



CELOX G

MT-CEL-Z3

CELOX G - gáza 7,6x 3m

Celox G je gáza (obvaz) napuštěný hemostatickým činidlem Celox. Jedná se o přelomovou kombinaci textilního obvazu a nejmodernějšího antikoagulantního hemostatika, které umožňuje jednoduché a přesné krytí rány. Celox G - gázu oceníte zejména ve ztížených pracovních podmínkách jako je napr. vítr, déšť nebo při nedostatku světla.

Celox je moderní hemostatikum, které bylo vyvinuto pro okamžitou zástavu velkých tepenných a žilních krvácení, mezi které patří např. (bodná, řzná, střelná poranění). Na rozdíl od konkurenčních hemostatik, nepatří Celox mezi exotermní hemostatika, tzn. že se nezahřívá a nemůže dojít k popálení zraněného nebo ošetřujícího lékaře či záchranáře.

Celox patří mezi antikoagulantní hemostatika, pracuje však na jiné bázi než je přirozené srážení krve. Celox částice se vyznačují velkou povrchovou aktivitou a při styku s krví vytváří gelovou strukturu (jakousi zátku), která brání dalšímu krvácení. Celox se vyznačuje jednoduchým, bezpečným a rychlým použitím. Je vhodný pro jakoukoliv zástavu krvácení a to i v oblasti hlavy, krku nebo hrudníku. Celox je nezbytným pomocníkem ve výbavě armád, policejních složek, profesionální i laické první pomoci. V extrémních situacích Celox zachraňuje životy. Vhodný i pro pacienty se špatnou srážlivostí krve, cukrovkáře nebo pacienty používající léky proti srážení krve (varfarin, heparin...)

Výhody Celoxu

- Jednoduché a bezpečné použití
- není exotermní, nezpůsobuje popáleniny
- antikoagulantní účinek
- bezpečné použití pro celé tělo včetně hlavy, krku a hrudníku ran
- účinný i za nízkých teplot
- vysoce funkční
- gáza 7,6x 3m
- vhodný pro práci za ztížených pracovních podmínek (déšť, vítr, nedostatek světla)
- možnost aplikace jednou rukou
- bez rizika při inhalaci nebo požití
- vhodný i pro pacienty se špatnou srážlivostí krve

Postup použití:

V případě velkého krvácení roztrhnout sáček, vyjmout roličku gázy, maximální množství vtlačit do rány a přitlačit gázou (krytím, látkou, prázdným sáčkem od Celoxu...) Celox začne okamžitě reagovat, změní se na pevnou, z rány vyjmutelnou sraženinu a krvácení zastaví do 3 minut. Rána nezačne znovu krváčet a to ani při pohybu ani při vyjmutí sraženiny Celoxu z rány. Ránu nedevastuje a umožňuje následné kvalitní chirurgické ošetření.

Důležité upozornění – tento produkt je zdravotnický prostředek, čtěte pečlivě návod k použití a informace o bezpečném používání.

Stamed s.r.o.

tel.: +420 725 323 111

email: obchod@stamed.cz

adresa: Vřesová 667, Zruč-Senec, 330 08

IČ: 29161941

DIČ: CZ29161941

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka



Komplexní řešení pro zdravotnická a

Stamed s.r.o.

tel.: +420 725 323 111

email: obchod@stamed.cz

adresa: Vřesová 667, Zruč-Senec, 330 08

IČ: 29161941

DIČ: CZ29161941

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka



Komplexní řešení pro zdravotnická a

laboratorní prostředí