

MOPEDIA®

CHODÍTKA

NÁVOD K POUŽITÍ

Obsah

1.	KÓDY.....	3
2.	ÚVOD	3
3.	URČENÉ POUŽITÍ	3
4.	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	3
5.	OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ	4
7.	OBEČNÝ POPIS.....	5
7.1	Nastavení výšky.....	5
8.	PŘED POUŽITÍM	5
9.	UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ.....	5
10.	NÁVOD K MONTÁŽI RP729X.....	6
11.	JAK POUŽÍVAT	6
12.	ÚDRŽBA	7
13.	ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	7
13.1	Čištění.....	7
13.2	Dezinfekce	7
14.	PODMÍNKY LIKVIDACE	7
15.	TECHNICKÉ VLASTNOSTI	8
15.1	Náhradní díly a příslušenství	10
16.	ZÁRUKA	10
17.	OPRAVA.....	10
17.1	Záruční opravy	10
17.2	Opravy, na které se záruka nevztahuje	11
17.3	Zařízení bez závady	11
18.	NÁHRADNÍ DÍLY	11
19.	VÝLUKY.....	11
	ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT.....	11



Zdravotnický prostředek třídy I

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

Chodítka se 4 koncovkami

RP729M-L	Pevné chodítko s nastavitelnou výškou
RP730M-L	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou
RP747	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou a dvojími rukojetmi
RP749M-L	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou a dvojí funkcí

Chodítko se 2 kolečky a 2 koncovkami

RP734	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 otočná kolečka a 2 koncovky
RP735S-M-L	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 pevná kolečka a 2 hroty
RP737	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 pevná kolečka a 2 hroty

Chodítka se čtyřmi kolečky

RP733S-M-L	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 4 otočná kolečka
RP738	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 samosvorná kolečka a 2 otočná kolečka
RP741	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdami
RP748	Rozebíratelné chodítko s nastavitelnou výškou, 2 otočná kolečka s brzdou a 2 otočná kolečka
RP742	Skládací chodítko s ruční brzdou
RP743	Skládací chodítko s nastavitelnou výškou, 2 samosvorná dvojítá kolečka, 2 otočná kolečka

2. ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení chodítka MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.A. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat vámi vybraný výrobek, a poskytuje cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete celý návod. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poskytne rady a pomoc.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Chodítka Mopedia od firmy Moretti jsou pomůcky určené k používání oběma rukama a jsou určeny pro osoby s pohybovými obtížemi.

VAROVÁNÍ!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v tomto návodu;
- Společnost Moretti S.p.A. nenesе žádnou odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných úprav rámu výrobku;
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. na svou výlučnou odpovědnost prohlašuje, že výrobek vyrobený a prodáváný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny WALKERS MOPEDIA je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDCÍCH ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost následující:

1. Zařízení splňují požadavky na obecnou bezpečnost a výkonnost stanovené v příloze I nařízení 2017/745, jak jsou vymezeny v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Zařízení NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou balena v NESTERILNÍM OBALU.
5. Zařízení patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité nařízení jsou obsaženy v prohlášení o shodě EU, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý návod;
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem, abyste určili správné nastavení a správné použití chodítka;
- Ujistěte se, že je výrobek dodán v kompletním stavu, a skladujte jej v obalu mimo dosah zdrojů tepla;
- ŽIVOTNOST – životnost zařízení je dána opotřebením jeho součástí;
- NEDOVOLTE dětem, aby si s přístrojem hrály nebo jej obsluhovaly.
- Uživatel a/nebo pacient jsou povinni nahlásit jakoukoli závažnou nehodu související s tímto zařízením výrobci a příslušnému orgánu státu, jehož jsou uživatel a/nebo pacient občany.

6. SYMBOLY



Kód výrobku



Jedinečná identifikace zařízení



Značka CE



Výrobce



Šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace

7. OBECNÝ POPIS

Chodítka MOPEDIA jsou vyrobena z lehkých eloxovaných hliníkových trubek s polstrovanými rukojeťmi, protiskluzovými gumovými koncovkami a/nebo otočnými kolečky a/nebo pevnými kolečky. Jsou výškově nastavitelné po 2,5 cm. Tyto pomůcky usnadňují pohyb osobám s omezenou statickou a/nebo dynamickou rovnováhou a zvyšují stabilitu opěrné základny. Poskytují oporu v situacích slabosti a/nebo ochrnutí dolních končetin. Pomáhají přenést část váhy osoby na paže, kde je nutné omezit zatížení jedné nebo obou dolních končetin.



7.1 Nastavení výšky

Pro nastavení výšky stiskněte tlačítko a posuňte hůl do požadované výšky. Po dokončení se ujistěte, že tlačítko zcela vyčnívá z požadovaného otvoru. Opakujte popsany postup pro každou nohu a na závěr zkontrolujte, zda mají všechny čtyři nohy stejnou výšku.

8. PŘED POUŽITÍM

- Před použitím chodítka vždy zkontrolujte, zda fungují brzdy, jsou-li k dispozici;
- Pokud je chodítko poškozené nebo nefunguje správně, nepoužívejte jej a obraťte se na prodejce s žádostí o opravu;
- Zkontrolujte, zda není poškozen rám, aby bylo zajištěno bezpečné používání pro osoby i věci;
- Uživatelé musí chodit po chodnicích, a ne po rušných silnicích;
- Dávejte pozor na možnost poranění v důsledku zachycení; nevkládejte prsty mezi pohyblivé části chodítka. Dávejte pozor při zavírání a otevírání chodítka.

9. UPOZORNĚNÍ K POUŽITÍ

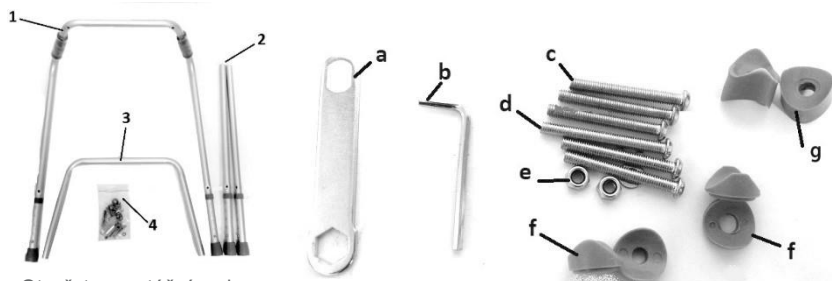
Toto zařízení zajišťuje větší stabilitu, oporu a bezpečnost při pohybu. V žádném případě jej však nesmějí používat osoby s viditelně omezenou funkcí ruky a/nebo paže, ani osoby s poruchami rovnováhy. Chodítko lze používat jak venku, tak uvnitř. Doporučujeme používat pouze na površích, na kterých se všechny čtyři nohy dotýkají země. Neměl by se používat na kamenitém terénu nebo na nakloněných površích, protože chodítko může být nestabilní. Zařízení není určeno k přepravě osob nebo jiného materiálu.

- Na mokřích a kluzkých površích buďte obzvláště opatrní;
- NEPOUŽÍVEJTE u pacientů, jejichž hmotnost přesahuje hodnotu uvedenou na štítku výrobku a v kapitole „Technické parametry“ tohoto návodu;
- Vyhněte se používání na svazích se sklonem větším než 10 stupňů a při otáčení do kopce nebo z kopce musí být osoba se zdravotním postižením asistována obsluhou;
- Vyhněte se dlouhodobému kontaktu zařízení s vodou;
- Pravidelně kontrolujte pevnost, stabilitu a dobrý stav gumových koncovek. Jakmile se opotřebují, vyměňte je;
- V případě pochybností ohledně používání, seřizování nebo údržby se obraťte na svého prodejce;
- Uchovávejte mimo dosah dětí, aby se předešlo možným rizikům;

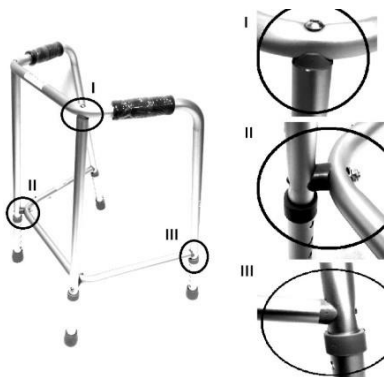
10. NÁVOD K MONTÁŽI RP729X

Seznam dílů

1. Hlavní rám (1 ks)
2. Nohy (2 ks)
3. Ohýbaná trubka (1 ks)
4. Montážní sada (1 ks)



- a. Otevřete montážní sadu a začněte montáž tím, že vezmete hlavní rám (1)
- b. Na hlavní rám (1) namontujte: nohy (2), podložky sedla (f) a krátké šrouby (c). Šrouby nedotahujte úplně.
- c. Na přední stranu hlavního rámu (1) namontujte: ohnutou trubku (2) s podložkami (g), dlouhé šrouby (d), matice a podložky (e). Šrouby nedotahujte úplně.
- d. Na hlavní rám (1) namontujte: ohnutou trubku (2) s podložkami (f) a krátkými šrouby (c). Šrouby nedotahujte úplně.
- e. Utáhněte všechny šrouby, chodítko je nyní připraveno k použití. (Viz obrázek níže)



11. JAK POUŽÍVAT

Poznámka: Řiďte se bezpečnostními pokyny v tomto návodu. Chodítko používejte jako pomůcku při chůzi. K tomu použijte obě rukojeti a chodítko posuňte dopředu, čímž získáte pohodlnou a spolehlivou oporu při chůzi.



Při natažené ruce by se rukojeti měly nacházet ve výšce zápěstí. Při položení ruky na rukojeť by měl být loket ohnutý o 20°–30°.



VAROVÁNÍ!

- Dávejte pozor na elektrické kabely, mokré povrchy, koberce, hračky nebo nečistoty, nábytek, malé schůdky a mezery v podlaze. Nepoužívejte chodítko na schodech nebo eskalátorech.



1. Při přesunu pacienta z invalidního vozíku na chodítko se ujistěte, že jsou kolečka invalidního vozíku a chodítka, pokud jsou k dispozici, zablokována.



VAROVÁNÍ!

- Při přesunu a prvních krocích si vyžádejte pomoc obsluhy.



2. a) Chodítka s hroty: při chůzi chodítko zvedněte a pohodlně si ho umístěte před sebe, přičemž dbejte na to, aby všechny čtyři nohy stály na podlaze. Chodte opatrně, krok za krokem.

- b) Chodítka s kolečky: při chůzi chodítko pohodlně tlačte před sebou a ujistěte se, že všechny čtyři nohy, včetně těch s kolečky, jsou na podlaze. Chodte opatrně, krok za krokem.

Poznámka: Chodítko je nutné vždy držet za rukojeti.



Nesuňte chodítko příliš daleko od těla. Mohlo by to způsobit pád a nesprávné rozložení zátěže.

12. ÚDRŽBA

Zařízení Mopedia od společnosti MORETTI jsou pečlivě zkontrolována a při uvedení na trh opatřena značkou CE. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme nechat zařízení každé 2 roky zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou laboratoří. Pravidelnou kontrolou se rozumí prohlídka následujících částí:

- Rám chodítka a spojovací části;
- Zkontrolujte upevnění a fungování koleček s brzdou;
- Zkontrolujte všechny svařované spoje;
- Zkontrolujte opotřebení koncovek, jsou-li k dispozici;

V případě opravy smí být použity pouze schválené díly a příslušenství.

13. ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE

13.1 Čistění

K odstranění prachu používejte pouze vlhký hadřík, na odolnější nečistoty použijte vlhký hadřík s jemným mýdlem. Před použitím důkladně osušte. Nikdy nepoužívejte vodu s teplotou vyšší než 30 °C. Nikdy nepoužívejte tlakovou vodu ani parní čistič.

Pokud potřebujete zařízení dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.

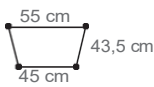
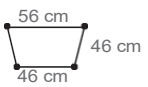
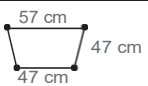
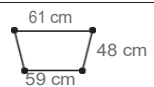
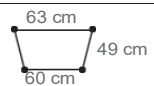
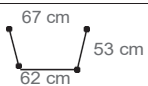
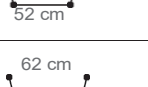
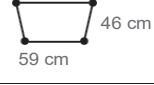
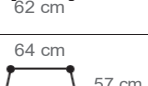
Poznámka: Nikdy nepoužívejte kyseliny, zásady ani rozpouštědla, jako je aceton.

14. PODMÍNKY LIKVIDACE



V případě likvidace zařízení nepoužívejte běžný kontejner na komunální odpad. Doporučujeme zařízení zlikvidovat v příslušných sběrných místech pro recyklaci.

15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Kódy	Maximální hmotnost uživatele	Výška nastavitelná po 2,5 cm	Koncovky/kolečka	Základna*	Základna**
RP729M	110 kg	Od 76 až 86 cm	4 koncovky		
RP729L		Od 86 až 96 cm			
RP730M	110 kg	Od 77 až 87 cm	4 koncovky		
RP730L		Od 83 do 101 cm			
RP749M	130 kg	Od 77,5 až 87,5 cm	4 koncovky		
RP749L		Od 83,5 až 101,5 cm			
RP747	130 kg	Od 71 až 89 cm	4 koncovky		
RP735S	130 kg	Od 68,5 až 78,5 cm	2 kolečka a 2 koncovky		
RP735M	130 kg	Od 76 až 86 cm	2 kolečka a 2 koncovky		
RP735L	130 kg	Od 83 až 101 cm	2 kolečka a 2 koncovky		
RP737	130 kg	Od 84 až 102 cm	2 kolečka a 2 koncovky		
RP734	130 kg	Od 84 až 102 cm	2 kolečka a 2 koncovky		

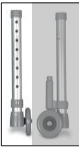
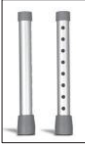
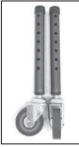
Kódy	Max. hmotnost uživatele	Výška nastavitelná po 2,5 cm	Nohy/kolečka	Základna*	Základna**
RP738	130 kg	Od 84 až 102 cm	4 kolečka		
RP733S	130 kg	Od 70 až 80 cm	4 kolečka		
RP733M	130 kg	Od 78 až 88 cm	4 kolečka		
RP733L	130 kg	Od 84 až 102 cm	4 kolečka		
RP741	100 kg	Od 86 až 96 cm	4 kolečka 2 s brzdami		
RP743	120 kg	Od 85 až 103 cm	4 kolečka 2 brzdové kluzáky		
RP742	130 kg	Od 86 až 103 cm	4 kolečka s brzdami		
RP748	130 kg	Od 77 až 92 cm	4 kolečka s brzdami		

*Rozměry měřeny při nejnižší výškové nastavení.

**Rozměry měřeny při nejvyšším nastavení výšky. Rozměry se

mohou lišit o ± 1 cm

151 Náhradní díly a příslušenství

 RV7052 Sada brzdových nožiček s upevňovacími prvky - pár	 RV7053 Kolečka s brzdou - pár	 RV7053D RV7053G Kolečko brzdová dvojitá kolečka Ø 10 cm - pár	 RV7054-5 RV7054-8 Otočná kolečka pro chodítko, pár 5 nebo 8 otvorů Ø 7 cm - pár	 RV7055-5 RV7055-8 pevná kolečka 5 nebo 8 otvorů Ø 7 cm - pár
 RV7056-5 RV7056-8 Náhradní nohy 5 nebo 8 otvorů - pár	 RV7051S Otočná kolečka 5 otvorů Ø 8 cm - pár	 RV7051F Otočná kolečka s brzdou, 5 otvorů Ø 8 cm - pár	 RV7121-8 Otočná kolečka 8 otvorů Ø 10 cm - pár	 RV7154-8 Otočná kolečka 8 otvorů Ø 12 cm - pár
 RV7155-8 Pevná kolečka 8 otvorů Ø 12 cm - pár	 RV7015 Otočná kolečka Ø 10 cm - pár pro RP748	 RV7016 Otočná kolečka s brzdou Ø 10 cm - pár Pro RP748	 RV7035 Gumové koncovky - sada pro RP729	 RV7030 Pár sedých gumových koncovek k ø28 mm
 RV7031 ø28 mm černé gumové koncovky - pár	 RV7045 Košík pro chodce pouze pro RP743-749	 RV7046 Košík pro chodce pouze pro RP742	 RV7045N Košík pro chodce	
 RV7-brachium Anti ort - pár sup	 RP758 Sedák pro RP748			

16. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se poskytuje záruka na vady materiálu nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data zakoupení, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravou výrobku a záruka nebude platná, pokud nebudou přísně dodrženy pokyny k použití. Správné zamýšlené použití zařízení je uvedeno v tomto návodu. Společnost Moretti neodpovídá za škody vyplývající z úrazu nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním nebo s nimi související. Společnost Moretti neposkytuje záruku na produkty v případě poškození nebo vad za následujících podmínek: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití náhradních dílů, které nebyly dodány společností Moretti, nesprávné použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (kromě původní přepravy společností Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v příručce.

Záruka se nevztahuje na součásti, které podléhají opotřebení při správném používání zařízení.

17. OPRAVA

17.1 Záruční opravy

V případě, že se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, společnost Moretti s zákazníkem ověří, zda se na danou vadu vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle svého výhradního uvážení výrobek v rámci záruky opravit nebo vyměnit u autorizovaného prodejce Moretti nebo v provozovně společnosti Moretti. Náklady na práci spojené s opravou mohou být účtovány společností Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna

172 Opravy, na které se záruka nevztahuje

Produkt, na který se záruka nevztahuje, lze vrátit k opravě pouze po předchozím souhlasu zákaznického servisu společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu v případě opravy, na kterou se záruka nevztahuje, hradí v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy produktů, na které se záruka nevztahuje, se poskytuje záruka v délce šesti (6) měsíců od data převzetí opraveného produktu.

173 Zařízení bez závady

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po prozkoumání a otestování vráceného zboží shledá, že se nejedná o vadný výrobek. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi a veškeré náklady na dopravu hradí zákazník.

18. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se poskytuje záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí.

19. VÝLUKY

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích stanovených zákonem společnost Moretti neposkytuje žádné výslovné ani implicitní prohlášení, záruky ani podmínky, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek týkajících se obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušování práv třetích stran a nezasahování do práv třetích stran. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli implicitních záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu, v mezích zákona. Některé státy neumožňují omezení délky trvání implicitní záruky ani vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s produkty pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určitá prohlášení o zřeknutí se odpovědnosti a omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

 **MOPEDIA**
ZÁRUČNÍ CERTIFIKÁT**Produkt** _____**Zakoupeno dne (datum)** _____**Prodejce** _____**Adresa** _____ **Město** _____**Prodaný** _____**Adresa** _____ **Město** _____**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles 3 – Melegnano 20122 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

 **www.morettispa.com** **e-mail: info@morettispa.com****VYROBENO V ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE**

