

# Návod na obsluhu

SNLZ-640    SNLZ-2-640BO    UNI-4L    UNI-5LP    UNI-4LG-BP



Stolek nástrojový se zásuvkami je určen jako mobiliář (nikoliv zdravotnický prostředek) pro odkládání obvazového, injekčního a ostatního medicínálního materiálu.

## Popis a postup použití

### 1/ Typy nástrojových lakovaných stolků :

- a) Stolek SNLZ-640 je opatřen horním NR lisovaným platem, spodním NR rovným platem a jednou zásuvkou s jednoduchým nábytkovým kolečkovým výsuvem.
- b) Stolek SNLZ-640BO je opatřen horním NR lisovaným platem, spodním NR rovným platem a dvěma zásuvkami s plnovýsuvy /hloubka zásuvek 100 mm a 200 mm/.
- c) Stolek UNI-4L je opatřen horním NR lisovaným platem, popř. držákem na kanyly, plastovým závěsným košem, integrovanou NR boční výsuvnou deskou a čtyřmi zásuvkami s plnovýsuvy /hloubka zásuvek 2x 100 mm a 2 x 200 mm/.
- d) Stolek UNI-5LP je opatřen horním NR lisovaným platem, spodním NR rovným platem, popř. závěsným plastovým košem a pěti zásuvkami s plnovýsuvy /hloubka 5x 100 mm/.
- e) Stolek UNI-4LG-BP je opatřen horním NR lisovaným platem, galerkou s výklopnými boxy /5+6/, držákem na kanyly, plastovým závěsným košem a čtyřmi zásuvkami s plnovýsuvy /hloubka zásuvek 2x 100 mm a 2x 200 mm/.

2/ Nástrojový stolek po důkladném rozbalení a odstranění všech zbytků folie ošetříme čistícími a desinfekčními prostředky – viz „Servis a ošetření“.

3/ Proved'te kontrolu funkčnosti zajištění stolku aretací brzdíček koleček  $\varnothing$  75 mm nebo 125 mm sešlápnutím konců brzdíček směrem dolů a zpětné odbrzdění stolku se provede sešlápnutím horní části brzdíček.

4/ Proved'te kontrolu funkčnosti výsuvů zásuvek.

V případě demontáže zásuvky postupujte takto:

U jednoduchého kolečkového výsuvu (SNLZ-640) při vyjmutí zásuvky přizvedneme, sklopíme o 45 st. A můžeme vyjmout. Při zpětném nasazení opět zásuvku sklopíme a vodící kolečko zásuvky 2 přesadíme za kolečko 1 na kostře stolku –viz obr. 1. U stolků s plnovýsuvy na levé straně zásuvky zatlačte plastovou páčku plnovýsuvu směrem nahoru viz obr. 2 a na pravé straně zatlačte plastovou páčku směrem dolů obr. 3, obě páčky musí být zatlačeny současně a vysunutím zásuvky z plnovýsuvů zásuvku vyjmeme z kostry stolku. Při následné montáži zásuvky do plnovýsuvů postupujte následovně : Zkontrolujte aretační kolíčky viz obr. 4. Na levé straně musí být zasunutý v plastové vrchní drážce a na pravé straně musí být kolíček zasunutý v plastové dolní drážce. Před nasunutím musí být plnovýsuvy vysunuty nadoraz.

### Upozornění :



V případě, že s vozíkem přejíždíte po nerovném povrchu nebo přes prahy, může dojít k vyskočení kolíček (viz bod. 4) a k uvolnění plnovýsuvů , zásuvka pak nejde zasunout nadoraz. Při projevení této závady opřeme stolek zády o stěnu a zásuvku silně přitlačíme pouze v místě úchyty plnovýsuvů na pravé a levé straně předního čílka zásuvky – Bod A.


## Návod na demontáž zásuvky

Obr. 1




Obr.2

**ZATLAČTE PÁČKU SMĚREM NAHORU**

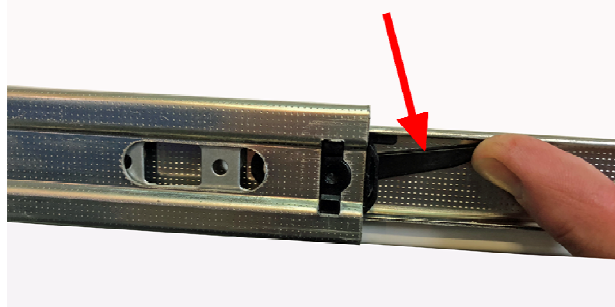

Obr.3

**ZATLAČTE PÁČKU SMĚREM DOLŮ**

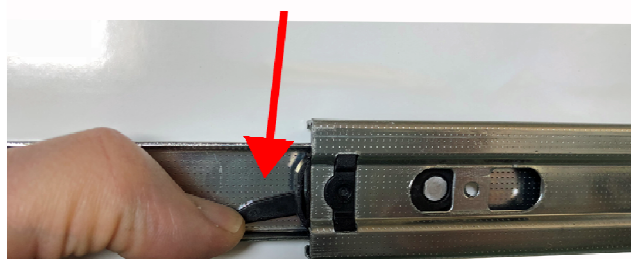

## Montáž zásuvky

Obr. 4



## Ošetření a údržba

Před prvním použitím je nutné stolek řádně očistit běžnými neagresivními saponátovými prostředky pomocí vlhkého hadříku, nikoliv přímé mytí kartáčem nebo košťátkem. V žádném případě nepoužívejte abrazivní prostředky – houbičky na nádobí, drátěnky a prostředky s pískem. Může tak dojít k nevratnému poškození laku a následné korozi. Pro desinfekci doporučujeme používat neagresivní prostředky na bázi alkoholu, např. Guttar. Prostředky na bázi jodu nebo chloru snižují životnost výrobku a vytváří bílé resp. hnědé mapy na povrchu výrobku. Nástrojové stolky nejsou určeny pro sterilizaci v jakýchkoliv sterilizátorech a pro mytí v myčkách.

Údržba je velmi snadná a u všech modelů provádíme pouze promazávání koleček každých 6 měsíců olejem SILIKAL. zvláště, když může do čepů koleček zatéct desinfekce, která způsobuje zadírání.

Vždy po 12 měsících je nutné provést kontrolu správné funkce plnovýsuvů zásuvek a koleček proškoleným technickým pracovníkem zdravotnického zařízení.

## 5/ Servis a záruční podmínky

Na nástrojový stolek je poskytována 24 měsíční záruka, která se však nevztahuje na mechanické poškození jednotlivých dílů stolku a nedodržení návodu k obsluze.

Servis a opravy je zajištěn prostřednictvím prodejců nebo přímo na provozovně výrobce firmy Málek & spol. s.r.o., Ke Xaverovu 2878/10, 193 00 Praha 9.

## 6/ Likvidace obalu a produktu

Likvidaci obalu zajišťuje prodejce nebo výrobce, popř. si zajistí odběratel vhodným způsobem do předem určených sběrných kontejnerů. Při likvidaci nočního stolku po skončení životnosti kontaktujte určenou organizaci nebo využijte sběrné dvory.



### KONTAKT :

MÁLEK & SPOL. s.r.o.

Ke Xaverovu 2878, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ : 61853291, DIČ : CZ61853291

Telefon : 281 923 923

Fax : 281 925 326

e-mail : [malek@zdravotnickynabytek.cz](mailto:malek@zdravotnickynabytek.cz)