



**KYARA®**



LTK730



LTK740

**ELEKTRICKÁ DEČKA NA KRK A RAMENA**

**LTK730**

**ELETRICKÁ DEČKA NA KRK A CELÁ ZÁDA**

**LTK740**

**Návod k obsluze**

## Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....	1
SYMBOLY .....	2
OBECNÝ POPIS.....	2
FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ .....	3
VYPÍNÁNÍ .....	3
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	3
OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE.....	4
TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	4
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....	4
ZÁRUKA.....	4
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE .....	5

## OZNAČENÍ

LTK730 Elektrická dečka na krk a ramena

LTK740 Elektrická dečka na krk a celá záda

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení elektrické dečky KYARA. Doporučujeme před prvním použitím pečlivě přečíst tento návod, zejména bezpečnostní upozornění a postupovat podle následujících pokynů. Příručku uschovejte po celou dobu životnosti výrobku. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tuto příručku. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokynům, obraťte se na prodejce.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda u zboží nedošlo k poškození během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Po vyjmutí zařízení z obalu zkontrolujte obsah balení a zda zařízení není poškozené vlivem přepravy. V případě pochybností nepoužívejte zařízení a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Obalový materiál není hračka pro děti. Uchovávejte plastový obal mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí udušení!
- Před zapojením zařízení zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Štítek je umístěn na zařízení.
- Toto zařízení smí být používáno pouze jako výhřevná podložka pro domácí použití. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevyhovující, a proto nebezpečné.
- Přístroj nemohou používat děti a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, stejně tak osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod stálým dohledem zodpovědné osoby.
- Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.
- Nepoužívejte přístroj u dětí nebo postižených osob, které jsou citlivé na teplo.
- Zařízení nesmí být používáno dětmi, pokud není jednotka uvedena do provozu a kontrolována rodiči, zákonnými zástupci nebo pokud nebylo dítě dostatečně poučeno, jak zařízení funguje a jak by jej mělo správně ovládat.
- **VAROVÁNÍ:** Nevhodné pro děti do 3 let. Děti do 3 let by neměly používat přístroj z důvodu neschopnosti reagovat v případě přehřátí.
- Nepoužívejte dečku, pokud je mokrá či vlhká.
- Před čištěním a údržbou vždy odpojte zařízení od napájecího zdroje.
- V případě poruchy nebo špatné funkce spotřebiče jej vypněte a kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem.
- Spotřebič musí být používán pouze s typy ovládacích prvků uvedených na štítku.
- Je-li zařízení zapnuté, nepokládejte ovládání ani napájecí kabel pod nebo na horní část topné vložky.
- Před skladováním nechte přístroj vychladnout, poté složte.
- Pokud je dečka složená, nenechávejte v ní oblečení.
- Před každým použitím dečky ji pečlivě prohlédněte, zda nevykazuje jakékoliv poškození či opotřebení. Pokud se objeví takové známky, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Přístroj nesmí používat uživatelé kardiostimulátoru.
- Zařízení není určeno k lékařskému použití v nemocnicích.


- Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí.
- Zařízení **NEPOUŽÍVEJTE** pro zahřátí zvířat.
- Nepoužívejte zařízení, když spíte.
- Při delším používání nastavte volič na minimum 1-2.
- Nepoužívejte zařízení na oteklá nebo bolestivá místa.
- Pokud cítíte při používání bolest, přestaňte zařízení používat.
- Příklad NEPOUŽÍVEJTE, jsou-li ve vzduchu přítomny vysoce hořlavé plyny.
- Příklad nikdy nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepokládejte na přístroj hořlavé materiály nebo materiály, které se snadno znehodnocují v důsledku tepla (např. karton, plast, papíry, svíčky)
- Nikdy nevystavujte zařízení v blízkosti jiných zdrojů tepla (hořáky, trouby), teplotám pod nulou, přímému slunečnímu záření, vlhkosti.
- Nevkládejte špendlíky nebo jiné ostré předměty.
- Nadměrné používání při nastavení vysoké teploty může způsobit popálení kůže.

**VAROVÁNÍ:** Při nesprávném používání zařízení hrozí nebezpečí zranění.

## SYMBOLY



## OBECNÝ POPIS

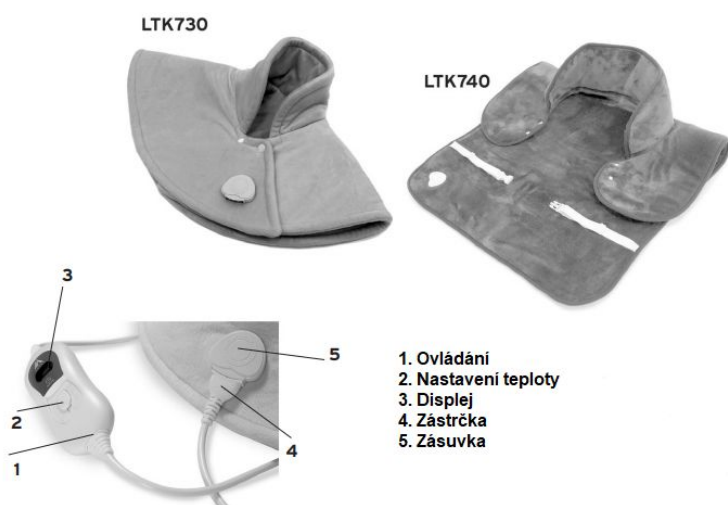

Vyhřívací podložka je určena k vyhřívání lidského těla. Vyhřívací dečka může být přiložena na části těla jako krk, ramena, záda, bedra, břicho případně na klouby.

**VAROVÁNÍ:** Elektrickou dečku používejte pouze s dodaným ovladačem. Přesné označení modelu je uvedeno na štítku všitém na dečce.

- Zapojte ovladač do zástrčky na dečce.
- Zasuňte elektrickou zástrčku do zásuvky a na krátkou dobu zvolte maximální teplotu pro urychlení zahřátí dečky. Poté zvolte teplotu od 1 do 3.
- LTK 730 Úroveň 1 = 53 °C; Úroveň 2 = 59 °C Úroveň 3 = 65 °C
- LTK740 Úroveň 1 = 50 °C; Úroveň 2 = 55 °C Úroveň 3 = 60 °C

\*Tolerance: +/- 5 °C

Dečku přiložte k části těla, kterou chcete vyhřívat.

## FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

- Elektrická dečka je vybavena systémem automatického zastavení. Po 3 hodinách provozu se dečka automaticky vypne.
- Chcete-li dečku znovu zapnout, nastavte volič do polohy „0“, vyčkejte několik sekund a poté znovu zvolte požadovanou teplotu.

## VYPÍNÁNÍ

- Po použití vypněte dečku nastavením voliče do polohy „0“
- Odpojte zařízení ze zásuvky.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Nebělte



Perte při maximální teplotě 30 °C



Nečistěte



Nesušte v sušičce



Nežehlete

- Před čištěním se ujistěte, že dečka není připojena k elektrické síti a je chladná.
- Před čištěním se ujistěte, že je odpojen přívodní kabel.
- Dečku lze umýt ručně (nepoužívejte pračku) při maximální teplotě 30°C.
- Použijte neutrální čisticí prostředek.
- Nepoužívejte bělidla.
- Nesušte v sušičce, elektrickou dečku nechte uschnout na vzduchu. Nepokládejte na topení a jiné topné systémy.
- Nežehlete
- Před opětovným použitím se ujistěte, že dečka je zcela suchá.
- Při čištění nepoužívejte chemické ani abrazivní prostředky.

## OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace nepoužívejte kontejner pro komunální odpad. Doporučujeme likvidaci přístroje v příslušných prostorách pro recyklaci.



Výrobek musí být zlikvidován v souladu s evropskou normou 2002/96/EC. Správná likvidace produktu snižuje riziko pro životní prostředí a zdraví. Části přístroje mohou být dále recyklovány a tím dojde k úspoře energie a surovin. Další informace vám poskytne místní likvidátor nebo prodejce.



### TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

- Napětí: 220-240 ~ 50 Hz
- Výkon: 100 W
- Rozměry:
- LTK 730: 60 x 62 cm
- LTK740: 60 x 90 cm
- Materiál: 100% polyester

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pokud je zařízení poškozené, nepokoušejte se ho opravit.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje	Přístroj není napájen	Ověřte, zda A. Je připojen napájecí kabel do zásuvky B. Zástrčka je vložena do zásuvky C. Zásuvka není vadná D. Zkontrolujte pojistky
	Nebyla nastavená teplota. Volič teploty je nastaven na pozici 0.	Nastavte teplotu posunutím na pozici 1, 2 nebo 3.
	Byla nastavena ochrana proti přehřátí.	Nechte zařízení zkontrolovat výrobcem.

## ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele).

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

## OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



**Stamed s.r.o.**

telefon: +420 725 323 111

www: [www.stamed.cz](http://www.stamed.cz)

email: [obchod@stamed.cz](mailto:obchod@stamed.cz)

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň

eshop: [www.pomuckyseniorum.cz](http://www.pomuckyseniorum.cz)