



NÁJEZDY

NÁVOD K POUŽITÍ

| | |
|---|----------|
| • INDEX | |
| • KÓDY | STRANA 3 |
| • ÚVOD | STRANA 3 |
| • URČENÉ POUŽITÍ | STRANA 3 |
| • EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ | STRANA 3 |
| • OBECNÁ UPOZORNĚNÍ | STRANA 4 |
| • POUŽITÉ SYMBOLY | STRANA 4 |
| • OBECNÝ POPIS | STRANA 5 |
| ○ Zobrazení a seznam dílů | strana 5 |
| • MONTÁŽ/DEMONTÁŽ | STRANA 6 |
| ○ Otevření modelu CR500-x | strana 6 |
| ○ Model uzávěru CR500-x | str. 6 |
| ○ Skládací modely cr503-x CR505-x | str. 6 |
| • PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM | STRANA 6 |
| • UPOZORNĚNÍ P R O P O U Ž Í T Í | STRANA 6 |
| • METODY POUŽITÍ | STRANA 7 |
| • ÚDRŽBA | STRANA 7 |
| • ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE | STRANA 7 |
| ○ Čištění rámu a kovových částí | strana 7 |
| ○ Dezinfekce | str. 7 |
| • PODMÍNKY LIKVIDACE | STRANA 8 |
| • TECHNICKÉ VLASTNOSTI | STRANA 8 |
| ○ Rozměry* a hmotnost | str. 8 |
| ○ Technické specifikace | str. 8 |
| • ZÁRUKA | STRANA 9 |
| • OPRAVY | STRANA 9 |
| ○ Záruční opravy | str. 9 |
| ○ Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka | strana 9 |
| ○ Nepoškozené výrobky | str. 9 |
| • NÁHRADNÍ DÍLY | STRANA 9 |
| • DOLOŽKY O VÝJIMCE | STRANA 9 |

CE Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze A CR500-X_CR503-X_CR505-X_CR507-X_CR509-X 01 A_ITA_10-2021

1. KÓDY

- CR500-1 Teleskopické rampy 152 cm - pár
- CR500-2 Teleskopické rampy 213 cm - pár
- CR503-1 Skládací rampa 61 cm
- CR503-2 Skládací rampa 213 cm
- CR505-1 Trojskládací rampa na kufry 152 cm
- CR505-2 Trojskládací rampa na kufry 183cm
- CR505-3 Trojskládací rampa na kufry 213 cm
- CR507-1 Pevné rampy 61 cm - pár
- CR507-2 Pevné rampy 183 cm - pár
- CR509-1 Nájezdová plošina 61 cm
- CR509-2 Nájezdová rampa 91 cm
- CR509-3 Nájezdová rampa 122 cm

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali rampu z řady **ARDEA** by Moretti S.p.A., která je určena k odstraňování architektonických bariér uvnitř i vně domu, při cestování nebo při běžných každodenních činnostech. Tato uživatelská příručka obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi zvolené pomůcky a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím rampy pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

Poznámka: Zkontrolujte, zda všechny části rampy nebyly během přepravy poškozeny. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.

POZOR!



- Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo použití v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny přístroje a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Tato rampa je určena k odstranění architektonických bariér pro osoby s pohybovými obtížemi a musí být používána s asistencí obsluhy.

4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA a patřící do skupiny RAMPE PER DISABILI ARDEA jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.

2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.

5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.

6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

POZNÁMKA: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které vydává a svými kanály zpřístupňuje společnost MORETTI SPA.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Pro správné používání přístroje si pozorně prostudujte následující návod.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky;
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění osob;
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí;
- Abyste rampu správně zvedli, je nutné ji složit podle pokynů v tomto návodu a poté ji uchopit za rukojeti, pokud jsou k dispozici.
- Nezvedejte rampu za odnímatelné části, které by se mohly při zvedání náhodně uvolnit;
- Uživatel a/nebo pacient by měli hlásit veškeré závažné události, k nimž došlo v souvislosti s prostředkem, výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, v němž byl prostředek vyroben.
kde je uživatel a/nebo pacient usazen;

6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečný identifikátor zařízení



Označení



CE Výrobce



Výrobní šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnické zařízení




Podmínky likvidace



Maximální přípustný průtok


7. OBECNÝ POPIS

7.1 Zobrazení a seznam dílů

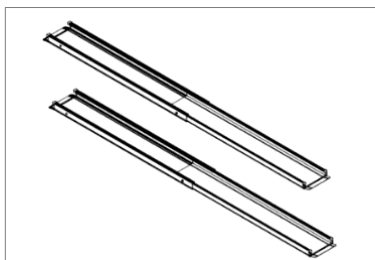


CR500-X:

Teleskopická rampa dodávaná v párech je k dispozici ve 2 velikostech (max. délka 152 a 213 cm).

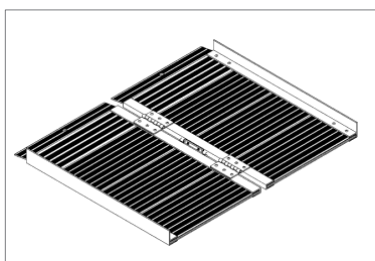


CR503-X:

Skládací rampa pro kufry je k dispozici ve 2 velikostech (max. délka 61 a 213 cm)

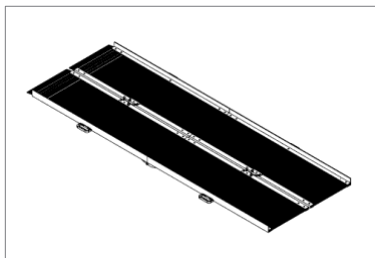


CR505-X:

Trojkládací rampa je k dispozici ve 3 velikostech (max. délka 152, 183 a 213 cm).

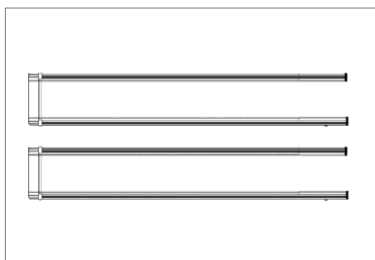

CR507-X:

Pevná rampa dodávaná v párech je k dispozici ve 2 velikostech (max. délka 61 a 183 cm).

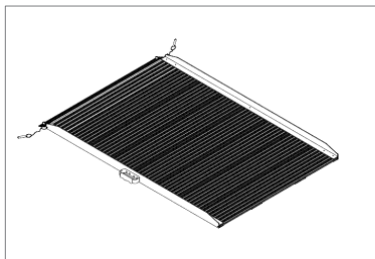


CR509-X:

Jednotlivá rampa je k dispozici ve 3 velikostech (61, 91 a 122 cm max. délka)

8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

81 Otevírací model CR500-x

Jednou rukou stiskněte tlačítko a druhou rukou vytáhněte vnitřní část nášlapné desky (obr. 1), dokud stisknuté tlačítko nezapadne na své místo (obr. 2).

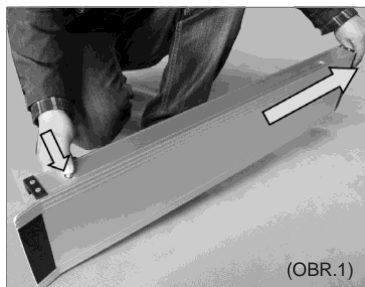


(OBR.1)



(OBRÁZEK 2)

82 Model uzávěru CR500-x

Jednou rukou opět stiskněte tlačítko a druhou rukou stiskněte vnitřní část nášlapné desky, dokud nedosáhnete situace znázorněné na obr. 3.

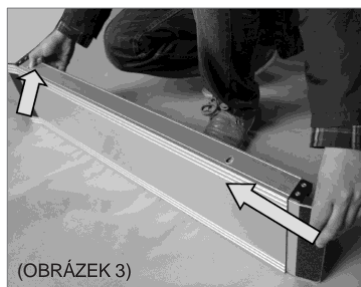

(OBRÁZEK 3)

Před uložením/zvednutím patky se ujistěte, že je kolík řádně zajištěn v otvoru pro kolík.

83 Skládací modely CR503-x | CR505-x

Před použitím plošinky otevřete a ujistěte se, že jsou stabilní a že se plně dotýkají obou spojovaných ploch.

Po použití je sklopte zpět na sebe, abyste s nimi mohli manipulovat za rukojeť uprostřed spodního žebra.

9. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav opotřeбенí mechanických částí ve hře, abyste zajistili, že zařízení lze používat v naprosté bezpečnosti pro osoby a majetek.
- Zkontrolujte správné sestavení zařízení se zvláštním důrazem na správné zajištění nastavení.

10. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ



POZOR!
POMĚR DÉLKY PŘEKÁŽKY K DÉLCE RAMPY NESMÍ BÝT NIKDY VĚTŠÍ NEŽ.
MĚNĚ NEŽ 1:5 (např. pro 30 cm překážku musí být rampa \geq 150 cm).

- Rampu používejte pouze pro nástup/výstup invalidních vozíků;

- Nástup a výstup na rampu musí probíhat při nízké rychlosti a bez rozjezdu.
- Rampa by měla být uspořádána tak, aby zakřivení vytvořené na konci rampy bylo zcela v kontaktu s opěrnou plochou.
- Rampa musí být umístěna na stabilním podkladu;
- Rampa musí být umístěna tak, aby překonala překážku až 5krát kratší, než je délka rampy (např. překonání překážky o délce 30 cm vyžaduje rampu dlouhou nejméně 150 cm), pokud je používána elektrickými invalidními vozíky nebo vozíky vedenými asistentem.
- Pokud musí osoba se zdravotním postižením samostatně vystoupat na některou z ramp uvedených v této příručce a/nebo z ní sestoupit, nesmí být poměr délky překážky a délky rampy menší než 1:7 (např. pro překážku vysokou 30 cm je zapotřebí rampa dlouhá nejméně 210 cm).
- Skládací rampy by se měly otevírat tak, aby se nepřibližovaly k tělu.
- Je třeba dávat pozor na zachycení prstů v oddělovacích pantech (skládací modely CR503-X | CR505-X) a v tlačítkách otevírání/zavírání. (teleskopický model CR500-X).

POZOR!



- Na štěrkovém nebo nerovném povrchu nebo za mokra hrozí, že se podklady pneumatik nebudou třít. Vždy přizpůsobte jízdní vlastnosti podmínkám použití.
- Další zatížení nad rámec uvedené kapacity může zhoršit provoz.

11. ZPŮSOB POUŽITÍ

Poznámka: Přečtěte si prosím obecná upozornění v tomto návodu k použití.

1. Ujistěte se, že jsou zajišťovací čepy ramp při otevírání řádně dotaženy.
2. Vždy se ujistěte, že protiskluzové podložky na koncích rampy jsou správně umístěny a že jsou zcela přilnuté k nosnému povrchu.

12. ÚDRŽBA

Přístroje řady **ARDEA** by Moretti S.p.A. jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a jsou opatřeny označením CE. Z důvodu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje nechat zkontrolovat vhodnost použití výrobku výrobcem nebo autorizovanou laboratoří nejméně jednou za 2 roky. V případě oprav lze používat pouze originální náhradní díly a příslušenství. Před použitím přístroje proveďte všechny kontroly a ověření navržené v části "**PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM**" tohoto návodu k použití. Rampy **ARDEA** vyžadují několik základních úkonů pravidelné údržby; kontroly, které je třeba pravidelně provádět, jsou uvedeny níže:

- MĚSÍČNĚ: brzdný výkon pryžových základů a brusných pásů.
- DLE POTŘEBY: Čištění výrobku.

13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

131 Čištění rámu a kovových částí

Na rám a kovové části můžete použít jemnou vodu a mýdlo a poté je otřít do sucha měkkým hadříkem, abyste nepoškrábali lak rámu.

Stejně tak pryžové základny a brusné pásy lze čistit jemnou vodou a mýdlem. Dávejte velký pozor na sušení: používání rampy s vlhkými výše uvedenými částmi by mohlo být velmi nebezpečné.

132 Dezinfekce

Pokud je nutné výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.

**POZOR!**





































Rozhodně nepoužívejte kyselé, zásadité nebo rozpouštědlové produkty, jako je aceton nebo ředidlo.

14. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Doporučujeme likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

151 Rozměry* a hmotnost

| | | | |
|---------|--|---|--|
| CR500-1 |  D: 83,5÷152 cm |  P: 19 cm |  5,75 kg |
| CR500-2 |  D: 120÷213 cm |  P: 19 cm |  8 kg |
| CR503-1 |  D: 61 cm |  D: 36÷73 cm |  5 kg |
| CR503-2 |  D: 213 cm |  D: 36÷73 cm |  17,5 kg |
| CR505-1 |  D: 77÷152 cm |  D: 36÷73 cm |  13,6 kg |
| CR505-2 |  D: 91,5÷183 cm |  D: 36÷73 cm |  16 kg |
| CR505-3 |  D: 107÷213 cm |  D: 36÷73 cm |  19,5 kg |
| CR507-1 |  D: 61 cm |  D: 18,9 cm |  1,33 kg |
| CR507-2 |  D: 183 cm |  D: 18,9 cm |  6,5 kg |
| CR509-1 |  D: 61 cm |  D: 73 cm |  4,8 kg |
| CR509-2 |  D: 91 cm |  D: 73 cm |  7 kg |
| CR509-3 |  D: 122 cm |  D: 73 cm |  10 kg |

*Měry se mohou lišit o $\pm 0,5$ cm.

152 Technické specifikace

Dvoudílné teleskopické rampy:

- S bezpečnostními zámky;
- Protiskluzový abrazivní povrch;
- Pohodlné pro přepravu a skladování;
- Maximální nosnost 272 kg;
- Rám z eloxovaného hliníku odolný proti korozi.

Skládací rampy:

- Hliníkový rám odolný proti korozi;
- Maximální nosnost 272 kg;
- Závěsy z nerezové oceli;
- Protiskluzový frézovaný povrch se zaoblenými hranami;
- Na každé straně jsou 2 pojistné kolíky;

16. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v případě potřeby), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

17. OPRAVY

171 Záruční oprava

Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve své provozovně. Náklady na práci související s opravou výrobku mohou být účtovány společností Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

172 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravený výrobek přijat.

173 Nebezpečné výrobky

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

18. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy náhradní díl obdržíte. Náhradní díly a příslušenství naleznete výhradně v obecném katalogu Moretti.

19. USTANOVENÍ O VÝJIMKÁCH

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasaňování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LISTINA

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.