



NOUZOVÉ BRAŠNY A BATOHY

NÁVOD K POUŽITÍ

INDEX

- KÓDY..... STRANA.3
- ÚVOD..... STRANA 3
- URČENÉ POUŽITÍ STRANA.3
- OBECNÁ UPOZORNĚNÍ STRANA 3
- POUŽITÉ SYMBOLY..... STRANA 4
- SLOŽENÍ..... STRANA 4
- MAXIMÁLNÍ HMOTNOST STRANA 4
- UPOZORNĚNÍ P R O POUŽITÍ STRANA 4
- ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE STRANA 4
- OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE STRANA 4
- TECHNICKÉ VLASTNOSTI STRANA 5
 - Nouzové sáčky..... str. 5
 - Nouzové batohy strana 7
 - Moduly pro nouzové brašny a batohy str. 9
- ZÁRUKA..... STRANA 9
- OPRAVY STRANA 9
 - Záruční opravy str. 9
 - Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka strana 9
 - Nebezpečné výrobky str. 10
- NÁHRADNÍ DÍLY..... STRANA 10
- DOLOŽKY O VÝJIMCE..... STRANA 10

1. KÓDY

- EM810** Víceúčelová nouzová brašna
- EM820** Víceúčelová nouzová brašna s moduly
- EM830** Víceúčelová nouzová brašna se třemi kapsami
- EM840** Nouzová brašna se dvěma částmi
- EM850** Nouzový batoh se dvěma oddíly
- EM860** Nouzový batoh se dvěma bočními kapsami
- EM870** Nouzový batoh se čtyřmi kapsami
- EM891** Víceúčelový průhledný sáček 5 ks se suchým zipem
- EM892** Víceúčelový průhledný sáček 5 ks se suchým zipem

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali nouzovou tašku nebo batoh z řady EASYRED by MORETTI. Jejich design a kvalita zaručují maximální bezpečnost a spolehlivost. Nouzové brašny a batohy EASYRED by MORETTI byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na správné a praktické používání. Tento návod obsahuje drobné rady pro správné používání a údržbu brašny nebo batohu. Doporučujeme, abyste si před použitím pozorně přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Pohotovostní brašny a batohy EASYRED by MORETTI jsou určeny pro přepravu zdravotnického vybavení, obvazového materiálu, léků a všeho dalšího, co je potřeba pro lékařský zásah v nouzových podmínkách.

POZOR!



- Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávné použití přístroje nebo použití jiným způsobem, než je uvedeno v této příručce.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět úpravy zařízení a následující příručku bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jejich funkcí.

4. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Správné používání přístroje je popsáno v této příručce.
- Výrobek smí používat pouze kvalifikovaný personál
- Zkontrolujte, zda je výrobek dodán nepoškozený a zda je zabalen mimo dosah zdrojů tepla.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Skladujte na suchém místě
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí

5. POUŽITÉ SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečný identifikátor zařízení
	Označení
	CE Výrobce
	Výrobní šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Podmínky likvidace

6. SLOŽENÍ

Všechny nouzové brašny a batohy EASYRED by MORETTI jsou vyráběny především z následujících materiálů :

Polyester 600D, nylon 210D a 420D, průhledný vinyl

7. MAXIMÁLNÍ HMOTNOST

Nouzové brašny a batohy EASYRED by MORETTI jsou navrženy a vyrobeny pro přepravu vybavení a všeho potřebného pro lékařský zásah v nouzových podmínkách, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 30 kg.

8. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Pro správné používání brašny nebo batohu se ujistěte, že

- Všechny závěsy a spojovací prvky jsou vždy v provozuschopném stavu a zajišťují, že je během přepravy zavřeny.
- Léky a všechny ostatní tekutiny obsažené v tašce a batohu by měly být pevně uzavřeny, aby se zabránilo jejich náhodnému rozlití.
- Taška nebo batoh musí být vždy dobře vyčištěné a zbavené jakýchkoli zbytků. V takovém případě postupujte podle pokynů k čištění.

9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Mytí rukou:

Použijte roztok teplé vody a tekutého čistícího prostředku pro domácnost a nechte jej uschnout na vzduchu.

K dezinfekci použijte roztok studené vody s dezinfekčním prostředkem. Praní v pračce:

Vyjměte všechny plastové díly zevnitř a umyjte je vodou o teplotě do 40 °C bez odstředování, nechte uschnout na vzduchu. Tašky a batohy, které nemají možnost vyjmout vnitřní plastové části, nelze prát v pračce. Nežehlete.

10. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE


Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy pro likvidaci pevného komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

11. TECHNICKÉ VLASTNOSTI


11.1 Nouzové brašny

EM810

Dvojitá boční kapsa a přední kapsa se síťovanou přepážkou. Hlavní otvor na zip uvnitř elastické kapsy a kapsy ze síťoviny na suchý zip.

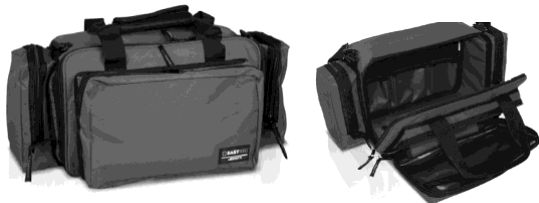

EM810 - Rozměry

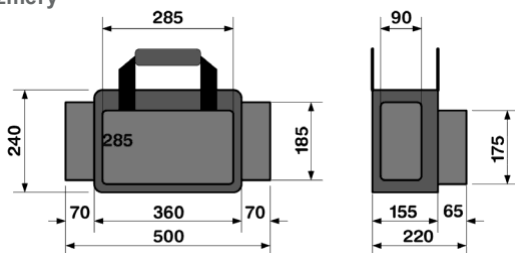


EM820

Otevírání na horní zip. Modulární úložné přihrádky s přepážkami na suchý zip. Doplněno 2 síťovými kapsami.




EM820 - Rozměry

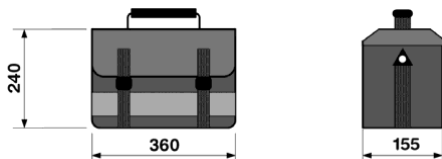


EM830

Modulární úložné přihrádky s přepážkami na suchý zip. Dvě boční kapsy na zip. Přední kapsa se třemi přihrádkami.

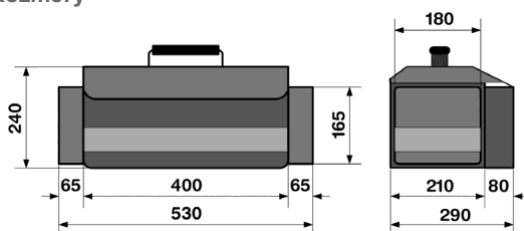**EM830 - Rozměry****EM840**

Dvě části. Dvojitý otevírací závěs. Vnitřní prostor připravený pro vložení víceúčelových průhledných sáčků. Doplněno otvory pro elastické pásky, průhledným okénkem na přední a zadní straně.

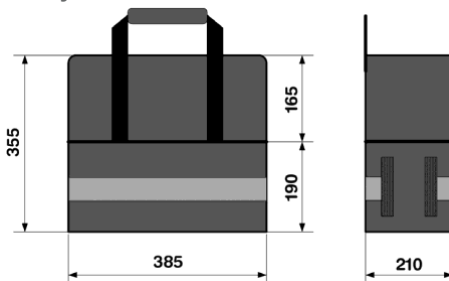**EM840 - Rozměry**


11.2 Nouzové batohy

EM850

Dvě části. Pevná spodní část, horní část s výsuvnými přihrádkami. Rozšiřitelný vnitřní oddíl vybavený gumičkami a kapsami se suchými zipy. Boční kapsy na zip.



EM850 - Rozměry

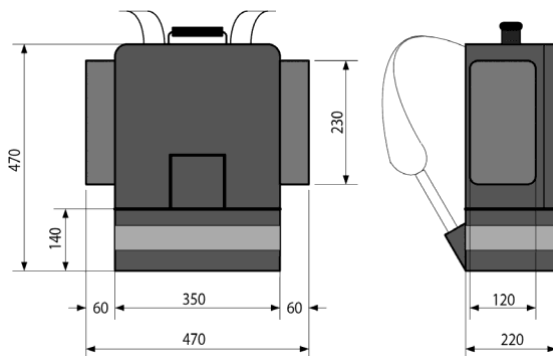


EM860

Otevíráni na zip. Modulární úložný prostor s přepážkami na suchý zip. Dvě boční kapsy na zip. Síťovaná kapsa se zapínáním na suchý zip a gumičkou. Přenosné v ruce nebo rameno.



EM860 - Rozměry

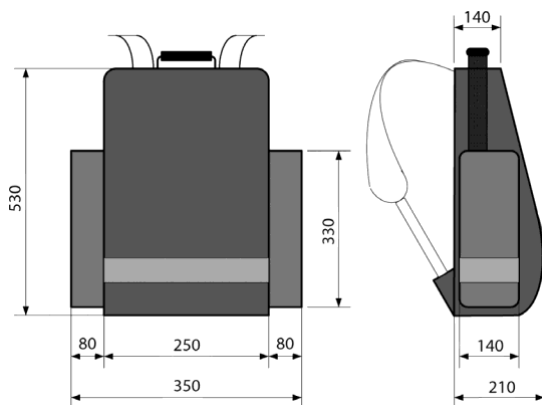


EM870

Kloubové otevření. Modulární úložné přihrádky s přepážkami na suchý zip. Dvě boční kapsy a dvě přední kapsy se zapínáním na zip. Síťovaná kapsa se zapínáním na suchý zip a gumičku.



EM870 - Rozměry

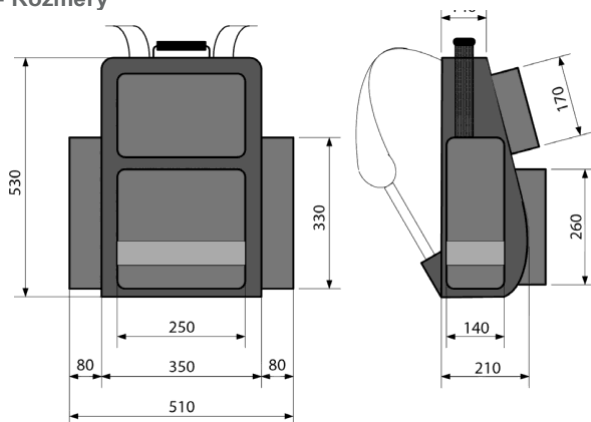

11.3 Moduly pro nouzové brašny a batohy


EM891 se suchým zipem

EM892 bez suchého zipu



Sada 5 průhledných barevných modulů pro vkládání materiálů snadno identifikovatelných zvenčí. Uzavírání na panytl.

EM891-EM892 - Rozměry

 **D: 14 CM**  **P: 15,5 CM**  **V: 7,5 CM**

12. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálů nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uve d e n ý m i v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v případě potřeby), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud poškození vzniklo v důsledku běžného používání výrobku.

13. OPRAVY

13.1 Záruční oprava

Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálů nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve své provozovně. Náklady na práci související s opravou výrobku mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

13.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce.

Na opravy výrobků, na které se vztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne převzetí opraveného výrobku.

13.3 Nebezpečné výrobky

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník p o n e s e náklady na zpětné zaslání.

14. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne obdržení náhradního dílu.

15. USTANOVENÍ O VÝJIMKÁCH

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LISTINA**

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ Umístění _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:**info@morettispa.com MADE IN INDONESIA**