



MOPEDIA®

KŘESLA

NÁVOD K POUŽITÍ

INDEX

- KÓDY.....STRANA.3
- ÚVOD..... STRANA 3
- URČENÉ POUŽITÍ STRANA 4
- EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ STRANA 4
- OBECNÁ UPOZORNĚNÍ STRANA 4
- POUŽITÉ SYMBOLY..... STRANA 5
- OBECNÝ POPIS STRANA 6
 - Zobrazení a seznam dílů str. 6
- MONTÁŽ STRANA 6
 - Shromáždění..... str. 6
- VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ..... STRANA 7
- METODY POUŽITÍ..... STRANA 8
 - Kolečkový systém str. 9
- ÚDRŽBA STRANA 9
- ČIŠTĚNÍSTRANA.10
- PÉČE O ELEKTRONICKÝ SYSTÉM STRANA 10
- PODMÍNKY LIKVIDACE STRANA 11
 - Všeobecné podmínky likvidace str. 11
 - Upozornění pro správnou likvidaci výrobku podle evropské směrnice 2012/19/EU: s. 11.
- PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ..... STRANA 11
- TECHNICKÉ VLASTNOSTI STRANA 14
 - Rozměry a hmotnosti* str. 14
 - Technické specifikace str. 15
 - Specifikace tkaniny str. 17
- PŘÍSLUŠENSTVÍSTRANA.17
 - Pokyny k instalaci Válečkový systém strana 18
- ZÁRUKA..... STRANA.19
- OPRAVYSTRANA.20
 - Záruční opravy str. 20
 - Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka str.20
 - Nebezpečné výrobky str. 20
- NÁHRADNÍ DÍLY..... STRANA.20
- DOLOŽKY O VÝJIMCE.....STRANA.20

CE Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

PO300M	Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka RITZ tmavě hnědá
PO300B	Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka GORDON Blue
PO300G	Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka GORDON Grey
PO300G-XL	Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka GORDON Grey
PO300P	Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka GORDON Pistachio
PO300R	Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka GORDON Red
PO300S	Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka GORDON Sand
PO300T	Křeslo Ninfea bez kolečkového systému - látka GORDON Terracotta
PO301B	Křeslo Ninfea s kolečkového systémem - látka GORDON Blue
PO301R	Křeslo Ninfea s kolečkového systémem - látka GORDON Red
PO301S	Křeslo Ninfea s kolečkového systémem - látka GORDON Sand
PO305G	Křeslo Daphne bez kolečkového systému - látka CABREO Grey
PO305S	Křeslo Daphne bez v kolečkového systému - látka CABREO Sand
PO310B	Křeslo Fern bez kolečkového systému - látka SIRMA Blue
PO310C	Křeslo Fern bez v kolečkového systému - tkanina SIRMA Rope
PO315R	Křeslo Anemone bez kolečkového systému - látka ALBIS Red
PO320S	Křeslo Timo se 4 kolečky - látka GORDON Sand
PO320B	Křeslo Timo se 4 kolečky - látka GORDON Blue
PO325G	Křeslo Timo Class se 4 kolečky - látka GINOLFO Grey
PO325T	Křeslo Timo Class se 4 kolečky - látka GINOLFO Tortora

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali křeslo z řady MOPEDIA by Moretti. Zvedací křesla MOPEDIA by Moretti byla navržena a vyrobena tak, aby splňovala všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi vybraného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme vám, abyste si před použitím zakoupeného křesla pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda všechny části výrobku nebyly během přepravy poškozeny. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.



POZOR!

Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce. Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití zařízení nebo v důsledku použití jiného, než je uvedeno v této příručce. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny zařízení a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Zvedací židle MOPEDIA jsou navrženy a vyrobeny pro pohodu a odpočinek dospělých ve vnitřním prostředí. Tento výrobek musí být určen pouze k použití, pro které byl výslovně navržen. Jakékoli jejich nesprávné použití může být zdrojem nebezpečí.

4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA, které jsou součástí skupiny ZDRAVOTNICKÝCH KŘESEL, jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy naleznete v EU prohlášení o shodě, které společnost MORETTI SPA vydává a zpřístupňuje svými kanály.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ



POZOR!

Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění osob.

- Pro správné používání přístroje si pozorně prostudujte následující návod.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Výrobce ani prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům nebo majetku v důsledku zásahu neoprávněných osob a nedodržení tohoto návodu k obsluze.



POZOR!

Doporučujeme vám, abyste věnovali maximální pozornost pravidlům chování a bezpečnosti, která jsou v nich uvedena, a předešli tak nepříjemným nehodám.

- Židle nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň, žhavé předměty a zařízení, které vytvářejí nebezpečné jiskry, neumísťujte hořlavé materiály na výrobek a/nebo do jeho blízkosti: **nebezpečí požáru.**
- Židle umístěte na rovnou, neprohýbající se podlahu.
- Používejte originální příslušenství a/nebo součásti.
- Při zjištění poruchy okamžitě odpojte napájecí kabel od sítě a zkontrolujte, zda nedochází k úniku elektrického proudu.
- Nepoužívejte elektrické prodlužovací kabely a/nebo volné spoje.

- Nejsou vhodné pro použití několika osobami současně.
- Netahejte za napájecí kabel, abyste jej odpojili ze zásuvky.
- Zásuvku neodpojujte ani nezasouvejte mokřými rukama.
- Když je židle otevřená, nevkládejte do mechanismu ruce.
- Uživatel a/nebo pacient by měl veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti s prostředkem, hlásit výrobci a příslušnému orgánu členskému státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.


6. POUŽITÉ SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečný identifikátor zařízení
	Označení
	CE Výrobce
	Výrobní šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace
	Pozor
	Datum výroby
	Likvidace výrobku podle směrnice EC/19/2012
IP54	Ochrana proti prachu a stříkající vodě
	Použitá část typ B Třída
	izolace
	Maximální teplota praní 30 °C; šetrný proces
	Nebělit
	Nežehlete
	Nesušte na rotačním bubnu

7. OBECNÝ POPIS

Vyvýšená křesla určená pro osobní relaxaci a odpočinek. Opěradlo a sedák s polstrováním o různé hustotě, speciálně navržené pro udržení správné polohy. Lakovaný ocelový rám, technická, skvrnám odolná a vodu odpuzující tkanina. Jsou vybavena dvěma nezávislými motory, které umožňují samostatné naklápění opěradla a podnožky, čímž je možné získat několik poloh, od polohy vhodné pro čtení nebo sledování televize až po polohu pro relaxaci a/nebo trávení. Křesla jsou rovněž vybavena funkcí zvedání podnožky díky motoru, který umožňuje zvedání osoby. Díky tomuto zvedacímu zařízení se sedící osoba dostane do téměř vzpřímené polohy, což jí usnadní vstávání. Nastavení různých poloh opěradla a opěrky nohou se provádí pomocí praktického, snadno použitelného dálkového ovladače se čtyřmi tlačítky.

7.1 Zobrazení a seznam dílů

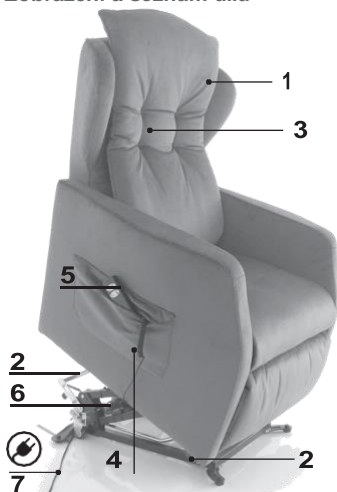

1. Křeslo
2. Přední kola nebo kolečkový systém
3. Naklápěcí opěradlo
4. Úložná kapsa
5. Dálkové ovládání
6. 2 motory pro nezávislé pohyby
7. Elektrický kabel

Immagine a scopo illustrativo

8. MONTÁŽ

8.1 Montáž

Po vyjmutí obalu zkontrolujte neporušenost jednotlivých částí židle a zkontrolujte, zda nejsou viditelně poškozené. V případě poškození zařízení nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce. Pro připojení k elektrické síti použijte kabel se zástrčkou vycházející z křesla a připojte jej do elektrické zásuvky. Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty ani po něm nechoďte.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce shodné s napětím na štítku motoru.

Poznámka: I drobné zásahy do elektroinstalace vyžadují práci odborně kvalifikovaného personálu.

POZOR!

- Jakékoli škody vzniklé v důsledku nedodržení výše uvedených ustanovení nelze přičítat výrobci a mohou vést k zániku záruky.
- Při obsluze ovládacích prvků musíte mít výhled do okolí, aby nedošlo k zachycení osob, zvířat nebo majetku pod pohyblivými se částmi.
- Židle musí být namontována ve vodorovné rovině. Vyhněte se volným nebo nerovným povrchům.
- Před použitím zkontrolujte, zda elektrické napájecí kabely nepřekážejí.



Křeslo umístěte na volném prostranství, mimo dosah zdrojů tepla (krbů, kamen, halogenových lamp atd.) a na rovný povrch. Dbejte na to, aby pohyb opěrky nohou a opěradla nebyl nijak omezen. Židle musí být vzdálena minimálně 30 cm od jakékoliv překážky (stěna, stůl apod.). Montáž a demontáž křesla musí provádět kvalifikovaní technici, aby nedošlo k mechanickému a/nebo elektrickému poškození výrobku. Pacientské křeslo je dodáváno již smontované a připravené k použití; uživatel jej musí pouze připojit k napájení.

9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Připojte elektrický kabel přímo do zásuvky. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Před usednutím do křesla se ujistěte, že dálkové ovládání a jeho kabel nepřekáží.
- Nedotýkejte se rukama ani nohama upevňovacích bodů, jako jsou mechanismy zvedání židle a opěrky nohou.
- Pokud židli nepoužíváte, nechte ji ve vzpřímené poloze se zavřenými podnožkami.
- Pokud přístroj nefunguje nebo má poruchu, okamžitě jej přestaňte používat, vypněte jej, odpojte ze zásuvky a obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko, které provede opravu.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je kožené nebo látkové čalounění roztržené a dochází k úniku vnitřního vybavení.
- Nedovoľte dětem, aby zařízení používaly nebo si s ním hrály.
- Neovládejte spínače, nepoužívejte dálkové ovládání a/nebo nevytahujte zástrčku mokřými rukama.
- Zástrčku nijak nevyměňujte.
- Při používání sklopného opěradla nebo opěrky nohou se ujistěte, že se v blízkosti nenachází žádné předměty a/nebo osoby, které by mohly být poškozeny.
- Vyhnete se prudkému sezení na mechanismu.
- Nesedějte si, nelezte ani neskákejte na opěradlo, opěrku rukou nebo opěrku nohou.
- Nevkládejte ruce ani nohy pod židli, do mezer mezi opěradlem a sedákem nebo područkami.
- V blízkosti křesla nepoužívejte mobilní telefony ani notebooky.
- Nepohybujte židli, na které se nacházejí lidé nebo předměty.
- V žádném případě nepřekračujte maximální přípustnou kapacitu.
- V případě použití dětmi nebo závislými osobami je nutná asistence a přítomnost další kompetentní osoby.
- Dávejte pozor na malé části, které lze spolknout.
- Na napájecí kabel nepokládejte žádné předměty ani po něm nechodte.
- Doporučuje se používat originální příslušenství.
- Nikdy nesedějte na opěrku nohou, když je židle v relaxační (ležící) poloze.
- Neumísťujte židli do blízkosti zdrojů tepla, do vlhkých místností nebo na nerovné podlahy.
- Doporučuje se, aby jednotlivé ovládací prvky ovládala jedna osoba sedící na židli.
- Židli umístěte do vzdálenosti minimálně 60 cm od stěny.
- Při přemísťování křesla nebo údržbě odpojte zásuvku.
- Nepokládejte na židli těžké předměty.
- Neumísťujte židli do blízkosti kamen nebo jiných zdrojů tepla.



POZOR!

Nebezpečí zkratu nebo požáru, úrazů elektrickým proudem, zranění a nehod.

- Zasuňte napájecí zástrčku až na doraz do zásuvky.
- Pokud přístroj nepoužíváte, ujistěte se, že je dálkový ovladač řádně uložen v kapse.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za kabel, ale vezměte ho

- zástrčku přímo vedle zásuvky. Nepoužívejte, pokud máte na sobě mokré oblečení.
- Nepoužívejte, když je židle mokrá.
- Nepoužívejte přístroj s jiným napětím, než je uvedeno na štítku, a nezapojujte jej do více zásuvek.
- Nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo venkovní prostory.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel, zástrčka a zásuvka.
- Elektrický kabel během používání nepoškozujte, nelámejte, neupravujte, neohýbejte, netahajte, nekroutěte, nemotejte.
- Nepoškozujte zástrčku kolíky, vodou ani jinými nečistotami.
- Napájecí kabel neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla nebo horkých povrchů.

10. ZPŮSOB POUŽITÍ

Poznámka: Viz upozornění v tomto návodu k použití.



POZOR!

Když je opěradlo nakloněné, nenaklánějte se ani nepůsobte silou směrem dolů. Hrozí nebezpečí převrácení a zranění.



POZOR!

Nepoužívejte válečkový systém, když osoba sedí na židli.




POZOR!

Nikdy nepoužívejte židli, když jsou kola odblokovaná a mohou se volně otáčet.



POZOR!

Křeslo není určeno k pohybu uživatele. Židli pohybujte pouze tehdy, když na ní nikdo nesedí.

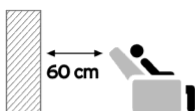

Umístění židle
60 cm od stěny



Nesedejte si
na podnožku



NO



SI

Správné sezení
se zády opřenými
o opěradlo.




NO



SI

Po ukončení
používání židle před
vstáváním změňte
polohu.
vzpřímené opěradlo
a zavřete podnož

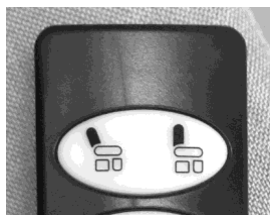


LEVÉ TLAČÍTKO NAHORU: přepne z přirozené polohy do polohy se sklopeným opěradlem.

LEVÝ DOLNÍ KLÍČ: počínaje polohou ve stoje nastavte židli do přirozené polohy; počínaje přirozenou polohou vytáhněte opěrku nohou.

PRAVÝ KLÍČ NAHORU: z polohy s opěradlem dolů se židle vrátí do své přirozené polohy.

PRAVÉ DOLNÍ TLAČÍTKO: z přirozené polohy uvede židli do vzpřímené polohy; počínaje vytaženou opěrkou nohou ji vrátí zpět na místo.

10 Válečkový systém

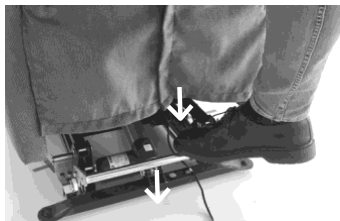

Válečkový systém je u židli PO301x instalován jako standardní vybavení.

Je k dispozici jako příslušenství pro modely PO300x, PO305x, PO310x a PO315x. Pro zapnutí válečkového systému zatlačte nohou na tyč (Obr. 1) směrem dolů. Chcete-li válečkový systém odpojit, zatáhněte nohou za tyč směrem nahoru.

Obr.1



POZOR!

Nepoužívejte válečkový systém s osobou sedící na židli! Nepřekračujte schody o více než 1 cm!

11. ÚDRŽBA

Výrobky řady MOPEDIA by Moretti jsou při uvedení na trh pečlivě kontrolovány a označeny značkou CE. Z důvodu bezpečnosti pacientů a lékařů doporučujeme, abyste si nechali zkontrolovat vhodnost výrobku výrobcem nebo autorizovanou laboratoří nejméně jednou za 2 roky. V případě oprav lze používat pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Je mimořádně důležité, aby byl přístroj při prvním použití zkontrolován. Zkontrolujte zejména:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a svorníky pevně utaženy.
- zda se mechanické části zařízení správně pohybují (opěradlo, opěrky nohou, područky, kolečka atd.).
- Zkontrolujte správnou funkci brzd kol *(pokud jsou namontovány).
- Mechanické díly (závěsy a čepy) by se měly kontrolovat každý měsíc a mazat kapkou oleje, aby se podpořila hladkost a odolnost proti opotřebení.
- Zkontrolujte neporušenost napájecího kabelu.
- Pravidelně kontrolujte účinnost elektromotorů.
- Zajistěte, aby elektromechanické díly zůstaly volné a dobře funkční.
- Zkontrolujte, zda kovovým pohyblivým částem podnože nebrání žádné předměty.

12. ČIŠTĚNÍ



POZOR!

Křesla uvedená v této příručce nemají snímatelné potahy.

Chcete-li provést čištění, odpojte přístroj od elektrické sítě vytáhnutím zástrčky ze zásuvky.

Čištění lze provádět častým používáním vysavače. V případě odolných nečistot použijte neutrální čisticí prostředky aplikované měkkým kartáčem.



Maximální teplota praní 30 °C; šetrný proces



Nebělit



Nežehlete



Nesušte na rotačním bubnu



POZOR!

Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových dílů a rezavění kovových povrchů.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií použitých při čištění.



POZOR!

Sanitační prostředky jsou korozivní. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Používejte ochranný oděv, rukavice, ochranné brýle a bezpečnostní obuv. V případě náhodného kontaktu postižené místo důkladně omyjte teplou vodou a okamžitě vyhledejte lékaře.

13. PÉČE O ELEKTRONICKÝ SYSTÉM

- Zkontrolujte, zda není kabel židle přefříznutý nebo jakkoli poškozený.
- V případě poškození (bez ohledu na rozsah) kontaktujte svého prodejce.
- Elektronické obvody uchovávejte mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.

14. PODMÍNKY LIKVIDACE

141 Obecné podmínky likvidace

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Doporučujeme zařízení likvidovat prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.



142 Upozornění pro správnou likvidaci výrobku podle evropské směrnice 2012/19/EU:

Po skončení životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s komunálním odpadem. Lze jej odevzdat ve speciálních střediscích odděleného sběru zřízených obecními úřady nebo u prodejců, kteří tuto službu poskytují. Oddělená likvidace výrobku zabraňuje možným negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví v důsledku nevhodné likvidace a umožňuje využití materiálů, z nichž je vyroben, a tím dosažení významných úspor energie a zdrojů. Pro zdůraznění povinnosti odděleně likvidovat elektromedicínské zařízení je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí na kolečkách.

15. PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

Přístroj POLTRONA ELEVABLE je určen pro použití v prostředí

elektromagnetických polí uvedených v následujících tabulkách. Uživatel zařízení ELEVATOR musí zajistit, aby bylo skutečně používáno za uvedených podmínek.

Tabulka 1

PRŮVODCE A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE		
ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO POUŽITÍ V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ SPECIFIKOVANÉM NÍŽE. ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL PŘÍSTROJE MUSÍ ZAJISTIT, ABY BYL PŘÍSTROJ V TAKOVÉM PROSTŘEDÍ POUŽÍVÁN.		
EMISNÍ TESTY	SHODA	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
CISPR 11 RF EMISE	SKUPINA 1	ZVEDACÍ KŘESLO VYUŽIVÁ KE SVĚMLU PROVOZU POUZE RF ENERGII. VNITŘNÍ PROVOZ A NABÍJENÍ BATERIE. PROTO JEHO EMISE RF JSOU VELMI NÍZKÉ A JE NEPRAVDĚPODOB N Ě , Ž E B Y ZPŮSOBOVALY RUŠENÍ V BLÍZKÝCH ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH.
CISPR 11 RF EMISE	TŘÍDA B	ZVEDACÍ KŘESLO JE VHODNÉ PRO POUŽITÍ VE VŠECH BUDOVÁCH, VČETNĚ OBYTNÝCH BUDOV A BUDOV PŘÍMO PŘIPOJENÝCH K VEŘEJNÉ SÍTI NÍZKÉHO NAPĚTÍ, KTERÁ ZÁSÓBUJE BUDOVY POUŽÍVANÉ P R O OBYTNĚ ÚČELY.
EMISE HARMONICKÝCH EN 61000-3-2	SOUHLASNOST	
KOLÍSÁNÍ NAPĚTÍ / EMISE BLIKÁNÍ EN 61000-3-3	SOUHLASNOST	


Tabulka 2

PRŮVODCE A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE			
ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO POUŽITÍ V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ SPECIFIKOVANÉM NÍŽE. ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL PŘÍSTROJE MUSÍ ZAJISTIT, ABY BYL PŘÍSTROJ V TAKOVÉM PROSTŘEDÍ POUŽÍVÁN.			
TESTY IMUNITY	ZKUŠEBNÍ ÚROVEŇ IEC 60601	ÚROVEŇ DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
ELEKTROSTATICKÝ VÝBOJ (ESD) EN 61000-4-2	± 4 KV CONTACT ± 8 KV VE VZDUCHU	± 4 KV CONTACT ± 8 KV VE VZDUCHU	INFORMACE PLATNÉ PRO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ. PODLAHY MUSÍ BYT DŘEVĚNÉ, BETONOVÉ NEBO KERAMIKA. POKUD JSOU PODLAHY JSOU POKRYTY SYNTETICKÝM MATERIÁLEM, MĚLA BY RELATIVNÍ VLHKOST VZDUCHU ČINIT ALESPŮŇ 30 %.

ZÁBLISKY A RYCHLÉ PŘECHODOVÉ JEVY EN61000-4-4	1KV - 5KHZ INDIVIDUÁLNÍ VAZBA, 2000V - 5KHZ PARALELNÍ VAZBA	1KV - 5KHZ INDIVIDUÁLNÍ VAZBA, 2000V - 5KHZ PARALELNÍ VAZBA	KVALITA SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ P R O NABÍJENÍ BATERIE BY MĚLA O D P O V Í D A T KVALITĚ TYPICKÉ KOMERČNÍ NEBO NEMOCNÍČNÍ PROSTŘEDÍ
PULZNÍ NAPĚTÍ EN 61000-4-5	2KV PARALELNÍ SPOJENÍ; 1KV INDIVIDUÁLNÍ SPOJKA	2KV PARALELNÍ SPOJENÍ; 1KV INDIVIDUÁLNÍ SPOJKA	KVALITA SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ P R O NABÍJENÍ BATERIÍ BY MĚLA O D P O V Í D A T KVALITĚ TYPICKÉ KOMERČNÍ NEBO NEMOCNÍČNÍ PROSTŘEDÍ
POKLESY NAPĚTÍ, KRÁTKÁ PŘERUŠENÍ A KOLÍSÁNÍ NAPĚTÍ N A VSTUPNÍCH NAPÁJECÍCH VEDENÍCH. EN 61000- 4-11	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	0V/2000MS; 0V/500MS; 0V/50MS; 0V/20MS; 0V/500MS; 0,75V/2000MS; 0,75V/500MS; 0V/50MS;	KVALITA SÍŤOVÉHO NAPĚTÍ P R O NABÍJENÍ BATERIÍ BY MĚLA O D P O V Í D A T KVALITĚ V TYPICKÉM KOMERČNÍM NEBO NEMOCNÍČNÍM PROSTŘEDÍ.
VEDENÉ RADIOFREKVENČNÍ EMISE EN55011	0,15 ÷ 0,5 MHZ 79 DBMV 0,5 ÷ 30 MHZ 73 DBMV	0,15 ÷ 0,5 MHZ 79 DBMV 0,5 ÷ 30 MHZ 73 DBMV	KVALITA NAPĚTÍ SÍŤ PRO NABÍJENÍ BATERIE BY MĚLA BÝT JAKO V TYPICKÉM KOMERČNÍM NEBO NEMOCNÍČNÍM PROSTŘEDÍ.
VYZAŘOVÁNÍ RÁDIOVÝCH FREKVENCÍ EN55011	TŘÍDA B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M) TŘÍDA A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	TŘÍDA B 30 - 230 MHZ, 40 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 47 (3 M) TŘÍDA A 30 - 230 MHZ, 50 (3 M) 230 - 1000 MHZ, 57 (3 M)	KVALITA NAPĚTÍ SÍŤ PRO NABÍJENÍ BATERIE BY MĚLA BÝT JAKO V TYPICKÉM KOMERČNÍM NEBO NEMOCNÍČNÍM PROSTŘEDÍ.

Tabulka 3

PRŮVODCE A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE			
ZAŘÍZENÍ JE URČENO PRO POUŽITÍ V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ SPECIFIKOVANÉM NÍŽE. ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL PŘÍSTROJE BY MĚL ZAJISTIT, ABY BYL PŘÍSTROJ V TAKOVÉM PROSTŘEDÍ POUŽÍVÁN.			
TESTY IMUNITY	ZKUŠEBNÍ ÚROVEŇ IEC 60601	ÚROVEŇ DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ	ELEKTROMAGNETI CKÉ PROSTŘEDÍ

RUŠENÍ ZPŮSOBENÁ RADIOFREKVENČNÍ MI POLI 61000-4-6	3 V EFF. 150 KHZ AŽ 80 MHZ	3 V EFF. 150KHZ AŽ 80MHZ	<p>PŘENOSNÁ A MOBILNÍ RF KOMUNIKAČNÍ ZARÍZENÍ BY SE NEMĚLA POUŽÍVAT V BLÍZKOSTI ZADNÉ ČÁSTI ZVEDACÍHO KŘESLA, VČETNĚ KABELŮ, S VYJÍMKOU PŘIPADŮ, KDY JSOU DODRŽENY DOPORUČENÉ ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI VYPOČTENÉ PODLE ROVNICE PLATNÉ PRO FREKVENCI VYSÍLAČE.</p> <p>DOPORUČENÉ ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI $D = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHZ AŽ 800 MHZ $D = 2,3 \sqrt{P}$ 800 MHZ AŽ 2,5 GHZ</p> <p>KDE "P" JE MAXIMÁLNÍ JMENOVITÝ VÝSTUPNÍ VÝKON VYSÍLAČE VE WATTECH. (W) PODLE VYROBCE VYSÍLAČE A "D" JE ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST.</p> <p>DOPORUČENO V METRECH (M), INTENZITA POLE PEVNÝCH VYSÍLAČŮ RF, JAK JE URČENA PŘI ELEKTROMAGNETICKÉM PRŮZKUMU LOKALITY MŮŽE BÝT NIŽŠÍ NEŽ ÚROVEŇ SHODY V KAŽDEM ROZSAHU FREKVENCE. V BLÍZKOSTI ZARÍZENÍ OZNACENÉHO NÁSLEDUJÍCÍM SYMBOLEM MŮŽE DOCHÁZET K RUŠENÍ:</p> 
VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ EN 6100-4-3	3 V/M 80 MHZ AŽ 2,5 GHZ	3 V/M 80 MHZ AŽ 2,5 GHZ	
<p>POZNÁMKA 1: PŘI FREKVENCÍCH 80 MHZ A 800 MHZ PLATÍ ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST PRO NEJVYŠŠÍ FREKVENČNÍ ROZSAH. POZNÁMKA 2: TYTO POKYNY NEMUSÍ PLATIT VE VŠECH SITUACÍCH. ELEKTROMAGNETICKÉ ŠÍŘENÍ JE OVLIVNĚNO ABSORPCÍ A ODRAZ STRUKTUR, PŘEDMĚTŮ A LIDÍ.</p>			
<p>^A INTENZITU POLE PEVNÝCH VYSÍLAČŮ, JAKO JSOU ZÁKLADNOVÉ STANICE RADIOTELEFONŮ (MOBILNÍCH A BEZDRÁTOVÝCH) A POZEMNÍCH MOBILNÍCH RADIOSTANIC, RADIOAMATÉRSKÝCH ZARÍZENÍ, AM A FM ROZHLASOVÝCH VYSÍLAČŮ A TELEVIZNÍCH VYSÍLAČŮ, NELZE THEORETICKY PŘESNĚ PŘEDPOVĚDĚT. PRO STANOVENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO PROSTŘEDÍ ZPŮSOBENÉHO PEVNÝMI RF VYSÍLAČI JE TŘEBA PROVĚST ELEKTROMAGNETICKÝ PRŮZKUM OKOLÍ.</p> <p>MÍSTO. POKUD INTENZITA POLE NAMĚŘENÁ V MÍSTĚ, KDE JE ZVEDACÍ KŘESLO POUŽÍVÁNO, PŘEKROČÍ VÝŠE UVEDENOU PŘÍSLUŠNOU ÚROVEŇ SHODY RF, JE TŘEBA DODRŽET NORMÁLNÍ PROVOZ ZVEDACÍHO KŘESLA. POKUD JE POZOROVÁNA ABNORMÁLNÍ ČINNOST, MOHOU BÝT NUTNÁ DALŠÍ OPATŘENÍ, NAPŘÍKLAD JINÁ ORIENTACE NEBO POLOHA ZVEDACÍHO KŘESLA.</p> <p>^B INTENZITA POLE VE FREKVENČNÍM ROZSAHU 150 KHZ AŽ 80 MHZ BY MĚLA BÝT MENŠÍ NEŽ 3 V/M.</p>			

Tabulka 4

DOPORUČENÉ ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI MEZI PŘENOSNÝMI A MOBILNÍMI RADIOKOMUNIKAČNÍMI ZARÍZENÍMI A ZVEDACÍMI KŘESLY

ZVEDACÍ KŘESLO JE URČENO K PROVOZU V ELEKTROMAGNETICKÉM PROSTŘEDÍ, V KTERÉM JE KONTROLOVANO VYZAŘOVANÉ RF RUŠENÍ. ZÁKAZNÍK NEBO UŽIVATEL ZVEDACÍHO KŘESLA MŮŽE POMOCI ZABRÁNIT ELEKTROMAGNETICKÉMU RUŠENÍ TÍM, ŽE ZAJISTÍ MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI MOBILNÍMI A PŘENOSNÝMI RF KOMUNIKAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI (VYSÍLAČI) A NABIJEČKOU ZVEDACÍHO KŘESLA BĚHEM FÁZE NABÍJENÍ A CELÉHO ZAŘÍZENÍ.

ZVEDÁNÍ ŽIDLE BĚHEM JEJÍHO PROVOZU, JAK JE DOPORUČENO NIŽE, VE VZTAHU K MAXIMÁLNÍMU VÝSTUPNÍMU VÝKONU RADIOKOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ.













ZKOUŠKY			
MAXIMÁLNÍ JMENOVITÝ VÝSTUPNÍ VÝKON VYSÍLAČE W	BĚHEM POUŽÍVÁNÍ ZVEDACÍHO KŘESLA	BĚHEM POUŽÍVÁNÍ ZVEDACÍHO KŘESLA	BĚHEM POUŽÍVÁNÍ ZVEDACÍHO KŘESLA
	150 KHZ AŽ 80 MHZ D = 1,2√P	80 KHZ AŽ 800 MHZ D = 1,2√P	800 KHZ AŽ 2,5 GHZ D = 1,2√P
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

U VYSÍLAČŮ S MAXIMÁLNÍM JMENOVITÝM VÝSTUPNÍM VÝKONEM, KTERÝ NENÍ UVEDEN, LZE DOPORUČENOU VZDÁLENOST D V METRECH (M) VYPOČÍTAT POMOCÍ ROVNICE PLATNÉ PRO FREKVENCÍ VYSÍLAČE, KDE P JE MAXIMÁLNÍ JMENOVITÝ VÝSTUPNÍ VÝKON VYSÍLAČE VE WATTECH (W) PODLE VÝROBCE VYSÍLAČE. POZNÁMKA 1: PŘI FREKVENCÍCH 80 MHZ A 800 MHZ PLATÍ ODSŤUPOVÁ VZDÁLENOST.
PRO NEJVYŠŠÍ FREKVENČNÍ ROZSAH.
POZNÁMKA 2: TYTO POKYNY NEMUSÍ PLATIT VE VŠECH SITUACÍCH.
ELEKTROMAGNETICKÉ ŠÍŘENÍ JE OVLIVNĚNO ABSORPCÍ A ODRAZ STRUKTUR, PŘEDMĚTŮ A OSOB

16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

16.1 Rozměry a hmotnosti*

Velikost a hmotnost

Kódy											 Maximální nosnost (Kg)	
PO300x	53	46	48	77	85	61	100	160	150	130	52	
PO300G-XL	64	46	48	88	85	61	100	160	150	160	55	
PO301x	53	46	48	77	85	61	100	160	150	130	52	
PO305x	53	46	48	77	85	61	110	165	150	130	55	
PO310x	53	47	49	66	85	61	110	165	150	130	55	
PO315x	52	48	48	75	85	61	110	165	150	130	55	
PO320x	52	47	49	72	85	61	110	170	150	130	58	
PO325x	52	47	49	72	85	61	110	175	150	130	58	

*Rozměry jsou uvedeny v cm a mohou se lišit o ± 1 cm.

162 Technické specifikace

PO300x - PO300G-XL - PO301x (NINFEA)

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám;
- Potah křesla
- Výplň z nedeformovatelné polyuretanové pěny v diferencované hustotě (opěradlo 18-22 Kg/m³, podnožka 18 Kg/m³, sedák 35 Kg/m³, područky 40 Kg/m³);³
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohové nastavitelné opěradlo;
- Funkce zvedání nohou;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- 2 přední kolečka pro malé pohyby (pouze u PO300x - PO300G-XL);
- Válečkový systém (standardně pouze pro PO301x) 4 kolečka Ø 50 mm;
- 230V - 110W;
- Teplota provozního prostředí -20 °C / + 60 °C;
- Doporučené skladování: Skladujte na chladném a suchém místě, a vždy mimo dosah přímých zdrojů tepla, jako je sluneční záření (doporučená teplota mezi -10 °C a +40 °C);
- V případě dlouhodobého skladování je nutné odpojit zdroj napájení a chránit ty části, které by se mohly poškodit v důsledku usazování prachu.

PO305x (DAFNE)

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám;
- Potah křesla
- Výplň z nedeformovatelné polyuretanové pěny v diferencované hustotě (opěradlo 18-22 Kg/m³, podnožka 18 Kg/m³, sedák 35 Kg/m³, područky 40 Kg/m³);³
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohové nastavitelné opěradlo;
- Funkce zvedání nohou;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- 2 přední kolečka pro malé pohyby;
- 230V - 110W;
- Teplota provozního prostředí -20 °C / + 60 °C;
- Doporučené skladování: Skladujte na chladném a suchém místě, vždy mimo dosah přímých zdrojů tepla, např. slunečního záření. (doporučená teplota mezi -10 °C a + 40 °C);
- V případě dlouhodobého skladování musí být zdroj odpojen, napájení a chránit ty části, které by mohly být poškozeny usazeným prachem.

PO310x (FELCE)

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám;
- Nedeformovatelná výplň z polyuretanové pěny v diferencované hustotě (opěradlo 18-22 Kg/m³, podnožka 18 Kg/m³, sedák 35 Kg/m³, područky 35 Kg/m³);³
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohové nastavitelné opěradlo;

- Funkce zvedání nohou;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- 2 přední kolečka pro malé pohyby;
- 230V - 110W;
- Teplota provozního prostředí -20 °C / + 60 °C;
- Doporučené skladování: Skladujte na chladném a suchém místě.
a vždy mimo dosah přímých zdrojů tepla, jako je sluneční záření (doporučená teplota mezi -10 °C a +40 °C);
- V případě dlouhodobého skladování je nutné odpojit ke zdroji napájení a chránit ty části, které by mohly být poškozeny usazeným prachem.

PO315x (ANEMONE)

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám;
- Nedeformovatelná výplň z polyuretanové pěny v diferencované hustotě (podnož 18 Kg/m³, sedák 35 Kg/m³, područky 35 Kg/m³);³
- Silikonová zadní část se sponou;
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohové nastavitelné opěradlo;
- Funkce zvedání nohou;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- 2 přední kolečka pro malé pohyby;
- 230V - 110W;
- Teplota provozního prostředí -20 °C / + 60 °C;
- Doporučené skladování: Skladujte na chladném a suchém místě, vždy mimo dosah přímých zdrojů tepla, např. slunečního záření (doporučená teplota mezi -10 °C a +40 °C);
- V případě dlouhodobého skladování je nutné odpojit zdroj napájení a chránit ty části, které by mohly být poškozeny usazeným prachem.

PO320x (TIMO)

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám;
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám;
- Nedeformovatelná výplň z polyuretanové pěny v diferencované hustotě (opěradlo 18-22 Kg/m³, podnožka 18 Kg/m³, sedák 35 Kg/m³, područky 35 Kg/m³);³
- Vícepolohově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepolohové nastavitelné opěradlo;
- Výsuvné područky;
- Odnímatelné uši;
- 4 kola Ø 50 mm, 2 s brzdou;
- Tlačítko;
- Funkce zvedání nohou;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- 230V - 110W;
- Teplota provozního prostředí -20 °C / + 60 °C;
- Doporučené skladování: Skladujte na chladném a suchém místě.
a vždy mimo dosah přímých zdrojů tepla, jako je sluneční záření (doporučená teplota mezi -10 °C a +40 °C);
- V případě dlouhodobého skladování je nutné odpojit zdroj napájení a chránit ty části, které by mohly být poškozeny usazeným prachem.


PO325x

- Práškově lakovaná ocel a dřevěný rám
- Tkanina odolná proti vodě a skvrnám
- Nedeformovatelná výplň z polyuretanové pěny v diferencované hustotě (opěradlo 18-22 Kg/m³, podnožka 18 Kg/m³, sedák 35 Kg/m³, područky 35 Kg/m³);³
- Sedák s přídatným polstrováním z paměťové pěny o tloušťce 3 cm;
- Vícepohodově nastavitelná opěrka nohou;
- Vícepohodově nastavitelné opěradlo;
- Výsuvné područky;
- Odnímatelné uši;
- 4 kola Ø 50 mm, 2 s brzdou;
- Tlačítko;
- Funkce zvedání nohou;
- Funkce vertikálního zdvihu;
- Funkce polohy lůžka;
- 2 nezávislé motory;
- 4tlačítkový dálkový ovladač s drátem uvnitř kapsy;
- 230V - 110W
- Teplota provozního prostředí -20 °C / + 60 °C;
- Doporučené skladování: Skladujte na chladném a suchém místě, vždy mimo dosah přímých zdrojů tepla, např. slunečního záření (doporučená teplota mezi -10 °C a +40 °C);
- V případě dlouhodobého skladování je nutné odpojit zdroj napájení a chránit ty části, které by mohly být poškozeny usazeným prachem.

163 Specifikace tkaniny

Všechny látky na křesla jsou:



PROTI ROZTOČŮM



ANTIMIKROBIÁLNÍ A
ANTIBAKTERIÁLNÍ LÁTKY



DÝCHATELNÉ

17. PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kolečkový systém (POUZE PRO PO300x, PO300G-XL, PO305x, PO310x, PO315x)
- Sada potahů sedadel (POUZE PRO PO310x, PO315x, PO320x, PO325x)
- Tabulka (POUZE PRO PO320x A PO325x)
- Přenosná sada baterií

Poznámka: Seznam příslušenství je průběžně aktualizován. Pro novinky, dostupnost a další informace doporučujeme kontaktovat prodejce.

17.1 Pokyny k instalaci kolečkového systému



POZOR!

Instalační práce musí provádět oprávněný personál.




POZOR!

Za poruchy nebo škody vzniklé v důsledku nesprávné instalace a uvedení do provozu nekvalifikovaným personálem se nepřebírá žádná odpovědnost.

Při instalaci příslušenství kolečkového systému (POA3xx) na židli je třeba pečlivě dodržet následující kroky:

- Uveďte židli do provozu a uveďte ji zcela do zvedací polohy;
- Odpojte elektrickou zásuvku;
- Pomocí běžného klíče o průměru 10 mm demontujte obě přední kola;
- Sklopte židli dopředu;

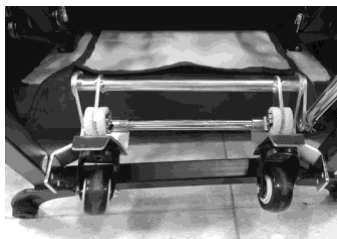

Obr.2



Obr.3



Obr.4


- Vložte kolečkový systém (dodává se již částečně smontovaný) do ocelové základny křesla (obr. 2);
- Srovnajte 4 otvory na přední straně podstavce rámu křesla s otvory na podpěrách kolečkového systému a vše zajistěte pomocí 4 dodaných šroubů a matic (obr. 3,4);



Obr.5



Obr.6

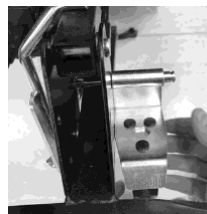

Obr.7



Obr.8

- Vezměte součásti znázorněné na obr. 5;
- Zasuňte dlouhý kolík do držáku kola (obr. 6);
- Vložte čep a kolo do pravé zadní desky rámu (obr.7,8);
- Zasuňte západku na čep na vnější straně rámu;
- Nasaďte podložku na čep z vnitřní strany rámu;



Obr.9



Obr.10



Obr.11

- Nasadíte dříve instalovanou tyč kolečkového systému na čep (Obr. 9) a vložte západku i z vnitřní strany;
- Vezměte si součásti znázorněné na obr. 10;
- Zasuňte krátký kolík do držáku kola;
- Vložte kolík a kolo do levé zadní desky rámu (obr. 11);
- Nasadíte podložku na čep z vnitřní strany rámu;
- Na oba konce čepu nasadíte držáky;



Obr.12



Obr.13

- Vezměte ocelovou tyč se zbývajícími 2 kolíky a přiblížte ji k deskám rámu otočením tak, aby černé gumové koncovky směřovaly dolů;
- Vložte pravou zahnutou tyč kolečkového systému do drážky na tyči (Obr. 12);
- Vložte kolíky pro upevnění tyče k deskám rámu židle;
- Nasadíte pojistky na oba kolíky (obr. 13);
- Sklopte židli zpět do normální polohy;
- Připojte židli k napájení a vraťte ji do přirozené polohy.

18. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výjimkou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k obsluze. Společnost Moretti nenese odpovědnost za jakékoli vzniklé škody, zranění osob nebo cokoli jiného způsobeného instalací a/nebo používáním zařízení nebo v souvislosti s ním, které není důsledně v souladu s pokyny uvedenými v návodech k instalaci, montáži, provozu a údržbě.

a použití. Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo závady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je to možné), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku. Jakékoli nesprávné použití židle, které není uvedeno v tomto návodu, ruší odpovědnost a záruku výrobce v případě nehody nebo poškození.

19. OPRAVY

191 Záruční oprava

V případě, že se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle svého uvážení záruční výrobek vyměnit nebo opravit, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve své provozovně. Náklady na práci související s opravou výrobku může nést společnost Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

192 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravený výrobek přijat.

193 Nebezpečné výrobky

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

20. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy jste náhradní díl obdrželi. Seznam dostupných náhradních dílů naleznete výhradně v katalogu Moretti.

21. USTANOVENÍ O VÝJIMKÁCH

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruk ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod ve vztahu k výrobkům pro spotřebitelů. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určité výjimky nebo omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LISTINA

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ **Umístění** _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ **Umístění** _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:

info@morettispa.com PRODUKT V ALBÁNII

