



MOPEDIA®

PÁSY

NÁVOD K POUŽITÍ

INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA 3
3. URČENÉ POUŽITÍ	STRANA.3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STRANA.3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	STRANA.4
6. POUŽITÉ SYMBOLY.....	STRANA.4
7. OBECNÝ POPIS	STRANA.5
71) RP200 - Prsní pás	str.5
72) RP210 - Hrudní pás	
RP215 - Motýlí hrudní pás	str. 5
73) RP220 - Pánevní pás pro celou pánev	
RP225 - Samostatný pánevní pás	str.5
74) RP240 - Náramek na ruku	str.6
8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM.....	STRANA.6
9. UPOZORNĚNÍ P R O POUŽITÍ	STRANA.6
10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	STRANA.6
101) Čištění	str.6
102) Dezinfekce.....	str.7
11. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE	STRANA.7
12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STRANA.7
13. ZÁRUKA	STRANA.8
131) Opravy.....	str.9
132) Náhradní díly	str.9
133) Ustanovení o výjimkách	str.9

CE Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP200 Hrudní pás

RP210 Hrudní pás

RP215 Motýlí hrudní pás

RP220 Celý pánevní pás

RP225 Samostatný pánevní pás

RP240 Zápěstní pásek

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali pomůcku z řady MOPEDIA by Moretti. Zádržné systémy KOALA by Moretti byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tato příručka obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi vybrané pomůcky a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím zařízení pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda všechny části výrobku nebyly během přepravy poškozeny. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.



Používání následujícího zařízení k jiným než definovaným účelům je zakázáno. v této příručce. Společnost Moretti S.p.A. nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo jiného použití, než je uvedeno v tomto návodu. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v zařízení a následující příručce bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jejich funkcí.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Zádržné systémy KOALA by Moretti jsou navrženy tak, aby zabránily sklouznutí dopředu a pomohly zadržet pacienty sedící na invalidním vozíku nebo v pohodlném křesle. Tyto pomůcky jsou obzvláště pohodlné díky polstrované látce, ze které jsou vyrobeny. Jsou vybaveny délkově nastavitelným popruhem a klipovými uzávěry, které umožňují rychlé a správné umístění pro jakoukoli tělesnou velikost na všech modelech invalidních vozíků, komfortních židlí nebo vysokých židlí, a také rychlé uvolnění v případě nouze.

4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA a patřící do skupiny CONTAINMENT SYSTEMS jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy naleznete v EU prohlášení o shodě, které společnost MORETTI SPA vydává a zpřístupňuje svými kanály.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Správné používání přístroje je popsáno v této příručce.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Zkontrolujte, zda je výrobek dodán nepoškozený a zda je zabalen mimo dosah zdrojů tepla.
- Životnost zařízení je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí
- Výrobce a prodejce nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám, zvířatům nebo majetku v důsledku zásahu neoprávněných osob a nedodržení tohoto návodu k obsluze.
- Uživatel a/nebo pacient by měl veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti s prostředkem, hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

6. POUŽITÉ SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečný identifikátor zařízení
	Označení
	CE Výrobce
	Výrobní šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky likvidace
	Ruční praní; maximální teplota 30 °C
	Nebělit
	Nežehlete
	Nesušte na rotačním bubnu

7. OBECNÝ POPIS

71) RP200 - Hrudní pás

Vhodný k zabránění sklouznutí dopředu a k usnadnění připoutání pacientů sedících na invalidním vozíku nebo v pohodlném křesle. Bandáž je obzvláště pohodlná díky polstrované tkanině, ze které je vyrobena. Je vybavena délkově nastavitelným popruhem a klipovými uzávěry, které umožňují rychlé a správné umístění pro jakoukoli tělesnou velikost na všech modelech invalidních vozíků, pohodlných židlí nebo vysokých židlí, a také rychlé uvolnění v případě nouze.

Způsoby použití

1. Posadte pacienta do pohodlného křesla nebo invalidního vozíku.
2. Ovinutí poprsí šerpou
3. Oba popruhy umístěte za opěradlo.
4. Zapněte sponu
5. Nastavte délku popruhu podle potřeby

72) RP210 - Korzetový hrudní pás RP215 -

Motýlí korzetový hrudní pás

Vhodné pro zabránění sklouznutí dopředu a pro podepření horní části těla u pacientů sedících na invalidním vozíku nebo pohodlném křesle. Pás je obzvláště pohodlný díky polstrované látce, ze které je vyroben. Je vybaven délkově nastavitelnými popruhy s rychloupínáním do X, klipovými uzávěry, které umožňují rychlé a správné umístění pro jakoukoli velikost těla na všech modelech invalidních vozíků, pohodlných židlí nebo vysokých židlí, a také rychlé uvolnění v případě nouze.

Způsoby použití

1. Posadte pacienta do pohodlného křesla nebo invalidního vozíku.
2. Umístěte korzet na hrudník pacienta.
3. Umístěte obě horní výztuhy tak, aby procházely přes zadní část opěradla.
4. Rovněž projděte dvěma stuhami ve spodní části na obou stranách bryndáku na zadní straně opěradla.
5. Připevněte 4 šroubení ke konektoru X a zajistěte je pomocí karabin.
6. Nastavte délku ramenních popruhů a pásu tak, aby byly pro pacienta pohodlně zapnuté.

73) RP220 - Celý pánevní pás

RP225 - Samostatný pánevní pás

Je navržen tak, aby zabránil pacientům sedícím na invalidním vozíku nebo v pohodlném křesle, kteří nejsou schopni udržet správnou polohu vsedě, sklouznout dopředu a držít stehna od sebe. Pás je tvarován tak, aby zajišťoval pohodlné rozložení a udržení. Pohodlí zaručuje také polstrovaná tkanina, ze které je vyrobena. Je vybaven délkově nastavitelnými popruhy a klipovými uzávěry, které umožňují rychlé a správné polohování pro jakoukoli velikost těla na všechny modely invalidních vozíků, pohodlných židlí nebo vysokých židlí a také rychlé uvolnění v případě nouze.

Návod k použití RP220

1. Umístěte pánevní pás na sedadlo pohodlného křesla nebo invalidního vozíku tak, aby značka **Koala** směřovala dolů.
2. Přehodte obě vyšší pásky přes zadní část opěradla, upravte délku tak, aby byly pásky pevně uchyceny, a zajistěte je pomocí karabiny.
3. Pacient se posadí na pánevní pás, který je již umístěn na sedadle.
4. Otočte jeden ze dvou pásů z vnitřní strany stehna směrem ven tak, aby se spojil s menším pásem, upravte délku pásu tak, aby byl pro pacienta pohodlně upevněn, a zajistěte pás pomocí patentky.
5. Operaci opakujte s druhou nohou

Návod k použití RP225

1. Umístěte oba pánevní pásy na sedadlo pohodlného křesla nebo invalidního vozíku tak, aby sametová tkanina směřovala dolů.
2. Projděte oběma zadními páskami v zadní části opěradla.
3. Pacient se posadí na pánevní pásy, které jsou již umístěny na sedadle.
4. Otočte jeden ze dvou pásů od vnitřní strany stehů směrem ven a přehodte pás přes opěradlo pohodlného křesla nebo invalidního vozíku.
5. Opakujte operaci s druhým pásmem
6. Zajistěte pásy pomocí karabin a překřížte je.
7. Nastavte délku pásy tak, aby pacientovi pohodlně seděla.

74 RP240 - Čelenka

Vhodný pro poutání zápěstí pacientů sedících na invalidním vozíku nebo v pohodlném křesle.

Pásek je obzvláště pohodlný díky polstrované látce, ze které je vyroben. Po obvodu je vyztužen pevnou polyesterovou bezpečnostní páskou se zapínáním na krabičku. Upevnění ke kočárku usnadňuje pásek s nastavitelným zapínáním na suchý zip.

Způsoby použití

1. Posadte pacienta do pohodlného křesla nebo invalidního vozíku.
2. Umístěte zápěstní pásek na opěrku pohodlného křesla nebo invalidního vozíku.
3. Připevněte pásek na zápěstí na opěrku pomocí pásu se suchým zipem ve spodní části pásu.
4. Umístěte zápěstí pacienta na pásek.
5. Zajistěte zápěstí nastavením suchého zipu pásu pro pohodlné zajištění
6. Přehodte bezpečnostní pásku přes pásek, upravte délku a zajistěte ji pomocí karabiny.

8. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Vždy zkontrolujte stav opotřebených dílů, zejména těsnost KLIPŮ, abyste se ujistili, že zařízení lze bezpečně používat.

9. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ



RP200 - Nepoužívejte hrudní popruh na běžných židlích, vzhledem k jejich nízké hmotnosti nezabraňují lidem vstát a táhnout židli za sebou.



POZOR!

Řada zádržných systémů Koala by MOPEDIA v žádném případě nenahrazuje bezpečnostní pásy v autě. Lze je však použít k polohování pacienta na autosedačce, ale musí být integrovány s bezpečnostními pásy.

10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

10.1 Čištění



Ruční praní; maximální teplota 30 °C



Nebělit



Nežehlete



Nesušte na rotačním bubnu

102 Dezinfekce

Vyhňte se rozpouštědlům, která mohou poškodit pásy.


Poznámka: Rozhodně nepoužívejte kyselé, zásadité nebo rozpouštědlové produkty, jako je aceton nebo ředidlo.

11. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy pro likvidaci pevného komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních recyklačních ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- RP200

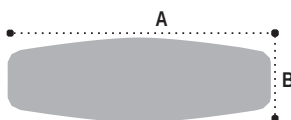


Jedna velikost pro všechny
A = 40 cm
B = 13 cm

Materiály

Vnější tkanina:
- 100% polyester
Výztuha a pásy:
- 100% polyester
Vycpávky:
- 100% polyuretan

- RP210

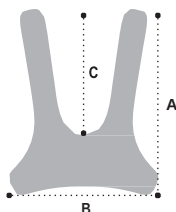


Jedna velikost A =
A = 46 cm
B = 30 cm
C = 38 cm

Materiály

Vnější tkanina:
- 100% polyester
Výztuha a pásy:
- 100% polyester
Vycpávky:
- 100% polyuretan

- RP215

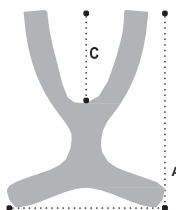


Jedna velikost pro všechny
Rozměry
A = 42 cm
B = 30 cm
C = 20 cm

Materiály

Vnější tkanina:
- 100% polyester
Výztuha a pásy:
- 100% polyester
Vycpávky:
- 100% polyuretan

B

- RP220

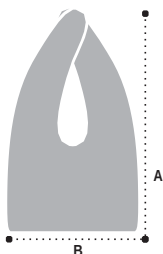

**Jedna
velikost pro
všechny**

Rozměry
A = 52 cm
B = 30 cm

Materiály

Vnější tkanina:

- 100% polyester


Výztuhy a pásky:

- 100% polyester

Vycpávky:

- 100% polyuretan

- RP225

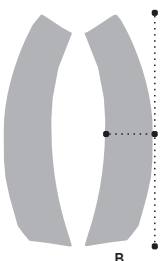

**Jedna
velikost pro
všechny**

Rozměry
A = 50 cm
B = 11 cm

Materiály

Vnější tkanina:

- 100% polyester

Výztuhy a pásky:

- 100% polyester

Vycpávky:

- 100% polyuretan

- RP240



**Jedna
velikost pro
všechny**

A = 35 cm
B = 8 cm

Materiály

Vnější tkanina:

- 100% polyester

Výztuhy a pásky:

- 100% polyester

Vycpávky:

- 100% polyuretan

13. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v případě potřeby), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

131) Opravy

Záruční oprava V případě, že se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení výrobek vyměnit nebo opravit v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve vlastních prostorách. Náklady na práci související s opravou výrobku mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka Výrobek, na který se nevztahuje záruka, můžete vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, hradí v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravený výrobek přijat.

Nevadné výrobky Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

132) Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne převzetí náhradního dílu.

133) Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky nebo podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LISTINA**

Produkt _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Prostřednictvím _____ **Umístění** _____

Prodáno do _____

Prostřednictvím _____ **Umístění** _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:

info@morettispa.com **MADE IN P.R.C.**

