

SKEMA[®]FORM

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO
NÁVOD K POUŽITÍ



INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA.3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STRANA.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	STRANA.3
4.1 Platná nařízení a směrnice.....	str.4
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ.....	STRANA.4
6. SYMBOLY.....	STRANA.4
7. OBECNÝ POPIS.....	STRANA.5
7.1 Zobrazení dílů.....	str. 5
8. MONTÁŽ.....	STRANA 6
8.1 Montáž postelí.....	str.6
8.2 Montáž pedálu (pouze pro MI371X-MI381X-MI383X-MI386X-MI391X-MI393X-MI396X).....	str.6
8.3 Připojení pohonu a řídicí jednotky (pro MI37XX).....	str.7
8.4 Připojení řídicí jednotky a pohonu (MI38XX-MI39XX).....	str.8
8.5 Montáž a připojení sady nožního spínače příslušenství MR332 (pro MI37XX-MI382..X-MI383XMI392XMI393X), MR333 (pro MI380X-MI381X-MI390X-MI391X).....	str.8
8.6 Držák role papíru.....	str.9
8.6.1 Držák papírových rolí na spodní straně MIA391 (pro MI37XX), MIA392 (pro MI38X) a MIA393/MIA394 (pro MI39X).....	str.9
8.6.2 Strana hlavy držáku role papíru MIA396 (pro MI38XX) a MIA395/MIA397 (pro MI39X).....	str.9
8.7 Příslušenství (volitelné): Sada obvodových tyčí MIA300 pro elektrické nastavení výšky lůžka.....	str.10
8.8 Příslušenství (volitelné): MIA305 IV tyč v hliníku.....	str.12
8.9 Příslušenství (volitelné): skládací boční lišty MIA310.....	str.12
8.10 Příslušenství (volitelné): skládací boční lišty MIA311.....	str.13
9. PŘED POUŽITÍM.....	STRANA.14
10. UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ.....	STRANA.14
11. JAK POUŽÍVAT.....	STRANA.14
11.1 Elektrické modely (MI37X-MI380X-MI381X-MI390X-MI391X).....	str.14
11.2 Modely s hydraulickou/plynovou pružinou (MI385-MI386-MI395-MI396).....	str.15
11.3 Modely s elektrickým zdvihem a opěrnou částí pohyblivou pomocí plynové pružiny (MI382X-MI383X-MI392X-MI393X).....	str.15
12. POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.....	STRANA.15
12.2 Použití dálkového ovládání (pouze pro MI37XX-MI382X-MI383X-MI392X-MI393X).....	str.15
12.2 Dálkové ovládání (pouze MI380X-MI381X-MI390X-MI391X).....	str.15
13. POUŽITÍ KOLEČEK (MI371X-MI381X-MI383X-MI386X-MI391X-MI393X-MI396X).....	STRANA.16
14. ÚDRŽBA.....	STRANA.16
15. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	STRANA.16
15.1 Čištění.....	str.16
15.2 Dezinfekce.....	str.16
16. PODMÍNKY LIKVIDACE.....	PAG.16
16.1 Všeobecné podmínky likvidace.....	str.16
16.2 Správné zacházení s elektrickými díly (směrnice 2012/19/EU).....	str.16
17. PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ.....	STRANA.17
17.1 Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise.....	str.17
17.2 Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost.....	str.17
17.3 Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními rádiovými komunikačními zařízeními a tímto zařízením.....	str.19
18. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	STRANA.19
19. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	STRANA.20
19.1 Rozměry a hmotnost MI370X - MI371X.....	str.20
19.2 Rozměry a hmotnost MI380X - MI381X - MI382X - MI383X.....	str.20
19.3 Rozměry a hmotnost MI390X - MI391X - MI392X - MI393X.....	str.21
19.4 Rozměry a hmotnost MI385X - MI386X.....	str.22
19.5 Rozměry a hmotnost MI395X - MI396X.....	str.22
19.6 Technické údaje.....	str.23
20. VYHLEDÁVÁNÍ PROBLÉMŮ.....	STRANA.23
21. ZÁRUKA.....	STRANA.24
22. OPRAVA.....	STRANA.24
22.1 Záruční oprava.....	str. 24
22.2 Oprava, na kterou se nevztahuje záruka.....	str. 24
22.3 Nepoškozená zařízení.....	str. 24
23. NÁHRADNÍ DÍLY.....	STRANA.24
24. DOLOŽKY O VÝJIMCE.....	STRANA.24

CE Zdravotnický prostředek třídy I
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

- MI370X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko, 62 cm
- MI371X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko, 62 cm, s kolečky
- MI380X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko 68 cm
- MI381X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko, 68 cm, s kolečky
- MI382X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko s opěrnou částí pohyblivou pomocí plynové pružiny 68 cm
- MI383X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko s opěrnou částí pohyblivou pomocí plynové pružiny 68 cm, s kolečky
- MI385X** LYTUS Hydraulické vyšetřovací lehátko, 68 cm
- MI386X** LYTUS Hydraulické vyšetřovací lehátko, 68 cm, s kolečky
- MI390X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko, 90 cm
- MI391X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko, 90 cm, s kolečky
- MI395X** LYTUS Hydraulické vyšetřovací lehátko, 90 cm
- MI396X** LYTUS Hydraulické vyšetřovací lehátko, 90 cm, s kolečky
- MI392X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko s opěrnou částí pohyblivou pomocí plynové pružiny 90 cm
- MI393X** LYTUS Elektrické vyšetřovací lehátko s opěrnou částí pohyblivou pomocí plynové pružiny 90 cm, s kolečky

X: Různé barvy podložek

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili vyšetřovací pohovku SKEMA od společnosti Moretti S.p.A.

Výrobky jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše potřeby pro praktické, správné a bezpečné používání. Tato příručka obsahuje drobné návrhy pro správné používání vámi vybraného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Před použitím výrobku si můžete přečíst celý návod, v případě nejasností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a řádně poradí.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Vyšetřovací lůžka Moretti jsou určena k diagnostice, léčbě a monitorování pacientů.



POZOR!

- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací obsažených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodávaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny PROFESIONÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ KOŠE - LYTUS je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované přílohou I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.

2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabice NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

4.1 Platné předpisy a směrnice

Aby společnost Moretti S.p.A. splnila bezpečnostní normy pro uživatele, dodržuje následující normy:

UNI CEI EN 60601-2-52:2016 Elektromedicínské přístroje. Část 2-52. Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek.

UNI EN 12182:2012 Výrobky určené pro pomoc osobám se zdravotním postižením

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Pro správné použití výrobku si přečtěte tento návod.

- Udržujte zabalené vyšetřovací lůžko mimo dosah zdrojů tepla.
- ŽIVOTNOST - životnost vyšetřovacího lůžka se určuje podle opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů a v žádném případě nesmí překročit 10 let.
- VŽDY dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění.
- NEDOVOLTE dětem, aby si na lůžku hrály nebo s ním manipulovaly.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit každou vážnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s použitím prostředku, výrobcí a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.

6. SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečná identifikace



zařízení Označení CE



Výrobce



Dávková šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace



Pozor, přečtěte si pokyny



Termíny výroby

Likvidace výrobku podle směrnice EC/19/2012

Odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE)

IPX6



Použitá část typu B




Izolační třída II



Maximální přípustné zatížení

7. OBECNÝ POPIS

7.1 Zobrazení dílů

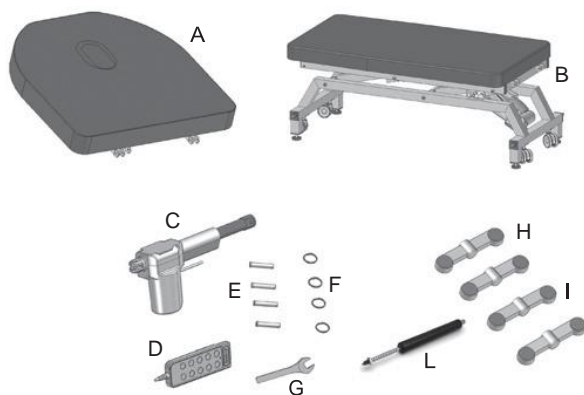

Popis

- A. Polstrovaná opěrka hlavy
- B. Čalouněný rám vyšetřovacího lůžka
- C. Ovladač opěrky hlavy (pouze u modelů MI380X-MI381X-MI390X-MI391X)
- D. Dálkové ovládání (pouze u modelů MI37XX-MI380X-MI381X--MI382X- MI383X- MI390X-MI391X -MI392X-MI393X)
- E. Spojovací kolíky pro montáž opěrky hlavy a pohonu (pouze u modelů MI38X-MI39X)
- F. Zátky ve tvaru kroužku (pouze u modelů MI38X-MI39X)
- G. Nástroj pro regulaci výšky tipů
- H. Systém dvojitého pedálu - levá strana (pouze u modelů MI371X-MI381X-MI383X-MI386X-MI391X- MI393X-MI396X)
- I. Systém dvojitého pedálu - pravá strana (pouze u modelů MI371X-MI381X-MI383X-MI386X-MI391X- MI393X-MI396X)
- L. Plynová pružina opěrky hlavy (pouze u modelů MI385X-MI386X-MI395X-MI396X-MI382X-MI383X- MI392X-MI393X)

8. MONTÁŽ




POZOR!

Tyto operace provádějte s pomocí obsluhy, buďte opatrní, abyste předešli zranění osob nebo poškození majetku při pohybu lůžka.


8.1 Montáž postele

- Vyjměte výrobek z obalu a ujistěte se, že obsah odpovídá požadovanému modelu a že strany nebyly během přepravy poškozeny. V opačném případě neprodleně kontaktujte svého prodejce
- Pokračujte v montáži opěrky hlavy (pouze u modelů MI38XX-MI39XX) a pohonu k rámu lůžka pomocí sady kolíků (REF.E), zajistěte je pomocí kolíků ve tvaru kroužku (REF.F), jak je znázorněno na obr. 1.

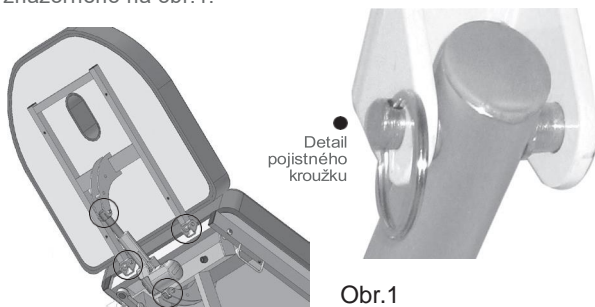

8.2 Montáž pedálu (pouze pro MI371X-MI381X-MI383X-MI386X-MI391X-MI393X-MI396X)

Sestavte ovládací kolečko pedálu (REF.H,I) s písmenným odkazem na stejný pedál (L = vlevo, R = vpravo) a uspořádejte je podle obr.2.

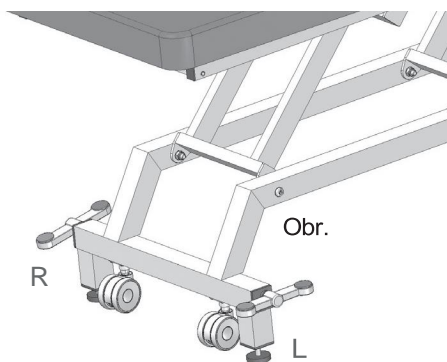

- Nastavení přítlačné patky



Nastavte přítlačné patky tak, aby umožňovaly správnou funkci ovládacího mechanismu pedálů koleček; za tímto účelem nastavte výšku přítlačné patky tak, aby vzdálenost uvedená na obrázku nepřesáhla 10 mm.

Vaše postel je správně sestavena a připravena k použití.

8.3 Připojení pohonu a řídicí jednotky (pro M137XX)

Proveďte elektrické připojení pohonu výtahu a dálkového ovládání k řídicí jednotce, jak je znázorněno na obr. 4 a obr. 4a.



Obr.4



Obr.4a

Zajistěte konektor z řídicí jednotky na pohonu pomocí upevňovacího prvku, jak je uvedeno na obr. 5.



Obr. 5

8.4 Připojení řídicí jednotky a pohonu (MI38XX-MI39XX)



- Montáž řídicí jednotky na příslušnou podpěru pod pantografem pro zvedání plánu lůžka, jak je znázorněno na obr. 6.

Obr.6




- Připojte kabely pohonů a dálkového ovládání k řídicí jednotce podle obr. 7.

Obr.7

POZNÁMKA: Obr. 7 se týká způsobu připojení kabelů (elektrický přívod, dálkové ovládání, dva pohony) k ovládací skřínce u modelů MI380X-MI381X-MI390X-MI391X; u modelů MI382X-MI383X-MI392X-MI393X, kde je pouze jeden pohon, je způsob instalace ovládací skříňky identický, ale způsob připojení kabelů (elektrický přívod, dálkové ovládání, jeden pohon) je znázorněn na obr. 4a.

8.5 Montáž a připojení sady nožního spínače příslušenství MR332 (pro MI37XX-MI382X-MI383XMI392XMI393X), MR333 (pro MI380X-MI381X-MI390X-MI391X)

Zobrazení a seznam součástí příslušenství MR332 a MR333:

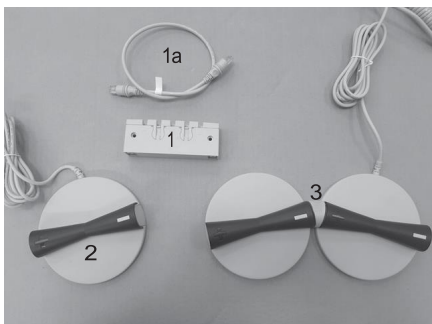


MR332 příslušenství; součástí jsou součásti: 1, 1a, 2
 MR333 příslušenství; součástí jsou součásti: 1, 1a, 3

Obr.8

Postup montáže:

- Odstraňte plastový kryt, který blokuje konektory na řídicí jednotce.
- Odpojte elektrický konektor dálkového ovládní na řídicí jednotce (pokud je již nainstalován) a nahradte jej kabelem dodaným s rozbočovačem.
- Nasadte kryt zámku konektorů na řídicí jednotku.
- Připojte k rozbočovači: právě nainstalovaný kabel z řídicí jednotky, kabel z nožního spínače, kabel z dálkového ovládní.
- Zajistěte konektory na rozbočovači pomocí plastového upevňovacího prvku.

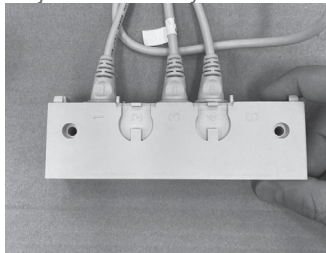

Obr.9

8.6 Držák role papíru

8.6.1 Držák papírových rolí na spodní straně MIA391 (pro MI37XX), MIA392 (pro MI38X) a MIA393/ MIA394 (pro MI39X).

Postup montáže:

Připevněte dva držáky na konec rámu postele pomocí 4 šroubů ze sady. Připojte trubku držáku pomocí dvou dodaných knoflíků, jak je znázorněno na obr. 10a.



Obr. 10a

8.6.2 Strana hlavy držáku role papíru MIA396 (pro MI38XX) a MIA395/MIA397 (pro MI39X)

Postup montáže:

Odstraňte krytky otvorů na horních koncích trubek rámu opěrky hlavy. Vložte dvě trubky s držáky (příslušenství) dovnitř trubek rámu, jehož víčko bylo odstraněno, a upevněte vložené držáky na rám opěrky hlavy pomocí dvou dodaných šroubů; vložte trubku držáku role mezi dva držáky a upevněte ji pomocí dodaných ručních koleček s držáky na koncích, jak je znázorněno na obr. 10b.




Obr. 10b

87 Příslušenství (volitelné): Sada obvodových tyčí MIA300 pro elektrické nastavení výšky lůžka


Vhodné pro elektrické modely: MI37X, MI38X, MI39X.

Součástí dodávky jsou komponenty:


- a) 1 deska ve tvaru U s namontovanými pákami a příslušnými šrouby
- b) 1 deska U s namontovanými pákami a nainstalovaným systémem ovládání tyčí a příslušnými šrouby
- c) 2 obvodové tyče (pravá a levá)
- d) 1 propojovací kabel mezi rozbočovačem a řídicí jednotkou
- e) kryty pro připojovací rozbočovač (již předinstalované v ref.b)
- f) kabelová vývodka se svorkami pro propojovací kabel rozbočovače a řídicí jednotky
- g) upevňovací šrouby pro desky ve tvaru U a dvě obvodové tyče.

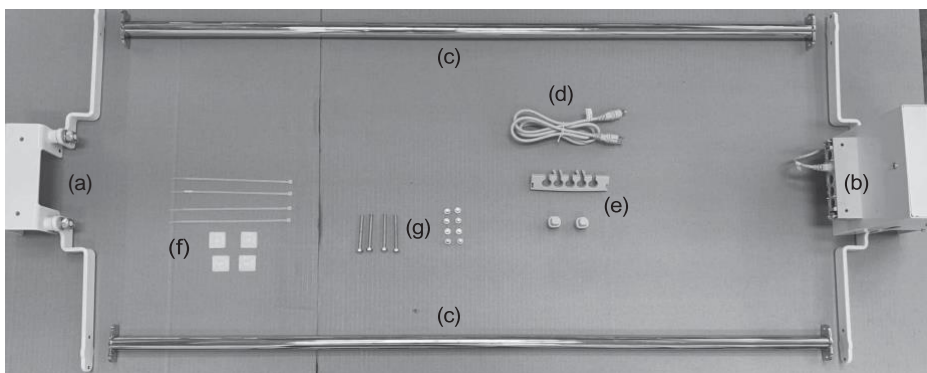

1. Montáž sestavy ref.A proveďte tak, že na příčník umístíte desku ve tvaru U v souladu s elektrickým pohonem a připevníte ji k rámu spojením příslušných otvorů pomocí dodaných šroubů (ref.g). Dbejte na umístění držáku: musí být vystředěn s ohledem na dostupný prostor.

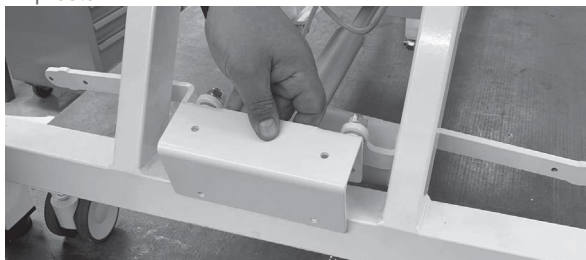

Obr. 11

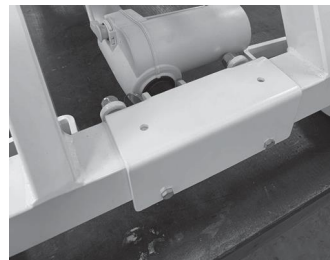

Obr. 12

2. Namontujte sestavu ref.b na příčník v souladu s elektrickým pohonem a připojte dodané šrouby (ref.g). Dbejte na umístění držáku: musí být vycentrován s ohledem na dostupný prostor.





Obr. 15

3. Nainstalujte obě obvodové tyče (viz bod c) a připevněte jejich konce k pákám pomocí dodaných šroubů, a to na pravé i levé straně, jak je znázorněno na fotografii.

4. Připojovací kabel k rozbočovači umístěte podél základny pomocí dodané kabelové svorky (pozn. f).


Obr. 16

- Odstraňte již připojený kabel dálkového ovládnání z řídicí jednotky a nainstalujte propojovací kabel rozbočovače (pozn. d) podle obrázku (obr. 17).

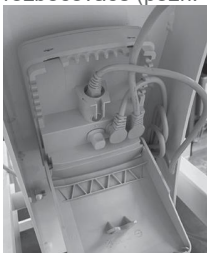
Obr. 17

Obr. 18


Obr. 19

5. Připojte 5zásuvkový rozbočovač HUB k ref.b, zejména zasuňte konektory dálkového ovládnání a kabel vycházející z řídicí jednotky do volných míst rozbočovače následujícím způsobem (2 výstupy nebudou použity a budou opatřeny uzavíracími krytkami): (obr. 18). Uzavřete rozbočovač nasazením speciálního hřebenového krytu. (Obr. 19).

Připojte ovládací skříňku do elektrické zásuvky; příslušenství je připraveno a funkční.

Použití obvodové lišty:

- Výšku lůžka snížíte pohybem tyče směrem nahoru.

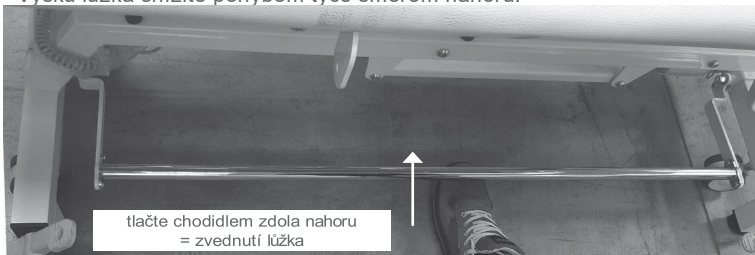


- Výškové zvednutí stolu provedete pohybem tyče směrem dolů.

**POZOR!**

Na tyče příliš netlačte (k ovládnání stačí posunout tyč o několik milimetrů nahoru nebo dolů); nenechte svou váhu spočívat na tyčích, aby nedošlo k trvalé deformaci materiálu!

88 Příslušenství (volitelné): hliníková tyč MIA305 IV

Příslušenství kompatibilní se všemi modely Lytus MI37X, MI38X, MI39X

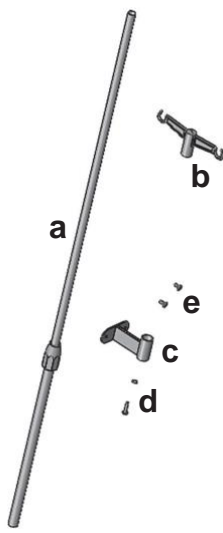


Součástí jsou komponenty:

- a) 1 tyč IV z hliníku
- b) n.1 Podpěra 2 plastových háčků na kapačky
- c) č. 1 Malovaný držák tyče IV
- d) n.1 Šroub M8 s podložkou pro tyč
- e) 2 šrouby M6 s podložkami pro upevnění k držáku

Montážní operace:

1. Pomocí šroubů M8 (e) přišroubujte opěrnou desku tyče (c) do příslušných závitových otvorů na podélné straně rámu postele v oblasti čela a zvolte požadovanou stranu instalace (pravou nebo levou).
2. Vložte infuzní tyč do již namontovaného držáku infuzní tyče a upevněte ji pomocí šroubu M8 s podložkou pod držákem infuzní tyče (d).
3. Zasuňte opěrné háky do konce tyče (b).

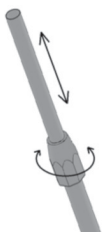

Použití infuzní tyče:

Chcete-li výškově nastavit infuzní tyč, povolte objímku otáčením proti směru hodinových ručiček, poté nastavte trubku do požadované výšky a objímku opět utáhněte.

**POZOR!**

Nikdy nepřekračujte maximální zatížení na hák uvedené v technických parametrech.

89 Příslušenství (volitelné): skládací bočnice MIA310

Příslušenství kompatibilní s modely Lytus MI37X MI38X, MI39X

- n.1 pravá boční lišta, n.1 levá boční lišta

Příslušenství je již nainstalováno na lůžku, aniž by zákazník musel provádět další operace (je připraveno k použití).

Chcete-li použít boční lišty, postupujte takto:

- pro zvednutí bočnice zatáhněte za knoflík na pravé straně a současně otáčejte bočnici nahoru a uvolněte knoflík; jakmile se bočnice dostane do vysoké svislé polohy, knoflík se zablokuje: bočnice je zajištěna ve zvednuté poloze.



Obr. 20



. 21

- pro spuštění bočnice zatáhněte za knoflík na pravé straně a současně otočte bočnici směrem dolů a uvolněte knoflík; jakmile se bočnice dostane do nízké svislé polohy, knoflík se uzamkne: bočnice je uzamčena ve spuštěné poloze.



Obr. 22



. 23




POZOR!

Při zvedání bočnice se vždy ujistěte, že je zajišťovací zařízení správně zasunuto do speciálního zajišťovacího sedla, aby bylo zajištěno bezpečné upevnění bočnice.

8.10 Příslušenství (volitelné): skládací boční lišty MIA311

Příslušenství kompatibilní s modely Lytus, MI38X, MI39X

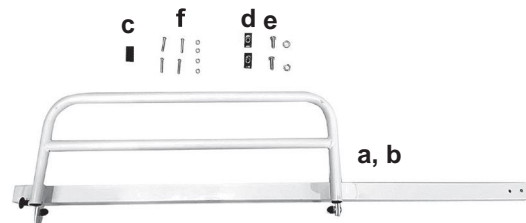

- a) n.1 pravá strana s podélnou opěrou
- b) 1 levá strana s podélnou podpěrou
- c) 2 černé plastové kryty hlavy 40x20 (lze je již nainstalovat na trubku)
- d) 2 černé kryty hlavy se závitem M10 z plastu 40x20
- e) 2 šrouby M10 s podložkou
- f) Šrouby č. 4 M6 s podložkou




Montážní operace:

1. Odstraňte plastový kryt hlavy z boční podélné trubky rámu na straně hlavy (na každé straně jeden) a nahraďte jej novým dodaným krytem hlavy se závitem (na každé straně jeden) (d).

2. Na konec patky přidavné podélné trubky s bočnicemi (jedna na každé straně) (c) nasadte plastový kryt hlavy (pokud již není namontován z výroby) a podélnou trubku s bočnicemi namontujte podél rámu následujícím způsobem:

- I. Našroubujte dodaný šroub M10 na kryt se závitovou hlavou vložený v předchozím kroku (e).
- II. Našroubujte 2 šrouby M6 do dvou otvorů se závitem v koncové části podélné strany nohy (f).

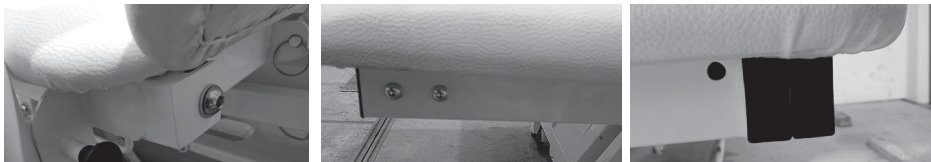

Příslušenství je připraveno k použití.

Poznámka: v případě přítomnosti držáku válců na straně nohou vložte během montáže bočních lišt v kroku 2.II držák držáku válců mezi rám lůžka a přidavný podélný prvek a vše utáhněte pomocí výše popsanych šroubů M6.



POZOR!

Při zvedání bočních lišt se vždy ujistěte, že je zajišťovací zařízení správně zasunuto v příslušném zajišťovacím sedadle, aby bylo zaručeno, že jsou boční lišty v bezpečí.

9. PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav opotřebení mechanických částí, abyste zajistili naprostou bezpečnost používání zařízení pro osoby a věci.
- Zkontrolujte správnou montáž zařízení se zvláštním zřetelem na čepy a pojistné spony čela, pohony a mechanické spoje obecně.

10. UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ

- Před jakýmkoli nastavením lůžka se ujistěte, že je ve stabilní poloze na nohách;
- Před čištěním, údržbou nebo pouhým přemístěním lůžka odpojte zástrčku od síťového napětí;
- Nepoužívejte napájecí lišty ani prodlužovací kabely.
- Nepřipojujte k přístroji žádné elektrické zařízení, na které se nevztahuje běžný provoz.



POZOR!


Nesedejte si tak, aby celá váha spočívala na hlavě, protože maximální deklarované zatížení lůžka je třeba chápat jako "rovnoměrně rozložené na jeho povrchu"; jinak by mohlo dojít k vážnému a nenapravitelnému poškození rámu. Společnost Moretti Spa odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného používání a/nebo jiné, než je uvedeno v tomto návodu k použití.

11. JAK POUŽÍVAT

11.1 Elektrické modely (MI37X-MI380X-MI381X-MI390X-MI391X)

Před každým použitím připojte kabel nabíječky/adaptéru do elektrické zásuvky 220 V AC. Pomocí dálkového ovládání nastavte výšku lůžka a polohu opěrky hlavy.

11.2 Modely s hydraulickou/plynovou pružinou (MI385-MI386-MI395-MI396)

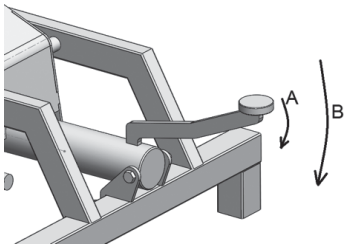

Několikerým sešlápnutím pedálu zvýšíte výšku lůžka, jak je znázorněno na obr. 9 (viz A), dalším hlubokým sešlápnutím pedálu výšku lůžka snížíte (viz B).

Chcete-li nastavit polohu opěrky hlavy, stiskněte uvolňovací páčku umístěnou pod opěrkou hlavy.

11.3 Modely s elektrickým zdvihem s opěradlovou částí pohyblivou pomocí plynové pružiny (MI382X-MI383X-MI392X-MI393X)

Před každým použitím připojte kabel nabíječky/adaptéru do elektrické zásuvky 220 V AC. Pomocí dálkového ovládání nastavte výšku lůžka.

Chcete-li nastavit polohu opěrky hlavy ručně, stiskněte uvolňovací páčku umístěnou pod opěrkou hlavy.

12. POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

12.2 Použití dálkového ovládání (pouze pro MI37XX-MI382X-MI383X-MI392X-MI393X)



Ref.6 Tlačítko zdvihu lůžka "UP" Ref.7 Tlačítko zdvihu lůžka "DOWN"

12.2 Dálkové ovládání (pouze MI380X-MI381X-MI390X-MI391X)



Ref.8 Tlačítko opěradla "NAHORU" Ref.9 Tlačítko opěradla "DOLŮ" Ref.10 Tlačítko zdvihu lůžka "NAHORU" Ref.11 Tlačítko zdvihu lůžka "DOLŮ"

13. POUŽITÍ KOLEČEK (POUZE PRO MI371X-MI381X-MI383X-MI386X-MI391X-MI393X-MI396X)



POZOR!

- Před přemístěním lůžka vždy odpojte přívodní kabel.
- Nepřemísťujte lůžko s pacienty na palubě

Tyto modely postelí mají 4 otočná kolečka usnadňující pohyb.

Systém kol byl studován tak, aby zajistil rychlý a snadný zásah pomocí pedálního ovládní. Když je třeba lůžko posunout, stačí nohou sešlápnout dva pedály na stejné straně lůžka (pravé nebo levé) tak, aby se lůžko zvedlo pomocí opěrných nohou. Přemístěte lůžko na požadované místo, poté sešlápnutím opěrných nohou spustíte kolečka a postavte lůžko na nohy tak, aby bylo stabilní.

14. ÚDRŽBA

Přístroje SKEMA od společnosti MORETTI jsou pečlivě kontrolovány a po uvedení na trh jsou dodávány se značkou ES. V zájmu bezpečnosti pacienta i lékaře doporučujeme alespoň jednou ročně zkontrolovat vhodnost výrobku.

Při pravidelné kontrole se jedná o kontrolu následujících částí:

- Nosný rám lůžka a zvedací mechanismus s jejich kováním, bezpečnostními zařízeními a příslušenstvím
- Zkontrolujte instalaci a funkci kol ovládacího mechanismu
- Zkontrolujte neporušenost kabelů a zástrček
- Zkontrolujte všechny svařovací body

Pokud je nutná oprava, používejte pouze schválené díly a příslušenství.

15. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

15.1 Čištění

Použijte vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím důkladně osušte

Použijte vodu o teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte pračky s proudem vody a páry.

15.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete přístroj dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční prostředek.

POZNÁMKA Nikdy nepoužívejte kyseliny nebo rozpouštědla jako je aceton.

16. PODMÍNKY LIKVIDACE

16.1 Obecné podmínky likvidace

V případě likvidace nepoužívejte vkladací kontejner na komunální odpad. Doporučujeme lůžka odevzdávat na příslušných místech k recyklaci.

16.2 Správné zacházení s elektrickými díly (směrnice 2012/19/EU)

Po skončení životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Uživatelé musí toto zařízení zlikvidovat tak, že jej odevzdají na speciálním recyklačním místě pro elektrická a elektronická zařízení nebo u prodejců, kteří tuto službu poskytují. Tím, že zajistíte správnou likvidaci těchto baterií, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným zacházením s baterií. Pro připomenutí nutnosti odděleného ukládání elektrozařízení jsou výrobky označeny křížkem na mobilní odpad.

17. PROHLÁŠENÍ O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

17.1 Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise

Toto zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel tohoto zařízení by se měl ujistit, že je v takovém prostředí používáno.


EMISNÍ TEST	SOUHLASNOST	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
VF emise CISPR 11	Skupina 1	Přístroj využívá RF energii pouze pro svou vnitřní funkci. Proto jsou jeho VF emise velmi nízké a není pravděpodobné, že by způsobovaly rušení okolních elektronických zařízení.
VF emise CISPR 11	Třída B	Přístroj je vhodný pro použití ve všech provozovnách, včetně domácích provozoven a těch, které jsou přímo napojeny na veřejnou nízkoprahovou síť. -napěťová napájecí síť
Harmonické emise IEC61000-3-2	Třída A	
Kolísání napětí / emise blikání IEC61000-3-3	V souladu s předpisy	
<p>⚠ Varování:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zařízení by nemělo být používáno v sousedství jiných zařízení nebo na sobě. Pokud je použito vedle sebe nebo na sobě, mělo by být zařízení pozorováno, aby se ověřil jeho normální provoz v konfiguraci, ve které bude použito. Použití jiného příslušenství, snímačů a kabelů než těch, které jsou specifikovány nebo dodány výrobcem tohoto zařízení, by mohlo vést ke zvýšení elektromagnetických emisí nebo snížení elektromagnetické odolnosti tohoto zařízení a k jeho nesprávnému provozu. Přenosná RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externí antény) by neměla být používána blíže než 30 cm (12 palců) od jakékoli části čerpadla, včetně kabelů určených výrobcem. V opačném případě by mohlo dojít ke zhoršení výkonu tohoto zařízení. 		

17.2 Pokyny a prohlášení výrobce - elektromagnetická odolnost

Toto zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže. Uživatel tohoto zařízení by se měl ujistit, že je v takovém prostředí používáno.

Základní norma EMC	Úrovně testu imunity		Úrovně dodržování předpisů	Elektromagnetické prostředí - pokyny
	Odborná zdravotní péče prostředí zařízení	PROSTŘEDÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE		
Elektrostatický výboj (ESD) IEC61000-4-2	kontakt ±8 kV ±15kV vzduch		kontakt ±8 kV ±15kV vzduch	Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo z keramických dlaždic. Pokud je podlaha pokryta syntetickým materiálem, je třeba, relativní vlhkost vzduchu by měla být alespoň 30 %.
Elektrický rychlý přechod/výbuch IEC61000-4-4	±2kV pro napájecí vedení ±1kV pro vstupní/výstupní vedení		±2kV pro napájecí vedení ±1kV pro vstupní/výstupní vedení	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Přepětí IEC61000-4-5	± 1 kV od vedení(-a) k vedení(-a) ± 2 kV vedení (vedení) k zemi	± 1 kV od vedení(-a) k vedení(-a)	± 1 kV od vedení(-a) k vedení(-a)	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat atypickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.



Základní norma EMC	Úrovně testu imunity		Úrovně dodržování předpisů	Elektromagnetické prostředí - pokyny
	Odborná zdravotní péče prostředí zařízení	PROSTŘEDÍ DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE		
Poklesy napětí, krátká přerušení a kolísání napětí na vstupních napájecích vedeních IEC61000-4-11	Poklesy napětí: i) 100% snížení za období 0,5, ii) Snížení o 100 % na 1 období, iii) 30% snížení po dobu 25/30, Přerušení napětí: 100% snížení pro období 250/300		230V	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí. Pokud uživatel tohoto zařízení vyžaduje nepřetržitý provoz při p r e r u š e n í napájení z elektrické sítě, doporučuje se, aby bylo zařízení napájeno z nepřerušitelného zdroje napájení nebo z baterie.
Frekvence napájení (50/60 Hz) magnetické pole IEC61000-4-8	30 A/m	30 A/m	30 A/m	Výkonová magnetická pole by měla být na úrovni charakteristické pro typické místo v typickém komerčním nebo nemocničním prostředí.
Vedené RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 0,15 MHz - 80 MHz 6 Vrms v pásmech ISM mezi 0,15 MHz a 80 MHz 80 % AM při 1 kHz	3 Vrms 0,15 MHz - 80 MHz 6 Vrms v pásmech ISM a radioamatérských pásmech mezi 0,15 MHz a 80 MHz 80 % AM při 1 kHz	6Vrms	Přenosná a mobilní rádiová komunikační zařízení by se neměla používat blíže než k jakékoli části tohoto zařízení, včetně kabelů, než je doporučená vzdálenost vypočtená podle příslušné rovnice. na frekvenci vysílače. Doporučená odstupová vzdálenost =√P 150kHz až 80MHz =0,6√P 80MHz až 800MHz =1,2√P 800 MHz až 2,7G MHz Kde P je maximální výstupní výkon jmenovitá hodnota vysílače ve wattch (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená vzdálenost v metrech (m),b Intenzita pole z pevných RF vysílačů, stanovená elektromagnetickým průzkumem lokality, by měla být v každém frekvenčním pásmu nižší než úroveň shody. V blízkosti zařízení označeného následujícím symbolem může docházet k rušení:
Vyzařovaná vysokofrekvenční elektromagnetická pole IEC61000-4-3	3 V/m 80 MHz až 2,7 GHz 80 % AM při 1 kHz 385-6000 MHz, 9-28V/m, 80% Pulzní režim AM(1kHz) a další modulace	10 V/m 80 MHz až 2,7 GHz 80 % AM při 1 kHz 385-6000 MHz, 9-28V/m, 80% Pulzní režim AM(1kHz) a další modulace	10V/m	

POZNÁMKA 1: UT je střídavé síťové napětí před použitím zkušební úrovně

POZNÁMKA2: Při frekvencích 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

a) intenzita pole z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a pozemní vysílače.

mobilní rádia, radioamatérské vysílání, rozhlasové vysílání v pásmu AM a FM a televizní vysílání nelze teoreticky přesně předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí způsobeného pevnými RF vysílači je třeba zvážit elektromagnetický průzkum lokality. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se zařízení používá, překračuje výše uvedenou platnou úroveň shody s RF, mělo by se zařízení pozorovat, aby se ověřil jeho normální provoz. Pokud je pozorována abnormální činnost, může být nutné provést další opatření, například změnit orientaci nebo přemístit zařízení.

b) Ve frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 10 V/m.

17.3 Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními a tímto zařízením

Toto zařízení je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou kontrolovány vyzařované rádiové disturbanci. Zákazník nebo uživatel tohoto zařízení může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení tím, že bude dodržovat minimální vzdálenost mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními (vysílači) a tímto zařízením, jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

Maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače W	Odstupová vzdálenost podle frekvence vysílače m		
	150 kHz na 80 MHz = \sqrt{P}	80 MHz do 800 MHz = $0,6\sqrt{P}$	800 MHz až 2,7 GHz d = $1,2\sqrt{P}$
0.01	0.1	0.06	0.12
0.1	0.31	0.19	0.38
1	1	0.6	1.2
10	3.1	1.9	3.8
100	10	6	12

U vysílačů specifikovaných pro maximální výkon, který není uveden výše, lze doporučenou oddělovací vzdálenost "d" v metrech (m) vypočítat pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde "P" je maximální jmenovitý výkon d' výkonu vysílače ve wattch (W) podle výrobce vysílače.

POZNÁMKA 1 Při frekvenci 80 MHz a 800 MHz, pokud je použit vysoký frekvenční rozsah.

POZNÁMKA 2: Pokynová otázka, která se nepoužije ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a osob.

18. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství naleznete v hlavním katalogu Moretti.

MR332 Sada nožního spínače 1 kanál pro MI37XX-MI382X-MI383X-MI392X-MI393X MR333 Sada

nožního spínače 2 kanály pro MI380X-MI381X-MI390X-MI391X

MIA391 Držák papírové role (strana nohou) šířka 60 cm pro MI37X MIA392 Držák papírové role

(strana nohou) šířka 60 cm pro MI38X MIA393 Držák papírové role (strana nohou) šířka 60 cm pro

MI39X MIA394 Držák papírové role (strana nohou) šířka 80 cm pro MI39X MIA395 Držák papírové

role (strana hlavy) šířka 60 cm pro MI39X MIA396 Držák papírové role (strana hlavy) šířka 60 cm

pro MI38X MIA397 Držák papírové role (strana hlavy) šířka 80 cm pro MI39X

MIA300 Sada obvodových tyčí pro elektrické nastavení výšky lůžka (pro všechny elektrické modely)


MIA305 Hliníková tyč IV (pro všechny modely)

MIA310 Skládací boční lišty (pro všechny modely)





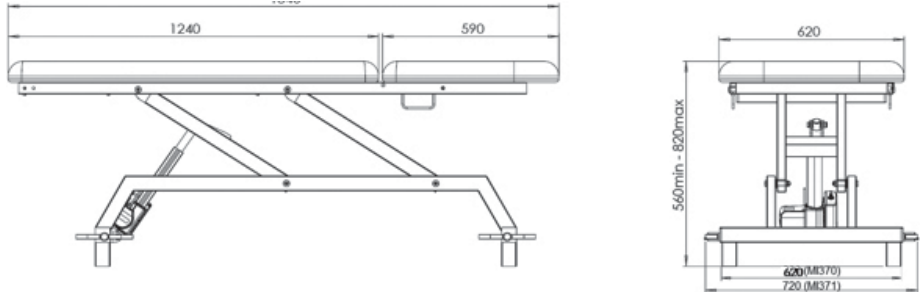


MIA311 Skládací boční panely, které lze instalovat "dodatečně" pro modely MI38x-MI39x

19. TECHNICKÉ VLASTNOSTI


19.1 Rozměry a hmotnost MI370X - MI371X






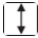




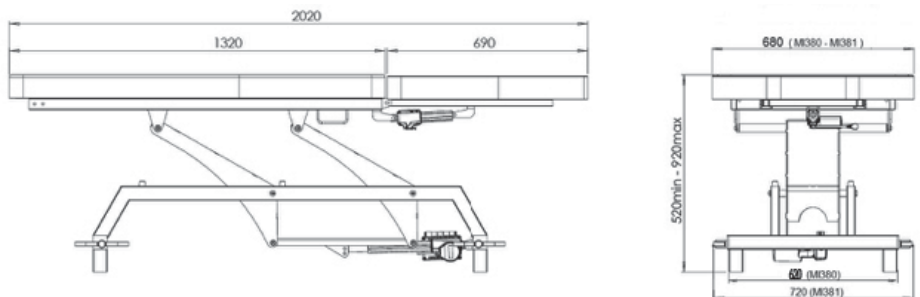


Rozměry (MI370):	mm 1840x620
Rozměry (MI371):	mm 1840x720
Minimální výška:	mm 560
Maximální výška:	mm 820
Maximální úhel hlavové části:	60°

 Velikost balení MI370-MI371	 D: 1850 mm	 D: 730 mm	 V: 570 mm
 Hmotnost balení MI372-MI371	MI370: 51 kg	MI371: 54 kg	
 Hmotnost lůžka MI370-MI371	MI370: 45 kg	MI371: 48 kg	
 Maximální hmotnost	150 kg		



19.2 Rozměry a hmotnost MI380X - MI381X - MI382X - MI383X







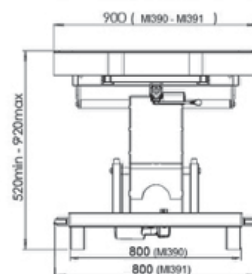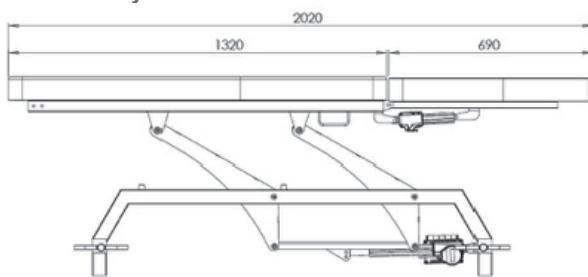


Rozměry (MI380X-MI382X):	Rozměr
(MI381X-MI383X):	mm 2020x720
Minimální výška:	mm 520
Maximální výška:	mm 920
Maximální úhel hlavové části:	60°



 Velikost balení MI380-MI381	 D: 1785 mm	 D: 730 mm	 V: 535 mm
 Velikost balení MI382-MI383	 D: 2040 mm	 D: 730 mm	 V: 535 mm
 Hmotnost balení MI38X	MI380-MI382: 65 kg		MI381-MI383: 68 kg
 Hmotnost lůžka MI38X	MI380-MI382: 57 kg		MI381-MI383: 60 kg
 Maximální hmotnost	200 kg		

19.3 Rozměry a hmotnost MI390X - MI391X - MI392X - MI393X







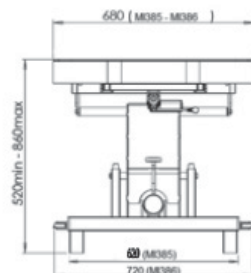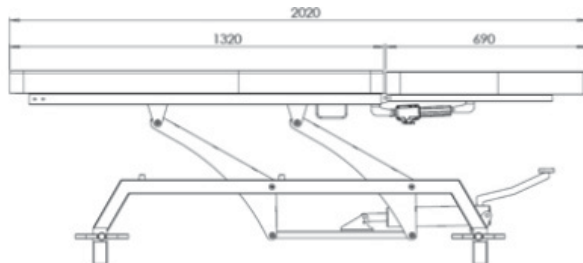


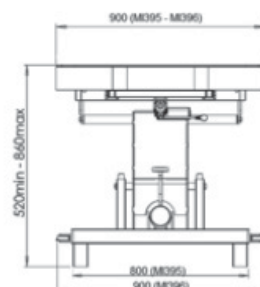
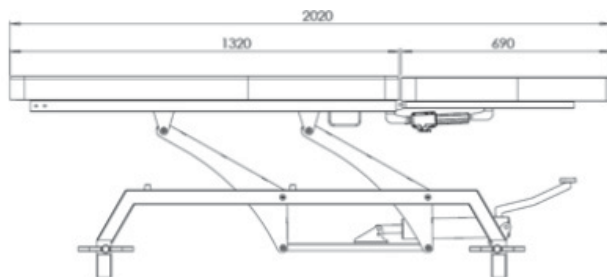
Rozměry (MI390X-MI392X):
(MI391X-MI393X): mm 2020x900: Rozměr
mm 2020x900
Min. výška: mm 520
Maximální výška: mm 920
Maximální úhel hlavové části: 60°

 Velikost balení MI39X	 D: 2040 mm	 D: 940 mm	 V: 535 mm
 Hmotnost balení MI39X	MI390-MI392: 83 kg		MI391-MI393: 86 kg
 Hmotnost lůžka MI39X	MI390-MI392: 74 kg		MI391-MI393: 77 kg
 Maximální hmotnost	200 kg		







19.4 Rozměry a hmotnost MI385X - MI386X


Rozměry (MI385X): mm 2020x620
 Rozměry (MI386X): mm 2020x720
 Minimální výška: mm 520
 Maximální výška: mm 860
 Maximální úhel hlavové části: 60°

 Velikost balení MI385-MI386	 D: 2040 mm	 D: 730 mm	 V: 535 mm
 Hmotnost balení MI385-MI386	MI385: 66 kg		MI386: 69 kg
 Hmotnost lůžka MI385-MI386	MI385: 58 kg		MI386: 61 kg
 Maximální hmotnost	180 kg		

19.5 Rozměry a hmotnost MI395X - MI396X


Rozměry (MI395X): mm 2020x900
 Rozměry (MI396X): mm 2020x900
 Minimální výška: mm 520
 Maximální výška: mm 860
 Maximální úhel hlavové části: 60°

 Velikost balení MI395-MI396	 D: 2040 mm	 D: 940 mm	 V: 535 mm
 Hmotnost balení MI395-MI396	MI395: 86 kg		MI396: 89 kg
 Špatná hmotnost MI395-	MI395: 75 kg		MI396: 78 kg

22

MI396



Maximální hmotnost

180 kg

19.6 Technické specifikace

Síla potřebná k ovládní ovládacích prvků na dálkovém ovladači	5 N
Síla potřebná k sešlápnutí výškového pedálu (MI39X)	30N
Vstup	220-240V AC 50Hz, 2,5A
Výstup	24 VDC
Třída ochrany	IPX 6
Hladina hluku	□ 45 dB
Třída izolace	Třída 2
Použité materiály pro hlavní rám postele	Lakovaný ocelový rám, pěnový potah postele z PVC

20. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

SYMPTOM	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Žádná kontrola běhu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zástrčka není připojena 2. Dálkový ovladač není připojen k řídicí jednotce. 3. Dálkový ovladač nebo řídicí jednotka jsou vadné. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Připojení zástrčky 2. Zkontrolujte a připojte dálkové ovládní 3. Pro přesnější diagnózu kontaktujte servisní středisko
Výška hlavové části nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pohon hlavové části není připojen k řídicí jednotka 2. Pohon nebo dálkové ovládní jsou vadné. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola a připojení výtahu k řídicí jednotce 2. Pro přesnější diagnózu kontaktujte servisní středisko
Vyvýšení postele nefunguje	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pohon lůžka není připojen k řídicí jednotce. 2. Pohon nebo dálkové ovládní jsou vadné. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte a připojte aktuátor k řídicí jednotce. 2. Pro přesnější diagnózu kontaktujte servisní středisko
Nefunguje nožní spínač	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nožní spínač není připojen ke kabelu Y. 2. Kabel Y není připojen k řídicí jednotce. 3. Řídicí jednotka nebo aktuátor jsou vadné. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte a připojte přepínač foo- ts ke kabelu Y 2. Připojte kabel Y k řídicí jednotce 3. Kontaktujte servisní středisko pro přesnější diagnostiku

21. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu 2 let od data zakoupení, s výjimkou možného vyloučení nebo omezení, jak je uvedeno níže. Záruka se nevztahuje na případné škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím nebo úpravami a záruka neplatí, pokud není důsledně dodržován návod k použití. Správný účel použití je uveden v tomto návodu.

Společnost Moretti neodpovídá za následné škody, zranění osob nebo jiné škody způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním.

Záruka společnosti Moretti se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku: přírodní katastrofy, neautorizované údržby nebo opravy, závad způsobených problémy s dodávkou elektrické energie (v případě potřeby), použití náhradních dílů, na které se nevztahuje záruka společnosti Moretti, nesprávného používání, neautorizovaných změn, poškození při přepravě (odlišné od originální dodávky společnosti Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu.

Záruka se nevztahuje na součásti, které podléhají opotřebení při správném používání zařízení.

22. OPRAVA

22.1 Záruční oprava

Pokud se u zboží Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, Moretti se zákazníkem potvrdí, zda se na vadu může vztahovat záruka. Společnost Moretti může podle svého nezpochybnitelného uvážení položku opravit nebo vyměnit, a to u prodejce Moretti nebo v centrále společnosti Moretti. Náklady na práci mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje záruku.

22.2 Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Nezáruční výrobek lze zaslat po autorizaci společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu mimozáručního zboží hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy je poskytována záruka 6 měsíců od obdržení zboží.

22.3 Neporuchová zařízení

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po vrácení a kontrole zařízení prohlásí, že zařízení není vadné. V takovém případě bude zboží zasláno zpět zákazníkovi, poštovné hradí zákazník.

23. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 měsíců od data převzetí.

24. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

Společnost Moretti neposkytuje žádná další prohlášení, výslovné nebo implicitní záruky nebo podmínky, včetně případných prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování práv a nezasahování, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v této záruce. Společnost Moretti nezaručuje nepřetržitě a bezchybně používání.

Doba trvání případných implicitních záruk, které mohou být uloženy ze zákona, je omezena záruční dobou v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení implicitní záruky nebo vyloučení či omezení pro náhodné škody. V takových zemích se některé z těchto vyloučení nebo omezení nemusí na uživatele vztahovat. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST**

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní p r o d e j c e _____

Adresa _____ Obec/město _____

Prodáno do _____

Adresa _____ Obec/město _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20136 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail:**info@morettispa.com MADE IN ITALY**



POZN

Lined writing area consisting of 20 horizontal lines.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022 Cavriglia
(Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com