

**SKEMA®**FORM

## INDEX

1. KÓD.....		strana 3
2. ÚVOD.....		strana 3
3. ÚČEL POUŽITÍ.....		strana.3
4. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....		strana.4
5. VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ.....		strana.4
6. OBECNÝ POPIS.....		strana 4
6.1 Zobrazení a popis dílů - MI440 Professional Hypodermoclysis Stand z nerezové oceli, na kolečkách, hydraulicky zvedané).....		strana 4
7. MONTÁŽ.....		strana 4
7.1 Návod k montáži - MI440 Professional Hypodermoclysis Stand z nerezové oceli, na kolečkách, hydraulicky zdvižený.....		strana 4
8. ZPŮSOBY POUŽITÍ .....		strana.5
9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....		strana.5
9.1 Čištění.....		strana 5
9.2 Dezinfekce .....		strana.6
10. PODMÍNKY LIKVIDACE.....		strana.6
10.1 Všeobecné podmínky likvidace .....		strana.6
11. PŘÍSLUŠENSTVÍ S PŘÍPLATKEM .....		strana.6
12. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY.....		strana 6
12.1 Rozměry a hmotnost .....		strana.6
13. ZÁRUKA.....		strana 6
14. OPRAVY.....		strana 6
14.1 Záruční opravy .....		strana.6
14.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka .....		strana.7
14.3 Nepoškozené výrobky.....		strana.7
15. NÁHRADNÍ DÍLY.....		strana.7
16. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY .....		strana.7



Zdravotnický prostředek třídy I

D. Legislativní nařízení č. 46 ze dne 24. 2. 1997, kterým se provádí směrnice 2017/745 a následné změny

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA MI440 01 A ENA\_05-2016

## 1. KÓD

**MI440** Infuzní stojan z nerezové oceli

## 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali řadu **stojanů pro podkožní dialýzu SKEMAFORM by MORETTI S.p.A.** Jejich design a kvalita zaručují maximální funkčnost, bezpečnost a spolehlivost. Stojany pro hypodermoklýzu řady **SKEMAFORM by MORETTI S.p.A.** byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše potřeby. Tato uživatelská příručka obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi zvolené pomůcky a cenné rady pro vaši bezpečnost. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí. Tato příručka se vztahuje na profesionální nerezovou hypodermoklyzační jednotku řady **SKEMAFORM**. Řiďte se prosím pouze návodem k modelu, který jste si vybrali.

## 3. ÚČEL POUŽITÍ

Profesionální stojan na hypodermoklýzu SKEMAFORM z nerezové oceli je zařízení pro podporu lékařských a zdravotnických činností během podávání intravenózních látek pacientovi.

## 4. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

### POZOR!

- Je zakázáno používat následující zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo v důsledku použití jiného, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny přístroje a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek vyrobený a uvedený na trh samotnou společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny profesionálních stojanů na hypodermoklýzu z nerezové oceli je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice 2017/745 o zdravotnických prostředcích a jejich následných změn. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené přístroje splňují základní požadavky přílohy I směrnice 2017/745 a následných změn, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje jsou uváděny na trh v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčná zařízení je třeba považovat za zařízení třídy I.
6. Není dovoleno používat a/nebo instalovat dotyčná zařízení mimo účel použití společnosti Moretti S.p.A.
7. Společnost Moretti S.p.A. uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu se směrnicí 2017/745 a následnými změnami.


## 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Pro správné používání přístroje si pozorně prostudujte následující návod k obsluze.
- Životnost zařízení se určuje podle opotřebení neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů a v žádném případě nepřekročí 10 let;
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí;
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla;
- Nikdy nepřekračujte nosnost háků, aby nedošlo k jejich zlomení nebo deformaci;
- Před použitím zařízení vždy zkontrolujte, zda je správně sestaveno

## 6. OBECNÝ POPIS

### 6.1 Zobrazení a popis dílů - MI440

Profesionální stojan na hypodermoklůzu z nerezové oceli na kolečkách, hydraulicky zvednutý

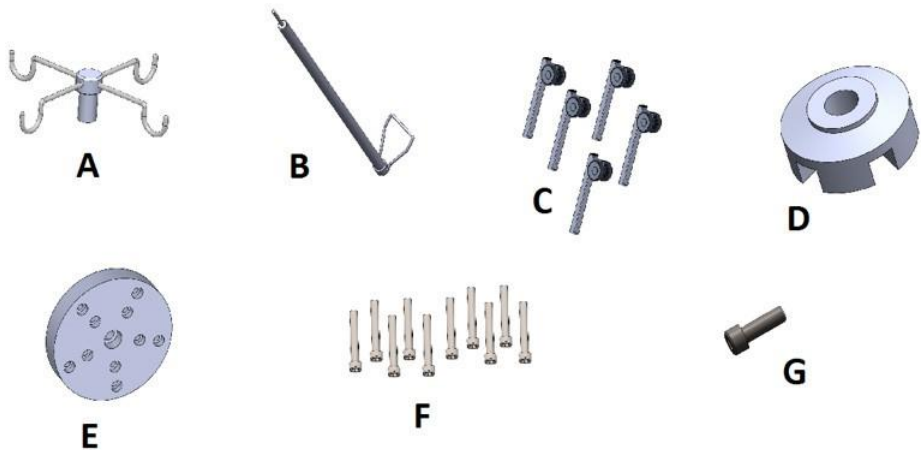

#### Seznam dílů

- A. Držák háčku z nerezové oceli (1ks)
- B. Tyč s hydraulickou nožní pumpou (1 kus)
- C. Nerezová noha s kolečkem (5ks)
- D. Základna pro profesionální tyč IV (1 ks)
- E. Základní montážní deska pro profesionální tyč IV (1 kus)
- F. Šrouby pro upevnění nohou k podstavci (10ks)
- G. Šroub pro upevnění hydraulické tyče na základnu (1 kus)

## 7. MONTÁŽ




#### POZOR!



Při montáži zařízení provádějte tyto operace s velkou opatností, abyste zabránili zranění osob a/nebo poškození majetku.

### 7.1 Návod k montáži - MI440

Profesionální stojan na hypodermoklůzu z nerezové oceli na kolečkách, hydraulicky zvednutý

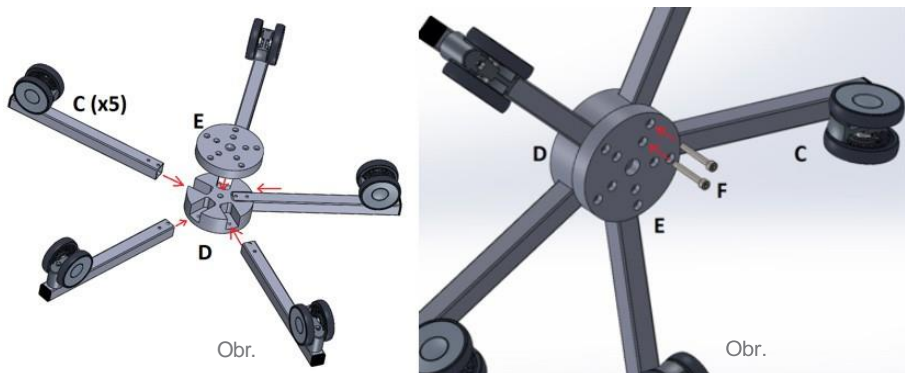


1. Vložte nohy s kolečky (pozn. C) do příslušných míst podstavce (pozn. D); (obr. 1).
2. Umístíte upevňovací desku (č. E) na podstavec s koly a dbejte na umístění otvorů;
3. Utáhněte upevňovací šrouby (ref.F pro 10ks), abyste pevně spojili nohy s kolečky se základnou prostřednictvím upevňovací desky; (obr.2).

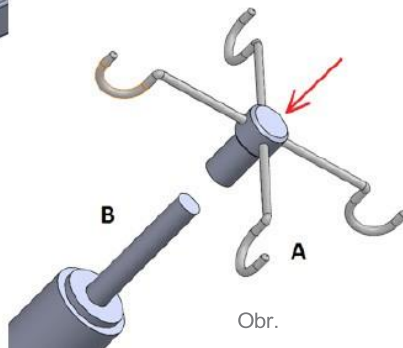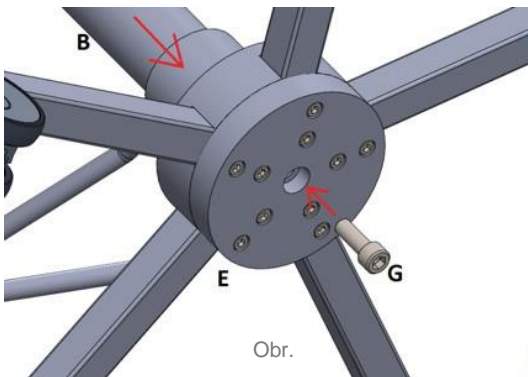

4. Připojte tyč s hydraulickým čerpadlem (č. B) k základní montážní desce (č. E) a utáhněte příslušný šroub (č. G); (obr. 3).
5. Vložte a přišroubujte držák háku (č. A) do horní části hydraulické tyče (č. B); (obr. 4).
6. Vaše infuzní tyč je nyní správně sestavena a připravena k použití.

## 8. ZPŮSOBY POUŽITÍ

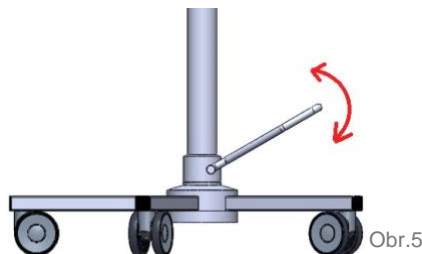

Chcete-li zvýšit výšku hydraulického kapkovacího sloupu, opakovaně působte přerušovanou silou na pedál zdvíhu, jak je znázorněno na obrázku; k úplnému vysunutí kapkovacího sloupu je zapotřebí přibližně 30 sešlápnutí pedálu (obr. 5). Chcete-li snížit výšku hydraulické kapkovací tyče, sešlápněte seřizovací pedál naplno a udržujte tlak, dokud není dosaženo požadované výšky.

## UPOZORNĚNÍ:

- Před každým použitím sloupek zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný, což by mohlo zhoršit jeho funkci. V takovém případě sloupek nepoužívejte;
- Vždy dbejte na to, aby poloha podnožky zaručovala maximální pohodlí a bezpečnost pacienta, zvláštní pozornost věnujte pohybu na kolečkách;
- Nikdy nepřekračujte maximální zatížení na hák uvedené v technických specifikacích.

## 9. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### 9.1 Čištění

K čištění výrobku používejte pouze hadřík namočený ve vodě a otřete jej do sucha čistým, suchým hadříkem nebo vlažnou vodou a jemným mýdlem.



### POZOR!

Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových dílů a rezavění kovových povrchů.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií použitých při čištění.

## 9.2 Dezinfekce

V případě potřeby výrobek vydezinfikujte pomocí jemného dezinfekčního prostředku.

## 10. PODMÍNKY LIKVIDACE

### 10.1 Obecné podmínky likvidace



Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

## 11. PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

**MIA441** Rukojeť z nerezové oceli pro MI440

**MIA442** Rukojeť s nerezovým košem pro MI440

**MIA443** Rukojeť s nerezovou vaničkou pro MI440

**MIA444** Nerezový koš a vanička pro MI440

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Stojan na hypodermoklýzu na operačním sále;
- Nerezová ocel 18/10 (AISI304);
- Zvedání pomocí hydraulického nožního pedálu;
- 4 háčky proti vypadnutí;
- Maximální nosnost 60 kg rovnoměrně rozložených, 15 kg na hák;
- Zatížená základna proti překlopení;
- 5 otočných koleček Ø 75 mm, 2 s brzdou.

### 11.1 Rozměry a hmotnost

Kód	<b>MI440</b>
Výška (min/max)	<b>1540 mm / 2550 mm</b>
Základní rozměry (mm)	<b>650 mm</b>
Maximální přípustná nosnost na hák	<b>15 kg</b>
Maximální přípustná nosnost	<b>60 kg</b>

## 12. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné vzniklé škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v důsledném souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání, nebo s nimi souvisí. Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v případě potřeby), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

## 13. OPRAVY

### 13.1 Záruční oprava

V případě, že se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti



podle vlastního uvážení vymění nebo opraví výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve svých prostorách. Náklady na práci související s opravou výrobku může nést společnost Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

### 13.2 Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu související s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, nese v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravený výrobek přijat.

### 13.3 Nebezpečné výrobky

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

## 14. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne převzetí náhradního dílu.

## 15. USTANOVENÍ O VÝJIMKÁCH

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



## ZÁRUČNÍ LISTINA

Produkt \_\_\_\_\_

Zakoupeno dne \_\_\_\_\_

Prodejce \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_

Prodáno do \_\_\_\_\_

Ulice \_\_\_\_\_ Lokalita \_\_\_\_\_

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**www.morettispa.com e-mail:****info@morettispa.com MADE IN ITALY**

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)