



MOPEDIA®



ZÁBRANA NA POSTEL

MP165

Návod k obsluze

Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
UPOZORNĚNÍ.....	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
OBECNÝ POPIS.....	2
MONTÁŽ/ DEMONTÁŽ.....	2
Montáž.....	2
Demontáž.....	2
PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM.....	3
POUŽITÍ.....	3
ÚDRŽBA.....	3
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	3
Čištění.....	3
Dezinfekce.....	3
OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE.....	3
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	3
TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	4
Technické specifikace.....	4
ZÁRUKA.....	4
OPRAVY.....	4
Záruční opravy.....	4
Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka.....	5
Neoprávněná reklamace.....	5
NÁHRADNÍ DÍLY.....	5
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE.....	5

OZNAČENÍ

MP165 Zábrana na postel

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení zábrany na postel MOPEDIA. Zábrana na postel byla navržena a realizována tak, aby vyhovovala vašim potřebám pro správné a bezpečné používání. Tento návod k obsluze vám poskytuje rady ke správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí.

ÚČEL POUŽITÍ

Zábrana na postel je univerzální příslušenství, které zabraňuje náhodnému pádu z lůžka. Zároveň může sloužit jako opora při zvedání a usedání na lůžko. Zábranu lze umístit na libovolnou stranu lůžka.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že produkty jím vyráběný a prodávány, patří do kategorie podpůrných pomůcek, jsou v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / CEE). Výrobce zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42 / EHS jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Zmíněná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ.
3. Zmíněná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÉ POUŽITÍ.
4. Zmíněná zařízení jsou distribuována V NESTERILNÍM OBALU.
5. Zmíněná zařízení patří do třídy I°.
6. NENÍ DOVOLENO používat a sestavovat produkty jiným způsobem, než je určen výrobcem.
7. Výrobce ukládá technickou dokumentaci u příslušných orgánů, ve věci prokázání shody zařízení se směrnicí 92/42 / CEE.

OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Informace o používání naleznete v této příručce.
- Před používáním zábrany na postel konzultujte její vhodnost se svým ošetřujícím lékařem nebo terapeutem.
- Balený výrobek uchovávejte mimo zdroje tepla.
- Doba použitelnosti je dána opotřebením jeho součástí, které nemohou být opraveny nebo nahrazeny.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí.

- Nepřenášejte na zábranu celou váhu těla. Slouží pouze jako pomoc pro udržení rovnováhy a opory při sezení a vstávání.

OBECNÝ POPIS

Zábranu lze díky teleskopickému mechanismu trubek umístit na jakékoliv lůžko.





- Popis částí:**
- 1. Rukojeť**
 - 2. Rám**
 - 3. Příčné spojení**
 - 4. Nohy**
 - 5. Úložná kapsa**
 - 6. Bezpečnostní popruh**

MONTÁŽ/ DEMONTÁŽ

Montáž

Postupujte dle pokynů:

1. Vložte rukojeť do rámu a upravte výšku stlačením aretační pojistky. Nasad'te na rám. (1-1 and 2-2).
2. Postavte nohy na podlahu a nastavte výšku v závislosti na výšce postele pomocí aretační pojistky. (3-3 a 4-4). Otáčejte seřizovacím šroubem na spodní straně, dokud nebude zábrana v pevném kontaktu s podlahou.
3. Vložte příčnou spojovací lištu do hlavního rámu. (5-5 and 6-6).
4. Složenou zábranu umístěte mezi rám postele a matraci.
5. Utáhněte bezpečnostní pásku k rámu postele na protější straně postele.

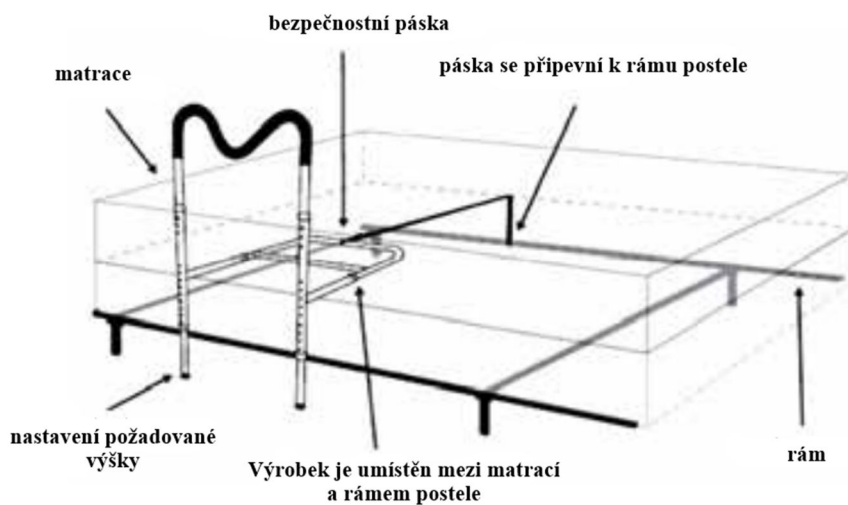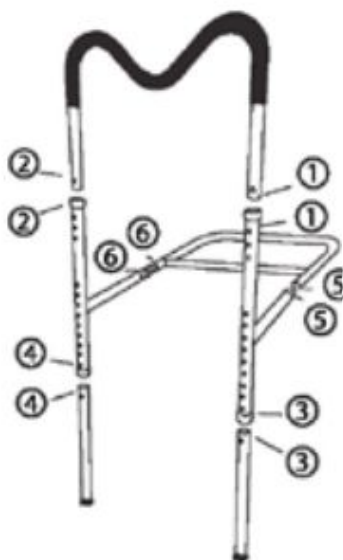

Demontáž

Pro vyjmutí postupujte opačně.

PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte opotřebení mechanických částí výrobku, aby bylo zaručeno, že výrobek bude zcela bezpečný pro uživatele a jeho okolí.
- Zkontrolujte správnou montáž zařízení s důrazem na upevnění zábrany k rámu postele.

POUŽITÍ

Zábranu namontujte dle návodu k obsluze, výšku nastavte dle vašich potřeb. Zábranu umístěte mezi rám a matraci.

POZNÁMKA: Vždy zkontrolujte, zda je zábrana bezpečně zajištěna.

ÚDRŽBA

Zařízení řady MOPEDIA jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolována a opatřena značkou CE. Pro bezpečnost uživatele se doporučuje, aby byl výrobek zkontrolován autorizovaným servisem každé dva roky. V případě opravy je třeba použít pouze originální náhradní díly a příslušenství.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Používejte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím důkladně osušte.

Dezinfekce

V případě potřeby použijte běžný dezinfekční prostředek.

POZNÁMKA: Nikdy nepoužívejte kyseliny, zásadité agresivní látky, rozpouštědla a látky s přísávkem acetonu nebo ředidla.

OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE

V případě likvidace nepoužívejte kontejner pro komunální odpad. Doporučujeme likvidaci přístroje v příslušných prostorách pro recyklaci.

Výrobek musí být zlikvidován v souladu s evropskou normou 2002/96/EC. Správná likvidace produktu snižuje riziko pro životní prostředí a zdraví. Části přístroje mohou být dále recyklovány a tím dojde k úspoře energie a surovin. Další informace vám poskytne místní likvidátor nebo prodejce.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství naleznete v katalogu výrobce. Používejte pouze originální příslušenství. Pokud tak neučiníte, výrobce nenesse zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku nesprávného použití výrobku.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Rozměry:

Nastavení výšky nohou: 34 - 52 cm

Nastavení výšky rukojetí: 47 - 52 cm

Šířka: 45 cm

Délka: 64 cm

Technické specifikace

- Eloxovaný hliníkový rám
- Rukojeti: polyuretan, 3- polohové nastavení výšky, užitečná jako opora při vstávání a usedání na lůžko
- 9- polohové nastavení výšky nohou
- Zábřana se zasune pod matraci a je opatřena polyuretanovými protiskluzovými návleky.

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou.

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě postižení přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti měsíců počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamacie

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem, že výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.
telefon: +420 725 323 111
www: www.stamed.cz
email: obchod@stamed.cz
adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň
eshop: www.pomuckyseniorum.cz