

Uživatelská příručka

EVEREST

Děkujeme, že jste si vybrali naše evakuační křeslo.

Stručný úvod

Křeslo EVEREST je napájeno lithium-iontovou baterií a je poháněno motorem. Slouží ke snadné přepravě osob se speciálními potřebami po schodech nahoru a dolů.

Specifikace

- Výška teleskopického úchopového rámu: Š108 cm, Š127 cm, Š146 cm a Š164 cm.
- Rozměry křesla: 108 x 52,1 x 103 [cm].
- Velikost sedadla: 49 x 42.5 [cm].
- Výška sedáku: 50 cm
- Teleskopické přední područky, délka: 15 cm, 35 cm
- Délka zadních zvedacích madel: 26 cm
- Rozměry ve složeném stavu: Délka 108 x šířka 52,1 x výška 24,2 [cm].
- Nosnost: 210 kg
- Úhel sklonu vodícího madla: 30 °
- Čistá hmotnost: Váha: 33 kg
- Hmotnost nabíječky: 0,4 kg
- Pracovní výkon: AC 100-240 V 50/60 Hz
- Motor: DC 200 W
- Baterie: 24 V / 13,2 Ah
- Velikost balení: D115 x Š58 x V32 [cm] / dřevěná krabice

Datum vydání příručky: 30/11/2021

Datum aktualizace příručky: 20/12/2021

Číslo verze: EVER IOE.1.2

Česká verze: 22/01/2024

POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992





www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552

Rozměry

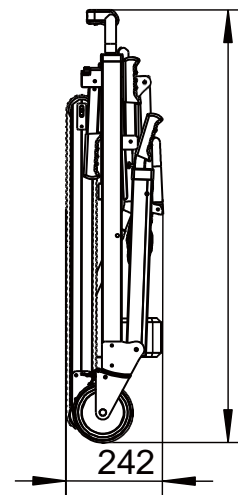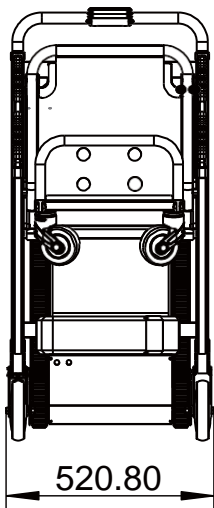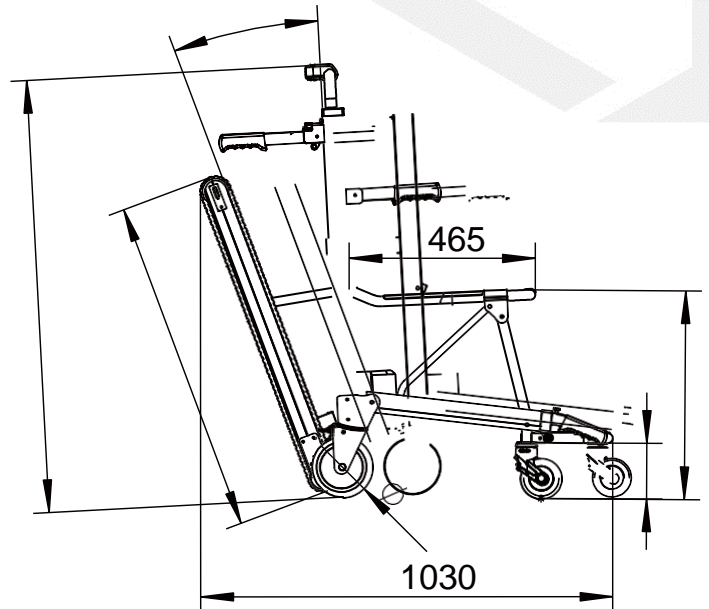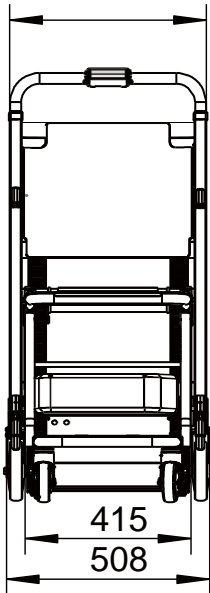

POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992

www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552



Komponenty

1. Nastavitelná a odnímatelná opěrka hlavy
2. Přední opěrky
3. Bezpečnostní pásy
4. Držák
5. Opěrka nohou
6. Teleskopické přední rukojeti
7. Tlačítko pro přední rukojeti
8. Baterie
9. Klíče
10. Lyžinový pás
11. Zadní madla pro přenášení
12. Tlačítko pro zadní madla
13. Ovládací panel
14. Zámek rukojeti
15. Horní tyč pro naklápění opěradla židle
16. Zatažení lyžinových pásů
17. Červené tlačítko pro uvolnění pásů
18. Spodní tyč pro naklápění opěradla židle
19. Ochranný kryt motoru
20. Brzdy
21. Zadní kola
22. Uvolňovací pedál brzdy
23. Přední kola
24. Nastavitelný rám

POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992

www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552

Nabíjení baterie

Před použitím je třeba nabíječku vyzkoušet na mobilním zařízení.



Pro nabíjení připojte stejnosměrný napájecí zdroj k nabíjecímu portu **A1** baterie **A3** (druhý konec **A2 připojte** do zásuvky). Když se kontrolka **A4** na baterii změní z červené na zelenou, znamená to, že je baterie plně nabitá.

Nabíječka nabije baterii na 100 %. Po dokončení nabíjení se přepne do udržovacího režimu, aby nedošlo k přebití.

- Pokud je úroveň nabití baterie nižší než 25 %, je nutné ji nabít.
- Pokud není baterie plně nabitá na 100 %, potřebuje několik cyklů nabíjení a vybíjení, aby dosáhla své maximální kapacity.

Nabíječku nerozebírejte ani neupravujte.

Ujistěte se, že nabíječka není během nabíjení baterie vystavena vlhkosti.

Nikdy se zástrčky nedotýkejte mokřýma rukama.

- Po dokončení nabíjení odpojte vstupní zástrčku 240 V AC a poté výstupní zástrčku. Baterii je třeba dobít po každém použití a lze ji nabít v křesle i mimo něj.
- Před použitím a nejméně jednou za 2 týdny baterii zkontrolujte a nabijte.

POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992

www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552



Instalace

Drážka na vnitřní straně baterie musí být v jedné rovině s vodící lištou. Zatlačte baterii podél směru šipky **1** vodící lišty, dokud nezapadne na místo. Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček o 180°, aby se baterie na židli zajistila.

Vyjmutí baterie

Otočte klíčkem proti směru hodinových ručiček o 180°, zatlačte akumulátor dopředu směrem k **2** a odpojte akumulátor.

Kontrola zbývající kapacity

Stiskněte tlačítko uprostřed, rozsvítí se čtyři červené kontrolky, každá znamená 25 % kapacity, nepoužívejte židli, když svítí pouze jedna červená kontrolka před úplným nabitím.

- Lithium-iontová baterie je spotřební materiál.
- Pokud se zobrazí nízký výkon nebo příliš nízké napětí, je nutné nabíjení.




Příprava evakuačního křesla EVEREST k použití:

Rozložte židli jako na obrázku.



Otevřete opěrku nohou podle obrázku.

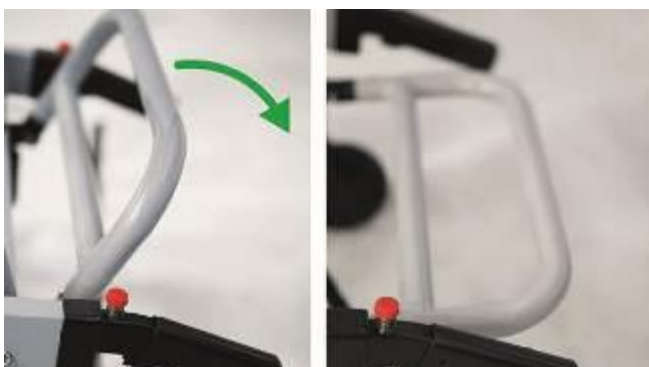

Rozložte opěrky rukou jako na fotografii.



POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992

www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552

Rozložení rukojetí pro přenášení:

V případě potřeby otevřete zadní madla podle obrázku, dokud se nezajistí.



Vytáhněte teleskopické přední zvedací rukojeti:

Stiskněte červené tlačítko a táhněte za rukojeti ve směru šipky, dokud nezapadnou na místo.



Uvolnění pásů:

Sešlápněte červený zajišťovací pedál.



POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992

www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552

Skládání židle

Zvedněte loketní opěrku podle obrázku.



Zvedněte opěrku nohou podle obrázku.



Jednou rukou uchopíte sedadlo a druhou rukou rám, zatlačte na sklopnou podpěru a poté, když je podpěra v zajištěné poloze, sedadlo sklopte.



POLSKO
Krakowska 390
32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:
9452220992



www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com
+ 48 791 400 552

Sklopte držadla pro přenášení:

Stiskněte červené tlačítko a sklopte rukojeti.

**Sklopte přední madla:**

Stiskněte červené tlačítko a zatlačte úchyty do rámu.

**Zatažení kolejových ližin:**

Položte nohu na červenou lištu, která spojuje ližiny, a stiskněte ji.



Nastavení držáku teleskopického rámu:



Když je židle v rozložené poloze, udržujte teleskopický rám v nejnižší poloze.



Při jízdě nahoru nebo dolů musí obsluha nastavit výšku rámu teleskopické rukojeti do blízkosti výšky ramen obsluhy.

Zvedněte rukojeť:

Zatlačte červenou zajišťovací tyč dovnitř a vytáhněte rukojeť do požadované výšky, poté uvolněte zajišťovací tyč, dokud se rukojeť nezablokuje ve správné výšce.

Spusťte rukojeť:

Stiskněte červenou aretační tyč směrem dovnitř a spusťte rukojeť do požadované výšky, poté uvolněte aretační tyč, dokud se rukojeť nezablokuje ve správné výšce.

POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992

www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552

Opěrky hlavy a bezpečnostní pásy

Opěrka hlavy:


Nastavte a připevněte opěrku hlavy do vhodné výšky pomocí popruhu v závislosti na výšce transportované osoby.

Bezpečnostní pásy:

Po usazení transportovaného nastavte bezpečnostní pás a v případě potřeby jej zapněte podle obrázku.



Brzdy

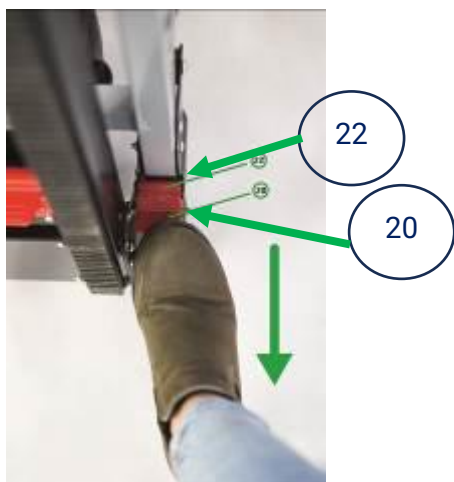

Před sklopením židle sešlápněte brzdový pedál.

Uzamčení: Sešlápněte brzdový pedál **20**.

Uvolnění: Stisknutím tlačítka **22** se odemkne.



Ovládací panel



POLSKO



Krakowska 390
32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:
9452220992



www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com
+ 48 791 400 552

Zapnutí napájení:

Zapněte vypínač baterie podle obrázku.

Stiskněte tlačítko POWER, na displeji se rozsvítí kontrolka LED a zobrazí se stav nabití baterie.

Vypnutí:

Stiskněte tlačítko POWER, pozadí monitoru baterie zhasne.

Vypněte vypínač baterie podle obrázku.

**Světlo:**

Stiskněte tlačítko LIGHT: LED dioda na displeji se rozsvítí.

Znovu stiskněte tlačítko LIGHT: LED displej je vypnutý.

Jízda nahoru:

Na ovládacím panelu: Stiskněte tlačítko NAHORU (šipka nahoru).

Pozastavení nebo zastavení: Uvolněte tlačítko UP.

Jízda dolů:

Na ovládacím panelu: Stiskněte tlačítko DOLŮ (šipka dolů).

Pozastavení nebo zastavení: Uvolněte tlačítko DOLŮ.

Použití evakuačního křesla EVEREST, obecná doporučení:

- Před použitím evakuačního křesla EVEREST se ujistěte, že jste byli řádně proškoleni a seznámeni s jeho obsluhou.
- V jednom okamžiku smí být přepravována pouze JEDNA osoba.
- První pokus o použití křesla by měl být nacvičen bez osoby v křesle při nízké rychlosti.
- Před použitím evakuačního křesla zkontrolujte nabití baterie a pásů.

POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992

www.ensafe-chair.com




office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552


Příprava evakuačního křesla EVEREST k použití



Evakuace směrem dolů

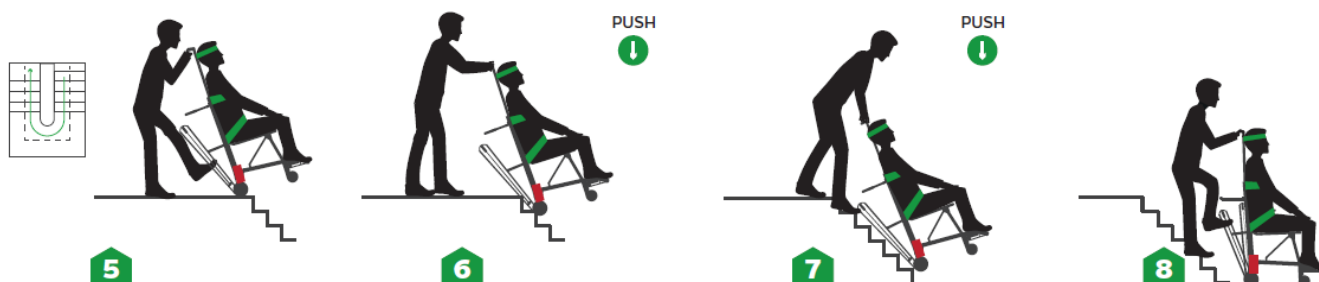

Evakuace směrem nahoru

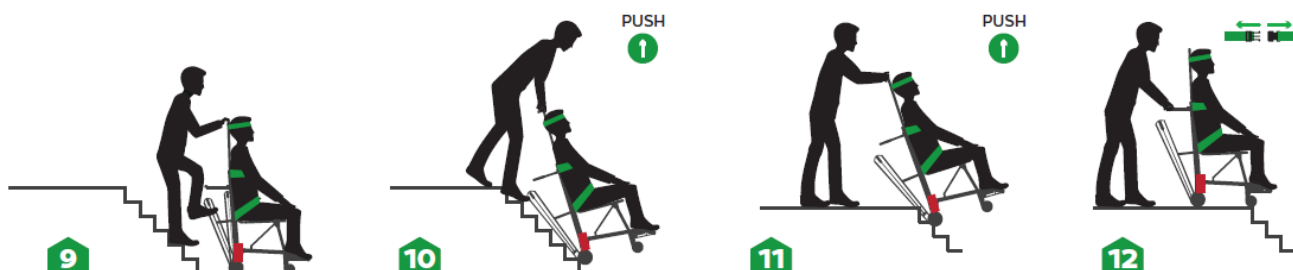

POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992

www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552

Další informace

Každý závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a předsedovi Úřadu pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků (v případě incidentů na území Polské republiky).

Hlášení o zdravotním incidentu a kopii hlášení o zdravotním incidentu je třeba zaslat předsedovi Úřadu e-mailem (adresa: incydenty@urpl.gov.pl), faxem (č. +48 22 492 11 29), doporučenou poštou nebo kurýrem (Al. Jerozolimskie 181c, 02- 222 Varšava).

Zdravotní příhoda se hlásí na formuláři pro hlášení zdravotních příhod.

Definice:

1. "Závažným incidentem" se rozumí jakýkoli incident, který přímo nebo nepřímo vedl, mohl vést nebo mohl vést k některé z následujících situací:

(a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby,

(b) dočasné nebo trvalé vážné zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby;

c) vážné ohrožení veřejného zdraví;

2. "Vážným ohrožením veřejného zdraví" se rozumí událost, která může mít za následek bezprostřední riziko úmrtí, vážné zhoršení zdravotního stavu osob nebo závažné onemocnění, které může vyžadovat naléhavá nápravná opatření a které může mít za následek významnou nemocnost nebo úmrtnost lidí, nebo něco neobvyklého či neočekávaného. v daném místě a čase.

Výrobce evakuačních křesel: z o. o., Polsko

Obchodní název výrobku, model: Název, model a označení výrobku: Evakuační křeslo, Everest

Země původu Polsko

Informace o výrobku:

- Zdravotnický prostředek třídy I v souladu se zásadou 1 přílohy VIII nařízení o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.



POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992



www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552



Kontakt:

Distributor: Stamed s.r.o.

Vřesová 667

330 08 Zruč – Senec

Česká Republika

obchod@stamed.cz

Výrobce: EnSafe Ltd.

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków

POLSKO

office@ensafe-chair.com



Skenujte mě!

POLSKO

Krakowska 390

32-080 Zabierzów - Kraków DIČ:

9452220992

www.ensafe-chair.com



office@ensafe-chair.com

+ 48 791 400 552