


seca

bodymeter

206

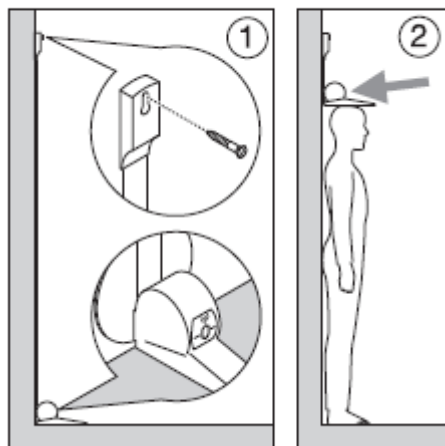

Gratulujeme!

S tělesným měřičem seca 206 jste zakoupili snadno ovladatelné zařízení pro měření výšky dětí a dospělých. Je určeno pro použití v nemocnicích, ordinacích lékařů a lůžkových měřicích a ošetrovatelských zařízeních.

Bezpečnost

Před použitím nového měřidla si prosím přečtete následující bezpečnostní pokyny.

- Dodržujte pokyny k obsluze.
- Použijte dodaný montážní materiál.
- Po měření zasuňte měřidlo zpět nahoru, aby nehrozilo nebezpečí zranění.

Přípevnění měřidla ke zdi

1. Umístěte měřidlo na podlahu ke zdi.
2. Vytáhněte měřicí pásku tak daleko, aby nula přesně odpovídala červenému pruhu v oblasti odečtu. Poté označte místo vrtání na stěně v horní části upevňovacího otvoru.
3. Konec měřicí pásky připevněte ke stěně pomocí dodaného šroubu.
4. Měřič zatlačte zpět.

Měření pomocí měřidla

- a. Osoba, která se má měřit, stojí pod měřidlem.
- b. Měřicí jazýček se spustí na hlavu.
- c. Výška se zobrazí v oblasti odečtu. Pokud jsou dodrženy výše uvedené kroky, je přesnost měření lepší než ± 5 mm.

Čištění

Měřidlo čistěte podle potřeby pomocí domácích čisticích prostředků nebo běžně dostupných dezinfekčních prostředků. Postupujte podle pokynů výrobce.

Technické údaje

Rozsah měření: 0–220 cm

Dělení: 1 mm / 1/8 palce

Rozměry (Š x V x H): 35 x 115 x 150 mm

Hmotnost: cca 140 g

Zdravotnický prostředek v souladu s nařízením (EU) 2017/745: třída Im

Likvidace

Pokud již není možné měřicí přístroj používat, příslušný orgán pro likvidaci odpadu vám rád poskytne informace o opatřeních nezbytných k jeho správné likvidaci.

Záruka

Na vady způsobené nekvalitními materiály nebo zpracováním poskytujeme záruku 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se ruší, pokud je přístroj otevřen neoprávněnými osobami.

Důležité: záruka platí pouze spolu s dokladem o zakoupení.

Verze návodu k použití: 17-10-02-237g_2024-04S, překlad: 9. 9. 2025

	Device complies with United Kingdom directives xxxx: Notified Body for Medical Devices of the United Kingdom
	Importer/representative in the United Kingdom: seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham United Kingdom
	Importer/representative Switzerland • Importateur/représentant Suisse • Importatore/rappresentante Svizzera: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönmatl Str. 4 CH-4153 REINACH
	Medical device in accordance with Regulation (EU) 2017/745