


Uživatelské instrukce / Návod k použití Antidekubitní matrace / Systém prevence dekubitů

Před prvním použitím produktu čtěte, prosím, pozorně bezpečnostní instrukce a poznámky, zajistíte tak bezpečné užívání.

Název produktu	Hyper Foam 1 <i>Hyper Foam 1 Clinic</i>	Hyper Foam Plus <i>Hyper Foam Plus Clinic</i> <i>Hyper Foam Visco Clinic*</i>	Hyper Foam 2 <i>Hyper Foam 2 Clinic</i>	Maxx250 <i>Maxx250 Clinic</i>
Obsah balení	Matrace s pěnovým jádrem a potahem PU-TEX se zipem, Návod k použití			
Indikace	Prevence dekubitů	Terapie dekubitů do 3. stupně (EPUAP), střední riziko vzniku do 2. stupně (EPUAP)	Terapie dekubitů do 4. stupně (EPUAP), Vysoké riziko	Terapie dekubitů do 4. stupně (EPUAP), Vysoké riziko
Kontraindikace	none			
Rozsah použití	Prevence dekubitů	Terapie dekubitů do 3. stupně (EPUAP), střední riziko vzniku do 2. stupně (EPUAP)	Terapie dekubitů do 4. stupně (EPUAP), Vysoké riziko	Terapie dekubitů do 4. stupně (EPUAP), Vysoké riziko
Hmotnost pacienta min.-max.	do 90 kg	20 kg – 140 kg	20 kg – 150 kg	40 kg - 250 kg
Materiál	PUR- pěna Potah s PU nástřikem	PUR- pěna Potah s PU nástřikem	PUR- pěna Potah s PU nástřikem	PUR- pěna Potah s PU nástřikem
Velikosti	šířka: 90 - 100 cm délka: 190 - 220 cm			
Hmotnost produktu (90 x 200 cm)	9 kg	11 kg	12 kg	18 kg
Zdravotnický prostředek třídy I v souladu s 93/42 EWG a zákona o zdravotnických prostředcích				
Třída bezpečnosti/ požární odolnost	DIN EN 597 I + II // BS 7175 sec 3 crib 5			
Biokompatibilita	DIN EN ISO 10993-5 ; DIN EN ISO 10993-1			
Bezpečnostní poznámky	Vhodné pro polohovací lůžka, postranice lůžka musí dosahovat alespoň 22 cm nad povrch matrace.			
Záruka	3 roky	3 roky	5 let	5 let

Čištění / údržba / další použití

Domácí užití	Klinické užití
Během používání	
Desinfekce potahu otřením	Desinfekce potahu otřením
	
Po použití pacientem	
Desinfekce potahu otřením	Desinfekce potahu otřením
Desinfekce potahu otřením	autoklárování
	
Žádná další údržba není nutná	

Instrukce pro skladování a používání

- Matrace musí být ihned po doručení vyjmuta z papírového kartonu.
- Uložte matraci na postel.
- Ujistěte se prosím, že štítek se značkou a šipkami „This Way Up“ spolu s názvem matrace směřuje vzhůru, případně že se štítek s názvem matrace (clinic) nachází na horní straně.

Výrobce zařízení

Funke Medical AG
Ährenfeld 10
46348 Raesfeld

Tel.: (+49) 2865/266 93 50
Fax: (+49) 2865/8133
info@funke-medical.de
www.funke-medical.de

RKI = Robert-Koch-Institut (RKI)
DGHM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (German Society for Hygiene and Microbiology)
MPG = Medizinproduktegesetz (Medical Devices Act)