

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POSUVNÁ PODLOŽKA – kluzný rukáv

Posuvné podložky jsou vyrobeny v barvách, které označují jejich velikost a mají kontrastní poutko pro pověšení. Vnitřní strana rukávu využívá vlastnosti speciální kluzné vrstvy. Umožňuje manipulaci posuvem v příčném či podélném směru, otáčení pacienta na bok, otáčení sedící osoby apod.

Při použití se podložka roluje a nylonové vrstvy kloužou po sobě, čímž se usnadňuje manipulace s pacientem na lůžku.

Návod k použití

Položte podložku v blízkosti nejtěžších částí těla – boky/ramena a přiložte jej na podložku. Poté vytáhněte horní vrstvu v požadovaném směru. Podložku lze vyjmout jemným uvolněním spodní vrstvy podložky.

Pokyny pro péči

Jestliže je potřeba podložku vyprat, řiďte se pokynů viz níže



Maximální teplota vody 40 °C
Běžné máchání
Běžné ždímání



Nesmí se
bělit



Povoleno sušit v bubnové sušičce při
nízkých teplotách



Nesmí se
žehlit



Zákaz chemického čištění
Zákaz používání organických
rozpouštědel

Balení obsahuje: 1 ks

Malé 70x66 cm



Velké 150x70 cm



Střední 120x70 cm

Široké 125x100 cm

Extra velké 200x70 cm

Extra široké/dlouhé 195x140cm

SSWEL100 200x100 cm

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

POSUVNÁ PODLOŽKA – kluzný rukáv

Posuvné podložky jsou vyrobeny v barvách, které označují jejich velikost a mají kontrastní poutko pro pověšení. Vnitřní strana rukávu využívá vlastnosti speciální kluzné vrstvy. Umožňuje manipulaci posuvem v příčném či podélném směru, otáčení pacienta na bok, otáčení sedící osoby apod.

Při použití se podložka roluje a nylonové vrstvy kloužou po sobě, čímž se usnadňuje manipulace s pacientem na lůžku.

Návod k použití

Položte podložku v blízkosti nejtěžších částí těla – boky/ramena a přiložte jej na podložku. Poté vytáhněte horní vrstvu v požadovaném směru. Podložku lze vyjmout jemným uvolněním spodní vrstvy podložky.

Pokyny pro péči

Jestliže je potřeba podložku vyprat, řiďte se pokynů viz níže



Maximální teplota vody 40 °C
Běžné máchání
Běžné ždímání



Nesmí se
bělit



Povoleno sušit v bubnové sušičce při
nízkých teplotách




Nesmí se
žehlit



Zákaz chemického čištění
Zákaz používání organických
rozpouštědel

Balení obsahuje: 1 ks

Malé 70x66 cm

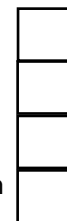

Velké 150x70 cm



Střední 120x70 cm

Široké 125x100 cm

Extra velké 200x70 cm

Extra široké/dlouhé 195x140cm

SSWEL100 200x100 cm