

NÁVOD K OBSLUZE

SECA 206

Gratulujeme !

V míře seca 206 získáváte snadno použitelný metr pro měření výšky dětí i dospělých. Míra je navržena pro použití v nemocnicích a lékařských ordinacích.

Bezpečnost

Před prvním použitím míry seca 206 věnujte, prosím chvíli čas na pročtení následujících instrukcí.

- Postupujte podle návodu k použití
- Požijte přiložené díly pro montáž
- po použití srolujte metr zpět do výchozí pozice, aby se zabránilo zbytečnému namáhání pružiny

Montáž metru na zeď

1. Položte míru na zem ke stěně, na které bude míra upevněna. Okénko pro čtení hodnot musí směřovat od stěny.
2. Nyní vysouvejte míru ven tak dlouho, dokud se na čtecí lince neobjeví nula. Pak označte místo vývrtu na stěně v horní části upevňovacího otvoru.
3. Konec v této výšce připevněte ke stěně pomocí šroubků, které jsou součástí dodávky.
4. Srolujte metr do výchozí pozice

Měření s mírou seca 206

- a. Osoba musí stát pod mírou seca 206
- b. Přiložte měřicí jazýček na hlavu
- c. Ve čtecím okénku bude zobrazena výška

Míra je zobrazována s přesností +/- 5 mm.

Čištění:

Vyčistěte měřicí tyč podle potřeby pomocí domácího čisticího prostředku nebo komerčně dostupných dezinfekčních prostředků. Postupujte podle pokynů výrobce

Technická data:

Rozsah měření: 0 – 220 cm
Přesnost : 1 mm
Rozměry : 35 mm x 115 mm x 150 mm
Hmotnost : cca 140g
Směrnice 93/42/EEC: Třída I

Likvidace:

Pokud již není možné měřicí přístroj používat, řiďte se dle vašeho odpovědného orgánu pro nakládání s odpady, která jsou nezbytná pro jeho řádné odstranění.