

# NÁVOD NA OŠETŘENÍ A SERVIS NEREZOVÝCH VÝROBKŮ

Ošetřování nerezových výrobků /materiál - AISI 304, ČSN 17240, DIN 1.4301/ lze provádět flanelovou utěrkou nebo papírovou utěrkou pomocí saponátových prostředků pro mytí nerezového nádobí a konečné doleštění pomocí okenních čističů ve spreji např. Mr Muscle, které jsou dostupné ve všech drogistických prodejnách.

Nikdy nepoužívejte pro čištění ostré předměty nebo prostředky s obsahem brusných částic /písek, CIF atd./, které mohou způsobit poškrábání nerezové desky.

Ošetření a mytí provádíme vlhkou utěrkou s běžnými neagresivními saponátovými prostředky /bez brusných částic/. Desinfekci provádíme schváleným desinfekčním prostředkem pro zdravotnictví GUTTAR, jehož distributorem je firma MÁLEK & SPOL. – viz samostatný návod.



Hlavní příčiny koroze nerezových materiálů :

- 1/ Použití desinfekce na bázi chlóru nebo jejich derivátů
- 2/ Příliš vysoká koncentrace hladiny chlóru a doby působení /vyšší než 2 mg/l/
- 3/ Vysoká koncentrace soli, která vytváří pasivní vrstvu a poškozuje povrch výrobku
- 4/ Při velkém snížení PH, správné PH je 7,2 – 7,5
- 5/ Jiné agresivní nečistoty z okolí, které se usazují na povrchu
- 6/ Styk povrchu s kyselinou nebo louhem /je třeba rychle omýt vodou/

**Za tato poškození výrobce nebere zodpovědnost a nevztahuje se na to záruka.**

**POZOR !** V případě použití jiných čisticích, mycích nebo desinfekčních prostředků na bázi chlóru, jodu, kyslíčků atd. hrozí chemická reakce, která může způsobit degradaci koleček, zadření čepů a vznik skvrn nebo zahnědnutí nerezových ploch.

U pohyblivých dílů /kolečka, čepy atd./ může dojít k silné oxidaci a zadření dílů.



**UPOZORNĚNÍ :** Při použití jiného desinfekčního prostředku se poraďte s výrobcem /dodavatelem/ tohoto prostředku, neboť mohou vzniknout nevratné škody poškozením povrchu a funkčních dílů nerezového výrobku a zaniká tak záruka. Na toto poškození se nevztahuje záruka.

Provádění servisu je nenáročná a vyžaduje pouze kontrolu a promazání čepů koleček u výrobků, kde jsou obsažena (nerezové stolky, vozíky, sedačky atd.)

Pravidelně odstraňujeme zjevné nečistoty a každých 6 měsíců lehce čepy promazeme a zkontrolujeme správné utažení šroubů koleček. Toto promazání je obzvláště nutné při používání desinfekce, která zadírá kluzné části.



Dne : 15.1.2024

Ver. 24-1

---

MÁLEK & SPOL. s. r. o.

Ke Xaverovu 2878/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ : 61853291 DIČ : CZ61853291

Telefon : 281 923 923, email : [malek@zdravotnickynabytek.cz](mailto:malek@zdravotnickynabytek.cz)