

Návod na obsluhu

○ SPN-640



○ UNI-2NG



○ UNI-3NB



○ UNI-4NP



○ UNI-4NR-BP



Stolek nástrojový se zásuvkami je určen jako mobiliář (nikoliv zdravotnický prostředek) pro odkládání obvazového, injekčního a ostatního medicínálního materiálu.

Popis a postup použití

1/ Typy nástrojových nerezových stolků :

- Stolek SPN-640 je opatřen horním NR lisovaným platem, spodním NR rovným platem popř. závěsným plastovým košem, bočním madlem a jednou zásuvkou s plnovýsuvy /hloubka zásuvky 100 mm /.
- Stolek UNI-2NG je opatřen horním NR lisovaným platem, galerkou s výklopnými boxy /5+6/, držákem na kanyly, plastovým závěsným košem a dvěma zásuvkami s plnovýsuvy /hloubka zásuvek 100 mm /.
- Stolek UNI-3NB je opatřen horním NR lisovaným platem, spodním NR rovným platem, popř. závěsným plastovým košem, NR boční výsuvnou deskou a třemi zásuvkami s plnovýsuvy /hloubka 3x 100 mm/.
- Stolek UNI-4NP je opatřen horním NR lisovaným platem, držákem na kanyly, plastovým závěsným košem, integrovanou NR boční výsuvnou deskou a čtyřmi zásuvkami s plnovýsuvy / hloubka zásuvek 2x 100 mm a 2 x 200 mm/.
- Stolek UNI-4NR-BP je opatřen horním NR lisovaným platem, NR boční výsuvnou deskou, držákem na defibrilátor, držákem na infuze s dvojháčkem, držákem na kanyly a popř. plastovým závěsným košem čtyřmi zásuvkami s plnovýsuvy /hloubka zásuvek 2x 100 mm a 2 x 200 mm/.

2/ Nástrojový stolek po důkladném rozbalení a odstranění všech zbytků folie ošetříme čistícími a desinfekčními prostředky – viz „Servis a ošetření“.

3/ Proved'te kontrolu funkčnosti zajištění stolku aretací brzdíček koleček \varnothing 75 mm nebo 125 mm sešlápnutím konců brzdíček směrem dolů a zpětné odbrzdění stolku se provede sešlápnutím horní části brzdíček.

4/ Proved'te kontrolu funkčnosti plnovýsuvů zásuvek. V případě demontáže zásuvky postupujte takto: na levé straně zásuvky zatlačte plastovou páčku plnovýsuvu směrem nahoru viz obr. 1 a na pravé straně zatlačte plastovou páčku směrem dolů obr. 2, obě páčky musí být zatlačeny současně a vysunutím zásuvky z plnovýsuvů zásuvku vyjmeme z kostry stolku. Při následné montáži zásuvky do plnovýsuvů postupujte následovně : Zkontrolujte aretační kolíčky viz obr. 3. Na levé straně musí být zasunutý v plastové vrchní drážce a na pravé straně musí být kolíček zasunutý v plastové dolní drážce. Před nasunutím musí být plnovýsuvy vysunuty nadoraz.

Upozornění :




V případě, že s vozíkem přejíždíte po nerovném povrchu nebo přes prahy, může dojít k vyskočení kolíček (viz bod. 4) a k uvolnění plnovýsuvů , zásuvka pak nejde zasunout nadoraz. Při projevení této závady opřeme stolek zády o stěnu a zásuvku silně přitlačíme pouze v místě úchyty plnovýsuvů na pravé a levé straně předního čílka zásuvky – Bod A.

Návod na demontáž zásuvky


Obr. 1

ZATLAČTE PÁČKU SMĚREM NAHORU

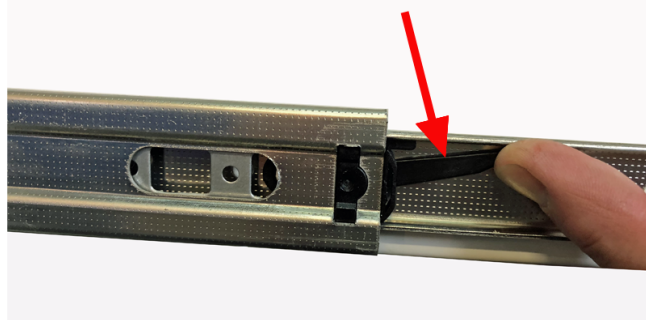

Obr. 2

ZATLAČTE PÁČKU SMĚREM DOLŮ

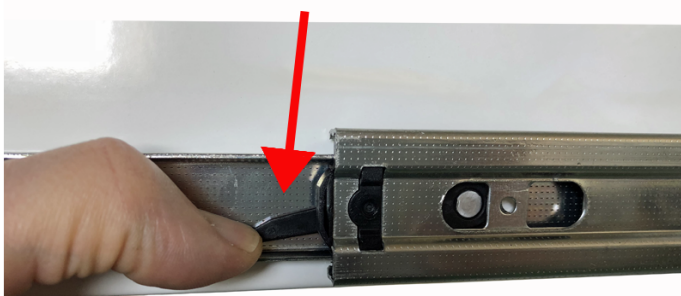

Montáž zásuvky

Obr. 3



Ošetření a údržba

Nerezové části a plata lze dezinfikovat použitím schváleného desinfekčního prostředku pro zdravotnictví na bázi alkoholu- GUTTAR, jehož distributorem je naše firma MÁLEK & SPOL.

Hlavní příčiny koroze nerezových materiálů :

- 1/ Použití desinfekce na bázi chlóru nebo jejích derivátů
- 2/ Příliš vysoká koncentrace hladiny chlóru a doby působení /vyšší než 2 mg/l/
- 3/ Vysoká koncentrace soli, která vytváří pasivní vrstvu a poškozuje povrch výrobku
- 4/ Při velkém snížení PH, správné PH je 7,2 – 7,5
- 5/ Jiné agresivní nečistoty z okolí, které se usazují na povrchu
- 6/ Styk povrchu s kyselinou nebo louhem /je třeba rychle omýt vodou/

Za tato poškození výrobce nebere zodpovědnost a nevztahuje se na to záruka.



POZOR! V případě použití jiných čistících, mycích a desinfekčních prostředků na bázi chlóru, jodu, kyslíčků atd. hrozí chemická reakce, která může způsobit degradaci koleček, zadření čepů a vznik skvrn nebo zahnědnutí nerezových ploch (vysoká koncentrace, dlouhá expozice). Údržba je velmi snadná a u všech modelů provádíme pouze promazávání koleček každých 6 měsíců olejem SILIKAL. To platí zvláště, když může do čepů koleček zatéct desinfekce, která způsobuje postupné zadírání.

Vždy po 12 měsících je nutné provést kontrolu správné funkce plnovýsuvů zásuvek a koleček proškoleným technickým pracovníkem zdravotnického zařízení.

5/ Servis a záruční podmínky

Na nástrojový stolek je poskytována 24 měsíční záruka, která se však nevztahuje na mechanické poškození jednotlivých dílů stolku a nedodržení návodu k obsluze.

Servis a opravy je zajištěn prostřednictvím prodejců nebo přímo na provozovně výrobce firmy Málek & spol. s.r.o., Ke Xaverovu 2878/10, 193 00 Praha 9.

6/ Likvidace obalu a produktu

Likvidaci obalu zajišťuje prodejce nebo výrobce, popř. si zajistí odběratel vhodným způsobem do předem určených sběrných kontejnerů. Při likvidaci nočního stolku po skončení životnosti kontaktujte určenou organizaci nebo využijte sběrné dvory.



Dne : 15.1.2024

Ver. 24-1

MÁLEK & SPOL. s. r. o.

Ke Xaverovu 2878/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ : 61853291 DIČ : CZ61853291

Telefon : 281 923 923, email : malek@zdravotnickynabytek.cz