

# NOSNÍ ODSÁVAČKA PRO DĚTI

## Návod k obsluze

### Zařízení pro odsávání hlenů z dětského nosu

Děkujeme za Váš nákup.

**Dětská nosní odsávačka Baby Flaem** je patentované zařízení. Je praktická, jednoduše se používá a je hygienická. Je třeba pouze jednoduchý stisk jedné ruky, není nutné odsávat ústy maminkou jako je obvyklé u ostatních odsávaček na trhu, zamezí se tím možné mikrobiologické kontaminaci.

### PROČ BY MĚL BÝT NADBYTEČNÝ HLEN ODSÁVÁN?

Dobré dýchání je první obranou dítěte, které má pro omezení infekcí a pocit celkové spokojenosti. Je známo, že **děti** do 1 roku **dýchají výhradně nosem**. Tzn., že pokud je nos ucpaný, dítěti se obtížně dýchá, má problémy se spaním i jídlem, může také odmítat kojení a velmi často plaká. **Do 3 let není dítě schopné samo smrkat**, takže hlen a v něm přítomné bakterie, viry a prachové částičky ucpou nosní dutiny. Většinou se doporučují dva způsoby, jak zprůchodnit nos: **dobře vypláchnout a odstranit hlen**. Pro vypláchnutí Vám doporučujeme použít nosní výplachy Flaem a pro odstranění hlenu naši dětskou nosní odsávačku.




### DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Pečlivě si přečtěte tyto instrukce a ponechejte je pro další potřebu. Zařízení používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto letáčku. Je důležité si přečíst a porozumět návodu k použití. Pro další informace kontaktujte Vašeho prodejce.

Zařízení by neměly používat děti a osoby nesoběstačné bez přísného dohledu dospělého, který si přečetl tento letáček. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.

Měkký nástavec pohodlně  
dosedne a zacpe nosní  
díрку.

### Odsátí hlenu

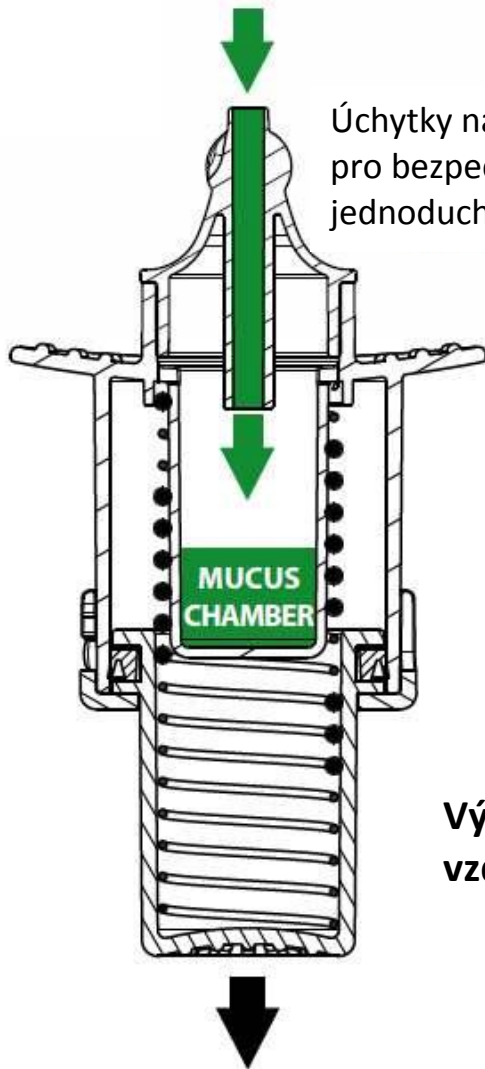


Úchytky na stranách  
pro bezpečnou a  
jednoduchou obsluhu

### UVOLNIT

Postupné stlačování pístu vytváří  
tlak, který jemně odsaje hlen  
z dětského nosu.

### Žádný vzduch není vytlačován

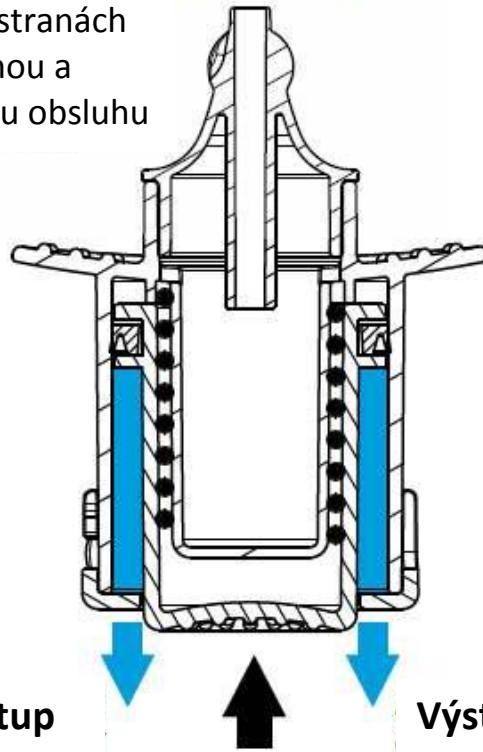

Výstup  
vzduchu

### ZATLAČIT

Výstup  
vzduchu

Zatlačení pístu do odsávačky  
vytvoří podtlak pro odsávání.  
Vzduch je při stlačování pístu  
uvolňován ventily na spodní  
straně odsávačky. Na nos dítěte  
tak není vyvíjen žádný tlak.

## POPIS ZAŘÍZENÍ (viz obr.)

1. Měkký, ergonomicky tvarovaný nástavec (2 ks v balení)
2. Tělo odsávačky s externími nopkami (2A), umožňujícími snadné a bezpečné uchopení, a se sběrnou nádobkou na hlen (2B)
3. Pružina
4. Píst
5. Těsnící kroužek

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před každým použitím si pečlivě umyjte ruce a vyčistěte **odsávačku** následovně: otevřete **odsávačku** otočením **těsnícího kroužku (5)**, dejte přitom pozor na vystřelení **pružiny (3)**.

**Čištění:** Jednotlivé díly umyjte teplou pitnou vodou (přibližně 40°C) s jemným neabrazivním prostředkem na nádobí nebo přímo v myčce nádobí (horký cyklus). Zařízení se může čistit běžně dostupnou studenou dezinfekcí za jejích specifických podmínek použití.

**Sušení:** Poté, co jsou všechny části umyté nebo vydezinfikované, jimi pořádně zatřeste a nakonec položte na papírovou utěrku, nebo případně vysušte proudem horkého vzduchu (např. použitím fénu).

**Naneste dětský zvlhčující olejíček na těsnění pístu (4) a poté sestavte zařízení tak, jak je zobrazeno na příslušném obrázku (obr. C).**

## NÁVOD K POUŽITÍ

Abyste zamezili riziku infekce, doporučujeme osobní použití, stejně tak jako častou výměnu **nosního nástavce (1)**.

**a-**Držte **odsávačku** tak, jako by to byla stříkačka.

**b-**Umístěte **nosní nástavec (1)** **odsávačky** do nosní dírky dítěte.

**c-**Palcem zatlačte na spodek **pístu (4)**; vzduch je vytlačen skrz otvory v dolní části **těla odsávačky (2)** a tím se předejde vytvoření tlaku, který by působil směrem k nosnímu otvoru dítěte. Tato fáze se také může provést před samotným umístěním **odsávačky** k nosní dírce dítěte.

**d-**Postupně uvolněte **píst (4)**, tím se vytvoří vakuum, které jemně nasaje hlen z nosu dítěte.

**e-**Opakujte od bodu **b** i pro druhou nosní díрку.

