


CS Návod k použití

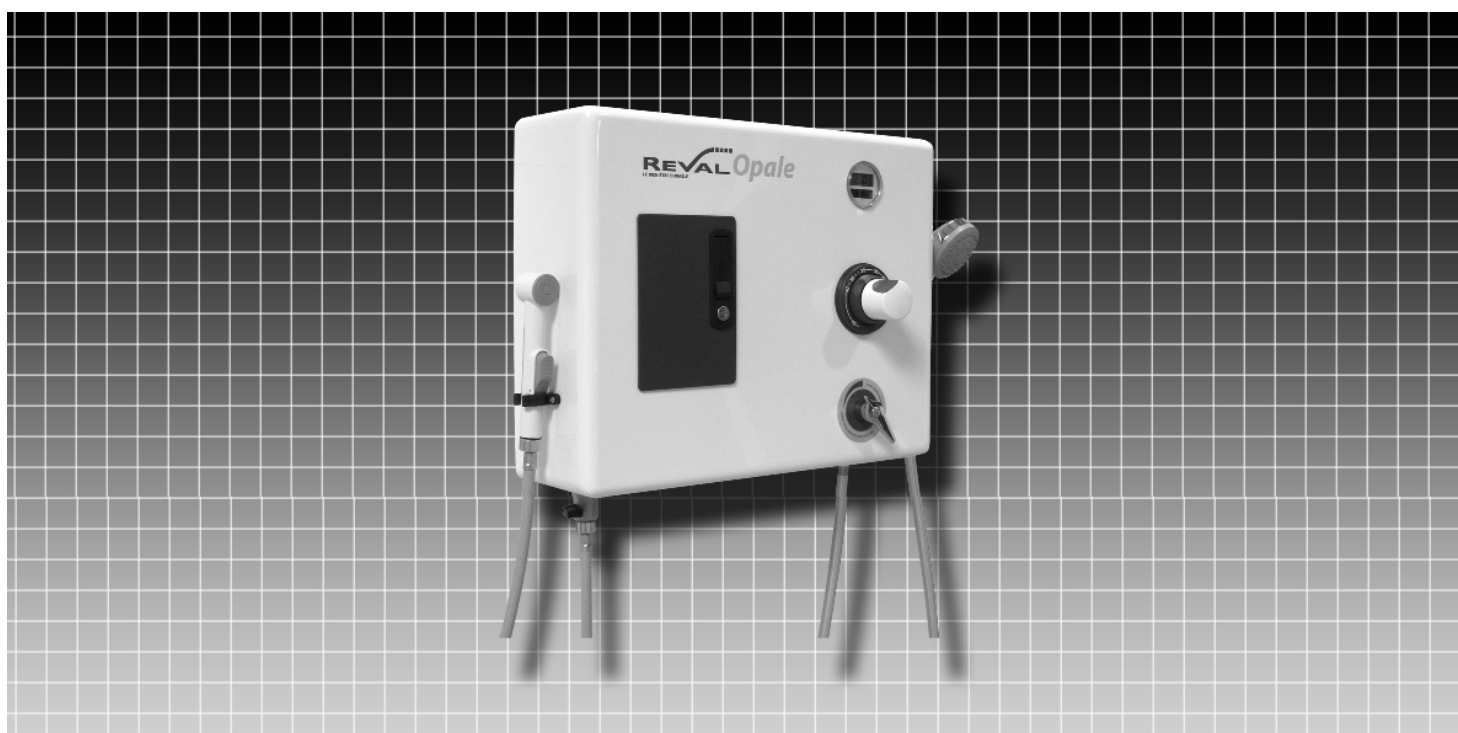

SPRCHOVÝ PANEL se zabezpečeným dezinfekčním systémem


OPALE

3011.00


SHRNUTÍ

OBSAH	STRÁNKY
OBECNÝ VÝKRES	2
ROZMĚRY	2
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	3
ROZSAH POUŽITÍ	3
NÁVOD K POUŽITÍ	
TERMOSTATICKÁ BATERIE - PROVOZ	4
MYTÍ PACIENTA	4
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PROTI POPÁLENÍ DISINFEKCE	4
ÚDRŽBA	
PŘIDÁNÍ DEZINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU	5
ČIŠTĚNÍ OVLÁDACÍHO PANELU	5
FORMULÁŘ PRO ÚDRŽBU (PALUBNÍ DENÍK)	6

OBEČNÝ VÝKRES

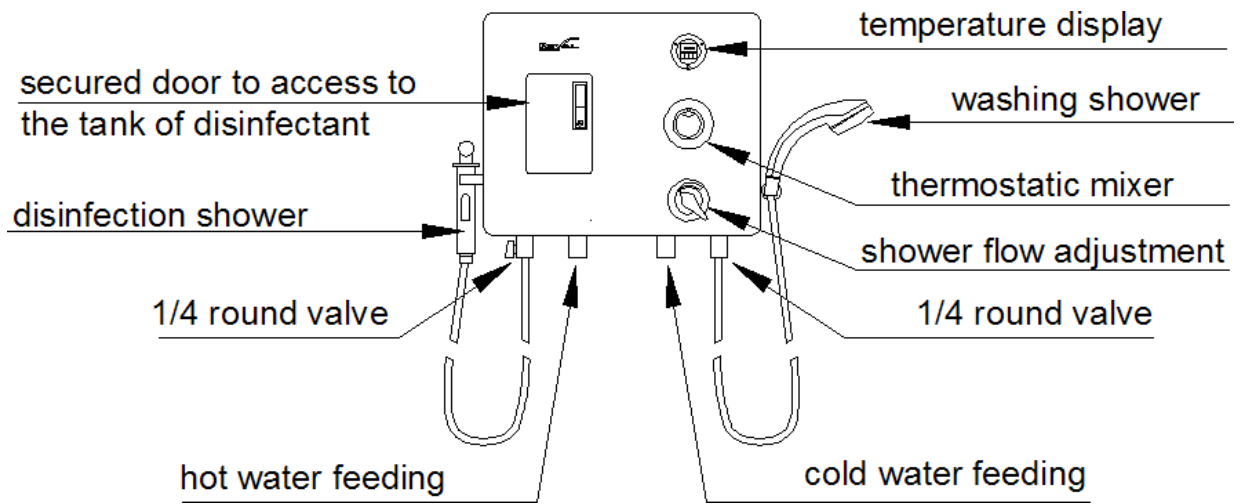

ROZMĚRY

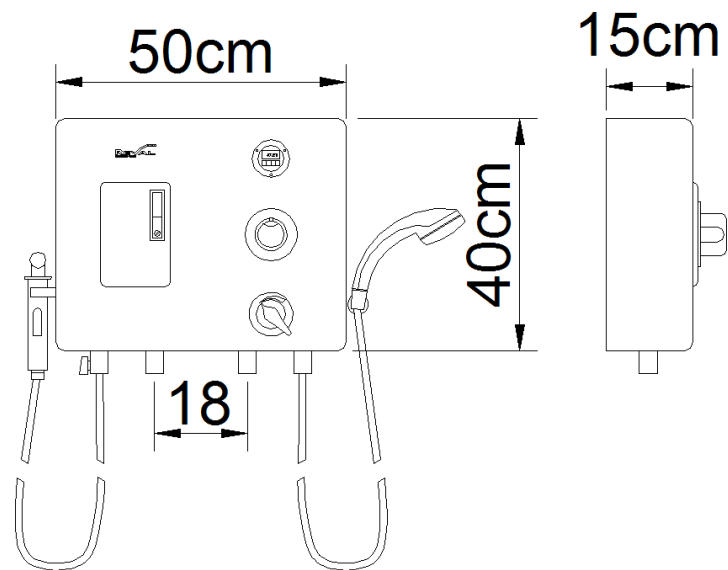

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MODELÝ:

REF. 3011.00 Sprchový panel "OPALE" s termostatickou baterií.

DATAS:

- Ocelový rám s antikorozní úpravou.
- Potah z bílého polyesteru.
- Termostatická směšovací baterie - 18 l/min
- Směšovač se zpětnými víčky a ochranou proti připálení.
- Dezinfekční sprchová hlavice se spouštěčem (žlutá hadice)
- Čistící sprcha.
- Dveře pro přístup k nádrži s dezinfekčním prostředkem zajištěné zámekem s klíčem.
- Sací zařízení dezinfekčního přípravku s uzavíracím ventilem a 1 litrovou nádrží.
- Digitální zobrazení teploty.

SHODA:

- 73/23/CEE.
- 89/336/EHS.
- NF EN 60335-1.
- NF C 15-100.

ROZSAH POUŽITÍ

Ústředna 3011.00 Opale byla zkoumána pro mytí pacientů na sprchovém vozíku a pro dezinfekci matrace, polštáře, stěny vany...

Sprchový panel smí používat pouze kvalifikované osoby, které si přečetly návod k použití a porozuměly mu.

Sprchový panel je určen pouze k mytí pacientů.


Nikdy nepoužívejte dezinfekční sprchu na pacienty.

! Výrobce nenese odpovědnost, pokud je výrobek používán, měněn nebo sestaven jiným způsobem, než je předepsáno v tomto návodu.

NÁVOD K POUŽITÍ

TERMOSTATICKÁ BATERIE - PROVOZ:

Termostatická baterie umístěná na ovládacím panelu umožňuje nastavit teplotu vody pouze u mycí sprchy. Pokud během používání potřebujete teplotu vody vyšší než 40 °C, stiskněte červený index a otočte tlačítkem proti směru hodinových ručiček. Chcete-li nastavit teplotu vody, otočte tlačítkem na směšovači.

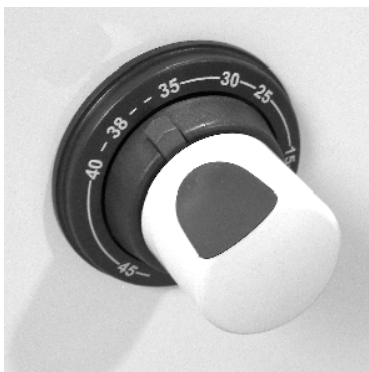

Před každým použitím zkontrolujte teplotu vody.

MYTÍ PACIENTA:

Vezměte si mycí sprchu a dohlédněte na to, abyste ji vždy otočili směrem ke sprchové skříňce nebo ke sprchovému vozíku.

Zkontrolujte teplotu vody.

Chcete-li pacienta vyčistit, stiskněte západku sprchy.
Po dokončení čištění ventil vypněte.

BEZPEČNOST PROTI POPÁLENÍ:

Pokud dojde k přerušení podávání studené vody, předejde se riziku popálení.

DEZINFEKCE:

Vezměte si dezinfekční sprchu (**žlutá** ohebná).
Opatrně pokropte díly, abyste je vydezinfikovali.

Nepoužívejte dezinfekční sprchu na pacienta.

Vyčkejte, aby byla dodržena doba působení předepsaná podle použitého dezinfekčního prostředku. Doba působení: 2 minuty pro přípravek B.F.R. 4.0.

Pečlivě je opláchněte čisticí sprchou, abyste odstranili veškeré stopy baktericidů.

ÚDRŽBA

1 - PŘIDÁNÍ DEZINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU :

Ovládací panel je vybaven automatickým systémem pro určení množství dezinfekčního prostředku.

Dezinfekční systém zahrnuje :

- Nádrž na 1 litr dezinfekčního přípravku.
- 1X píst s kalibrovanou trubicí, umístěný v nádrži a spojený ohebným průchodem horní částí Venturiho trubice (bílý plastový díl).
- 1 dezinfekční sprcha. (žlutá hadice)

Ředění :

Míchání vody a dezinfekčního prostředku uvnitř dezinfekční sprchy probíhá ve 2 fázích:

První :

Ruční ředění uvnitř nádrže.

Druhý :

Sací zařízení (Venturiho trubice) zajišťuje dávkování 10 % nasávaného produktu z nádrže.

Příklad :

Dezinfekční prostředek BFR 4.0 se musí používat v konečném ředění 0,4 %.

- 1) Ruční ředění v nádrži na 4 %, tj. 40 ml BFR 4.0 na 960 ml vody.
- 2) Doplnkové ředění 10 % **studenou vodou** zajišťuje sací zařízení (Venturiho trubice).

Po přidání zředěného přípravku do nádrže je třeba nepoužitý roztok zlikvidovat a po týdnu jej obnovit.

1- ČIŠTĚNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

Používejte pouze tekuté přípravky (tekuté mýdlo).

Nepoužívejte abrazivní prostředky, jako je například " mycí krém "

FORMULÁŘ PRO ÚDRŽBU (PALUBNÍ DENÍK)

Datum kontroly	Čištění filtrační vložky směšovače	Čištění sprch	Pozorování	Opravy	Zástupce (jméno a podpis)



FRANCIE :

Reval®

Z.A. Fief des Prises

Usseau 17220 Sainte Soulle

Tel: (33) 05.46.42.04.16

Fax: (33) 05.46.43.06.38

www.groupe-reval.com

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ :

Reval® Continuing Care Limited
Unit 17 Brynmenyn Busines Centre
St Theodore's Way - Brynmenyn
CF32 9TZ BRIDGEND - WALES

Tel: 01656 721 001

Fax: 01656 720 006

www.reval-group.com