

Pilgo®

Pilgo je inovativní léčebná pomůcka určená pro usnadnění polykání pilulek a tablet. Je pečlivě vytvarovaná tak, aby spolupracovala s našimi přirozenými reflexy. Pilgo snižuje stres a nepohodlí při polykání pilulek. Jedinečná konstrukce náustku podporuje přirozenou pozici pro pití nápoje a inovační systém drážek umožňuje společné doručení pilulky a nápoje do úst pro snazší polykání.

- Vnitřní žebrovaná struktura podporuje efektivní proudění tekutiny pro polykání bez stresu a napětí
- Jedinečná konstrukce náustku podporuje přirozenou pozici pro pití nápoje
- Inovativní systém drážek umožňuje společné doručení pilulky a nápoje do úst pro snazší polykání
- Neobsahuje ftaláty



Možno ohřívat v mikrovlnné troubě



Možno mýt v myčce nádobí



Navrženo a vyrobeno ve Velké Británii



Registrovaný průmyslový vzor

RCD 00218559-0001

Patentová přihláška

GB 1300824.8



Návod k použití

- Před prvním použitím důkladně umyjte.
- Neplňte horkou tekutinou – nebezpečí opaření.
- Děti mohou výrobek používat pouze pod dohledem zodpovědné dospělé osoby.
- Podávání léků vždy konzultujte s ošetřujícím lékařem.
- Vždy se řiďte příbalovým letákem vašich léků.
- Léky vždy uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
- Použitelné pro většinu velikostí léků.
- V případě, že dojde k namoření pítka před použitím, může dojít k zaseknutí podávaného léku.



Odstraňte kryt a dbejte na to aby zůstal suchý

Nepřepĺňujte!

Neplňte pítko zavřeným krytem



Opatrně zavřete víčko

Vložte tabletu koncovky pítka – viz obrázek.

TIP! Před zavřením víčka umístěte nádobku pítka na pevný povrch. Zavření je tak jednodušší



Ujistěte se, že je víčko pevně zavřené.

Uchopte pítko a napijte se.

