



**MOPEDIA®**

MA R1821\_822\_823\_824\_825\_826\_827\_828 01 A\_CZE\_07-2021

**ZVEDÁKY MUEVO**

---

**NÁVOD K POUŽITÍ**

ČESKÝ

## OBSAH

1. KÓDY .....	STR. 3
2. ÚVOD.....	STR. 3
3. URČENÉ POUŽITÍ .....	STR. 3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	STR. 3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	STR. 4
6. POUŽITÉ SYMBOLY.....	STR. 4
7. ROZMĚRY .....	STR. 5
7.1 Rozměry konstrukce nosnost 150 kg (RI821-RI822-RI823-RI824) .....	str. 5
7.2 Rozměry nosnost konstrukce 180/200 kg (RI825-RI826-RI827-RI828).....	str. 5
8. POPIS ČÁSTÍ.....	STR. 6
9. POPIS POHONNÝCH JEDNOTEK .....	STR. 6
9.1 Hydraulický pohon (150/180 Kg).....	str. 6
9.2 Elektrická souprava (150/200 kg) .....	str. 6
10. NÁVOD K MONTÁŽI ZVEDACÍ KONSTRUKCE (PRO VŠECHNY MODELY).....	STR. 6
11. NÁVOD K MONTÁŽI POHONU .....	STR. 7
11.1 Montáž hydraulického pohonu (platí pro RI821-RI823-RI825-RI827) .....	str. 7
11.2 Montáž elektrického pohonu (platí pro RI822-RI824-RI826-RI828) .....	str. 8
12. NÁVOD K OBSLUZE .....	STR. 9
12.1 Návod k obsluze hydraulických modelů RI821-RI823-RI825-RI827 .....	str. 9
12.2 Návod k obsluze elektrických modelů RI822-RI824-RI826-RI828.....	str. 9
13. UPOZORNĚNÍ .....	STR. 11
14. ČIŠTĚNÍ .....	STR. 11
15. ÚDRŽBA .....	STR. 11
16. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	STR. 12
17. PODMÍNKY LIKVIDACE .....	STR. 12
17.1 Upozornění pro správnou likvidaci výrobku podle směrnice 2012/19/EU...	str. 12
17.2 Zpracování vybitých baterií (směrnice 2006/66/ES) .....	str. 12
18. ZÁRUKA.....	STR.13
18.1 Záruka na dobíjecí baterie .....	str. 13
18.2 Opravy.....	str. 13
18.3 Náhradní díly .....	str. 13
18.4 Ustanovení o výjimkách .....	str. 13

**CE** Zdravotnický prostředek třídy I  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745  
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

## 1. KÓDY

### HYDRAULICKÝ PACIENTSKÝ ZVEDÁK

- RI821** - HYDRAULICKÝ pohon s nosností 150 kg a nožním otevíráním pedálem  
**RI823** - HYDRAULICKÝ pohon s nosností 150 kg a otevíráním pákou  
**RI825** - HYDRAULICKÝ pohon s nosností 180 kg a nožním otevíráním pedálem  
**RI827** - HYDRAULICKÝ pohon o nosnosti 180 kg a otevíráním pákou

### ELEKTRICKÝ PACIENTSKÝ ZVEDÁK

- RI822** - ELEKTRICKÝ pohon s nosností 150 kg a nožním otevíráním pedálem  
**RI824** - ELEKTRICKÝ pohon s nosností 150 kg a otevíráním pákou  
**RI826** - ELEKTRICKÝ pohon s nosností 200 kg a nožním otevíráním pedálem  
**RI828** - ELEKTRICKÝ pohon s nosností 200 kg a otevíráním pákou

## 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali patientský zvedák z řady **MUEVO by MOPEDIA** společnosti MORETTI S.p.A. Jejich design a kvalita zaručují maximální pohodlí, bezpečnost a spolehlivost. Zvedáky **MUEVO by MOPEDIA** od společnosti MORETTI S.p.A. byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické a správné používání. Tato uživatelská příručka obsahuje drobné typy pro správné používání vybraného zvedáku a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím zvedáku pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

## 3. URČENÉ POUŽITÍ

Pacientské zvedáky řady **MUEVO by MOPEDIA** jsou určeny pro zvedání a přemísťování osob s pohybovými obtížemi za pomoci obsluhy, která ovládá ovládací prvky. Nemůže je používat jedna osoba. Společnost MORETTI S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním přístroje nebo jiným použitím, než je uvedeno v tomto návodu.

## 4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA a patřící do skupiny MOPEDIA LIFT jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745 ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

**Poznámka:** Kompletní kódy výrobků, registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy naleznete v EU prohlášení o shodě, které společnost MORETTI SPA vydává a zpřístupňuje svými kanály.

## 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ



### POZOR!

Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění osob.

- Před každým použitím se seznamte s tímto návodem ke správnému používání přístroje a věnujte zvláštní pozornost části Údržba a Upozornění.
- O správném používání přístroje se poradte se svým lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost příslušenství je dána opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Nepřekračujte maximální povolenou kapacitu.
- Uživatel a/nebo pacient by měl veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti s prostředkem, hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

## 6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečný identifikátor zařízení



Značka CE



Výrobce



Výrobní šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnický prostředek



Podmínky likvidace



Varování



Datum výroby



Likvidace výrobku podle směrnice ES 19/2012





Ochrana před prachem a stříkající vodou



Příložná část typu B



## 7. ROZMĚRY

### 7.1 Rozměry konstrukce nosnost 150 kg (RI821-RI822-RI823-RI824)

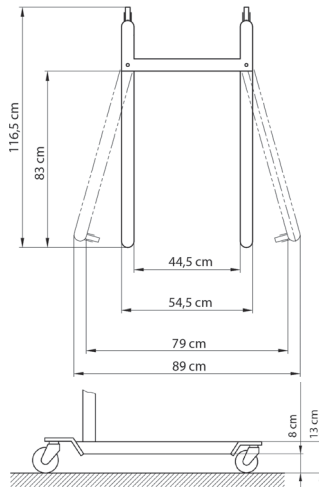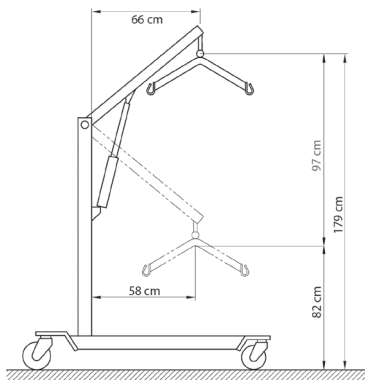


- Hmotnost patientského zvedáku s malým rámem a elektrickou sadou: **35 kg**
- Hmotnost patientského zvedáku s malým rámem a hydraulickou sadou: **33 kg**

### 7.2 Rozměry konstrukce nosnost 180/200 kg (RI825-RI826-RI827-RI828)

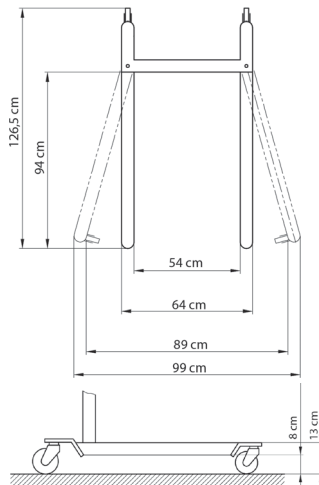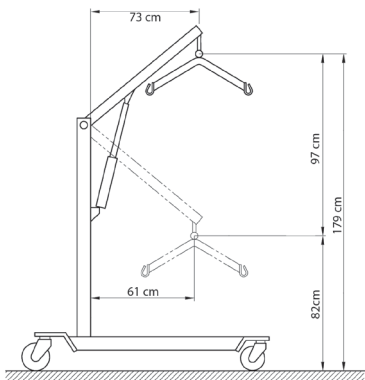

- Hmotnost patientského zvedáku s velkým rámem a elektrickou sadou: **36 kg**
- Hmotnost patientského zvedáku s velkým rámem a hydraulickou sadou: **34 kg**

## 8. POPIS DÍLŮ

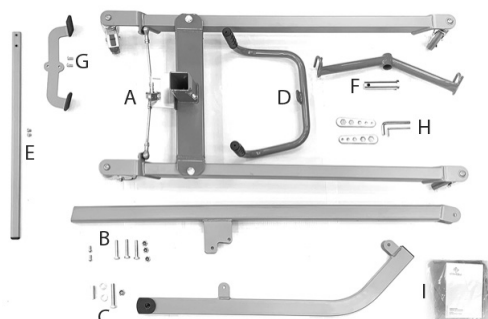

- A - základna s kolečky
- B - sloupek
- C - rameno
- D - rukojeť
- E - páka (pouze pro RI823-RI824-RI827-RI828)
- F - tyč s nastavcem na závěs
- G – pedál (pouze pro RI821-RI822-RI825-RI826)
- H - montážní příslušenství
- I - standardní postroj

(Obrázky jsou ilustrační)

## 9. POPIS POHONNÝCH JEDNOTEK


### 9.1 Hydraulický pohon (150/180 kg)

Platí pro modely RI821-RI823-RI825-RI827)



### 9.2 Elektrická souprava (150/200 kg)

Platí pro modely RI822-RI824-RI826-RI828

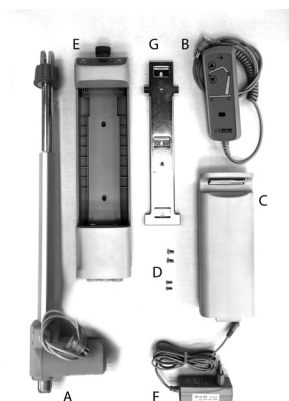


- A - pohon TiMOTION
- B - Dálkové ovládání TiMOTION
- C - Baterie TiMOTION
- D - Šrouby pro zajištění řídicí jednotky
- E - Řídicí jednotka TiMOTION
- F - adaptér nabíječky baterií
- G - podpora řídicí jednotky

## 10. MONTÁŽNÍ NÁVOD KONSTRUKCE PACIENTSKÉHO ZVEDÁKU (PRO VŠECHNY MODELÝ)


1. Vyšroubujte šroub v základně sloupku. (obr. 4)
2. Vložte sloupek do dutiny v podstavci (obr. 4).
3. Vložte šroub upevňující sloupek do základny a pevně jej zašroubujte. (obr. 4)
4. Vložte pouzdro do otvoru ramene určeného pro zasunutí do kloubu sloupku (obr. 5a).

4. Připevněte rameno ke sloupu pomocí dodaných šroubů. (Obr. 5b)
5. Umístěte rukojeť na sloupek a upevněte ji pomocí 2 šroubů. (Obr. 6)

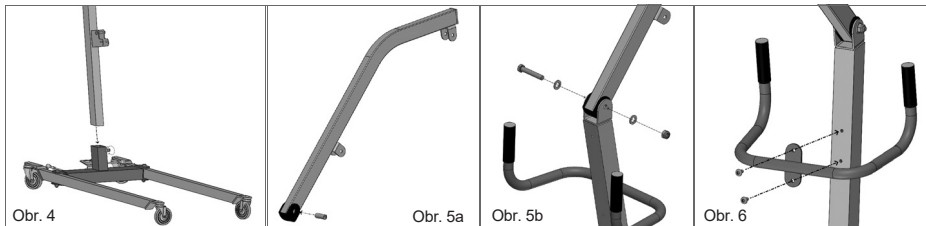

(Obrázky jsou ilustrační)


6. Umístěte vahadlo do příslušného háku na konci zvedacího ramene. (Obr. 7)
- 7a. Nasadte páčku pro otevření základny a zajistěte ji šrouby. (Obr.8a - pro modely RI823-RI824-RI827-RI828)
- 7a. Nasadte nožní pedál, abyste otevřeli základnu, a zajistěte ji šrouby. (Obr.8b - pro modely RI821-RI822-RI825-RI826)
8. Konstrukce bude kompletně smontována; nainstalujte hydraulický/elektrický pohon odpovídající zvolenému typu výtahu.

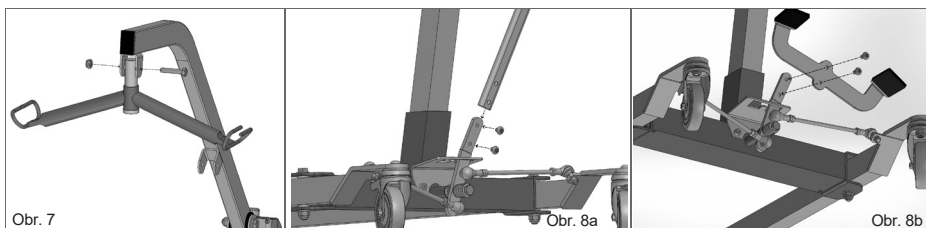

(Obrázky jsou ilustrační)

## 11. NÁVOD K MONTÁŽI POHONŮ


### 11.1 Montáž hydraulického pohonu (platí pro RI821-RI823-RI825-RI827)

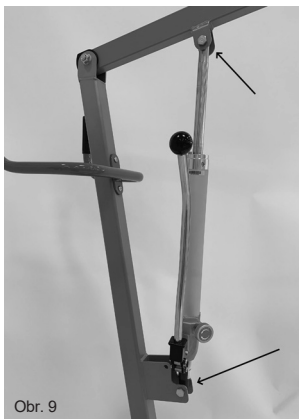

(Obrázky jsou ilustrační)


1. Umístěte hydraulický pohon podle obrázku a pevně jej zajistěte nahoře a dole pomocí šroubů a samojistících matic. (Obr. 9)

## 11.2 Montáž elektrického pohonu (platí pro RI822-RI824-RI826-RI828)

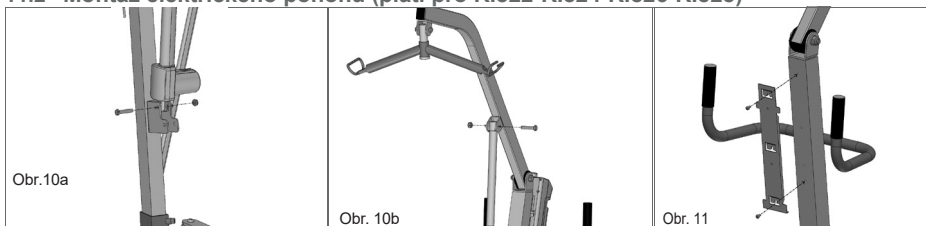

(Obrázky jsou ilustrační)

1. Odstraňte dva šrouby na rameni a sloupku, které slouží k upevnění pohonu. Vložte pohon a zajistěte jej dvěma dříve odstraněnými šrouby. (Obr. 10a - 10b)
2. Připevněte podpěrný držák řídicí jednotky ke sloupu pomocí dodaných šroubů a otvorů. (Obr. 11)
3. Nasadte řídicí jednotku na nově namontovaný držák shora dolů a zajistěte ji šrouby. (Obr. 12a-12b)
4. Vložte baterii do řídicí jednotky. (Obr. 13a-13b)
5. Připojte konektor pohonu k centrálnímu kanálu řídicí jednotky a dálkový ovladač k pravému kanálu. (Obr. 14). Elektrický pohon je kompletně sestaven a připraven k použití (obr. 15).

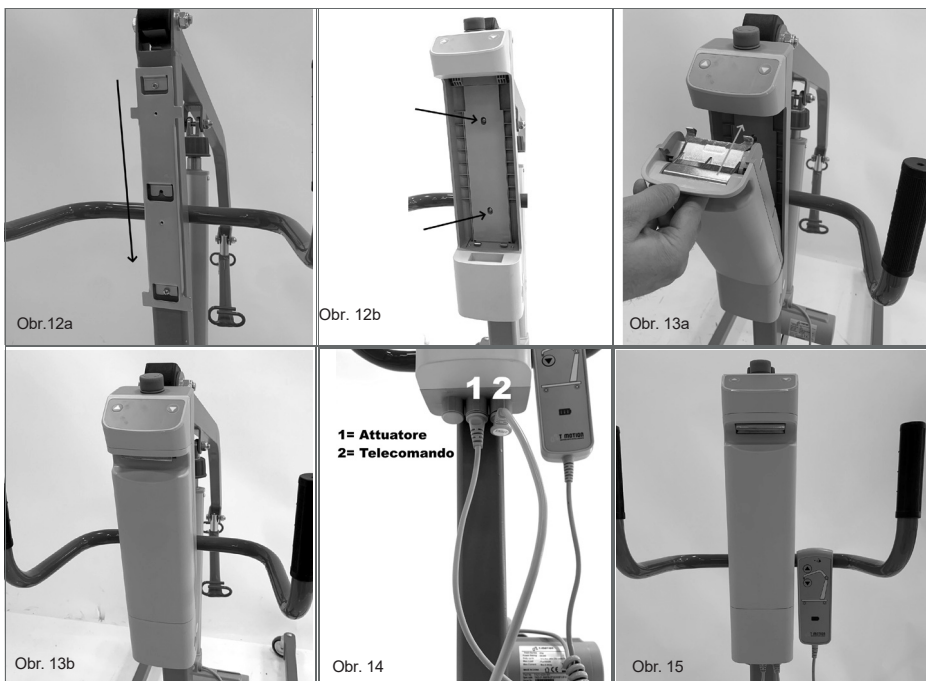

(Obrázky jsou ilustrační)

**Poznámka:** Před použitím zkontrolujte, zda není stisknuto nouzové tlačítko, a pokud je aktivováno, uvolněte jej, aby se zapnula řídicí jednotka.



## 12. NÁVOD K POUŽITÍ

### 12.1 Návod k obsluze hydraulických modelů RI821-RI823-RI825-RI827

1. Před zvednutím co nejvíce roztáhněte nohy podstavce:
  - lehce přitáhněte nohou otevírací pedál směrem k sobě, poté jej otočte doleva a zajistěte v otevřené poloze (pro RI821-RI825).
  - lehce zatáhněte otevírací páčku směrem k sobě, pak ji otočte doleva a zajistěte ji v otevřené poloze (pro RI823-RI827). (Stejně operace proveďte v opačném pořadí, abyste základnu vrátili do uzavřeného stavu.)
2. Zabrzděte brzdy zadních kol
3. Udržujte pacienta ve středu mezi nohama podstavce a vždy čelem k ošetřovateli.
4. Pečlivě připevněte popruhy k ramenu zvedáku.
5. Ujistěte se, že je ventil hydraulického čerpadla zcela uzavřen (otočte jej ve směru "ZAVŘÍT").
6. Použijte čerpací páku hydraulického pohonu, abyste zahájili zvedání.
7. **VŽDY KONTROLUJTE SPRÁVNOU POLOHU PACIENTA V CELÉM ROZSAHU POHYBU!**
8. Zvedněte pacienta do potřebné výšky a udržujte ho v přední poloze směrem k ošetřovateli.
9. Odblokujte zadní kola a přeneste pacienta.
10. Před zahájením sestupu pacienta znovu zablokujte zadní kola.
11. Zahajte sestup pacienta pomalým otáčením ventilu na hydraulickém čerpadle ve směru "OTEVŘENO".

**Poznámka: Pro pomalé klesání ventil mírně otevřete; chcete-li zvýšit rychlost, otočte jím více ve směru "OTEVŘENO".**

12. **VŽDY KONTROLUJTE SPRÁVNOU POLOHU PACIENTA V CELÉM ROZSAHU POHYBU!**

**BĚHEM SESTUPU VŽDY POMOZTE PACIENTOVI ZKONTROLOVAT SPRÁVNOU POLOHU SEDU!**

### POZOR!

Během sestupu zabraňte tomu, aby pacient narazil na překážku, která mu brání v pohybu dolů. V takovém případě pacienta opět přesuňte nahoru a odstraňte příčinu překážky sestupu.

### 12.2 Návod k obsluze elektrických modelů RI822-RI824-RI826-RI828

#### POZOR!



PŘI PRVNÍM POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZVEDÁKU PRO PACIENTY DOPORUČUJEME NABÍJET BATERIE PŘIBLIŽNĚ 6 AŽ 8 HODIN. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE BATERIE NABITÁ.

1. Před zvednutím co nejvíce roztáhněte nohy podstavce:
  - lehce přitáhněte nohou otevírací pedál směrem k sobě, poté jej otočte doleva a zajistěte v otevřené poloze (pro RI822-RI826).
  - lehce zatáhněte otevírací páčku směrem k sobě, pak ji otočte doleva a zajistěte ji v otevřené poloze (pro RI824-RI828). (Stejně operace proveďte v opačném pořadí, abyste základnu vrátili do uzavřeného stavu.)
2. Zabrzděte brzdy zadních kol
3. Udržujte pacienta ve středu mezi nohama podstavce a vždy čelem k ošetřovateli.
4. Pečlivě připevněte popruhy k ramenu zvedáku.
5. Zvedněte pacienta stisknutím tlačítka se šipkou nahoru na ovladači
6. **VŽDY KONTROLUJTE SPRÁVNOU POLOHU PACIENTA V CELÉM ROZSAHU POHYBU!**

7. Zvedněte pacienta do potřebné výšky a držte ho v přední poloze směrem k ošetřovateli.
8. Odblokujte zadní kola a přeneste pacienta.
9. Před zahájením sestupu pacienta znovu zablokujte zadní kola.
10. Chcete-li pacienta spustit, stiskněte tlačítko se šipkou dolů.
11. **VŽDY KONTROLUJTE SPRÁVNOU POLOHU PACIENTA V CELÉM ROZSAHU POHYBU!**

### **BĚHEM SESTUPU VŽDY POMOZTE PACIENTOVI ZKONTROLOVAT SPRÁVNOU POLOHU SEDU!**

#### **POZOR!**

Během sestupu zabraňte tomu, aby pacient narazil na překážku, která brání jeho pohybu dolů. V takovém případě nechte pacienta znovu vystoupat a odstraňte příčinu, která brání sestupu.

#### **AUTOMATICKÁ FUNKCE PROTI PŘIMÁČKNUTÍ**

V elektrické soupravě je automatická funkce proti přimáčknutí pacienta, která zastaví spouštění zvedacího ramene v případě náhodného kontaktu pacienta s překážkou.



#### **NOUZOVÉ ZASTAVENÍ**

Na řídicí jednotce je červené tlačítko "STOP", po jehož stisknutí se okamžitě deaktivují všechny ovládací prvky. Chcete-li obnovit provoz, otáčejte červeným knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud necvakne směrem nahoru a nevrátí se do výchozí polohy.

#### **NOUZOVÉ OVLÁDÁNÍ**

Na řídicí jednotce jsou dvě tlačítka (jedno se šipkou nahoru a druhé se šipkou dolů), kterými lze

lze použít místo dálkového ovladače k provádění operací v případě poruchy samotného dálkového ovladače.

#### **MECHANICKÉ SPOUŠTĚNÍ Pohonu**

Pokud se používá ruční/mechanické spouštění, zajistěte, aby se provádělo za podmínek naprosté bezpečnosti pro pacienta. Chcete-li aktivovat ruční/mechanické spouštění, stáhněte červený kroužek v horní části pohonu a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Po dokončení spouštění vraťte červený kroužek do výchozí polohy.

#### **INDIKACE STAVU NABÍTÍ BATERIE**

Stav nabití baterie je indikován 3 LED diodami. Tento indikátor se nachází na dálkovém ovladači. Tři svítící diody LED signalizují, že je baterie plně nabitá, zatímco jedna svítící dioda LED signalizuje, že je baterie vybitá a je třeba ji dobít.

Standardní baterie v novém stavu, s plným nabitím a venkovní teplotou 20 °C při používání a skladování má kapacitu více než 40 cyklů při zatížení 200 kg; se snižujícím se zatížením se zvyšuje kapacita baterie, a tedy i počet cyklů, které lze provést.

#### **JAK DOBÍJET BATERIE**

- Připojte adaptér k síťové zásuvce a poté ke vstupu řídicí jednotky po sejmutí ochranné krytky.
- Na nabíjecím adaptéru je umístěna kontrolka LED, která během fáze nabíjení je oranžová. Nabíjejte baterii, dokud se kontrolka LED nerozsvítí zeleně
- Před použitím výtahu vždy nezapomeňte odpojit adaptér pro dobíjení baterii!
- Před použitím zvedáku nabíjejte baterie alespoň 6 hodin.

## NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání je k řídicí jednotce připojeno pomocí výsuvného kabelu.



### Tlačítka na dálkovém ovladači:

1. tlačítko "nahoru" pro zvednutí
2. tlačítko "dolů"

### Signály dálkového ovládání:

3. kontrolka přetížení: výtah je vybaven zařízením pro kontrolu přetížení, které zastaví pohyb, pokud je překročen práh přetížení, a vydává vizuální i akustický signál.
4. LED dioda indikující stav nabití baterie

## 13. UPOZORNĚNÍ

- Zvedák je zařízení, které umožňuje krátké přesuny pacienta s pohybovými obtížemi, například z lůžka na invalidní vozík nebo pohodlné křeslo a naopak. Zvedák by neměl být používán k přepravě pacienta.
- Při zvedání pacienta se ujistěte, že jsou nohy základny co nejvíce rozevřené, ovládací páka je bezpečně zajištěna ve své poloze a brzdy zadních kol jsou zablokovány.
- Během přejezdu se vyhněte překážkám, které by mohly způsobit převrácení vozidla.
- Použití zvedáků pro pacienty popsaných v této příručce v kombinaci s popruhy Moretti, které jsou součástí příslušenství, umožňuje zvedání a zdvihání pacientů z podlahy.



### POZOR!

Vždy zkontrolujte dobrý stav popruhů. Nepoužívejte popruhy, které vykazují známky poškození nebo opotřebení.

## 14. ČIŠTĚNÍ

K čištění závěsů a konstrukce použijte roztok stejného množství alkoholu a neutrálního mýdla smíchaného s vodou.

## 15. ÚDRŽBA

- Je mimořádně důležité, aby byl výtah před každým použitím zkontrolován:
- Zejména zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a svorníky řádně dotaženy.
- zda se výtah může volně pohybovat s neaktivními brzdami kol.
- Zkontrolujte správnou funkci brzd zadních kol.
- Je velmi důležité pravidelně kontrolovat, zda jsou připojovací kolíky a jejich pojistné kroužky jsou správně uspořádány (čepy spojují pohon v horní a dolní části výtahu a vahadlo, kde je připojen závěs).
- Mechanické díly je třeba mazat kapkou oleje, aby se podpořila hladkost a odolnost proti opotřebení. Zvláštní pozornost věnujteVěnujte pozornost mechanickému roztahovači nohou zvedáku pacienta. Mazání podle výše uvedených pokynů každé dva až tři měsíce.

## 16. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství naleznete vždy v katalogu MORETTI Master.

Příslušenství

**Cod.RP828** Rám nosítek pro patientské zvedáky (max. nosnost 150 kg)

**Cod.BLD500-BLC250** Váhy pro patientské zvedáky třídy III

**Cod.RP881** Standardní závěs se "základní" opěrkou hlavy

**Cod.IM100-IM101** Standardní závěs bez opěrky hlavy

**Cod.IM110-IM111** Standardní závěs s opěrkou hlavy

**Cod.IM120** Kontrolní závěs s dlahami

**Cod.IM140** Hygienický závěs bez opěrky hlavy

**Cod.IM141** Hygienický závěs s opěrkou hlavy

**Cod.IM150** Kontrolní závěs pro amputované pacienty

**POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORETTI. JINAK NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEHODY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM.**

## 17. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje zařízení zlikvidovat prostřednictvím obecních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

### 17.1 Upozornění pro správnou likvidaci výrobku v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU.

Po skončení životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s komunálním odpadem. Lze je odevzdat ve zvláštních sběrných střediscích zřízených obecními úřady nebo u prodejců, kteří tuto službu poskytují. Oddělená likvidace výrobku zabraňuje možným negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví v důsledku nevhodné likvidace a umožňuje využití materiálů, z nichž je vyroben, a tím dosažení významných úspor energie a zdrojů. Pro zdůraznění povinnosti odděleného nakládání s elektromedicínským zařízením je výrobek označen přeškrtnutou popelnicí na kolečkách.

### 17.2 Zpracování použitých baterií (směrnice 2006/66/ES)

Symbol na výrobku označuje, že baterie by neměly být považovány za běžnou součást vybavy domovní odpad. Zajištění správné likvidace baterií pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a zdraví, které by jinak mohly být způsobeny jejich nesprávnou likvidací. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Použité baterie odevzdejte k recyklaci na určených sběrných místech. Podrobnější informace o likvidaci vybitých baterií nebo výrobku získáte na místním obecním úřadě, v místní službě pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.

## 18. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné použití výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti neodpovídá za žádné škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání. Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo závady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v případě potřeby), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

### 18.1 Záruka na dobíjecí baterie

Na originální a náhradní baterie se vztahuje záruka 90 (devadesát) dnů na funkčnost a 6 (šest) měsíců na výrobní vady nebo v souladu se zákonem. Pokud se plně nabitá baterie nepoužívá déle než tři po sobě jdoucí měsíce, záruka automaticky zaniká. Pokud jsou zcela vybité baterie ponechány nepoužívané déle než tři po sobě jdoucí dny, záruka automaticky zaniká.

### 18.2 Opravy

V případě, že se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit záruční výrobek, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve svých prostorách. Náklady na práci související s opravou výrobku mohou být účtovány společností Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje. Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na které se nevztahuje záruka, hradí v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne převzetí opraveného výrobku. Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

### 18.3 Náhradní díly

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne obdržení náhradního dílu.

### 18.4 Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být stanoveny zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země nepovolují omezení trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LISTINA**

Produkt \_\_\_\_\_

Zakoupeno dne \_\_\_\_\_

Prodejce \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_

Prodáno do \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

MADE IN ITALY

## POZNÁMKY