



MOPEDIA®



RP418



RP420

**NÁSTAVEC NA WC CENTRÁLNÍ UCHYCENÍ
RP418**

**NÁSTAVEC NA WC CENTRÁLNÍ UCHYCENÍ S MADLY
RP420**

Návod k obsluze

Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
MONTÁŽ.....	1
VAROVÁNÍ	2
ČIŠTĚNÍ	2
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	2
VAROVÁNÍ	2
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:.....	2
ZÁRUKA.....	3

OZNAČENÍ

RP418 Nástavec na WC centrální uchycení 12 cm

RP20 Nástavec na WC centrální uchycení s madly 13 cm

ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili nástavec na WC značky MOPEDIA, který je určen jako podpora pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jejich design a kvalita zaručují maximální komfort a bezpečnost. Nástavce značky MOPEDIA jsou navrženy a vyrobeny tak, aby uspokojily všechny vaše potřeby. Tento návod k obsluze obsahuje několik užitečných tipů pro správné používání a některé důležité rady pro vaši bezpečnost. V případě pochybností kontaktujte prodejce, který vám bude schopen správně pomoci.

ÚČEL POUŽITÍ

Nástavec na WC je zařízení, které pomáhá lidem s omezenou schopností pohybu při vykonávání potřeby. Výrobce/ dodavatel nenesе jakoukoliv zodpovědnost za možné následky vzniklé nesprávným používáním zakoupeného výrobku a za jakékoliv neautorizované úpravy výrobku.


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodáváný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NENÍ POVOLENO používat diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

MONTÁŽ

1. Namontujte madla na příslušné místo. Zkontrolujte, zda jsou správně namontována. (obr.1) (pouze u modelu RP420)
2. Ujistěte se, že vnitřní hrana je umístěna dovnitř toalety a vnější hrana je umístěna směrem ven. Pamatujte, že nástavec musí být umístěn zároveň s toaletní mísou.
3. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, dokud není nástavec dobře utažen a nemůže se pohybovat. (obr.2)

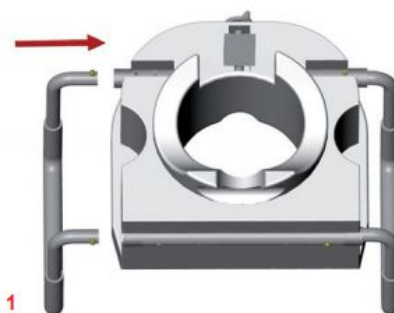


obr. 1

VAROVÁNÍ:

Systém bočních svorek byl speciálně navržen tak, aby umožňoval snadné utažení. Proto nepokračujte v utahování, jakmile ucítíte odpor.

VAROVÁNÍ

Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Dbejte zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí.

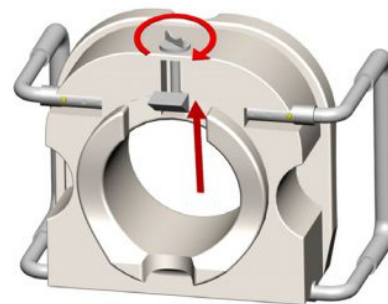

obr. 2

ČIŠTĚNÍ

Všechny části nástavce mohou být čištěny mýdlem a teplou vodou.

OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobce vylučuje jakoukoliv zodpovědnost z možných následků vzniklých nesprávným používáním zakoupeného výrobku a jakýchkoliv neautorizovaných úprav výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu obsahu tohoto dokumentu bez jakéhokoliv předchozího upozornění.

VAROVÁNÍ

Nástavec by neměli používat ti, jejichž tělesná hmotnost je více než 110 kg.

Ujistěte se, zda nástavec je bezpečně umístěn a na správném místě.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

RP418

Max. nosnost: 110 kg

Vnější rozměry: 43 x 41,5 x 20

Vnitřní okraj: 27,5 x 23,5 cm

Rozměry nástavce: 43 x 41,5 cm

Výška nástavce: 12 cm

Hmotnost 2 kg

RP420

Max. nosnost: 110 kg

Vnější rozměry: 52 x 43 x 38,5 cm

Vnitřní okraj: 27,5 x 23,5 cm

Výška područek: 20 cm

Rozměry nástavce: 38 x 41 cm

Výška nástavce: 13 cm

Hmotnost: 2,5 kg

ZÁRUKA

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení, které je potvrzeno účtenkou nebo fakturou. Distributor si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit potřebné díly v materiálech nebo zpracování bez jakýchkoliv poplatků. Záruka se nevztahuje na škodu vzniklou s užíváním v rozporu s návodem k obsluze, nehodou, úmyslným poškozením při montáži/demontáži. V Případě, že je potřeba výrobek opravit nebo vykazuje vady, neprodleně oslovte vašeho dodavatele a zároveň pro uplatnění záruky předložte doklad o koupi.



Stamed s.r.o.

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.cz

email: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň