



MOPEDIA

MA RP5XX 01 A_02-2014

HLINÍKOVÁ CHODÍTKA NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. KÓDY	str.2
2. ÚVOD	str.2
3. ÚČEL VÝROBKU.....	str.2
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	str.2
5. VAROVÁNÍ	str.3
5.1 Obecná varování	str.3
5.2 Uživatelská varování.....	str.3
5.3 Nosnost.....	str.3
5.4 Upozornění pro sestavení.....	str.3
6. PŘED POUŽITÍM.....	str.4
7. INSTRUKCE K SESTAVENÍ	str.4
7.1 Před sestavením	str.4
7.2. Sestavení modelu RP520.....	str.4
7.2.1 Složení chodítka.....	str.4
7.2.2 Nastavení rukojetí	str.4
7.2.3 Nákupní košík.....	str.4
7.2.4 Sedadlo.....	str.4
8. BRZDY	str.5
8.1 Jak zabrzdit.....	str.5
8.2 Uzamčení brzdy (ruční brzda).....	str.5
9. PRAKTICKÉ POUŽITÍ.....	str.5
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	str.5
11. ČIŠTĚNÍ	str.5
12. ÚDRŽBA KOL	str.5
13. TECHNICKÉ ÚDAJE	str.5
14. NÁHRADNÍ DÍLY / PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	str.6
15. ZÁRUKA.....	str.6
15.1 Opravy.....	str.6
15.2 Náhradní díly	str.6
15.3 Osvobozující klauzule.....	str.6

Zdravotnický prostředek tř. I podle směrnice 93/42 / EHS
a následných změn

1. Kódy

RP520 4-kolové hliníkové chodítko se sedačkou ATLANTE
RP525 4-kolové hliníkové chodítko se sedačkou a podnožkou GAYA
RP530 4-kolové hliníkové chodítko se sedačkou OCEANO
RP535 44-kolové hliníkové chodítko se sedačkou URANO

2. Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili chodítko z řady MOPEDIA, které pomáhá lidem s obtížemi v pohybu doma, na cestách i v každodenním životě. Výroba byla provedena podle nejvyšší kvality a bezpečnostních norem v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC).

Tento návod k obsluze obsahuje pokyny ke správnému používání a bezpečnosti. Doporučujeme si pečlivě přečíst tento návod k použití. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Zkontrolujte všechny součásti a ověřte, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě poškození při přepravě výrobek nepoužívejte. Pro další pokyny se obraťte na prodejce.

3. Účel výrobku

Toto chodítko je vhodné pro osoby s pohybovými problémy. Může být použito i jako pomocný prostředek k usnadnění ambulantní péče. Rozhodně ji nemohou používat lidé se zjevnou poruchou ruky a ramene, a to i lidé s poruchou rovnováhy. Chodítko lze použít v interiéru i exteriéru. Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde se všechna kola dotýkají povrchu. Nesmí být používáno na kamenném povrchu ani na šikmé ploše, chodítko pak může být nestabilní. Zařízení není určeno k převážení lidí nebo věcí.



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a neoprávněné manipulace nebo změny na rámu výrobku. Výrobce může upravovat výrobek nebo návod k použití bez předchozího upozornění.

4. Prohlášení o shodě EC

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu chodítek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC). Výrobce zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42 / EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ NÁSTROJE.
3. Diskutovaná zařízení, NEJSOU URČENA PRO KLINICKÉ TESTOVÁNÍ.
4. Diskutovaná zařízení, jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I °.
6. NENÍ povoleno používat a instalovat zařízení s výjimkou povolení výrobce.

Výrobce ukládá technickou dokumentaci příslušným orgánům, aby prokázal shodu zařízení 92/42 / EHS.

7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42 / EEC).

5. Varování

5.1 Obecná varování

- NIKDY neinstalujte ani nepoužívejte přístroj dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokynům, obraťte se na obchodního zástupce nebo na technický personál před pokusem o instalaci tohoto zařízení, aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje;
- Chodítka by mělo být používáno pouze pacienty s dostatečnou motorikou, která zajistí bezpečné použití přístroje;
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem o správném nastavení a správném použití;
- Lékař nebo terapeut by měl posoudit nastavení výšky maximální podpory, správnou aktivaci brzdy a obecné sestavení;
- Chodítka nejsou určena k použití jako samohybné zařízení.

5.2 Uživatelská varování

- Zajistěte, aby byl kabel brzdy správně nastaven;
- Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili volnému ohnutí kabelu;
- Porušení těchto základních pravidel může způsobit osobní újmu;
- Chodítka lze používat pouze na tvrdém a rovnoměrném povrchu. Nepoužívejte přístroj pro stoupání po schodech;
- Udržujte rovnováhu vždy na obou madlech;
- Věnujte zvláštní pozornost při pohybu po vlhkém, ledovém nebo zasněženém povrchu;
- Přístroj nepřetěžujte;
- Nepoužívejte sedačku (pokud je k dispozici) pro přepravu osob nebo majetku, sedadlo je určeno pouze pro uživatele a s aktivovanou parkovací brzdou;
- Všechna kola musí být během používání stále v kontaktu s povrchem, aby se zajistilo správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;
- Před použitím sedadla musí být chodítka zabrzděna.

Poznámka: Pokud je chodítka používáno jako opora v nehybné poloze, musí být ruční brzda zablokována.

5.3 Nosnost

- Chodítka může být používáno osobou s hmotností do 136 kg, VČETNĚ tašky;
- Max. nosnost tašky je 5 kg.

5.4 Upozornění pro sestavení

- Ověřte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojeti správně zasunuty do rámu a pevně zajištěny pomocí zajišťovacích koleček zablokovaných do držáku pomocí hlavních křídlových matic a knoflíků bez pohybu;
- Obě rukojeti jsou bezpečně zajištěny v hlavní opěrné části s křídlovými maticemi a knoflíky;
- Abyste se vyhnuli poškození konstrukce, nezavěšujte nic na rám chodítka. Poškození rámu může způsobit zranění;
- Při rozkládání a skládání chodítka dbejte opatrnosti a zamezte zachycení prstů a / nebo oděvu.

6. Před použitím

1. Vždy zkontrolujte:
2. Všechny části chodítka jsou bezpečně zajištěny;
3. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené;
4. Ujistěte se, že sedadlo je řádně zajištěno;
5. Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zasunuto;
6. Zkontrolujte správnou funkci obou brzd.

7. Instrukce k sestavení

71 Před sestavením

Rozbalte produkt a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození. V případě, že je chodítko poškozeno, kontaktujte nejbližšího prodejce.

72 Sestavení modelu RP520

- Rozložte chodítko roztažením rámu a nohou.
- Zasuňte trubky rukojetí do rámu.
- Otáčejte zajišťovacími šrouby až do úplného utažení.
- Šestihranný otvor je určen k umístění hlavy šroubu.

721 Složení chodítka

Zatáhněte za postranní tyče a přisuňte přední část chodítka.

722 Nastavení rukojetí

Nastavte výšku rukojetí pomocí postranních knoflíků. Odšroubujte knoflík, umístěte rukojeti do požadované výšky, otáčejte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a opět jej utáhněte. Zopakujte s druhou rukojetí a ujistěte se, že obě rukojeti jsou umístěny ve stejné výšce.



VAROVÁNÍ!

Ujistěte se, že pozice rukojetí je v souladu se směrem pohybu chodítka. Pokud rukojeť nezůstane rovná, hrozí nebezpečí, že se chodítko bude třást nebo se převrhne, zvláště pokud jej tlačíte větší silou.

723 Nákupní košík

Nákupní košík je připevněn pomocí dvou háků k rámu chodítka. Košík je umístěn ve spodní části chodítka.



VAROVÁNÍ! Používejte koš pouze pro drobné předměty.

Nepřepiňujte košík, aby nedošlo k nerovnováze a riziku převrácení.

724 Sedadlo

Před usednutím umístěte chodítko na rovnou a pevnou plochu a pak zajistěte brzdy. Ujistěte se, zda jsou brzdy pevně zajištěny a zda je chodítko ve stabilní poloze.



VAROVÁNÍ! Sedněte tak, abyste rozložili váhu na sedadlo. Nesedejte pouze k jedné straně.

8. Brzdy

81 Jak zabrzdít

Chcete-li zabrzdít chodítko, zatáhněte brzdovou páčkou prsty směrem nahoru, až se chodítko zpomalí nebo se zastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu, uvolněte páčku brzdy.

Uzamčení brzdy

Stiskněte brzdovou páčku dlaní. Když uslyšíte "kliknutí" kolečka jsou zablokována.



VAROVÁNÍ! Pokud se s chodítkem nepohybujete, vždy zabrzděte kola.

Odblokování kol

Zatáhněte za obě páčky brzdy, dokud se brzdy neuvolní.

9. Praktické použití

Začněte tlačit chodítko, když jste ve vzpřímené poloze a s oběma rukama na rukojeti;

- Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché, aby se zabránilo nebezpečí sklouznutí;
- Při chůzi udržuje vzpřímenou pozici s očima směřujícími dopředu a ne dolů;
- Netlačte chodítko příliš daleko od těla, což může způsobit pády a nesprávné zatížení.
- Nepoužívejte chodítko k překonání překážek vyšších než 20 mm;
- Při použití venku dáváte přednost chodníkům;

10. Čištění a údržba

Přístroje MOPEDIA jsou pečlivě zkontrolovány a nesou značku CE. Pro bezpečnost uživatele doporučujeme kontrolu výrobcem nebo oprávněnou osobou nejméně jednou za dva roky. Při opravách je třeba použít pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Doba životnosti výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

11. Čištění

Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní nebo ostré předměty, mohlo by dojít k poškození výrobku.

12 Údržba kol

1. Očistěte kola teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem.
2. Kola pravidelně mažte

13. Technické údaje

ATLANTE										
Kód	RP520									
Sedadlo	38x34 cm									
Rám	Hliník									
Hmotnost a rozměry										
RP520	69	84 99	56	61	44	36	7,4	20	20	136
			56	61	44	36	7,4	20	20	MAX Weight 13

14. Náhradní díly/ příslušenství

Pro více informací kontaktujte distributora.

15. Záruka

Výrobce poskytuje záruku na materiál a výrobní vady 2 roky od data nákupu, s výjimkou možného vyloučení nebo omezení následujícím způsobem. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo změnami a záruka nebude platná, pokud se návod k použití přísně nedodrží. Správné zamýšlené použití je uvedeno v této příručce.

Výrobce není zodpovědný za následné škody, zranění nebo jakékoliv jiné následky způsobené v souvislosti s nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním zařízení. Výrobce nezaručuje škody způsobené následujícími příčinami: přírodní katastrofou, neoprávněnou údržbou nebo opravami, poruchami způsobenými problémy s dodávkou elektřiny (v případě potřeby), použitím náhradních dílů, které nejsou pokryty výrobcem, nesprávným použitím, změnami nepovolenými, poškozením při přepravě (odlišné od původní zásilky výrobce) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v příručce.

Záruka se nevztahuje na součásti, které jsou vystaveny běžnému opotřebení při správném používání zařízení.

15.1 Opravy

Záruční oprava: Pokud přístroj v průběhu záruční doby vykazuje závady na materiálu či výrobní vady, výrobce spolu s klientem posoudí, zda se na vadu vztahuje záruka, po důkladném zvážení, může opravit či vyměnit produkt ve svém servisním středisku či u autorizovaného distributora. V případě záruky mohou být náklady s pojené s opravou hrazeny výrobcem. Oprava či výměna neprodlužují ani neruší lhůtu původní záruky.

Oprava nekrytá zárukou: Produkt, který nepodléhá záruce, smí být doručen k opravě až po výslovném povolení zákaznického servisu výrobce. Pracovní a přepravní náklady jsou v případě nezáruční opravy plně hrazeny klientem či distributorem. Garance na nezáruční opravy je 6 měsíců od převzetí opraveného produktu klientem.

Závada nezjištěna: Zákazník bude informován o tom, pokud po vrácení a vyzkoušení přístroje nebyla zjištěna závada. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, poplatek za přepravu bude placen zákazníkem.

71 Náhradní díly

Originální díly podléhají záruce 6 měsíců od data převzetí.

72 Osvobozující klauzule

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.

**Stamed s.r.o.**

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.czemail: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň