



**MOPEDIA®**



 **Saturno**

## Čtyřkolové chodítka Saturno RP551

Návod k obsluze

# Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
ÚČEL VÝROBKU.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	1
VAROVÁNÍ .....	1
Obecná varování.....	1
Uživatelská varování.....	2
Nosnost.....	2
UPOZORNĚNÍ PRO SESTAVENÍ .....	2
PŘED POUŽITÍM.....	2
INSTRUKCE K SESTAVENÍ .....	3
Před sestavením .....	3
Složení chodítka.....	3
Instalace madel a nastavení madel .....	3
Instalace tašky .....	3
Sedadlo .....	4
Brzdy.....	4
Montáž .....	4
Zablokování kol.....	4
PRAKTICKÉ POUŽITÍ .....	4
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	4
Čištění.....	4
Údržba kol .....	4
TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	5
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	5
ZÁRUKA.....	5
OPRAVY .....	5
Záruční opravy.....	5
Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka .....	5
Neoprávněná reklamace .....	6
NÁHRADNÍ DÍLY .....	6
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE .....	6

## OZNAČENÍ

RP551 Čtyřkolové chodítko Saturno

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení chodítka pro seniory značky MOPEdia. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

## ÚČEL VÝROBKU

Toto chodítko je vhodné pro osoby s pohybovými obtížemi. Může být použito i jako pomocný prostředek k usnadnění ambulantní péče. Rozhodně ji nemohou používat lidé se zjevnou poruchou ruky a ramene, a to i lidé s poruchou rovnováhy. Chodítko lze použít v interiéru i exteriéru. Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde se všechna kola dotýkají povrchu. Nesmí být používáno na kamenném povrchu ani na šikmé ploše, chodítko pak může být nestabilní. Zařízení není určeno k převážení lidí nebo věcí.

## **UPOZORNĚNÍ:**

Nepoužívejte výrobek pro účely, které nejsou uvedeny v této příručce. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a neoprávněné manipulace nebo změny na rámu výrobku. Výrobce může upravovat výrobek nebo návod k použití bez předchozího upozornění.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu chodítek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje a prohlašuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE.
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÉ TESTOVÁNÍ.
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NENÍ povoleno používat a instalovat zařízení s výjimkou povolení výrobce. Výrobce ukládá technickou dokumentaci příslušným orgánům, aby prokázal shodu zařízení 92/42/EHS.
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

## VAROVÁNÍ

### Obecná varování

- NIKDY neinstalujte ani nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se na obchodního zástupce nebo na technický personál před použitím tohoto zařízení, aby nedošlo ke zranění nebo poškození výrobku.

- Chodítka by mělo být používáno pouze pacienty s dostatečnou motorikou, která zajistí bezpečné použití výrobku.
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem ohledně správného nastavení a použití
- Lékař nebo terapeut by měl posoudit správné nastavení výšky pro maximální podporu, správné používání brzdy a sestavení chodítka.
- Chodítka nejsou určena k použití jako samohybné zařízení

#### Uživatelská varování

- Zajistěte, správnou funkci kabelu brzdy;
- Ověřte správnou funkci brzdy po každém nastavení výšky, abyste zabránili deformaci kabelu;
- Porušení těchto základních pravidel může způsobit osobní újmu;
- Chodítka lze používat pouze na tvrdém a rovnoměrném povrchu. Nepoužívejte výrobek na schodech;
- Udržujte rovnováhu vždy pomocí obou madlech;
- Věnujte zvláštní pozornost při pohybu po vlhkém, ledovém nebo zasněženém povrchu;
- Výrobek nepřetěžujte;
- Nepoužívejte sedačku pro přepravu osob nebo věcí, sedadlo je určeno pouze pro uživatele a s aktivovanou parkovací brzdou;
- Všechna kola musí být během používání stále v kontaktu s povrchem, aby se zajistilo správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;
- Před použitím sedačky musí být chodítka zabrzděna.

**POZNÁMKA:** Pokud je chodítka používáno jako opora v nehybné poloze, musí být ruční brzda zablokována.

#### Nosnost:

- Chodítka může být používáno osobou s hmotností do 136 kg, VČETNĚ tašky;
- Max. nosnost tašky je 5 kg.

#### UPOZORNĚNÍ PRO SESTAVENÍ

- Ověřte, že jsou obě rukojeti správně zasunuty do rámu;
- Ověřte, že jsou obě rukojeti bezpečně zajištěny v hlavní opěrné části křídlovými maticemi;
- Abyste se vyhnuli poškození konstrukce, nezavěšujte nic na rám chodítka. Poškození rámu může způsobit zranění;
- Při rozkládání a skládání chodítka dbejte opatrnosti a zamezte zachycení prstů anebo oděvu.

#### PŘED POUŽITÍM:

- Zkontrolujte, zda všechny části chodítka jsou bezpečně zajištěny;
- Zkontrolujte, za jsou všechny šrouby utažené;
- Ujistěte se, že sedátko je řádně zajištěno;
- Zkontrolujte, zda je sedadlo správně zasunuto;
- Zkontrolujte správnou funkci obou brzd.

## INSTRUKCE K SESTAVENÍ

### Před sestavením

Rozbalte produkt a zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k žádnému poškození. V případě, že je chodítko poškozeno, kontaktujte nejbližšího prodejce.


### Montáž

Uvolněte bezpečnostní pojistku.

Při prvním sestavení chodítka je třeba namontovat rukojeti na určené místo na rámu chodítka.



Zatlačte na sedačku směrem dolů až dosáhnete krajní polohy, poté zajistěte pojistkou.

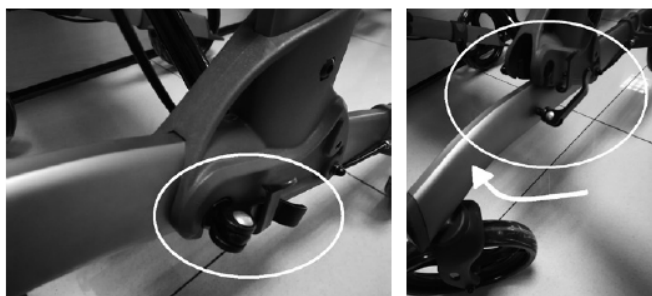

Pootočte rámem kola a zajistěte ve správné pozici páčkou dle obrázku.

### Složení chodítka:

Složte chodítko uchopením a nadzvednutím sedačky.

### Instalace madel a nastavení madel

Vložte rukojeti do rámu a zajistěte je ve správné pozici. Pomocí knoflíků můžete nastavit požadovanou výšku dle preferencí uživatele.

**Upozornění:** Rukojeti by měly být nastaveny do výšky zápěstí při vzpřímeném postoji s rukama podél těla. To zajistí správný úhel rukou cca 20° – 30°.

### Upevnění tašky

Zavěste tašku na sedadlo a uchyťte pomocí suchých zipů na chodítko.

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte tašku pouze pro drobné předměty. Nepřepřehňujte ji, aby nedošlo k nerovnováze a riziku převrácení. Nosnost tašky je 5 kg.

### Upevnění zádové opěrky

Vsuňte opěrku do předem připravených plastových držáků v rámu chodítka.

## Sedadlo

Před usednutím umístěte chodítko na rovnou a pevnou plochu a pak zajistěte brzdy. Ujistěte se, zda jsou brzdy pevně zajištěny a zda je chodítko ve stabilní poloze.

**UPOZORNĚNÍ:** Sedněte si tak, abyste rozložili váhu na sedadlo. Nesedejte pouze k jedné straně.

## Brzdy

Jak zabrzdit

Chcete-li zabrzdit chodítko, zatáhněte brzdovou páčku prsty směrem nahoru. Chcete-li pokračovat v pohybu, uvolněte páčku brzdy.

## Zablokování kol (ruční brzda)

Stiskněte brzdovou páčku dlaní. Když uslyšíte „kliknutí“ – kolečka jsou zablokována. Pro odblokování kol zdvihněte obě páčky brzdy, brzdy se uvolní.

**UPOZORNĚNÍ:** Pokud se s chodítkem nepohybujete, vždy zabrzděte kola.

## PRAKTICKÉ POUŽITÍ:

- S chodítkem jděte, pokud jste ve vzpřímené poloze a s oběma rukama na rukojetích;
- Ujistěte se, že jsou vaše ruce suché;
- Při chůzi udržujte vzpřímenou pozici s očima směřujícími dopředu a ne dolů;
- Netlačte chodítko příliš daleko od těla, což může způsobit pády a nesprávné zatížení;
- Nepoužívejte chodítko k překonání překážek vyšší než 20 mm;
- Při použití venku dávejte přednost chůzi po chodníku.
- Před překonáním malých překážek zvedněte opěrky nohy a poté nadzdvihněte předek chodítka.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Výrobky MOPEdia jsou pečlivě zkontrolovány a nesou značku CE. Pro bezpečnost uživatele doporučujeme kontrolu výrobcem nebo oprávněnou osobou nejméně jednou za dva roky. Při opravách je třeba použít pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Doba životnosti výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

### Čištění

Při čištění dílů používejte pouze vlhkou utěrku s neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní nebo ostré předměty, mohlo by dojít k poškození výrobku.

### Údržba kol

- Očistěte kola teplou vodou a jemným mycím prostředkem. Osušte je čistým hadříkem.
- Kola pravidelně promazávejte.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Saturno										
Kód produktu	RP551									
Sedadlo	44x24 cm									
Konstrukce	hliník									
RP551	70	115÷130 předloketní opora 100÷115	56	68	52	28	7,9	25	20	Max. nosnost 136

Pozn. – Tolerance +/- 0,5 cm

## NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro více informací kontaktujte prodejce.

## ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

## OPRAVY

### Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

### Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

### Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem, že výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

### NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

### OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



**Stamed s.r.o.**

telefon: +420 725 323 111

www: [www.stamed.cz](http://www.stamed.cz)

email: [obchod@stamed.cz](mailto:obchod@stamed.cz)

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň