



MOPEDIA®

CS

MAMA RP553_RP562A_RP562R 02 B_CS_12-2025

Hliníkové chodítko **NÁVOD K POUŽITÍ**

REJSTŘÍK

1. KÓDY.....	STR. 3
2. ÚVOD	STR. 3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STR. 3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	STR. 3
5. UPOZORNĚNÍ	STR. 4
5.1 Obecná upozornění	str. 4
5.2 Upozornění pro použití	str. 4
5.3 Upozornění ke stabilitě	str. 4
5.4 Upozornění pro montáž	str. 4
6. POUŽITÉ SYMBOLY	STR. 5
7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM	STR. 5
8. MONTÁŽNÍ POKYNY	STR. 5
8.1 Před montáží	str. 5
8.2 Montáž modelu RP562	str. 5
8.2.1 Otevírání a zavírání chodítka RP562.....	str. 6
8.2.2 Nafukování pneumatik RP562	str. 6
8.2.3 Instalace úložné tašky	str. 6
8.2.4 Sedadlo	str. 6
8.3 Montáž modelu RP553	str. 6
8.3.1 Instalace rukojetí a jejich seřízení	str. 7
8.3.2 Instalace úložné tašky	str. 7
8.3.3 Sedadlo	str. 7
8.3.4 Správa a údržba pneumatik RP562.....	str. 7
8.4 Překonávání malých překážek	str. 8
9. ZPŮSOBY POUŽITÍ.....	STR. 8
10. BRZDY.....	STR. 8
10.1 Použití brzdy.....	str. 8
10.2 Blokování brzd (parkovací brzda)	str. 8
12. ČIŠTĚNÍ.....	STR. 9
13. PÉČE O KOLA	STR. 9
14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	STR. 9
15. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE	STR. 9
16. NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ	STR. 10
17. ZÁRUKA.....	STR. 10
17.1 Opravy	str. 10
17.2 Náhradní díly	str. 10
17.3 Ustanovení o výjimkách	str. 10

CE

Zdravotnický prostředek třídy I

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RP562A	Skládací chodítko s pneumatickými koly Ermes Světlemodrá
RP562R	Skládací chodítko s pneumatickými koly Ermes Červená
RP553	Skládací chodítko Artemis

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali chodítko řady MOPEDIA by Moretti S.p.a.

Chodítka MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.a jsou navržena a vyrobená tak, aby splňovala všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tato příručka obsahuje drobné tipy pro správné používání zvoleného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím zakoupeného chodítka přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Toto chodítko je určeno pro osoby s pohybovými obtížemi a lze jej používat jako pomůcku usnadňující chůzi. Chodítko poskytuje větší stabilitu, oporu a bezpečnost při chůzi. V žádném případě jej nemohou používat osoby s viditelně oslabenou funkcí rukou a/nebo paží a osoby s problémy s rovnováhou. Chodítko lze používat venku i v interiéru. Doporučujeme používat pouze na povrchu, na kterém se všechna kola dotýkají země. Nesmí se používat na kamenitém terénu nebo na nakloněných rovinách, protože by mohlo být nestabilní. Zařízení není určeno k přepravě materiálu a/nebo osob jiných než uživatel.

POZOR!



- Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití zařízení nebo v důsledku jiného použití, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny zařízení a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA. a patřící do řady CHODÍTKO - MOPEDIA jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745 ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Předmětná zařízení splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.
2. Tato zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tato zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ.
4. Tato zařízení se prodávají v NESTERILNÍCH baleních.
5. Tato zařízení je třeba považovat za zařízení třídy I v souladu s přílohou VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které vydává společnost MORETTI SPA a zpřístupňuje je prostřednictvím svých kanálů.

5. UPOZORNĚNÍ

5.1 Obecná upozornění

- Neinstalujte ani nepoužívejte výrobek, dokud si nepřečtete a neporozumíte těmto pokynům. Pokud nerozumíte upozorněním, bezpečnostním opatřením a pokynům, poraďte se před pokusem o instalaci výrobku s odborníkem, prodejcem nebo technickým personálem, abyste předešli poškození nebo zranění osob;
- Chodítko musí používat pouze pacienti s odpovídajícími motorickými dovednostmi, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání;
- Poraďte se s lékařem nebo terapeutem, abyste zjistili vhodnost výrobku, správné seřízení a správné používání chodítka;
- Lékař nebo terapeut by vám měl pomoci se seřízením výšky chodítka pro maximální oporu, správnou aktivaci brzd a obecně správné sestavení;
- Uživatel a/nebo pacient musí veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti se zařízením, hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

5.2 Upozornění pro použití

1. Vždy se ujistěte, že je brzdové lanko správně upevněno.
2. Po každém seřízení výšky vždy zkontrolujte, zda brzda funguje správně, aby nedošlo k nadměrnému volnému ohybu lanka.
3. Nedodržení těchto jednoduchých upozornění může vést ke zranění osob.
4. Chodítko lze používat pouze na pevném a rovném povrchu. Nepoužívejte chodítko ke stoupání do schodů!
5. Vždy se opřete o obě řídítka, abyste udrželi rovnováhu.
6. Zvláštní pozornost věnujte mokřým, zledovatělým nebo zasněženým povrchům.
7. Chodítko příliš nezatěžujte.
8. Nepoužívejte sedadlo chodítka (pokud je namontováno) k přepravě zboží nebo osob; sedadlo je určeno k usazení uživatele se zataženou parkovací brzdou;
9. Všechna kola musí být během používání vždy v kontaktu s podlahou, aby bylo zajištěno správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost.
10. Před použitím sedadla musí být zatažena parkovací brzda.

POZN. Při používání chodítka v klidové poloze musí být parkovací brzda zajištěna.

5.3 Upozornění ke stabilitě

- Chodítko poskytuje pomoc osobě s hmotností do 136 kg, včetně naložené tašky.
- Taška/košík má hmotnostní limit 5 kg. Nepřetěžujte, abyste se vyhnuli nerovnováze a rizikům převrácení.

5.4 Upozornění pro montáž

- Po sestavení nebo otevření chodítka se ujistěte, že je podpěra sedadla zajištěna na obou stranách, a zkontrolujte, zda je bezpečnostní zařízení zajištěno ve správné poloze.
- Zkontrolujte, zda jsou obě podpěrné trubky rukojeti správně zasunuty do konstrukce.
- Na rám chodítka nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek a aby nebyla ovlivněna jeho stabilita.

Poznámka: Při otevírání a zavírání dávejte pozor na zachycení prstů a/nebo oděvu.

6. POUŽITÉ SYMBOLY

	Kód výrobku
	Jedinečný identifikátor zařízení
	Označení CE
	Výrobce
	Výrobní šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnické zařízení
	Podmínky likvidace
	Maximální nosnost

CS

7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:


- Zda jsou všechny části chodítka bezpečně zajištěny;
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně dotažené;
- Zkontrolujte, zda je sedadlo řádně zajištěno (pokud tomu tak není, přitlačte sedadlo více k rámu);
- Zkontrolujte, zda je pojistka sedadla správně zajištěna;
- Zkontrolujte správnou funkčnost normální brzdy a parkovací brzdy;
- U modelu RP562 zkontrolujte, zda jsou pneumatiky správně nahuštěné a nepoškozené.

8. MONTÁŽNÍ POKYNY

8.1 Před montáží

Výbalte výrobek a zkontrolujte, zda nebyl během přepravy poškozen. Pokud je chodítko poškozené, obraťte se na nejbližšího prodejce.

8.2 Montáž modelu RP562

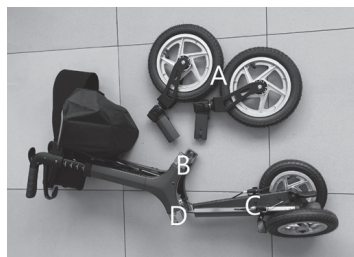

- Opatrně výrobek vybalte, dbejte na to, abyste jej nepoškodili, a položte díly na podlahu.
- Vložte přední kola A do předních sedel B, dokud kovová spona nezapadne, a utáhněte zajišťovací knoflík. Vložte zadní kola C do zadních sedel D a utáhněte zajišťovací knoflík.



POZOR! Ujistěte se, že jsou knoflíky dobře zasunuty do otvorů.

Před použitím se vždy ujistěte, že chodítko pod vlivem malé boční síly nemá tendenci se sklopit. Při připojování řídítek a kol dávejte pozor, abyste brzdová lanka nepřekroutili.

8.2.1 Otevírání a zavírání chodítka RP562

Poté, co umístíte chodítko tak, aby bylo stabilní na podlaze, zatlačte na strany sedadla, dokud se zcela neotevře a neuslyšíte cvaknutí zespodu. Chcete-li jej opět zavřít, zvedněte pás na sedadle.

8.2.2 Nafukování pneumatik RP562

K nafouknutí pneumatik použijte dodanou pumpu a postupujte podle následujících pokynů:

- Odšroubujte uzávěr ventilu.
- Nasaďte hlavu pumpy na ventil v poloze s otevřenou páčkou (Obr.1) a pevně zatlačte až na doraz.
- Spusťte páčku pumpy do zavřené polohy (Obr.2).
- Po umístění pumpy na zem spusťte základnu a zajistěte ji nohou (Obr.3).
- Začněte pumpovat vzduch, dokud nedosáhnete požadovaného nahuštění.
- Odstraňte hlavu pumpy z ventilu a uzavřete ji víčkem.



Obr.1



Obr.2



Obr.3

8.2.3 Instalace úložné tašky

Pro instalaci úložné tašky zavěste poutka tašky na přední odnímatelné držáky sedadla.



POZOR!

Maximální nosnost tašky 5 kg. Nepřetěžujte, abyste se vyhnuli nerovnováze a rizikům převrácení.

8.2.4 Sedadlo

Před usednutím postavte chodítko na rovný, pevný povrch a zabrzděte. V případě potřeby otočte opěradlo. Ujistěte se, že je zajišťovací západka bezpečná a že je chodítko ve stabilní poloze.



POZOR!

Posad'te se a rozložte váhu na celé sedadlo. Nesedějte si a netlačte pouze na jednu straně.

8.3 Montáž modelu RP553

- Opatrně výrobek vybalte, dbejte na to, abyste jej nepoškodili.
- Zasuňte čepy předních kol do příslušných drážek (Obr.4), opatrně zvedněte rukojeti chodítka do zcela vzpřímené polohy (Obr.5), poté chodítko otevřete do strany, dokud mechanismus pod sedadlem nezapadne na místo, a zasuňte opěradlo do předních úchyťů (Obr.6).
- Chcete-li chodítko zavřít, zatáhněte za rukojeť na sedadle nahoru, dokud se chodítko na straně zcela nezavře, a jemně zatlačte rukojeti dolů do první zajištěné polohy a poté zajistěte bezpečnostní sponu.



Obr.4



Obr.5



Obr.6



POZOR!

Při otevírání a zavírání chodítka držte ruce na rukojetích, aby nedošlo k rozdrcení a sevření prstů mezi kovovými částmi.

8.3.1 Instalace rukojetí a jejich seřízení

Stiskněte červené tlačítko a nastavte požadovanou výšku. Zopakujte postup na opačné straně a ujistěte se, že jsou obě rukojeti pevně zajištěny a ve stejné výšce. Chodítko je vybaveno výškově nastavitelnými rukojetmi, které vyhovují všem potřebám uživatele.



POZOR!

Nastavte výšku chodítka tak, aby uživatel stojící s rukama podél těla měl zápěstí ve výšce rukojetí. Tím zajistíte, že ruce budou při používání chodítka ohnuty přibližně v úhlu 20°-30°.

8.3.2 Instalace úložné tašky

Pro instalaci úložné tašky zavěste poutka tašky na odnímatelné podpěry sedadla a připevňte pásky na suchý zip ke konstrukci.



POZOR!

Maximální nosnost tašky 5 kg. Nepřetěžujte, abyste se vyhnuli nerovnováze a rizikům převrácení

8.3.3 Sedadlo

Před usednutím postavte chodítko na rovný, pevný povrch a zabrzděte. Ujistěte se, že je zajišťovací západka bezpečná a že je chodítko ve stabilní poloze.



POZOR!

Posad'te se a rozložte váhu na celé sedadlo. Nesedejte si a netlačte pouze na jednu straně.

8.3.4 Správa a údržba pneumatik RP562

- K huštění pneumatik nepoužívejte motorové zařízení, ale pouze ruční pumpu, která je součástí dodávky.
- Nepoužívejte chodítko, pokud jsou pneumatiky viditelně vypuštěné.
- Pravidelně kontrolujte nahuštění pneumatik a celkový stav pneumatik před každou jízdou a po každém použití, zejména ve venkovním prostředí.

- Nepřehrušřujte pneumatiky
- Nedovolte, aby se kola dostala do kontaktu s přímými zdroji tepla.
- Chodítko skladujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením.
- K čištění pneumatik nepoužívejte kyselá rozpouštědla ani agresivní přípravky, použijte specifické nebo neutrální přípravky.

8.4 Překonávání malých překážek

CS



POZOR!

Malé překážky, jako jsou obrubníky a schody, by se měly překonávat oběma předními koly rovnoběžně s překážkou.

Chcete-li překonat malé překážky, přiblížte se k nim co nejbližší, dokud se jich nedotknou oběma předními koly.

1. Ujistěte se, že jste stabilní ve vzpřímené poloze a pevně uchopte obě rukojeti.
2. Jednou nohou stiskněte páku naklápění a zvedněte přední kola.
3. Začněte tlačit chodítko dopředu vyrovnáváním síly působící na nohu a tah, a udržujte kola v kontaktu s překážkou.
4. Pohybuje se dopředu společně s chodítkem a dávejte pozor, abyste nezakopli o překážku.

9. ZPŮSOBY POUŽITÍ

- Začněte tlačit ve stoje s oběma rukama na rukojetích;
- Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, abyste předešli nebezpečí uklouznutí;
- Krácejte vzpřímeně a dívejte se dopředu, nikoli dolů;
- Netlačte chodítko příliš daleko od těla, mohlo by dojít k pádu a nevhodnému zatížení;
- Nepoužívejte chodítko ke zdolávání schodů vyšších než 20 mm;
- Při použití ve venkovním prostředí je třeba dávat přednost dlažbě řádně připravené podle předpisů pro odstraňování architektonických bariér;
- Chcete-li překonat malé překážky, zvedněte přední část chodítka pomocí zadních opěrek nohou.

10. BRZDY

Správná funkčnost brzd závisí na opotřebení a znečištění kol. Před každým použitím zkontrolujte stav brzd a kol.

10.1 Použití brzdy

Chcete-li chodítko zabrzdit, zatáhněte prsty za brzdové páky směrem nahoru, dokud se chodítko nezpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu chodítka, uvolněte rukojeti brzdy.

10.2 Blokování brzd (parkovací brzda)



Stiskněte obě brzdové páčky dlaní, až uslyšíte „cvaknutí“, kola jsou zablokována. Zvednutím rukojeti brzdy chodítko uvolněte z polohy zastavení.

11. ÚDRŽBA

Zařízení řady MOPEDIA by Moretti S.p.A. jsou při uvedení na trh důkladně kontrolována a označena značkou CE. Z důvodu bezpečnosti pacientů a lékařů se doporučuje nechat si zkontrolovat vhodnost chodítka výrobcem nebo autorizovanou laboratoří

nejméně jednou za 2 roky. Při opravách se smí používat pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Životnost výrobku závisí na jeho používání, údržbě, skladování a čištění a není delší než 10 let.

12. ČIŠTĚNÍ

K čištění dílů používejte pouze vlhký hadřík s neutrálními čistícími prostředky. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo brusné či ostré předměty, mohly by výrobek poškodit.

13. PÉČE O KOLA

1. Kola čistěte vlažnou vodou s neutrálním čistícím prostředkem. Otřete je do sucha čistým hadříkem.
2. Kola pravidelně promazávejte.

14. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Řada ERMES										
Kód výrobku	RP562									
Sedadlo	46x24 cm									
Konstrukce	Hliník									
Rozměry a hmotnosti										
										
RP562A	80	100	56	62	45	24	11,45	30	24	136 kg
RP562R		85								

Řada ARTEMIS										
Kód výrobku	RP553									
Sedadlo	45x25 cm									
Konstrukce	Hliník									
Rozměry a hmotnosti										
										
RP553	70	91	52	63	45	27	8,8	20	20	136 kg

Rozměry jsou uvedeny v cm a mohou se lišit o $\pm 0,5$ cm

15. OBECNÉ PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy pro likvidaci pevného komunálního odpadu. Doporučuje se likvidovat zařízení prostřednictvím obecních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

16. NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství naleznete v hlavním katalogu společnosti Moretti S.p.A.

17. ZÁRUKA

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné použití výrobku je uvedeno v návodu k použití.

CS

Společnost Moretti neodpovídá za žádné škody, zranění osob ani za nic jiného, co by bylo způsobeno instalací a/nebo používáním zařízení, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a použití.

Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo závady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je to možné), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

17.1 Opravy

Oprava v záruce: Pokud se u výrobku Moretti během záruční doby vyskytnou vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení vyměnit nebo opravit výrobek v rámci záruky, a to buď u určeného prodejce Moretti, nebo ve vlastních prostorách. Náklady na práci související s opravou výrobku může hradit společnost Moretti, pokud se zjistí, že oprava spadá do rozsahu záruky. Opravu nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka: Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, hradí v plné výši zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne převzetí opraveného výrobku.

Výrobky, které nejsou vadné: Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku dojde k závěru, že výrobek není vadný. Výrobek bude vrácen zákazníkovi a zákazník ponese náklady na zpětné zaslání.

17.2 Náhradní díly

Na originální náhradní díly MORETTI se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne obdržení náhradního dílu.

17.3 Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky nebo podmínky, výslovně ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezahavování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání výrobku Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy právními předpisy, je omezena na záruční dobu v mezích právních předpisů. Některé státy nebo země nepovolují omezení trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat určité výjimky nebo omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



CS

ZÁRUČNÍ LISTINA

Výrobek _____

Zakoupeno dne _____

Prodejce _____

Ulice _____ Místo _____

Prodáno do _____

Ulice _____ Místo _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**VYROBENO V ČÍNĚ**

MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com