



MOPEDIA®

MA RP75x03 A_01-2022

CHODÍTKA
NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH

1. OZNAČENÍ.....	str.3
2. ÚVOD	str.3
3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ.....	str.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	str.3
5. OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	str.4
6. OBECNÝ POPIS.....	str.4
6.1 Nastavení výšky (RP754S-RP754A-RP756T)	str.4
6.2 Ramenní chodítka	str.4
6.3 Předloketní chodítka.....	str.5
6.4 Předloketní chodítka s opěrkou.....	str.5
7. MONTÁŽNÍ INSTRUKCE.....	str.5
7.1 Ramenní a předloketní chodítka.....	str.5
7.2 Chodítka - RP758S.....	str.6
7.3 Předloketní chodítka s opěrkou RP755T-RP756T	str.7
8. PŘED POUŽITÍM.....	str.7
9. VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ	str.7
10. JAK POUŽÍVAT	str.7
11. ÚDRŽBA	str.8
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	str.8
12.1 Čištění.....	str.8
12.2 Dezinfekce.....	str.8
13. PODMÍNKY LIKVIDACE.....	str.8
14. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	str.8
14.1 Příslušenství.....	str.8
15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	str.8
15.1 Technické specifikace.....	str.8
15.2 Rozměry	str.9
16. ZÁRUKA.....	str.11
17. OPRAVY.....	str.11
17.1 Záruční oprava.....	str.11
17.2 Oprava nekrytá zárukou.....	str.12
17.3 Zařízení bez závad.....	str.12
18. NÁHRADNÍ DÍLY.....	str.12
19. VÝJIMKY.....	str.12



- Zdravotnické zařízení třídy I,
dle Směrnice o zdravotnických prostředcích 2017/745 a pozdějších předpisů

1. OZNAČENÍ

RP755S – Lakovaná ocelová demontovatelná ramenní chodítka

RP755F – Lakovaná ocelová demontovatelná ramenní chodítka s brzdami

RP756S – Lakovaná ocelová skládací ramenní chodítka

RP754S – Lakovaná ocelová skládací ramenní chodítka, nohy s nastavitelnou výškou

RP756A – Lakovaná ocelová skládací chodítka s předloketní podpěrou

RP754A – Lakovaná ocelová skládací chodítka s předloketní podpěrou, nohy s nastavitelnou výškou

RP755T – Lakovaná ocelová demontovatelná chodítka s předloketní opěrkou

RP756T – Lakovaná ocelová skládací chodítka s předloketní opěrkou

RP758S – Lakovaná ocelová skládací chodítka s nohama s nastavitelnou výškou

RP756 M – Lakovaná ocelová chodítka s nastavitelnou výškou mini

RP756AM – Lakovaná ocelová chodítka s podpěrou mini

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali chodítka řady MOPEDIA, výrobce MORETTI S.p.A. Design a kvalita jsou zárukou pohodlí, bezpečnosti a spolehlivosti. Chodítka MOPEDIA jsou navržena a vyrobená tak, aby splňovala všechny vaše požadavky na praktické a správné používání. Tato uživatelská příručka vám poskytuje několik návrhů, jak správně používat chodítka, která jste si vybrali, a nabízí mnoho cenných rad pro vaši bezpečnost. Před použitím chodítek si prosím pozorně přečtěte návod. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na svého prodejce se žádostí o radu a pomoc.

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Chodítka MOPEDIA od MORETTI S.p.A. jsou zařízení pro použití dvěma pažemi a jsou určena pro osoby s pohybovými obtížemi.

VAROVÁNÍ!



- Nepoužívejte výrobek k účelu, který není uveden v tomto návodu.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z nesprávného používání a neoprávněné úpravy konstrukce produktu.
- Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace obsažené v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

MORETTI S.p.A. tímto na svou vlastní výhradní odpovědnost prohlašuje, že produkty vyráběné a prodávané MORETTI S.p.A. a patřící do kategorie CHODÍTKA jsou v souladu s platnými ustanoveními uvedenými ve Směrnici o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC. Za tímto účelem MORETTI S.p.A. na svou vlastní odpovědnost zaručuje a prohlašuje následující:

1. Dotyčné zařízení splňují základní požadavky přílohy I směrnice 2017/745 předepsané v příloze VII výše uvedené směrnice. Úplný seznam dotyčných prostředků je k dispozici v příloze A prohlášení.
2. Dotyčná zařízení **NEJSOU MĚŘICÍMI** nástroji.
3. Dotyčná zařízení **NEJSOU URČENA** pro stanovení klinické diagnózy.
4. Dotyčná zařízení jsou zabalena v **NESTERILNÍM BALENÍ**.
5. Dotyčná zařízení by měla být považována za náležející do třídy I.
6. Nepoužívejte/neinstalujte dotyčná zařízení k žádnému jinému účelu, než k jakému jsou výslovně určeny společností MORETTI S.p.A.
7. Moretti S.p.A. vede a předkládá příslušným orgánům technickou dokumentaci osvědčující shodu daných výrobků se směrnicí 2017/745 a následným změnám.

5. OBECNÁ VAROVÁNÍ



Vždy věnujte zvýšenou pozornost přítomnosti pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění.

- Informace o správném používání zařízení naleznete v této příručce, přičemž věnujte zvláštní pozornost varováním před použitím;
- O správném používání zařízení se poraďte se svým lékařem nebo terapeutem;
- Uchovávejte zabalený produkt mimo zdroje tepla, jelikož je obal vyroben z lepenky;
- Životnost příslušenství je určena opotřebením dílů, které nelze opravit a/nebo vyměnit;
- Buďte opatrní, když jsou v blízkosti dětí;
- Nepřekračujte maximální nosnost.

REF Codice prodotto

LOT Lotto di produzione

UDI Identificativo univoco del dispositivo

MD Dispositivo medico

Leggere il manuale per le istruzioni

CE Marchio CE



Condizioni di smaltimento



Fabbricante

6. OBECNÝ POPIS

Skládací nebo demontovatelná, ramenní nebo předloketní chodítka MOPEDIA jsou určena pro osoby s pohybovými obtížemi. Jsou vyrobená z chromované a lakované oceli, se 4 kolečky 100 mm, z čehož 2 jsou s brzdou, s nastavitelnou výškou, nastavitelnou podpěrou na šířku a hloubku ***(Viz model)**. Nastavení výšky a šířky umožňují použití výrobku pro osoby malé, střední nebo velké velikosti. Chodítko lze použít s polstrovaným sedátkem ***(RP757 volitelné)**. K dispozici s podpažními berlemi nebo předloketní podpěrou.

Tato zařízení usnadňují pohyb osob se špatnou rovnováhou a omezenou pohyblivostí a zlepšují jejich stabilitu. Poskytují podporu v situacích slabosti a/nebo ochrnutí dolních končetin. Pomáhají přenášet část váhy ze spodních končetin na ruce.



6.1 Nastavení výšky (RP754S-RP754A-RP756T)

Pro nastavení výšky stiskněte tlačítko a posuňte tyč do požadované výšky. Po dokončení se ujistěte, že tlačítko zcela vyčnívá ven přes požadovaný otvor. Opakujte popsany postup pro každou nohu, na konci zkontrolujte, zda mají všechny čtyři nohy stejnou výšku. Maximální nosnost 130 kg.

6.2 Ramenní chodítka

Demontovatelná konstrukce



RP755S



RP755F

Skládací konstrukce

RP756S
Předloketní chodítka

RP754S

Nastavitel
ná výška

RP758S

Nastavitel
ná výška

RP756S
Předloketní chodítka s opěrkou
Demontovatelná konstrukce

RP754S

Nastavitel
ná výška

RP758S


Nastavitel
ná výška

RP755T

RP756T
7. MONTÁŽNÍ INSTRUKCE
Ramenní a předloketní chodítka

1. Začněte sestavovat chodítka tyčí přední strany konstrukce, kterou je třeba zasunout do trubek boční strany konstrukce a upevnit dvěma mosaznými knoflíky.
2. *Skládací – Jednoduše otevřete konstrukci. **RP756S – RP754S – RP754A – RP756A**

*Demontovatelná - Vložte dvě vodorovné tyče do zadní strany konstrukce, abyste zpevnili celé chodítko. Připevněte tyče čtyřmi šroubovacími knoflíky. **RP755S - RP755F**



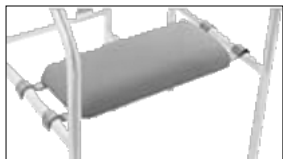


3. Nastavte opěrky na požadovanou výšku pacienta a zajistěte je dvěma zajišťovacími hlavními tyčemi.
4. Je snadné smontovat a a demontovat sedačku, která je zavěšena pomocí háčků na tyčích boční strany konstrukce.

***(RP757 volitelná)**

Chodítka – RP758S

1. Otevřete konstrukci, viz obr. (1.) Věnujte pozornost tomu, aby bezpečnostní tlačítka správně blokovaly strany chodítka, viz obr. (2 a 3.) Poté vložte bezpečnostní spony do otvorů v zadní části chodítka jako na obrázku. (4).

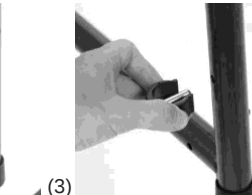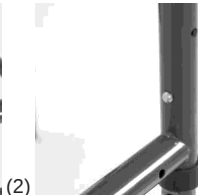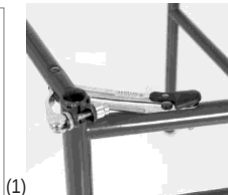

(1)

(2)

(3)



(4)

2. Připojte nohy s kolečky k rámu (nohy s brzdou musí být na zadní straně). Bezpečnostní tlačítka musí cvaknout, když jsou zablokována..

POZNÁMKA Všechny nohy musí být ve stejné výšce. Obr. (5)

3. Umístěte rukojeti do trubek a zablokuje je pákami. Obr. (6)

POZNÁMKA Pokud páky nemohou dostatečně utáhnout trubku, utáhněte matici šroubu.

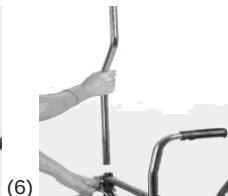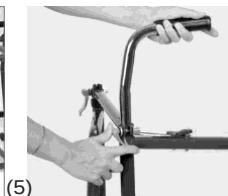


(5)

(6)

(7)

(8)

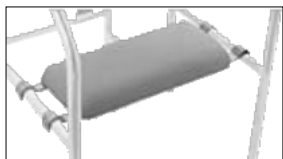

4. Ramenní podpěry vložte z delší strany do otvorů obr. (7) a zablokuje je pákami.


5. Vložte ramenní podpěry do trubek. Obr. (8)

6. Nastavte výšku chodítka podle potřeby pacienta. Sedátko lze snadno nainstalovat do chodítka díky 4 háčkům.

***(RP757 volitelná)**

Jak složit chodítko:

1. Sundejte sedátko
2. Sundejte bezpečnostní spony
3. Stiskněte bezpečnostní tlačítka v přední a zadní části jako na obr. (9-10) a složte čtyři části dovnitř. Viz obr. (11-12)

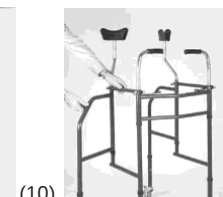

(9)



(10)

(11)

(12)

Předloketní chodítka s opěrkou RP755T - RP756T

1. Začněte sestavovat chodítko tyčí zadní strany konstrukce, kterou je třeba zasunout do trubek boční strany konstrukce a upevnit dvěma mosaznými knoflíky.

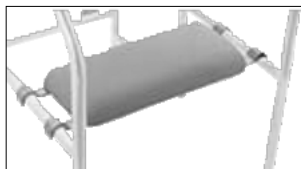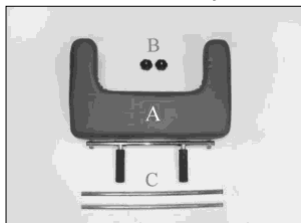

2. *Skládací – Jednoduše otevřete konstrukci. **RP756T**
*Demontovatelná - Vložte dvě vodorovné tyče do zadní strany konstrukce, abyste zpevnili celé chodítko. Upevněte tyče čtyřmi šroubovacími knoflíky. **RP755T**
3. Pro montáž polstrovaných podpěrek vložte tyče (C) do podpůrných tyčí konstrukce. Poté, co jsou ve stejné výšce, je zajistěte pákou na chodítku.
4. Umístěte polstrované podpěrky (A) a nastavte výšku tak, aby si uživatel mohl opřít paže v úhlu 90°.
5. Upravte madla do požadované pozice a zajistěte je pomocí šroubovacích knoflíků na opěrce.
6. Ujistěte se, že jsou šrouby utažené.
7. V tento moment jsou polstrované podpěrky správně sestaveny a připraveny k použití.
8. Sedátko může být jednoduše nainstalováno i odstraněno pomocí háčků na trubkách boční strany konstrukce *(RP757 volitelně)

8. PŘED POUŽITÍM

VAROVÁNÍ!



- Vždy zkontrolujte dobrý stav výrobku.
- Dávejte pozor na přítomnost elektrických kabelů na cestě, mokrých povrchů, koberečků, hraček, nečistot, nábytku, schůdků a mezer v podlahách. Nepoužívejte chodítko na schodech nebo eskalátorech.
- VĚNUJTE ZVÝŠENOU OPATRNOST NA MOKRÝCH A KLIZKÝCH POVRŠÍCH.
- Nenechávejte chodítko po dlouhou dobu v kontaktu s vodou a pravidelně kontrolujte jeho pevnost.
- Uchovávejte jej mimo dosah dětí, abyste předešli možným rizikům.

9. VAROVÁNÍ PRO POUŽITÍ

Toto zařízení poskytuje větší stabilitu, podporu a bezpečnost při pohybu. V žádném případě jej nemohou používat lidé s viditelně slabou funkcí ruky a/nebo paže a ani lidé s problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít jak venku, tak uvnitř. Doporučujeme jej však používat pouze na površích, na kterých se všechny čtyři nohy dotýkají země. Nemělo by se používat na skalnatém terénu nebo na nakloněných površích, na kterých by chodítko mohlo být nestabilní. Zařízení není určeno pro přepravu osob nebo jiného materiálu.

- Dbejte zvýšené opatrnosti na mokrém a klzkém povrchu.
- Nepoužívejte u pacientů, kteří překračují hmotnost uvedenou na štítku produktu a v kapitole Technické vlastnosti tohoto návodu.
- Nenechávejte zařízení v kontaktu s vodou po delší dobu.
- **Pravidelně kontrolujte stav a stabilitu chodítka a stav gumových koncovek. Koncovky vyměňte v případě opotřebování.**
- V případě pochybností o použití, seřízení nebo údržbě kontaktujte svého prodejce.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí, abyste předešli možným rizikům.

10. JAK POUŽÍVAT

Chodítko je personalizovaný výrobek, takže možná budete potřebovat upravit výšku chodítka specializovaným personálem.

POZNÁMKA: Přečtěte si bezpečnostní pokyny v tomto návodu. Používejte chodítko jako pomůcku při chůzi. K tomu použijte dvě rukojeti a posunujte pomůcku dopředu, čímž získáte podporu vhodnou a spolehlivou pro chůzi.

**VAROVÁNÍ!**

Věnujte zvýšenou pozornost nerovnostem na cestě, mokrým povrchům a překážkám. Nepoužívejte chodítko na schodech nebo eskalátorech.

11. ÚDRŽBA

Zařízení MOPEDIA od MORETTI jsou po uvedení na trh pečlivě kontrolována a dodávána se značkou CE. Pro bezpečnost pacienta a lékaře doporučujeme nechat přístroj každé 2 roky zkontrolovat výrobcem nebo autorizovanou firmou. V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

- Je nesmírně důležité chodítka před každým použitím zkontrolovat. Konkrétněji zkontrolujte, zda jsou všechny knoflíky a šrouby dobře utaženy.
- Zkontrolujte, zda se chodítka mohou volně pohybovat s odblokovanými brzdami.
- Zkontrolujte správnou funkci brzd zadních kol.

12. ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE**12.1 Čištění**

K čištění pomůcky a konstrukce použijte vlhký hadřík s roztokem alkoholu nebo neutrálního mýdla (ve stejném poměru) smíchaného s vodou.

**VAROVÁNÍ!**

Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, čistý alkohol, čističe na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezivění kovových povrchů.

Výrobce není zodpovědný za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií při čištění.

12. 2 Dezinfekce

Pokud potřebujete produkt dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.

13. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy zpětného odběru komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím vybraných míst vhodných pro recyklaci.

14. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Seznam náhradních dílů a příslušenství naleznete v hlavním katalogu MORETTI.

**VAROVÁNÍ!**

Používejte pouze originální příslušenství moretti. Společnost Moretti S.p.A. nenese odpovědnost za žádný incident způsobený nesprávným použitím.

14.1 Příslušenství


- **RP757** Polstrované sedátko
- **RV7115** Zátěžová tyč - pár

15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI**15.1 Technické specifikace**

- Pochromovaná ocelová konstrukce s práškovým nástřikem
- Kolečka s brzdou a zámkem otáčení
- Ergonomická loketní opěrka z PU
- Maximální zatížení 130 kg


Rozměry

Ramenní chodítka - Demontovatelná konstrukce

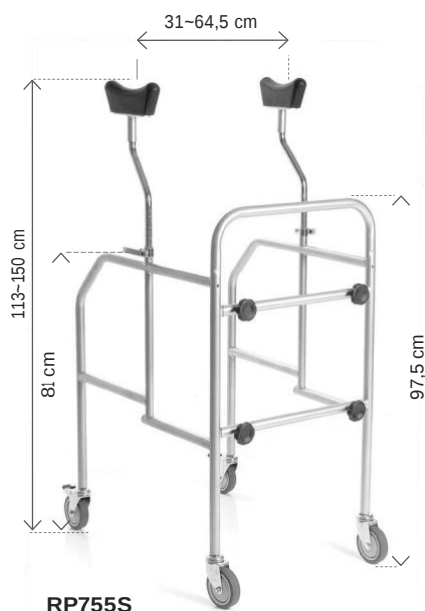


RP755S


Ramenní chodítka - Skládací konstrukce

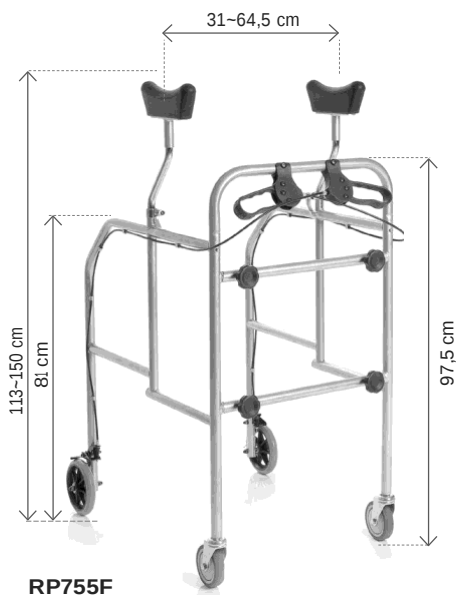

RP755F

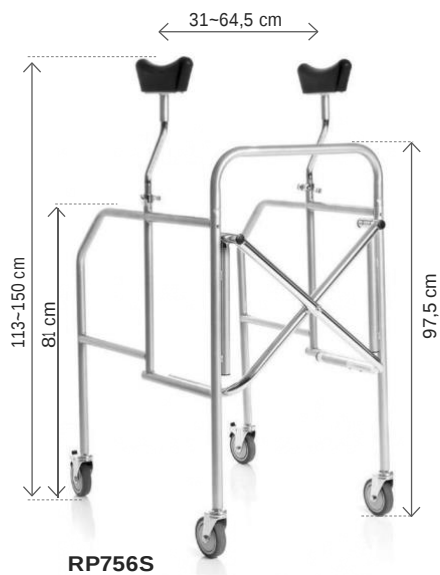


RP756S

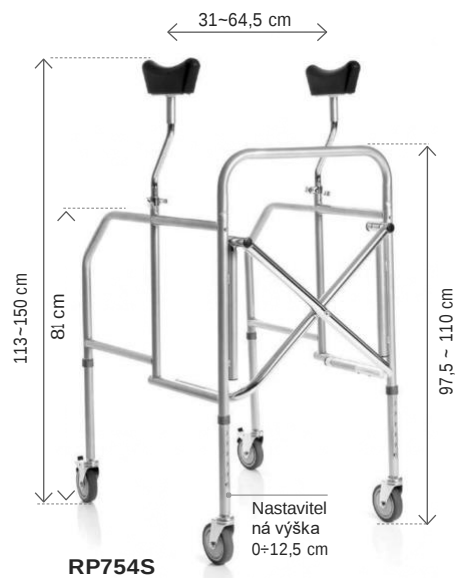


RP754S

Ramenní chodítka - Skládací konstrukce

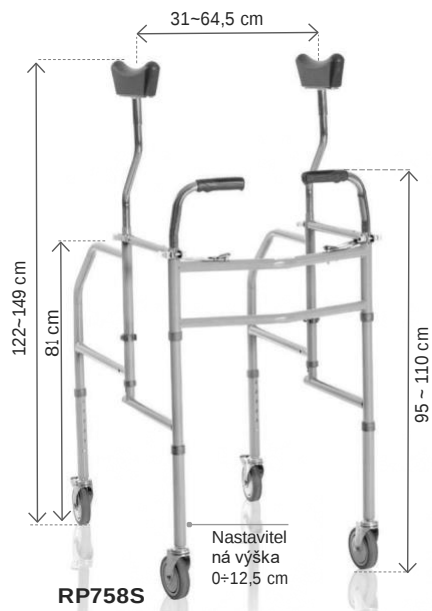


Předloketní chodítka - Skládací konstrukce

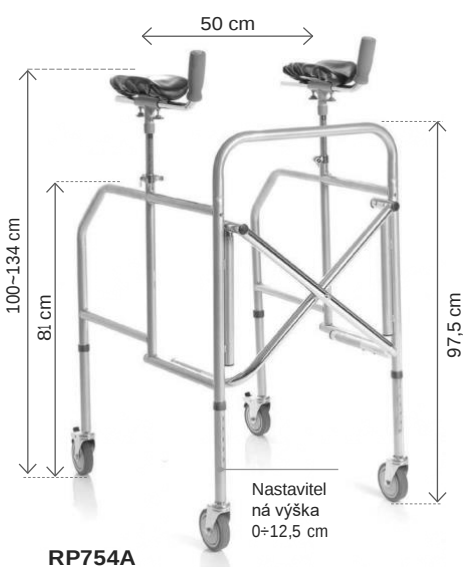


Předloketní chodítka s opěrkou
Demontovatelná konstrukce

Skládací konstrukce

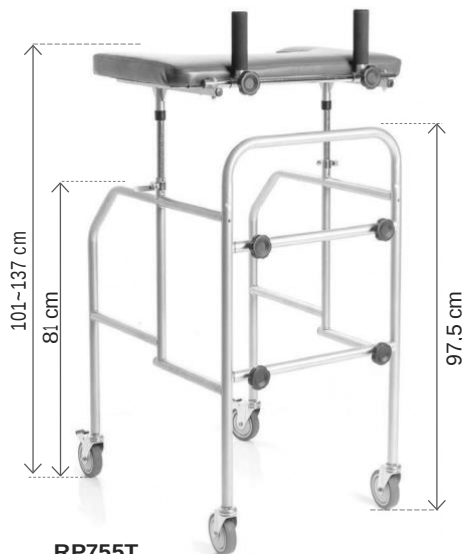

RP755T

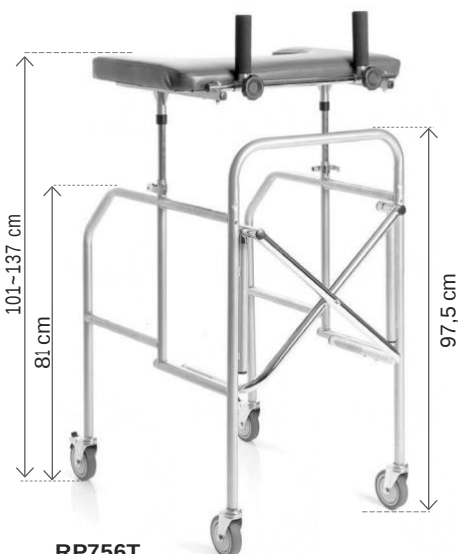

RP756T

16. ZÁRUKA

Na každý výrobek Moretti je poskytována záruka 2 (dva) ROKY od data nákupu, s výjimkou omezení uvedených níže. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužitím, úpravami výrobku nebo jiným použitím, které není v souladu s návodem k použití. Správné použití výrobku je uvedeno v uživatelské příručce. Moretti S.p.A. nenese odpovědnost za žádné škody nebo zranění osob v důsledku nesprávné montáže/nesprávného použití zařízení, které není v souladu s uživatelskou příručkou. Moretti neručí za své produkty proti škodám nebo poruchám v následujících případech: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy, škody způsobené problémy s elektrickým napájením (pokud jsou k dispozici), použití dílů nebo komponentů nedodaných Moretti, nedodržení pokynů a návod k použití, neautorizované změny, poškození v důsledku přepravy (jiné než původní dodávka Moretti) nebo selhání údržby zařízení, jak je uvedeno v návodu. Na součásti podléhající opotřebení se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním produktu.

Záruka na dobíjecí baterii (pokud je součástí)

Na originální baterie a náhradní baterie se vztahuje (devadesát) 90denní záruka, pokud jde o jejich výkon, a záruka (šest) 6 měsíců, pokud jde o výrobní vady nebo jak to vyžaduje zákon. Záruka na plně nabitě baterie ponechané v nepoužitém stavu déle než (tři) 3 po sobě jdoucí měsíce automaticky zaniká. Záruka na zcela vybité baterie ponechané v nepoužitém stavu déle než (tři) 3 po sobě jdoucí dny automaticky zaniká.

17. OPRAVY

Záruční oprava

Pokud výrobek Moretti během záruční doby vykazuje materiálové nebo výrobní vady, Moretti S.p.A. společně se zákazníkem zvaží, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Moretti S.p.A. může podle svého nevyvratitelného uvážení opravit nebo vyměnit produkt u prodejce produktů Moretti nebo ve vlastní prodejně. Pracovní náklady může nést Moretti, pokud je oprava kryta zárukou. Oprava nebo výměna neobnovuje ani neprodlužuje záruku.

Oprava nekrytá zárukou

Produkt, na který se nevztahuje záruka, může být vrácen k opravě pouze po obdržení předchozího povolení od zákaznického servisu Moretti. Náklady na opravu a přepravu produktu při mimozáruční opravě budou plně hrazeny zákazníkem nebo prodejcem. Na opravy pozáručních výrobků je poskytována záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy zákazník obdrží opravený výrobek.

Zařízení bez závad

Zákazník bude informován, pokud po vrácení zařízení a kontrole Moretti prohlásí, že zařízení není vadné. Produkt bude zaslán zpět zákazníkovi a veškeré náklady na zpětné doručení hradí zákazník.

18. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti je poskytována záruka 6 (šest) měsíců od data převzetí.

19. VÝJIMKY

Kromě toho, co je jasně uvedeno v této záruce a v souladu se zákonem, Moretti SpA nenabízí svým zákazníkům žádné jiné prohlášení, záruku nebo podmínku, vyjádřenou nebo implicitní, včetně jakéhokoli prohlášení, záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, o neporušování nebo nerušení, o vhodnosti pro konkrétní cíl. Moretti S.p.A. nezaručuje, že používání výrobků Moretti bude nepřetržité a bezchybné. Doba trvání případných implicitních záruk, které lze uplatnit v souladu se zákonem, je omezena na záruční dobu. Některé státy nebo země nepovolují omezení délky trvání implicitní záruky nebo zproštění odpovědnosti nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod souvisejících s produkty pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá zproštění nebo omezení této záruky. Tato záruka podléhá změnám bez předchozího upozornění.

**MOPEDIA®****ZÁRUČNÍ LIST**

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Prodejce _____

Adresa _____ Místo _____

Zákazník _____

Adresa _____ Místo _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriago (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com**VYROBENO V ČR**

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA RP75x 05 D_ITA_05-2022

MORETTI S.P.A.Via Bruxelles, 3 - Melegnano
20122 Cavriago (Arezzo)Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200**www.morettispa.com**
info@morettispa.com