



MOPEDIA®



**KLOZETOVÉ KŘESLO DO SPRCHY
S NASTAVITELNÝMI PODRUČKAMI
RP783**

Návod k obsluze

Obsah

ÚVOD	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
OBECNÝ POPIS	1
PŘED POUŽITÍM	2
PŘED MONTÁŽÍ.....	2
MONTÁŽ	2
SEDÁTKO.....	2
UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ.....	2
POUŽITÍ.....	3
ÚDRŽBA	3
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	3
Čištění.....	3
Dezinfekce	3
PODMÍNKY LIKVIDACE	3
Obecné podmínky likvidace	3
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:.....	3
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
ZÁRUKA.....	4
OPRAVY	4
Záruční opravy.....	4
Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka	4
Neoprávněná reklamace	5
NÁHRADNÍ DÍLY	5
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE	5

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení klozetového křesla do sprchy. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

ÚČEL POUŽITÍ

Multifunkční křeslo do koupelny MOPEDIA je určeno pro osoby s obtížemi chůze a slouží jako pomůcka do sprchy a koupelny.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu koupelňových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce.
- O vhodnosti výrobku se vždy poradte svým ošetřujícím lékařem či terapeutem.
- Zkontrolujte kompletnost balení a uchovávejte jej mimo zdroje tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením jeho součástí.
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo s ním jiným způsobem manipulovaly.

OBECNÝ POPIS

RP783 – Multifunkční židle MOPEDIA z ocelové konstrukce, sedátko s poklopem: PVC materiál, protiskluzové pryžové nástavce. Nastavitelná výška po krocích - 2,5 cm.

PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte opotřebení částí výrobku, aby bylo zaručeno, že výrobek bude zcela bezpečný pro uživatele a jeho okolí.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně namontovány.

PŘED MONTÁŽÍ

Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

MONTÁŽ

Vložte do držáků toaletní nádobu, která je součástí balení a ujistěte se, že je správně uchycena.

SEDÁTKO

- Pro nastavení výšky křesla nastavte výšku každé nohy zvlášť stisknutím kolíku na každé z nich. Vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolíček.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nožičky ve stejné výšce.



obr. 1



obr. 2

Zvednutí područek

Zvedněte područky, dokud nezapadne pojistka.

Sklopení područek

Stiskněte bezpečnostní pojistky a sklopte područky dolů.

POZNÁMKA: Před usednutím:

- Umístěte křeslo na rovnou a pevnou plochu.
- Ujistěte se, že je křeslo ve stabilní pozici.

UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ

- Buďte opatrní, je-li podlaha mokrá nebo kluzká.
- Křeslo nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální nosnost uvedenou na obalu.
- Křeslo umístěte na rovný a pevný povrch. Nepoužívejte křeslo na schodech nebo na nakloněném povrchu.
- Nepoužívejte křeslo pro jiné účely, než je uvedeno v této příručce. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
- Nenechávejte výrobek v dlouhodobém kontaktu s vodou.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu a opotřebení částí výrobků.
- V případě pochybností ohledně použití, opravy nebo údržby výrobku kontaktujte svého prodejce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli možným rizikům.

POUŽITÍ

Pokyny pro usedání:

- Nesedejte na křeslo opřením pouze na jednu stranu.
- Při zvedání se vždy opírejte oběma rukama, abyste vstali snadněji a udrželi rovnováhu.
- Bude-li křeslo používat osoba s pohybovými obtížemi, vždy ji pomáhejte při usedání a vstávání z křesla.

UPOZORNĚNÍ: Nepřenášejte křeslo, pokud v něm osoba sedí.

ÚDRŽBA

Výrobky řady MOPEDIA firmy. jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost uživatele se doporučuje, aby byla bezpečnost výrobku zkontrolována autorizovaným servisem každé dva roky.

Pravidelná kontrola znamená kontrolu následujících částí:

- Zkontrolujte montáž;
- Zkontrolujte všechny svařovací body;
- Zkontrolujte protiskluzové nástavce;

V případě opravy používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Na čištění výrobku použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla 1:1 a smíchat s vodou. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie.

Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

PODMÍNKY LIKVIDACE

Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Kód	Max. nosnost	Výška područek při nastavení výšky sedátka	Nastavitelná výška sedátka	Základna	Materiál
RP783	130 kg	60 - 78 cm	40 - 58 cm		ocel

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



RV7058-5
Náhradní sedátko na
WC s poklopem



RV7069-1
Toaletní nádoba pro
toaletní křeslo
včetně háčku
a poklopu



RV7024
Ø 29mm
Protiskuzové nástavce na
nohy 4 ks

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě postižení přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravdu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.
telefon: +420 725 323 111
www: www.stamed.cz
email: obchod@stamed.cz
adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň