

PODPĚRA ZAD
NÁVOD K POUŽITÍ

MOPEDIA®



INDEX

1. KÓD	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA.3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STRANA.3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	STRANA.3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	STRANA.4
6. SYMBOLY	STRANA.4
7. OBECNÝ POPIS.....	STRANA.4
7.1 Zobrazení a seznam komponentů.....	strana 4
8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ	STRANA.5
8.1 Montáž.....	strana 5
8.2 Demontáž	strana 5
9. OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ.....	STRANA.5
10. NÁVOD NA POUŽITÍ.....	STRANA.5
11. ÚDRŽBA	STRANA.5
12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	STRANA.5
12.1 Čištění.....	strana 5
12.2 Dezinfekce	strana 5
13. PODMÍNKY LIKVIDACE	STRANA.5
14. NÁHRADNÍ DÍLY	STRANA.6
15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	STRANA.6
15.1 Rozměr	strana 6
15.2 Technické specifikace.....	strana 6
16. ZÁRUKA	STRANA.6
17. OPRAVY.....	STRANA.6
18. NÁHRADNÍ DÍLY	STRANA.7
19. OSVOBOZENÉ DOLOŽKY	STRANA.7

 Zdravotnický prostředek třídy I

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA RS450-RS455 02A_ENG_09 2020

1. KÓDY

RS450 - Zádová opěrka z bílé pružné fólie

RS455 - Opěradlo z plátna s polstrovanou opěrkou hlavy

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali opěradlo řady **MOPEDIA**, výrobce **MORETTI S.p.A.** Jejich design a kvalita jsou zárukou pohodlí, bezpečnosti a spolehlivosti. Opěradla řady **MOPEDIA od společnosti MORETTI S.p.A.** jsou navržena a vyrobena tak, aby splňovala všechny vaše požadavky na praktické a správné používání. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat vámi vybraný zvedák, a nabízí spoustu cenných rad pro vaši bezpečnost. Před použitím patientského zvedáku si prosím pečlivě přečtete návod k použití. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Zádová opěrka Mopedia je určena pro osoby v nemocnici nebo doma, které musí dlouho ležet.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda výrobek nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození jej nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.

- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.P.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.



- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodáváný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny PŘÍSLUŠENSTVÍ K LŮŽKÁM je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:




1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované přílohou I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabici NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže .

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ


- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte celý návod k použití
- Ujistěte se, že je výrobek dodán kompletní, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- Životnost servisu - limit používání zařízení je dán opotřebením dílů.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo ho obsluhovaly.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, výrobcí a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.

6. SYMBOLY


- REF** Kód produktu
- UDI** Jedinečná identifikace zařízení
- CE** Označení CE
-  Výrobce
- LOT** Šarže
-  Přečtěte si návod k použití
- MD** Zdravotnický prostředek
-  Podmínky likvidace

7. OBECNÝ POPIS

7.1 Zobrazení a seznam součástí

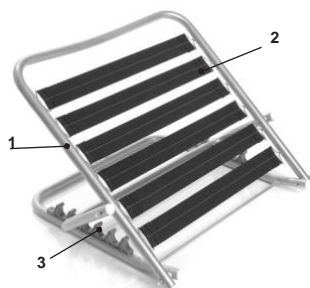

RS450

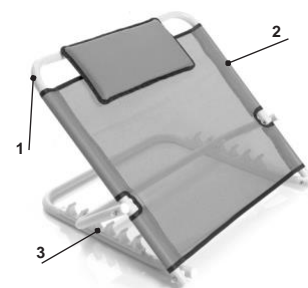

RS455

1. Rám - 1ks
2. Opěradlo - 1ks
3. Podpěra pro nastavení sklonu - 1ks

8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

8.1 Sestavení stránek

- Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda obsah odpovídá popisu dílů v příručce.
- Položka je pro vás připravena k použití

8.2 Demontáž

- Při demontáži postupujte přesně opačně, než je uvedeno výše.

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

- Vždy zkontrolujte stav mechanických částí, abyste zajistili jejich naprostou bezpečnost při používání;
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno;
- Nepřekračujte maximální nosnost;
- Seřizovací operace provádějte bez zatížení;
- Při manipulaci vždy asistujte pacientovi.



POZOR! Buďte velmi opatrní při používání ručního nebo elektrického opěradla lůžka, které pomáhá pacientovi vstát.

10. JAK POUŽÍVAT

Asistent musí opěradlo umístit a nastavit s maximální opatrností, aby nedocházelo k náhlým pohybům nebo nebezpečným výkyvům. Asistent musí kontrolovat každý pohyb pacienta.

11. ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte konstrukci: správnou polohu trubek, spojů, háků a úplné dotažení šroubů a/nebo svorek.

12. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

12.1 Čištění

Použijte vlhký hadřík nebo roztok vlažné vody a neutrálního mýdla.



POZOR! Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, zásady, alkohol, čisticí prostředky na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezavění kovových povrchů.

Výrobní společnost neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií při čištění.

12.2 Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.



POZOR! Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, zásady, alkohol, čisticí prostředky na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezavění kovových povrchů.

13. PODMÍNKY LIKVIDACE



Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy zpětného odběru tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím společných obecních ekologických ostrovů pro předpokládané operace recyklace použitých materiálů.


14. NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly a příslušenství naleznete vždy v hlavním katalogu MORETTI.

POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORETTI. SPOLEČNOST MORETTI S.P.A. NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM.

15. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

15.1 Rozměr

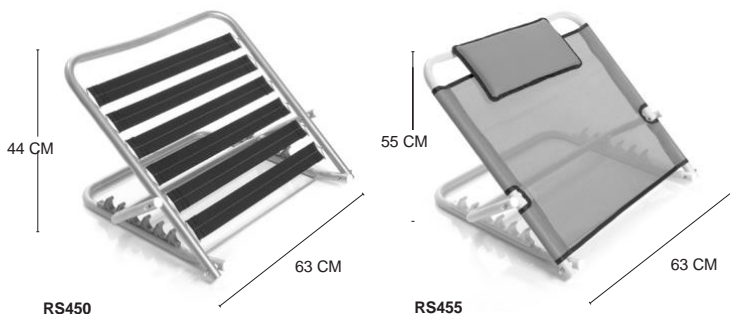

15.2 Technické specifikace

- Ocelový rám lakovaný
- Podrobnosti o polypropylenu
- Trubku lze otáčet pro více umístění
- Zádová opěrka s pružným ohybem (**RS450**)
- Opěradlo z plátna s polstrovanou opěrkou hlavy (**RS455**)

16. ZÁRUKA

Na každý výrobek Moretti je poskytována záruka po dobu 2 (dvou) LET od data nákupu, s výjimkou níže uvedených omezení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, zneužitím, úpravami výrobku nebo jiným použitím, které není v souladu s návodem k použití.

Správné použití výrobku je uvedeno v návodu k použití. Společnost Moretti S.p.A. nese žádnou zodpovědnost za případné škody nebo zranění osob způsobené nesprávnou montáží/nesprávným používáním zařízení, které není v souladu s uživatelskou příručkou. Společnost Moretti neručí za poškození nebo závady svých výrobků v následujících případech: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo opravy.

Škody způsobené problémy s elektrickým napájením (pokud je k dispozici), použitím dílů nebo součástí, které nebyly dodány společností Moretti, nedodržením pokynů a návodu k použití, neautorizovanými úpravami, poškozením způsobeným přepravou (odlišnou od originální dodávky Moretti), nebo selhání při údržbě zařízení, jak je uvedeno v příručce. Na součásti podléhající opotřebením se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

17. OPRAVY

Záruční opravy

Pokud výrobek Moretti vykazuje během záruční doby vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti S.p.A. společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti S.p.A. může podle svého nezpochybnitelného uvážení vyměnit nebo opravit záruční výrobek v prodejním místě společnosti Moretti nebo ve vlastních kvalifikovaných kancelářích. Náklady na práci při opravě výrobku mohou jít na vrub společnosti Moretti, pokud se zjistí, že se jedná o záruční opravu. Opravu nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a doručení při mimozáruční opravě jdou plně na vrub zákazníka nebo prodejce. Na opravy mimozáručních výrobků se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy zákazník obdrží opravený výrobek.

Nepoškozené zařízení

Zákazník je informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku rozhodne, že výrobek není vadný. Výrobek bude zaslán zpět zákazníkovi a veškeré náklady na zpětné doručení jdou na jeho náklady.

18. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne jejich obdržení.

19. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

Kromě toho, co je jasně uvedeno v této záruce a v souladu se zákonem, společnost Moretti S.p.A. neposkytuje svým zákazníkům žádné jiné prohlášení, záruku nebo podmínku, výslovnou nebo implicitní, včetně prohlášení, záruky nebo podmínky prodejnosti, neporušování nebo nezasahování, vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Moretti S.p.A. nezaručuje, že používání výrobků Moretti bude trvalé a bezchybné. Doba trvání případných implicitních záruk, které lze uplatnit v souladu se zákonem, je omezena záruční dobou. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání implicitní záruky, zproštění odpovědnosti nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod souvisejících s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá zproštění odpovědnosti nebo omezení této záruky. Tato záruka podléhá změnám bez předchozího upozornění.

**ZÁRUČNÍ LIST**

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní prodejce e _____

Adresa _____ Obec/město _____

Prodáno do _____

Adresa _____ Obec/město _____

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.