



MOPEDIA®

Onda



**SEDAČKA DO VANY NASTAVITELNÁ
RS809**

Návod k obsluze

Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
OBECNÝ POPIS	2
MONTÁŽ	2
PŘED POUŽITÍM	3
UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ.....	3
POUŽITÍ.....	3
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	3
PODMÍNKY LIKVIDACE	3
TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	3
ZÁRUKA.....	3
OPRAVY	4
NÁHRADNÍ DÍLY	4
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE	4

OZNAČENÍ

RS809 Sedačka do vany nastavitelná

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení sedačky do vany. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda výrobek nebyl poškozen během přepravy. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

ÚČEL POUŽITÍ

Sedačka do vany zajistí méně mobilním uživatelům komfort při koupání,

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud neporozumíte varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se na odborného lékaře, obchodního zástupce nebo na technický personál před použitím tohoto výrobku, abyste předešli zranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek uchovávejte mimo zdroje tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením jeho součástí.
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění.

- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo s ním jiným způsobem manipulovaly.

OBECNÝ POPIS

Plastová sedačka s protiskluzovým madlem a otvory pro odtok vody. Nastavitelná dle šířky vany.



MONTÁŽ

Výrobek je dodáván nesmontovaný, ale lze ho snadno sestavit bez použití nástrojů.

Obsah balení:

- Sedadlo (1 ks)
- Nastavitelné boční opěrky (4 ks)
- Madlo (1 ks)
- Šrouby

Našroubujte na spodní stranu sedadla čtyři dorazové boční opěrky. Utáhněte je pomocí šroubováku nebo malé mince. Otočte sedačku bočními opěrkami směrem dolů a vložte madlo do otvorů na kraji sedačky. Madlo by mělo být umístěné na opačné straně, než je přístup do vany.

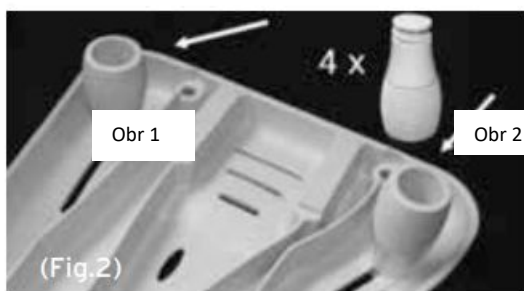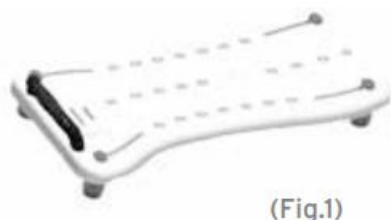

Nastavení sedačky

- Otočte sedačku a uvolněte 4 boční opěrky, tak aby s nimi bylo možné pohybovat.
- Posuňte boční opěrky do středu sedačky.
- Znovu otočte sedačku tak, aby sedačka s madlem byla čelem ke zdi. (Madlo musí být umístěné na kraji sedačky.)
- Šířku nastavte dle potřeby a typu vany.
- Posuňte boční dorazové opěrky tak, aby se dotýkaly vnitřní strany vany a utáhněte.
- Otočte sedačku s bočními opěrkami nahoru a posuňte opěrky ještě o cca 2 mm směrem ven.
- Nyní je utáhněte tak, aby se nepohybovaly.
- Umístěte sedačku zpět na vanu, jestliže opěrky sami sklouznou po bocích vany, bude je nutné ještě více posunout k okraji vany.

PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není poškozená konstrukce sedačky, aby bylo zaručeno bezpečné používání.
- Zkontrolujte správnou montáž výrobku.

UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ

- Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
- Vždy pomáhejte pacientovi s omezenou pohyblivostí posadit se na sedačku.
- Sedačku nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na obalu.
- Vyvarujte se prudkých pohybů během užívání.
- Výrobek neukládejte venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku a jeho pevnost.
- V případě pochybností ohledně použití, úpravy nebo údržby výrobku, kontaktujte svého prodejce.

!! Maximální nosnost nepřekračujte z jakéhokoli důvodu!!

POUŽITÍ

Umístěte sedačku do vany a utažením zátek zajistíte stabilitu. Madlo nasad'te na opačnou stranu přístupu do vany. Pokud je to nutné, pomozte uživateli posadit se na sedačku. Použijte madlo jako oporu při pohybu a při usednutí či zvednutí ze sedačky.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Na čištění výrobku použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla 1:1 a smíchat s vodou. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie.

Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

PODMÍNKY LIKVIDACE

Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Rozměry: 76 x 35 x 16 cm; váha: 2,4 kg; maximální nosnost 160 kg.

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.cz

email: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň