



MOPEDIA®

Onda



KOUPELNOVÁ STOLIČKA RS817

Návod k obsluze

Zdravotnický prostředek třídy I
D. Lgs 24/02/97 n.46 podle prováděcí směrnice 93/42 EHS a následných změn

OZNAČENÍ

RS817 Koupelnová stolička

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení stoličky do koupelny MOPEDIA. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOUMĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

PŘED POUŽITÍM

Koupelnová stolička zajistí zdravotně postiženým komfort při sprchování.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy za řízení, za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

OBECNÁ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varování, upozornění nebo pokynům, obraťte se na odborného lékaře, obchodního zástupce nebo na technický personál před pokusem o použití tohoto výrobku, aby nedošlo ke zranění nebo poškození výrobku.

- Výrobek uchovávejte mimo zdroj tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána běžným opotřebením jeho součástí.
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění.
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo nějakým způsobem s ním manipulovaly.

OBECNÝ POPIS

Kruhová koupelnová stolička

MONTÁŽ

Výrobek je dodáván nesmontovaný a lze ho snadno sestavit bez použití nástrojů.

Obsah balení:

- Kulaté sedadlo s rámem (1 ks)
- Nohy (4 ks)

PŘED POUŽITÍM

- Zkontrolujte, zda není konstrukce výrobku poškozena, aby bylo zaručeno bezpečné používání.
- Zkontrolujte správnou montáž výrobku.
- Vždy pomáhejte pacientovi usadit se na stoličku.
- Stoličku nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na obalu.
- Vyvarujte se prudkých pohybů během přemístění.
- Buďte opatrní - je-li podlaha mokrá nebo kluzká, může znesnadnit pohyb pacienta.
- Výrobek neukládejte venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, utaženost šroubů a protiskluzové nožičky.
- V případě pochybností ohledně použití, opravy nebo údržby výrobku, kontaktujte svého prodejce.

Nastavení výšky

- Pro nastavení výšky stoličky nastavte výšku každé nohy zvlášť stisknutím kolíku na každé z nich. Vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolíček.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nožičky ve stejné výšce.
- Umístěte stoličku na rovnou plochu a před použitím zkontrolujte její stabilitu.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

Čištění

Použijte pouze vlhký hadřík a jemné mýdlo. Před použitím dobře osušte.

Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

POZNÁMKA: V žádném případě nepoužívejte na čištění výrobku kyseliny nebo zásaditá agresivní rozpouštědla a látky s přísadkou acetonu.

PODMÍNKY LIKVIDACE

Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OPRAVY

Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEdia má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztážena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem, že výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEdia je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.cz

email: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň