



**MOPEDIA®**



*Onda*



**SEDAČKA DO SPRCHY S VÝŘEZEM  
RS831**

**Návod k obsluze**

## Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	1
ÚČEL POUŽITÍ.....	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
OBECNÝ POPIS.....	2
MONTÁŽ.....	2
UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ.....	2
POUŽITÍ.....	2
Nastavení výšky .....	2
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	2
Čištění.....	2
Dezinfekce .....	2
PODMÍNKY LIKVIDACE .....	3
Obecné podmínky likvidace .....	3
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:.....	3
ZÁRUKA.....	3
OPRAVY .....	3
Záruční opravy.....	3
Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka .....	3
Neoprávněná reklamace .....	3
NÁHRADNÍ DÍLY .....	3
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE .....	4

## OZNAČENÍ

RS831 Sedačka do sprchy s výřezem

## ÚVOD

Děkujeme za zakoupení sedačky do sprchy MOPEDIA. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodáváný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOUMĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda výrobek není poškozen přepravou. V případě poškození výrobek nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.

## ÚČEL POUŽITÍ

Sedačka do sprchy zajistí zdravotně postiženým komfort při sprchování.

### UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobce a dodavatel nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy zařízení za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

### OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce. Pokud se vám nedaří porozumět varováním, upozorněním nebo pokynům, obraťte se na odborného lékaře, obchodního zástupce nebo na technický personál před pokusem o použití tohoto výrobku, aby nedošlo ke zranění nebo poškození výrobku.
- Výrobek uchovávejte mimo zdroj tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením součástí.
- Vždy věnujte pozornost pohyblivým částem výrobku – nebezpečí zranění

- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo jiným způsobem s ním manipulovaly.

## OBECNÝ POPIS

Koupelnová sedačka z lakovaného hliníkového rámu a HDPE plastu s výřezem pro intimní hygienu. Výškově nastavitelné nohy s protiskluzovými nastavci. Montáž bez nástrojů.

## MONTÁŽ

Výrobek je dodáván nesmontovaný, ale lze ho snadno sestavit bez použití nástrojů.

### Obsah balení:

- Nohy s protiskluzovými nastavci (4 ks)
- Sedadlo (1 ks)

Připevněte nohy k sedátku. V případě potřeby otáčejte protiskluzovými nastavci tak, aby se dotýkaly podlahy.

## UPOZORNĚNÍ PŘI POUŽITÍ

- Výrobce ani distributor nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku.
- Vždy pomáhejte pacientovi s omezenou pohyblivostí posadit se na stoličku.
- Stoličku nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální nosnost uvedenou na obalu.
- Vyvarujte se prudkých pohybů během přemístění.
- Buďte opatrní, je-li podlaha mokrá nebo kluzká, to může znesnadnit umístění pacienta.
- Výrobek neukládejte venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, utažení šroubů a stav protiskluzových nožiček.
- V případě pochybností ohledně použití, úpravy nebo údržby výrobku kontaktujte svého prodejce.  
!! Maximální nosnost v žádném případě nepřekračujte!!

## POUŽITÍ

### Nastavení výšky:

- Pro nastavení výšky stoličky nastavte výšku každé nohy zvlášť stisknutím kolíku na každé z nich.
- Vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolíček.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny nožičky ve stejné výšce.
- Umístěte sedačku na rovnou plochu a před použitím zkontrolujte její stabilitu.

## ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### Čištění

Na čištění výrobku použijte roztok alkoholu a neutrálního mýdla 1:1 a smíchejte s vodou. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol a čisticí prostředky na bázi chloru, dezinfekční prostředky a aceton, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu výrobku.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím přípravků, které by mohly během čištění poškodit povrch výrobku nebo korozivní chemikálie.

### Dezinfekce

V případě potřeby dezinfikujte výrobek běžným dezinfekčním prostředkem.

## PODMÍNKY LIKVIDACE

### Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

RS831 – rozměry: 49-56 cm x 42 x 41-53 cm; sedadlo: 48 x 33 cm; hmotnost: 2,3 kg; maximální nosnost: 110 kg.

\* Měření se vztahuje na celkové rozměry.

## ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

## OPRAVY

### Záruční opravy

V případě, že produkt MOPEDIA má během záruční doby materiálové nebo výrobní vady, výrobce/dodavatel posoudí, zda je na vadu výrobku vztažena záruka. Výrobce/dodavatel může na základě vlastního uvážení nahradit nebo opravit záruční položku u konkrétního dealera dané společnosti nebo v jeho sídle. Náklady na opravu přístroje v případě uznání záruky nese výrobce, potažmo prodejce přístroje. Oprava nebo výměna neobnovuje nebo prodlužuje záruku.

### Oprava výrobku, na který se nevztahuje záruka

Produkt, na nějž se nevztahuje záruka, lze opravit u autorizovaného prodejce zařízení. Náklady na práci a dopravu spojené s opravou, na kterou se nevztahuje záruka, budou plně hrazeny zákazníkem. Na vykonanou opravu se vztahuje záruční doba po dobu šesti (šesti) měsíců, počínaje dnem, kdy byl opravovaný výrobek obdržen.

### Neoprávněná reklamace

Zákazník bude informován o tom, že po přezkoumání a otestování vráceného produktu dodavatelem výrobek není vadný a nelze uplatnit záruční opravu. Produkt bude vrácen zákazníkovi a bude účtován náklad za dopravu výrobku zákazníkovi.

## NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly MOPEDIA je poskytována záruční doba šesti (6) měsíců od data, kdy byly náhradní díly použity.

## OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



**Stamed s.r.o.**

telefon: +420 725 323 111

www: [www.stamed.cz](http://www.stamed.cz)

email: [obchod@stamed.cz](mailto:obchod@stamed.cz)

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň