



STOLEK NAD LŮŽKO

NÁVOD K POUŽITÍ

1. KÓDY	3
2. ÚVOD	3
3. URČENÉ POUŽITÍ	3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	4
6. SYMBOLY	4
7. OBECNÝ POPIS	5
8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ	5
9. PŘED POUŽITÍM	6
10. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM POUŽITÍ	7
11. JAK POUŽÍVAT	7
12. ÚDRŽBA	8
13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE	8
14. PODMÍNKY LIKVIDACE 	8
15. NÁHRADNÍ DÍLY	8
16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI	8
17. ZÁRUKA	9
18. OPRAVA	9
19. NÁHRADNÍ DÍLY	10
20. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY	10



Zdravotnický prostředek třídy I

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745

ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

1. KÓDY

RS890X - sklápěcí stolek nad lůžko na kolečkách se dvěma policemi, lakovaná ocelová konstrukce, automatický zdvih

RS891X - Jednopatrový sklápěcí stolek nad lůžko na kolečkách, lakovaná ocelová konstrukce, automatické zvedání.

2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali stolek přes postel z řady MOPEDIA, výrobce MORETTI S.p.A. Jejich design a kvalita jsou zárukou pohodlí, bezpečnosti a spolehlivosti. Stoly přes postel řady MOPEDIA od společnosti MORETTI S.p.A. jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické a správné používání. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení pro správné používání vámi vybraných stolů a nabízí mnoho cenných rad pro vaši bezpečnost. Před použitím stolku na lůžko si prosím pečlivě přečtěte návod k obsluze. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže.

3. URČENÉ POUŽITÍ

Stolky MOPEDIA jsou určeny především pro pacienty upoutané na lůžko, u nichž se předpokládá konzumace jídla na lůžku nebo na židli. Jsou však přizpůsobitelné jak v nemocnicích, tak v domácnostech.

POZNÁMKA:

Zkontrolujte, zda výrobek nebyl během přepravy poškozen. V případě poškození jej nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce, který vám poskytne další pokyny.



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.P.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodávaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny STOLKY k LŮŽKŮM je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017. Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované v příloze I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v balení NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.

Poznámka: Úplné kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které společnost Moret- ti S.p.A. vydává a zpřístupňuje svými kanály.

4.1 Odkaz na normy a pokyny

Bezpečnostní zkoušky požadované normou UNI EN 12182

5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Vždy dávejte pozor na přítomnost pohyblivých částí, které by mohly způsobit zachycení končetin a zranění.
- Správné používání přístroje je popsáno v tomto návodu.
- Správné používání přístroje konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost příslušenství je dána opotřebením dílů, které nelze opravit a/nebo vyměnit.
- Buďte opatrní, když jsou poblíž dětí.
- Nepřekračujte maximální užitečné zatížení.

6. SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečná identifikace zařízení



Označení CE



Výrobce Šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnický prostředek




Podmínky likvidace

7. OBECNÝ POPIS

a. Zobrazení a seznam součástí


RS890X

- A. Velké šrouby - 2ks
- B. Uzamykací systém (zajišťovací tyč a kroužek, knoflík a uzávěr) - 4ks
- C. Malý stolek - 1ks
- D. Perforovaná destička - 1ks
- E. Velký stůl - 1ks
- F. Základna - 1ks
- G. Kolečka - 4ks
- H. Sloupek - 1ks

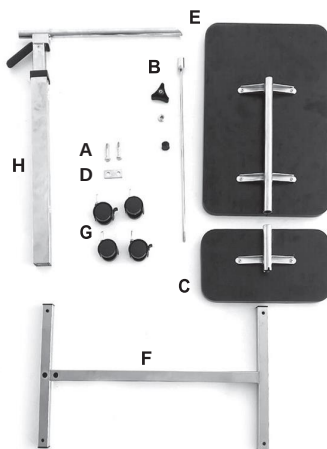

RS891X

- A. Velký šroub - 2ks
- B. Malý šroub - 2ks
- C. Sloupek - 1ks
- D. Perforovaná destička - 1ks
- E. Základna - 1ks
- F. Kolečka - 4ks

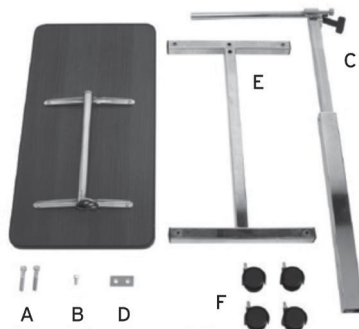

8. MONTÁŽ/DEMONTÁŽ

a. Sestavení stolků

RS890X

1. Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda obsah odpovídá popisu dílů v příručce. Sestavte čtyři kolečka.
2. Sestavte sloupek pomocí děrované destičky (obr. D) a dvou velkých šroubů (obr. A) a zajistěte je velkým imbusovým klíčem.
3. Sestavte malý stolek tak, že vložíte podpěru sloupku do pouzdra a zasunete ji až na doraz, přičemž rovina zůstane vodorovná.
4. Sestavte velký stůl tak, že do vyčnívající části trubky na stole zasunete část tyčky na sloupku a zatlačte jej až na doraz.
5. Zasuňte zajišťovací tyč do části 1 trubky (použijte šroubovák, abyste ji zasunuli do spodní části).
6. Zasuňte pojistný kroužek do vyčnívajícího konce tyče v části 2.
7. Utáhněte knoflík a dávejte pozor, abyste netlačili na tyč.





RS891X



Neodstraňujte bezpečnostní šroub před bodem "3".

POZOR!

1. Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda obsah odpovídá popisu v dokumentu díly v příručce. Sestavte čtyři kolečka.
2. Sestavte sloupek pomocí děrované destičky (obr. D) a dvou velkých šroubů (obr. A) a zajistěte je imbusovým klíčem.
3. Vložte stolek do vyčnívající trubky sloupu.
4. Pomocí imbusového klíče připevněte stolek pomocí malého šroubu (obr. B). Odstraňte černý šroub (A strana 8), který funguje jako pojistka, a nahraďte jej šroubem uvnitř sáčku (B strana 8).
5. Nyní je stolek nad postelí připraven k použití.



b. Demontáž

- i. Pro demontáž postupujte přesně opačně, než je uvedeno výše.

9. PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav mechanických částí, abyste zajistili jejich naprostou bezpečnost při používání.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno. Zvláštní pozornost věnujte zajištění knoflíků.

10. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ BĚHEM POUŽITÍ

- Nepřekračujte maximální nosnost.
- Ujistěte se, že je povrch podlahy, na které stojí stolek, rovný.
- Seřizovací operace provádějte bez zatížení.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti dobře upevněny.
- Při elevaci pacientovi vždy pomáhejte.
- Nenechávejte na stole po delší dobu nadměrné zatížení.
- Nadměrné zatížení boků stolu může způsobit jeho naklonění.

11. JAK POUŽÍVAT

Asistent musí umístit a nastavit lůžkový stůl s maximální opatrností, aby nedocházelo k náhlým pohybům nebo nebezpečným výkyvům. Pro odblokování zvedacího systému vyšroubujte šroub uvedený na sloupku.

RS890X

Utáhněte šroub, abyste zablokovali v požadované výšce. Otáčením šroubu se může velký stolek otáčet. Opětovným utážením šroubu jej zablokuje v požadovaném sklonu.

Stisknutím páčky se stolek automaticky zvedne. Zatlačením na stolek se spustí dolů. Utáhněte šroub, aby se zablokoval v požadované výšce.



RS891X

Stisknutím páčky (C1) se stolek automaticky zvedne. Zatlačením na stolek se spustí dolů. Utáhněte šroub, aby se zablokoval v požadované výšce. Otáčením šroubu (C2) se může stolek otáčet. Opětovným dotažením šroubu jej zablokuje v požadovaném sklonu.



12. ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte konstrukci: správnou polohu trubek, spojů, háků a úplné dotažení šroubů a/nebo svorek.

13. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

a. Čištění

Použijte vlhký hadřík nebo roztok vlažné vody a neutrálního mýdla.



Při čištění nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, zásady, alkohol, čisticí prostředky na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezavění kovových povrchů.

Výrobní společnost neodpovídá za škody způsobené použitím materiálů, které mohou poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií při čištění.

b. Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný jemný dezinfekční neutrální prostředek.

14. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy zpětného odběru tuhých komunálních odpadů. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím společných komunálních recyklačních oblastí pro předpokládané operace recyklace použitých materiálů.

15. NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly a příslušenství naleznete vždy v hlavním katalogu MORETTI. POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MORETTI. SPOLEČNOST MORETTI S.P.A. NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ UDÁLOSTI ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM.

16. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

a. Rozměr

RS890X

Výška 74-119 cm

Malý stůl Šířka 20,5 cm

Velký stůl Šířka 56 cm

Hloubka 38,5 cm

Výška od země po základnu 9 cm

Průměr kola 5 cm

Hmotnost cca 11 Kg

Nosnost 20 Kg

RS891X

Výška 78-110 cm

Šířka 80 cm

Hloubka 50 cm

Výška od země po základnu 9 cm

Průměr kola 5 cm

Hmotnost cca 11 Kg

Nosnost 20 Kg

b. Technické specifikace**RS890X - RS891X**

- I Lakovaný a chromovaný ocelový rám
- II Automatické nastavení výšky pomocí páky
- III Laminátový stůl odolný proti poškrábání
- IV Ochranný okraj z polypropylenu
- V Protínárazový okraj a okraj odolný proti proříznutí z polyethylenu
- VI Polohovatelný stůl ve více polohách
- VII Malý stolek (*pouze pro RS890X)
- VIII K dispozici v přírodní nebo hnědé barvě

17. ZÁRUKA

Na každý výrobek Moretti je poskytována záruka po dobu 2 (dvou) let od data nákupu, s výjimkou níže uvedených omezení. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nesprávným používáním, zneužitím, úpravami výrobku nebo jiným použitím, které není v souladu s návodem k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce. Společnost Moretti S.p.A. nenese odpovědnost za škody nebo zranění osob způsobené nesprávnou montáží/nesprávným používáním zařízení, které není v souladu s uživatelskou příručkou. Společnost Moretti neručí za poškození nebo závady svých produktů v následujících případech: živelné pohromy, neautorizovaná údržba nebo opravy, škody způsobené problémy s elektrickým napájením (pokud je poskytováno), použití dílů nebo komponentů, které nebyly poskytnuty společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, škody způsobené přepravou (odlišnou od originální dodávky společnosti Moretti) nebo nedodržení údržby zařízení podle pokynů v návodu k použití. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

18. OPRAVA**Záruční oprava**

Pokud výrobek Moretti vykazuje během záruční doby vady materiálu nebo výrobní vady, společnost Moretti S.p.A. společně se zákazníkem posoudí, zda se na vadu výrobku vztahuje záruka. Společnost Moretti S.p.A. může podle svého nezpochybnitelného uvážení vyměnit nebo opravit záruční výrobek v prodejném místě společnosti Moretti nebo ve svých vlastních kvalifikovaných kancelářích. Náklady na práci při opravě výrobku mohou jít na vrub společnosti Moretti, pokud se zjistí, že se jedná o záruční opravu. Opravou nebo výměnou se záruka neobnovuje ani neprodlužuje.

Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím povolení zákaznického servisu společnosti Moretti. Náklady na práci a dodání při mimozáruční opravě jdou plně na vrub zákazníka nebo prodejce. Na opravy mimozáručních výrobků je poskytována záruka 6 (šest) měsíců ode dne, kdy zákazník obdrží opravený výrobek.

Nepoškozené zařízení

Zákazník je informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku rozhodne, že výrobek není vadný. Výrobek bude zaslán zpět zákazníkovi a veškeré náklady na zpětné doručení jdou na jeho náklady.

19. NÁHRADNÍ DÍLY

Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců ode dne jejich obdržení.

20. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

Kromě toho, co je jasně uvedeno v této záruce a v souladu se zákonem, neposkytuje společnost Moretti S.p.A. svým zákazníkům žádné jiné prohlášení, záruku nebo podmínku, výslovnou nebo implicitní, včetně prohlášení, záruky nebo podmínky prodejnosti, neporušování nebo nezasahování, vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Moretti S.p.A. nezaručuje, že používání výrobků Moretti bude trvalé a bezchybné. Doba trvání případných implicitních záruk, které lze uplatnit v souladu se zákonem, je omezena záruční dobou. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání implicitní záruky, zproštění odpovědnosti nebo omezení náhodných nebo nepřímých škod souvisejících s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na uživatele nemusí vztahovat některá zproštění odpovědnosti nebo omezení této záruky. Tato záruka podléhá změnám bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

Produkt _____

Zakoupeno dne (datum) _____

Maloobchodní prodejce _____

Adresa _____ Obec/město _____

Prodáno komu _____

Adresa _____ Obec/město _____

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: **info@morettispa.com**



MADE IN P.R.C.