



**MOPEDIA®**

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

---

### **BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA NA WC**

## OBSAH

1. KÓD .....	STR. 3
2. ÚVOD.....	STR. 3
3. URČENÉ POUŽITÍ.....	STR. 3
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	STR. 3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	STR. 4
6. SYMBOLY .....	STR. 4
7. MONTÁŽ.....	STR. 4
8. NASTAVENÍ VÝŠKY .....	STR. 5
9. PŘED POUŽITÍM .....	STR. 5
10. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ .....	STR. 5
11. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE .....	STR. 5
11.1 Čištění.....	str. 5
11.2 Dezinfekce .....	str. 5
12. PODMÍNKY LIKVIDACE .....	STR. 5
13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI.....	STR. 5
14. ZÁRUKA .....	STR. 6
15. OPRAVY .....	STR. 6
15.1 Záruční oprava .....	str. 6
15.2 Opravy, na které se nevztahuje záruka.....	str. 6
15.3 Nepoškozené zařízení .....	str. 6
16. NÁHRADNÍ DÍLY .....	STR. 6
17. DOLOŽKY O VÝJIMCE .....	STR. 6
18. ZÁRUČNÍ LIST.....	STR. 7

CE Zdravotnický prostředek třídy I  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745  
ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

## 1. KÓD

**RS910** Bezpečnostní zábrana na WC

## 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili bezpečnostní zábranu na WC MOPEDIA od společnosti Moretti S.p.A.. Tento návod k použití obsahuje několik doporučení, jak správně používat výrobek, který jste si vybrali, a poskytuje několik cenných rad pro vaši bezpečnost. Před použitím výrobku si prosím návod pečlivě přečtete. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na svého prodejce, který vám poradí a pomůže. V případě nejasností doporučujeme obrátit se na prodejce, který vám může pomoci a správně poradit.

## 3. URČENÉ POUŽITÍ

Pomůcky do vany/sprchy řady MOPEDIA od společnosti Moretti jsou určeny k usnadnění sezení osob se zdravotním postižením nebo osob s pohybovými obtížemi během operací v koupelně.

**POZNÁMKA:** Před použitím zkontrolujte, zda některý díl není poškozen při přepravě, a vyzkoušejte jej. V případě poškození zařízení nepoužívejte. Další pokyny získáte od svého prodejce.

### POZOR!



- Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A odmítá jakoukoli odpovědnost za následky vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku a z neoprávněných zásahů do rámu výrobku.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu informací uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.

## 4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Moretti S.p.A. prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek vyráběný a prodávaný společností Moretti S.p.A. a patřící do skupiny SEDADLA A PODPĚRY PRO WC je v souladu s ustanoveními nařízení 2017/745 o zdravotnických prostředcích ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost Moretti S.p.A. zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Přístroje splňují požadavky na obecnou bezpečnost a funkční způsobilost požadované v příloze I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV výše uvedeného nařízení.
2. Přístroje NEJSOU MĚŘICÍMI PŘÍSTROJI.
3. Přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ TESTY.
4. Zařízení jsou zabalena v krabici NON-STERILE BOX.
5. Přístroje patří do třídy I v souladu s ustanoveními přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost Moretti S.p.A. poskytuje příslušným orgánům technickou dokumentaci k prokázání shody s nařízením 2017/745, a to po dobu nejméně 10 let od výroby poslední šarže.









**Poznámka:** Kompletní kódy výrobků, registrační kód výrobce (SRN), kód UDI-DI a veškeré odkazy na použité předpisy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které Moretti S.p.A. vydává a zpřístupňuje prostřednictvím svých kanálů.

## 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek se doporučuje pro osoby s hmotností maximálně 100 kg. Pro správné použití zařízení si přečtěte tento návod.

- Zabalený výrobek uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, protože obal je vyroben z lepenky.
- Životnost zařízení je dána opotřebením dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda byl výrobek dodán v bezvadném stavu.
- V případě pochybností o používání, nastavení nebo údržbě výrobku se obraťte na svého prodejce.
- Opotřebené, poškozené nebo chybějící součásti je třeba vyměnit.
- Výrobek neskladujte venku.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku, zda jsou šrouby řádně dotaženy a zda jsou gumové krytky v pořádku.
- Nepoužívejte záchodovou mřížku na mokřem povrchu.
- Uživatel a/nebo pacient musí nahlásit jakoukoli závažnou nehodu, ke které došlo v souvislosti s přístrojem, výrobcí a příslušnému orgánu státu, do kterého uživatel a/nebo pacient patří.

## 6. SYMBOLY

	Kód produktu
	Jedinečná identifikace zařízení
	Označení CE
	Výrobce
	Dávková šarže
	Přečtěte si návod k použití
	Zdravotnický prostředek
	Podmínky nakládání s odpady

## 7. MONTÁŽ



Pomůcka pro WC, demontovatelná, výškově nastavitelná, rám z eloxovaného hliníku. Tato pomůcka pomáhá pacientovi při sezení a vstávání.

Při montáži postupujte podle výkresu a zašroubujte přední tyč (A) a zadní tyč (B). Ujistěte se, že jsou všechny šrouby dostatečně utaženy.

## 8. PRO NASTAVENÍ VÝŠKY

Stiskněte zarážku a posuňte hůl do požadované výšky. Nasaďte zarážku a ujistěte se, že je zcela vysunuta požadovaným otvorem. Zkontrolujte, zda mají všechny čtyři nohy stejnou výšku.

## 9. PŘED POUŽITÍM

- Vždy kontrolujte opotřeбенí mechanických částí, abyste zajistili naprostou bezpečnost používání zařízení pro osoby a věci.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně sestaveno.

## 10. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

Výrobce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za následky nesprávného použití výrobku.

- Nepoužívejte u pacientů, kteří překračují maximální hmotnost uvedenou na štítku umístěném na rámu výrobku.
- Během polohování se vyvarujte prudkých pohybů.
- Buďte opatrní na mokré podlahy, na mokrém nebo kluzkém povrchu, mohlo by to ztížit polohování pacienta.
- Výrobek neskladujte venku. Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku a správné upevnění šroubů a stav ochranných pryží.
- V případě pochybností o používání, seřízení nebo údržbě výrobku se obraťte na svého prodejce.



### POZOR!

· Nepřekračujte maximální povolenou kapacitu !

## 11. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### 11.1. Čištění

K čištění výrobku používejte pouze hadřík namočený ve vodě a osušte jej čistým a suchým hadříkem nebo teplou vodou s neutrálním mýdlem. Nepoužívejte abrazivní látky, kyseliny, alkohol, čisticí prostředky na bázi chlóru, dezinfekční prostředky a aceton při čištění, protože tyto látky způsobují odírání plastových povrchů a rezavění kovových povrchů. Výrobní společnost nenes odpovědnost za škody způsobené použitím materiálů, které by mohly poškodit povrch výrobku, nebo korozivních chemikálií při čištění.

### 11.2. Dezinfekce

Pokud potřebujete výrobek dezinfikovat, použijte běžný dezinfekční neutrální čisticí prostředek.

## 12. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy zpětného odběru tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidace prostřednictvím společných obecních ekologických ostrovů pro předpokládané operace recyklace použitých materiálů.

## 13. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

RS910

\*ROZMĚRY:

 Š: 63 CM  D: 49 CM  V: 60,5÷70,6 CM



MAX. HMOTNOST 100 KG

\* ROZMĚRY SE VZTAHUJÍ NA STŘEDNÍ CELKOVÉ ROZMĚRY

## 14. ZÁRUKA

Na výrobky Moretti se vztahuje záruka na materiálové nebo výrobní vady po dobu (dvou) 2 let od data nákupu, s výhradou níže uvedených omezení a výjimek. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, zneužíváním nebo úpravami výrobku a záruka neplatí, pokud nejsou důsledně dodržovány pokyny k používání. Správné určené použití přístroje je uvedeno v tomto návodu. Společnost Moretti neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zranění osob nebo jinak způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným používáním nebo v souvislosti s nimi.

Společnost Moretti neručí za poškození nebo vady výrobků v následujících případech: přírodní katastrofa, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození v důsledku problémů s napájením (pokud je poskytováno), použití náhradních dílů nedodaných společností Moretti, nesprávné použití, neautorizovaná změna, poškození při přepravě (jiné než originální zásilka od společnosti Moretti) nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v návodu. Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení a opotřebení při správném používání přístroje.

## 15. OPRAVY

### 15.1. Záruční oprava

V případě, že se na výrobku Moretti během záruční doby vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, společnost Moretti potvrdí zákazníkovi, zda se na vadu může vztahovat záruka. Společnost Moretti může podle vlastního uvážení provést záruční opravu nebo výměnu u prodejce Moretti nebo v provozovně Moretti. Náklady na práci při opravě mohou být účtovány společnosti Moretti, pokud se na opravu vztahuje záruka. Oprava nebo výměna neprodlužuje ani neobnovuje záruku.

### 15.2. Oprava, na kterou se nevztahuje záruka

Výrobek, na který se nevztahuje záruka, lze vrátit k opravě pouze po předchozím schválení zákaznickým servisem společnosti Moretti. Náklady na práci a dopravu při opravě, na kterou se nevztahuje záruka, plně hradí zákazník nebo prodejce. Na opravy výrobků, na které se nevztahuje záruka, se vztahuje záruka po dobu šesti (6) měsíců ode dne převzetí opraveného výrobku.

### 15.3. Nepoškozené zařízení

Zákazník bude informován, pokud společnost Moretti po přezkoumání a otestování vráceného výrobku prohlásí, že výrobek není vadný. V takovém případě bude zboží vráceno zákazníkovi, veškeré náklady na dopravu hradí zákazník.

## 16. NÁHRADNÍ DÍLY

Náhradní díly a příslušenství naleznete výhradně ve všeobecném katalogu Moretti. Na originální náhradní díly Moretti se vztahuje záruka 6 (šest) měsíců od data přijetí.

## 17. VÝJIMKOVÉ DOLOŽKY

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v mezích zákona společnost Moretti neposkytuje žádné prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a rušení. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované.

nebo bezchybný. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být stanoveny zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky ani vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti s výrobky pro spotřebitele. V takových státech nebo zemích se na vás nemusí vztahovat některá zřeknutí se odpovědnosti a omezení této záruky. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



## ZÁRUČNÍ LIST

Produkt \_\_\_\_\_

Zakoupeno dne (datum) \_\_\_\_\_

Maloobchodní prodejce \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec/město \_\_\_\_\_

Prodáno do \_\_\_\_\_

Adresa \_\_\_\_\_ Obec/město \_\_\_\_\_



**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com**

**MADE IN P.R.C.**