



MOPEDIA®



RS918 Sedačka do sprchy sklopná

RS919 Sedačka do sprchy sklopná, opěrné nožičky

Návod k obsluze

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení sedačky do sprchy MOPEdia. Sedačky byly navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly nejvyšší kvality standardy kvality a bezpečnosti. Rám je z práškově lakovaných ocelových trubek se základovou deskou s upevněním na stěnu. Všechny sedačky mohou být umístěny svisle. RS919 má výškově nastavitelné podpůrné nožičky pro případ větší zátěže.

MONTÁŽ

Úchytná deska na zeď obsahuje montážní otvory. Montáž by měla být provedena pouze odborným technikem a na stěnu, která je schopná unést svislé zatížení a síly způsobené hmotností uživatele (princip páky). Maximální nosnost pro oba modely je 110 kg.

Nastavení výšky (pro model RS819)

Chcete-li nastavit výšku, stiskněte kolík a vyberte správnou výšku posouváním dolů a nahoru a pak uvolněte kolík.

POZNÁMKA: Nastavte výšku sedáku dříve, než upevníte desku na stěnu.

ČIŠTĚNÍ

- Sedačky do sprchy vyžadují minimální údržbu. Čištění provádějte příležitostně měkkým hadříkem. Používejte univerzální neutrální čisticí prostředky a teplou vodu.
- Nepoužívejte drsné abrazivní prostředky ani agresivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch výrobku.
- Pravidelně kontrolujte, zda jsou deska a sedák pevně zajištěny.

VAROVÁNÍ

- Výrobci ani dodavatelé nevnášají žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Před použitím zkontrolujte stav výrobku.
- V případě pochybností o použití, úpravě nebo údržbě výrobku se obraťte na prodejce.
- Opotřebované, poškozené nebo chybějící díly je třeba vyměnit.
- Výrobek neskladujte venku.
- Pravidelně kontrolujte stabilitu výrobku a správné utažení šroubů včetně protiskluzových nástavců. (pouze RS919)

ZÁRUKA

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení, která je potvrzena účtenkou nebo fakturou. Distributor si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit potřebné díly v materiálech nebo zpracování bez jakýchkoliv poplatků. Záruka se nevztahuje na škodu vzniklou s užíváním v rozporu s návodem k obsluze, nehodou, úmyslným poškozením při montáži/demontáži. V případě, že je potřeba výrobek opravit nebo vykazuje vady, neprodleně oslovte vašeho dodavatele a zároveň pro uplatnění záruky předložte doklad o koupi.

REF

Označení produktu

LOT

Šarže

UDI

Unikátní identifikace zařízení

MD

Zdravotnické zařízení



Přečtěte si návod k použití



Označení CE



Podmínky likvidace



Výrobce