



MOPEDIA®

opera



ST332-44

opera



ST336

opera



ST332-44
ST332-48

opera



ST355

ST332-44 Podsedák z paměťové pěny kruh Ø 44 cm

ST335-41 Podsedák z paměťové pěny ovál 41 x 32 x 8 cm

ST335-48 Podsedák z paměťové pěny ovál 48 x 38 x 8 cm

ST336 Podsedák z paměťové pěny tvar U 41 x 51 x 6,5 cm

ST355 Podsedák z paměťové pěny 44 x 37,5 x 7,5 cm

Návod k obsluze

Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
ÚČEL POUŽITÍ	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
OBECNÝ POPIS.....	2
PŘED POUŽITÍM.....	2
VAROVÁNÍ PŘI POUŽITÍ	2
ÚDRŽBA	2
ČIŠTĚNÍ	2
PODMÍNKY LIKVIDACE.....	2
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	2
ZÁRUKA	2
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE	3

OZNAČENÍ

- ST332-44 Podsedák z paměťové pěny kruh Ø 44 cm
- ST335-41 Podsedák z paměťové pěny ovál 41 x 32 x 8 cm
- ST335-48 Podsedák z paměťové pěny ovál 48 x 38 x 8 cm
- ST336 Podsedák z paměťové pěny tvar U 41 x 51 x 6,5 cm
- ST355 Podsedák z paměťové pěny 44 x 37,5 x 7,5 cm

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení podsedáků MOPEDIA. Podsedáky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vyhovovaly vašim potřebám pro praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

ÚČEL POUŽITÍ

Podsedáky MOPEDIA zajistí bezbolestné sezení osobám po operaci, ženám po porodu, hemoroidech a osobám s problémy s prostatou.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobce a dodavatel nenesou žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy zařízení za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu koupelnových pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (2017/745). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 2017/745, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (2017/745)

OBECNÝ POPIS

Podsedačky jsou vyrobeny z polyuretanové pěny vysoké hustoty, které poskytují úlevu od bolesti související s dlouhodobou péčí, po porodu, po operaci či při hemoroidech. Podsedačky jsou také užitečné pro snížení únavy při dlouhých cestách autem. Může být použit na jakémkoliv rovném povrchu pro snížení napětí v oblasti konečnicku. Dodán s odnímatelnou polyesterovou podšívkou.

PŘED POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte opotřebení výrobku, aby bylo zaručeno bezpečné používání.

VAROVÁNÍ PŘI POUŽITÍ

- Neponechávejte výrobek v delším kontaktu s vodou.
- V případě pochybností o použití, nastavení nebo údržbě, kontaktujte svého prodejce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli možným rizikům.

ÚDRŽBA

Výrobky MOPEDIA jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Pro bezpečnost uživatele se doporučuje, aby byla bezpečnost výrobku zkontrolována výrobcem nebo autorizovaným servisem každé dva roky.

ČIŠTĚNÍ

Podšívkou perle při maximální teplotě 30 °C, nebělte, nežehlete, nečistěte chemicky ani nesušte.



POZNÁMKA: Podsedačka nelze prát

PODMÍNKY LIKVIDACE

Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Kód	Materiál	Velikost
ST332-44	Paměťová pěna (polyuretan)	Ø 44 cm
ST335-41	Paměťová pěna (polyuretan)	41 x 32 x 8 cm
ST335-48	Paměťová pěna (polyuretan)	48 x 38 x 8 cm
ST336	Paměťová pěna (polyuretan)	41 x 51 x 6,5h cm
ST355	Paměťová pěna (polyuretan)	44 x 37,5 x 7,5 cm

POZNÁMKA: Paměťová pěna je odolná proti ohni a respektovaná normou EN1021 Standard.

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě poškození přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.