

sinfonia



ANATOMICKÝ POLŠTÁŘ ST352

Návod k obsluze

Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
OBECNÁ VAROVÁNÍ.....	1
OBECNÝ POPIS	1
PŘED POUŽITÍM.....	1
UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ	2
ÚDRŽBA	2
ČIŠTĚNÍ	2
PODMÍNKY LIKVIDACE	2
TECHNICKÉ VLASTNOSTI:.....	2
ZÁRUKA.....	2
OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE	3

OZNAČENÍ

ST352 Anatomický polštář

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení anatomického polštáře KYARA. Anatomický polštář KYARA byl navržen a realizován tak, aby vyhovoval vašim potřebám pro správné a bezpečné používání. Tento návod k obsluze vám poskytuje rady ke správnému použití a bezpečnostní pokyny. Doporučujeme pečlivě přečíst tento návod před prvním použitím polštáře. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

UPOZORNĚNÍ:

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavateli nevzniká žádná zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy výrobku za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu zdravotnických pomůcek, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 93/42/ EHS, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU KLINICKÉ TESTOVÁNÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (93/42/EEC.)

OBECNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek dříve, než si přečtete a porozumíte této příručce.
- Zkontrolujte kompletnost balení a uchovávejte jej mimo zdroje tepla.
- Doba použitelnosti výrobku je dána opotřebením součástí.
- Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály nebo jiným způsobem s ním manipulovaly.

OBECNÝ POPIS

Anatomický polštář ve tvaru válce zmírní uživateli zdravotní potíže. Díky anatomickému tvaru se dokonale přizpůsobí tělu uživatele. Polštář snižuje napětí krčního svalstva a zajistí oporu zad nebo přes rameno, zároveň zmírní únavu svalů. Je kompaktní, přenosný a pohodlný při čtení, odpočinku, sledování televize, cestování atd.

PŘED POUŽITÍM

Vždy zkontrolujte opotřebení částí výrobku, aby bylo zaručeno, že výrobek bude zcela bezpečný pro uživatele a jeho okolí.

UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Nenechávejte výrobek v dlouhodobém kontaktu s vodou.
- V případě pochybností ohledně použití, úpravy nebo údržby výrobku, kontaktujte svého prodejce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, abyste předešli možným rizikům.

ÚDRŽBA

Výrobky Kyara jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE.

ČIŠTĚNÍ



- Použijte vlhký hadřík a neutrální jemné mýdlo.
- Vodu použijte při maximální teplotě 30 °C.
- Nepoužívejte bělidla.
- Nežehlete (nepoužívejte páru).
- Nečistěte, nepoužívejte odstraňovače skvrn ani rozpouštědla.
- Nesušte v sušičce.

POZNÁMKA: Pěna se nesmí prát

PODMÍNKY LIKVIDACE

Obecné podmínky likvidace

Výrobek nelze likvidovat jako běžný komunální odpad. Výrobek odevzdejte do příslušných prostor pro recyklaci.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

ST352 -Rozměry: 65 x průměr 12 cm; materiál:100% Polyuretan, podšívka PU

ZÁRUKA

Všechny výrobky mají záruku na vady materiálu nebo zpracování po dobu dvou let od data prodeje, s výhradou výjimek a omezení uvedených níže. Tato záruka není platná v případě nesprávného použití, zneužití nebo změny produktu a nedodržení pokynů k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v uživatelské příručce.

Prodejce ani výrobce neodpovídá za vzniklé škody, zranění nebo jiné škody při použití tohoto zařízení v rozporu s touto příručkou

Výrobce ani dodavatel neodpovídá za vady výrobku v případě postižení přístroje přírodními katastrofami, zanedbané údržby nebo neodborné úpravy, škody způsobené problémy s napájením (je-li k dispozici), použití částí nebo součástí, které nejsou schváleny, použití v rozporu s návodem k obsluze, neoprávněné úpravy přístroje, poškození při přepravě (odlišné od původních zásilek od výrobce/dodavatele)

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným použitím výrobku.

OSVOBOZUJÍCÍ KLAUZULE

Výrobce neposkytuje klientům žádné jiné záruky, podmínky ani garance, vyslovené či předpokládané než ty, které jsou explicitně uvedeny v tomto dokumentu, a to v souladu se zákonem. Výrobce nezaručuje, že používání příslušných produktů bude dlouhodobé a bez závad. Délka záruk, které mohou implicitně vyplývat ze zákona, je omezena na řádnou záruční lhůtu 2 roky. Některé státy a země nepovolují omezení a výjimky v délce záruky vyplývající náhodného nepřímého poškození produktu. V těchto státech či zemích se nemusí některá omezení či výjimky uvedené v této záruce vztahovat na klienta. Tyto záruční podmínky mohou být bez dalšího upozornění upravovány.



Stamed s.r.o.

telefon: +420 725 323 111

www: www.stamed.cz

email: obchod@stamed.cz

adresa: Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň