



ANTIDEKUBITNÍ NAFUKOVACÍ PODSEDÁK ST851/2

Návod k obsluze

Český překlad návodu byl zhotoven na základě originální verze MA ST840-ST841-ST850-ST851-ST852-ST853-ST855-ST856-ST857-ST858-ST860-ST861-ST862-ST863 01 A ITA_01-2024

Obsah

OZNAČENÍ.....	1
ÚVOD.....	1
ÚČEL POUŽITÍ	1
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	1
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	2
POUŽITÍ.....	2
PÉČE A ÚDRŽBA.....	3
OPRAVA ANTIDEKUBITNÍHO PODSEDÁKU	3
ČIŠTĚNÍ A MYCÍ INSTRUKCE	3
Čištění.....	3
OBECNÁ VAROVÁNÍ	3
NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	4
ZÁRUKA	4

OZNAČENÍ

ST851/2 – Dvoukomůrkový podsedák 40 x 40 cm v: 6 cm

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení antidekubitního podsedáku LEVITAS. Jeho design a kvalita zaručují uživatelský komfort, bezpečnost a spolehlivost. Podsedáky LEVITAS jsou navrženy a realizovány tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Tento návod vám poskytuje rady k správnému použití a bezpečnostní pokyny. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce.

ÚČEL POUŽITÍ

Podsedáky jsou navrženy tak, aby zajistily rovnováhu, ochránily zdraví pacienta a zabránily vzniku dekubitu a poškození tkáně. Zajišťuje perfektní rozložení hmotnosti a zmírní tlak v jakékoli poloze. Navíc podsedák se přizpůsobí tvarům těla uživatele a umožňuje plné ponoření do sedací části těla.

Pro koho je antidekubitní podsedák určen?

- Pro ty, pro které je sezení nepohodlné.
- Pro vozíčkáře
- Osobám, které dlouhodobě sedí (z důvodu nemoci, starší osoby atd.)
- Osobám, u kterých je riziko vzniku dekubitů
- Osobám, které mají šikmé postavení pánve

Na co je podsedák je určen?

- Pro zabezpečení správného umístění pánve a dolních končetin
- Stabilitu trupu, hlavy, krku a horních končetin zajištěním pánve a dolních končetin
- Pro snížení tlaku
- Pro prevenci vzniku poškození kůže

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobek jím vyráběný a prodávaný, který patří do sortimentu vzduchových polštářů, je v souladu s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (2017/745). Výrobce zaručuje na vlastní odpovědnost následující:

1. Zařízení, která jsou předmětem jednání, splňují základní požadavky požadované směrnicí 2017/745, jak je stanoveno v příloze VII uvedené směrnice.
2. Diskutovaná zařízení NEJSOU MĚŘÍCÍ NÁSTROJE
3. Diskutovaná zařízení NEJSOU URČENA PRO KLINICKÁ VYŠETŘENÍ
4. Diskutovaná zařízení jsou dodávána v NESTERILNÍM BALENÍ.
5. Diskutovaná zařízení patří do třídy I°.
6. NEPOUŽÍVEJTE/NEVYSTAVUJTE diskutovaná zařízení pro jiné účely, než je výslovně uvedeno výrobcem.
7. Výrobce udržuje a poskytuje orgánům technickou dokumentaci prokazující splnění evropské směrnice o zdravotnických prostředcích (2017/745)

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Materiál:
- Polštář: PVC
- Podšívka: Základ z PU, kryt a spodní boční kryt z nylonu.
- Rozměry: Dvoukomůrkový podsedák 40 x 40 cm v: 6 cm

VAROVÁNÍ:

Před prvním použitím si přečtěte tento návod k použití. Dbejte zvýšené opatrnosti při přítomnosti dětí.

POUŽITÍ

Nafukovací pumpa je součástí vybavení.

Podsedák

1. Umístěte antidekubitní podsedák na židli.
2. Odšroubujte ventil proti směru hodinových ručiček.
3. Připojte pumpičku do ventilu.
4. Nafoukněte polštář.
5. Po nafouknutí vytáhněte pumpu a zavřete ventil.
6. Posad'te se na podsedák.
7. Umístěte ruku pod pánevní oblast v místě, kde kost nejvíce vystupuje
8. Pomalu otevřete ventil a nechte unikat vzduch. Uzavřete ventil, když vznikne mezera mezi sedákem a pánví alespoň pro na šířku konečků prstů.
9. V tuto chvíli je podsedák správně nafouknutý.

Potah

- Potah chrání povrch podsedáku. Dno je vyrobeno z protiskluzového materiálu, který se zafixuje na židli a pomáhá pacientovi udržet rovnováhu.
- Pokud chcete potah použít, postupujte dle následujících pokynů:
- Rozložte potah, černou protiskluzovou úpravou dolů a zipem nahoru.
- Vložte podsedák s buňkami nahoru do potahu s prodyšnou stranou vzhůru.
- Ventil musí vyčnívat ven – k tomu slouží otvor v potahu.
- Jemně zatlačte na podsedák, případně s ním lehce posunujte ze strany na stranu – dosáhnete lepší fixace k potahu.
- Opatrně zapněte zip.

UPOZORNĚNÍ

- Regulujte tlak podsedáku nafukovací pumpičkou nebo manometrem každých 5-10 dnů.
- Pracujte s následujícími teplotními a vlhkostními rozsahy:
- Teplotní rozsah: 0 ~ 40 ° C
- Rozsah vlhkosti: 10 ~ 90 % RH

PÉČE A ÚDRŽBA

Výrobky řady LEVITAS jsou při uvádění na trh pečlivě kontrolovány a opatřeny značkou CE. Používejte pouze originální díly a příslušenství.

OPRAVA ANTIDEKUBITNÍHO PODSEDÁKU

- Nechte vyfouknout podsedák.
- Použijte brusný papír a jemně nabruste poškozené místo do hladka.
- Poškozený povrch zalepte záplatou potřenou lepidlem.
- Nechte schnout 5 minut, případně otřete zbytky lepidla, poté zatlačte na náplast.
- Po uschnutí nafoukněte podsedák

ČIŠTĚNÍ A MYCÍ INSTRUKCE

Čištění

Podsedák

- Pro čištění výrobku použijte vlažnou vodu a neutrální mýdlo.
- Podsedák otřete mokřým hadříkem a opláchněte studenou vodou.
- Podsedák nechte uschnout.

VAROVÁNÍ

- Používejte pouze neutrální čisticí prostředky.
- Podsedák neperte v pračce.
- Nepoužívejte tepelné ani parní trysky.
- Chraňte před přímým slunečním světlem.

Potah

- Potah perle ve studené vodě s pracím práškem nebo kapalným čisticím prostředkem. Opláchněte studenou vodou a nechte volně uschnout.
- Nepoužívejte sušičku, topení nebo bělidlo.
- Nežehlete
- Skladování:
Teplotní rozsah: 0 ~ 40 °C
Rozsah vlhkosti: 10 ~ 90 % RH

*10% tolerance u všech specifikací

OBEČNÁ VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte výrobek pro jiné účely, než je uvedeno v příručce.
- Výrobci a dodavatelé nevnášejí žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé v důsledku použití výrobku v rozporu s touto uživatelskou příručkou.
- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu a úpravy zařízení za účelem jeho zlepšení bez předchozího upozornění.

UPOZORNĚNÍ

- Chraňte před ostrými předměty a nedopalky cigaret
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a ohni
- Maximální nosnost je 130 kg. Nepřekračujte maximální nosnost.
- NEPOUŽÍVEJTE podsedák, pokud je poškozen vnější silou.
- Před usednutím na podsedák se ujistěte, že na povrchu podsedáku nezůstaly žádné cizí předměty.
- Podsedák by měl být používán samostatně, nekombinujte s jinými topnými nebo chladícími zařízeními.

NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní díly a příslušenství naleznete v katalogu výrobce.

ZÁRUKA

Tento produkt má záruku 2 roky od data zakoupení, které je potvrzen účtenkou nebo fakturou. Distributor si vyhrazuje právo opravit nebo vyměnit potřebné díly v materiálech nebo zpracování bez jakýchkoliv poplatků. Záruka se nevztahuje na škodu vzniklou s užíváním v rozporu s návodem k obsluze, nehodou, úmyslným poškozením nebo poškozením při montáži/demontáži. V případě, že je potřeba výrobek opravit nebo vykazuje vady, neprodleně kontaktujte vašeho dodavatele a zároveň pro uplatnění záruky předložte doklad o koupi.



Označení produktu



Šarže



Unikátní identifikace zařízení



Zdravotnické zařízení



Přečtěte si návod k použití



Označení CE



Podmínky likvidace



Výrobce