
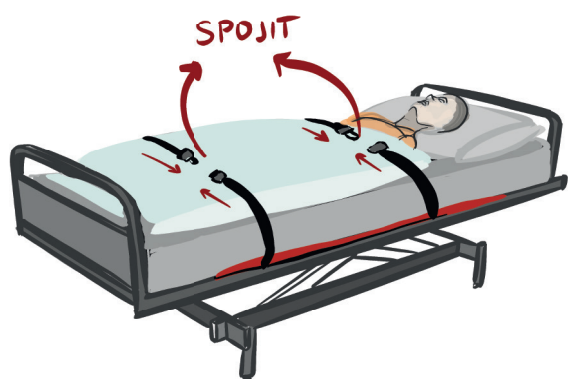


# EVAKUAČNÍ PODLOŽKA - Příprava lůžka a samotná evakuace

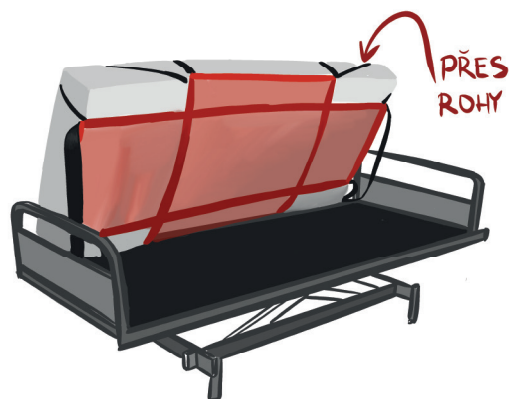

## 1. Příprava lůžka pro evakuační podložku

- Položte podložku na rošt lůžka.
- Ujistěte se, že je viditelný štítek. Šipky znázorňují správné umístění podložky směrem k hlavě nebo nohám ležícího.
- Ujistěte se, že je **viditelný štítek**, a umístěte matraci na horní stranu evakuační podložky.
- Připevněte rohové pásky evakuační podložky na rohy matrace.

*Poznámka: Maximální rozměry použité matrace jsou 200 x 90 cm, Lůžko následně ustelte obvyklým způsobem.*

## 2. Příprava ležícího pro evakuaci

- Umístěte polštář pod pacientovu šíji, abyste tak zajistili dostatečnou ochranu a podporu oblasti krku evakuované osoby.
- Pokud je riziko, že by u evakuované osoby mohlo dojít k poranění hrudníku, pevným utažením jistícího popruhu umístěte evakuované osobě na oblast hrudníku polštář pro snížení tlaku na tuto oblast. Až poté zajišťovací popruh náležitě utáhněte.
- Nyní propojte spony protilehlých popruhů přes matraci a evakuovanou osobu a utáhněte. Utažení popruhů **nesmí** evakuované osobě způsobit zranění.
- Upravte výšku lůžka do nejnižší možné polohy. **Nyní je pacient připraven na evakuaci.**

## 3. Přemístění pacienta z lůžka

- Pokud se rozhodnete pro evakuaci tažením za popruhy v nožní části matrace, posuňte matraci s ležícím pod úhlem 45° tak, abyste měli neustálou kontrolu nad rychlostí pohybu matrace z lůžka na zem, aby nedošlo k poranění ležícího.

*Poznámka: Z bezpečnostních důvodů není tímto způsobem povolena evakuace osob s hmotností nad 250 kg.*

Pro bezpečnou evakuaci výrobce doporučuje, aby přesunutí pacienta z lůžka na zem **bylo prováděno ve dvou osobách**

- **1. osoba** u hlavy pacienta zajišťuje stabilitu hlavy a krku a zároveň kontroluje rychlost sesunutí matrace na zem, zatímco...
- **2. osoba** zajišťuje stažení matrace s pacientem dolů z lůžka na zem.




**Doporučená evakuace  
ve dvou lidech**

# EVAKUAČNÍ PODLOŽKA - Příprava lůžka a samotná evakuace



**Doporučená evakuace po schodech ve dvou lidech**

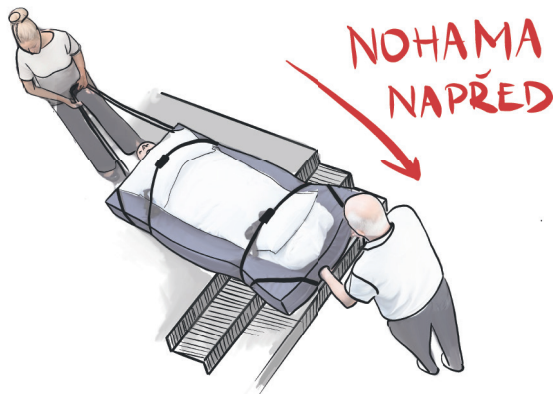

## 4. Evakuace pacienta na bezpečné místo

- Tažením za popruhy přemístíte podložku spolu s matrací z pokoje na místo stanovené v evakuačním plánu. Pro bezpečnou manipulaci s pacientem je doporučena obsluha ve dvou osobách.
- Pro snížení tření a zvýšení komfortu a efektivity evakuace nadlehčete při tažení rohy matrace. Pro snadnější zatočení kolem rohů můžete bok matrace odlehčit pomocí postranních úchytů.
- Upozornění: Mějte na paměti, že koberec na podlaze výrazně zvyšuje tření a evakuace je tak mnohem obtížnější.

## 5. Evakuace po schodech

- Pokud je zapotřebí evakuovat po schodech, je výrobcem doporučeno toto provádět za účasti dvou osob. Evakuace osob o vyšší hmotnosti může pro bezpečný transport vyžadovat více osob obsluhy.

*Upozornění: Transport po schodech provádějte co nejplynuleji, zvláště pak v počáteční fázi při překonávání prvního schodu, kdy je zvýšený tlak na tělo pacienta.*

**6. Pravidelně kontrolujte neporušenost a celistvost evakuační podložky.** Při porušení materiálu vadnou podložku zlikvidujte a nahraďte novým kusem.

**7. V případě potřeby údržby a čištění postupujte podle instrukcí uvedených na štítku.**

8. Evakuační podložku skladujte na suchém a chladném prostředí.

## UPOZORNĚNÍ

Před použitím evakuační podložky si pečlivě přečtěte návod k obsluze a ujistěte se, že rozumíte všem uvedeným instrukcím. Pokud některým pasážím obsluhy nebo upozornění nerozumíte, kontaktujte svého dodavatele. Pokud je evakuační podložka nesprávně umístěna nebo používána v rozporu s návodem k obsluze, může dojít k ublížení na zdraví evakuované osoby nebo obsluhy. Nesprávným použitím může rovněž dojít k poškození samostatné evakuační podložky.

- NEPOUŽÍVEJTE evakuační podložku, pokud je poškozená nebo chybějí některé části výrobku.
- NEPŘEKRAČUJTE maximální povolené zatížení podložky.

## KONTRAINDIKACE

- NEPOUŽÍVEJTE zařízení v případě, že pacient trpí vnějším poraněním nebo poraněním krku/páteře.



praní max. na 80°



v sušičce na nízké teploty



nepoužívat bělidlo



nežehlit



viz. návod



WEIL  
ELECTRONIC  
DEVICES s.r.o.