



# Návod k použití


## XSEAT® light

Sedák na prevenci proleženin

Před použitím systému si pozorně přečtete návod k použití a dodržujte **varování!**

<b>Jméno výrobku</b>	<b>XSEAT® light</b>
<b>Datum vydání</b>	Verze č. 13; vydáno 23. března 2026
<b>Účel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Podpora při prevenci dekubitů</li></ul>
<b>Princip fungování</b>	Měkké sedací polštáře s nestrukturovaným sedacím povrchem mohou pomoci předcházet vzniku proleženin.
<b>Uživatelská skupina/ Cílová skupina pacientů</b>	Produkt je určen k použití zdravotnickými pracovníky nebo soukromými osobami, například rodinnými příslušníky, které s jeho používáním proškollí zdravotnický pracovník. Produkt je vhodný i pro samotné pojištěné osoby, pokud prokáží potřebnou schopnost tak učinit.
<b>rozsah dodávky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sedák s pěnovým jádrem pro prevenci proleženin</li><li>PU potah (odnímatelný pomocí zipu)</li><li> Návod k použití; návod v jiných jazycích naleznete zde: <a href="http://manuály.funke-medical.eu">manuály.funke-medical.eu</a></li></ul>
<b>Indikace / oblasti použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Profylaxe dekubitů</li></ul>
<b>Kontraindikace</b>	Žádné známé
<b>Přípustná hmotnost pacienta min - max.</b>	20-120 kg
<b>materiál</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sedák se skládá z vrchní vrstvy z viskoelastické pěny a spodní vrstvy ze studené pěny.</li><li>Jádro: PU pěny (HR/Visco)</li><li>Potah: Nosný materiál PES s PU povrchovou úpravou</li><li>Hustota/tvrdost v tlaku: Horní deska 40 kg/m<sup>3</sup>/ 2,2 kPa; Spodní deska 35 kg/m<sup>3</sup>, 5,5 kPa</li><li>Pěna: Plochá, nestrukturovaná sedací plocha sestávající z horního panelu vyrobeného z 1,5 cm viskoelastické pěny a spodního panelu vyrobeného z 3,5 cm studené pěny.</li></ul>
<b>Rozměry</b>	Číslo artiklu (šířka x délka x výška): X-SEATL3840 (38x40x5cm); X-SEATL4040 (40x40x5cm); X-SEATL4042 (40x42x5cm); X-SEATL4146 (41x46x5cm); X-SEATL4240 (42x40x5cm); X-SEATL4242 (42x42x5cm); X-SEATL4244 (42x44x5cm); X-SEATL4246 (42x46x5cm); X-SEATL4252 (42x52x5cm); X-SEATL4542 (45x42x5cm); X-SEATL4544 (45x44x5cm); X-SEATL4546 (45x46x5cm); X-SEATL4651 (46x51x5cm); X-SEATL4842 (48x42x5cm); X-SEATL4844 (48x44x5cm); X-SEATL4846 (48x46x5cm); X-SEATL5042 (50x42x5cm); X-SEATL5144 (51x44x5cm); X-SEATL5146 (51x46x5cm); X-SEATL5252 (52x52x5cm)
<b>Hmotnost produktu</b>	Všechny velikosti cca 0,5 kg
<b>Číslo podpory (podle § 139 SGB V)</b>	
<b>Zdravotnické zařízení</b>	Třída 1, MDR 2017/745 
<b>Technická bezpečnost / nehořlavost</b>	Zkoušky zpomalení hoření dle DIN EN ISO 1021-1 a 1021-2
<b>Zkoušky toxikologické bezpečnosti / biokompatibilita</b>	ČSN EN ISO 10993
<b>Varovná upozornění</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Umístěte sedák do invalidního vozíku tak, aby potisk „This Side up“ směřoval dopředu. Šipky na potisku by měly směřovat dopředu.</b></li><li>Před prvním použitím musí být systém připraven k prvnímu použití (viz „Příprava systému k použití“).</li><li>Odpovědnost za použití této pomůcky vždy leží na zdravotnickém pracovníkovi, který ji po odebrání anamnézy pacienta vybere. Dekubity jsou multifaktoriální onemocnění. Sedák je pouze jednou součástí terapie. Je důležité zvážit i další relevantní ošetřovatelská opatření a možnosti úlevy od tlaku, aby byla zajištěna optimální prevence a léčba.</li><li>Vysvětlení zkratk a piktogramů naleznete zde: <a href="http://funke-medical.de/produktkataloge-und-bildanleitungen">funke-medical.de/produktkataloge-und-bildanleitungen</a></li></ul>
<b>záruka</b>	1 rok na funkční vlastnosti pěnového jádra (pro rata záruka)
<b>údržba</b>	Ne
<b>Návod na čištění (polštář)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Kryt si v zásadě může uživatel/prodejece vyčistit na vlastní odpovědnost.</b><ol style="list-style-type: none"><li>Potah lze prát v pračce při 95 °C s použitím běžných domácích pracích prostředků.</li><li>Je možné chemicko-termické čištění krytu pomocí čisticích prostředků pro domácnost.</li><li>Kryt lze navíc dezinfikovat ořtením komerčně dostupnými dezinfekčními prostředky na bázi isopropanolu (např. Bacillol) nebo jinými vhodnými produkty uvedenými na seznamu DGHM (např. čisticími ubrousky ECOLAB Incidin OxyWipe S XL). Po dezinfekci otřete vlhkým hadříkem (čistá voda).</li></ol></li><li><b>Alternativní čištění v rámci institucí:</b> Kryt lze znovu zpracovat autoklávováním dle pokynů RKI (Institut Roberta Kocha). V každém jednotlivém případě (1+2) je kryt nyní připraven k opětovnému použití. <b>POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo je přítomno viditelné poškození, musí být kryt zlikvidován v souladu s národními předpisy.</b> </li></ol> <p>Po sejmutí potahu pro praní jej prosím vraťte na polštář takto:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Položte polštář potiskem „SPODNÍ STRANA“ dolů.</li><li>Při objednávání se ujistěte, že potisk „TOP SIDE“ (horní strana) směřuje nahoru.</li><li>Jakmile je polštář správně umístěn, můžete potah zavřít po celém obvodu.</li></ol>
<b>Pokyny k čištění (jádro)</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>Pěnové jádro není vhodné pro čištění v pračce. Pěnové jádro si obvykle může uživatel/prodejece vyčistit na vlastní nebezpečí.</b><ol style="list-style-type: none"><li>Pěnové jádro bez krytu lze čistit jemným běžným čisticím prostředkem pro domácnost a vlhkým hadříkem. 1.2 Dezinfekce může být provedena nasycením kontaminované oblasti nebo postříkáním celého pěnového jádra dezinfekčním prostředkem (např. Bacillol) nebo pěnovým sprejem ECOLAB Incidin OxyFoam S s obsahem peroxidu vodíku). Poté je nutné pěnové jádro nechat uschnout na vzduchu.</li></ol></li><li><b>Alternativní čištění v institucích:</b> Pěnové jádro lze znovu zpracovat autoklávováním dle pokynů RKI (Institut Roberta Kocha). V každém jednotlivém případě (1+2) je pěnové jádro nyní připraveno k opětovnému použití. <b>POZOR: Pokud nelze odstranit viditelné znečištění a/nebo je přítomno viditelné poškození, musí být výrobek zlikvidován v souladu s národními předpisy.</b></li></ol>
<b>Připravte systém k použití</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Výrobek je určen a vhodný pro domácí a institucionální použití.</li><li>Vyjměte polštář z krabice.</li><li>Umístěte polštář na sedadlo invalidního vozíku nebo sedadlo potiskem „THIS SIDE UP“ směrem nahoru.</li></ol>

<b>Jméno výrobku</b>	<b>XSEAT® light</b>
<b>kontakt</b>	Pokud by v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem došlo k závažné nehodě, musí být neprodleně nahlášena společnosti Funke Medical GmbH a příslušnému orgánu.

 Výrobci ve smyslu MDR 2017/745

Funke Medical GmbH Ährenfeld 10 46348 Raesfeld Tel.: +49-2865-266 93 50 Fax: +49-2865-8133 qm@funke-medical.de www.funke-medical.de

Download: 23.06.2026 12:40